

Hurtigguide Acrobat HD Ultra

Skru på lese-tv'en ved å sette hovedbryteren i posisjon 1. Bryteren finner du nederst på enhetens bakside.




Kameraarmen kan skyves fra høyre til venstre, og roteres i begge retninger.

I enden av kameraarmen kan kameraet både vinkles i det horisontale og vertikale planet.



Hvis du skal bruke kameraet til å se på avstand, må du vippe av kameraets nærlinse.

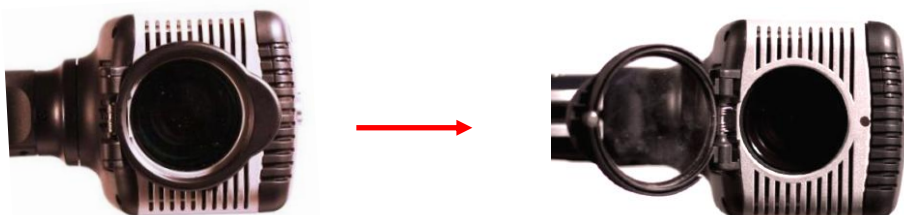

«Modus» knappen

-Trykk for å
endre kontrast

«Finn» knappen

-Trykk og hold inne
knappen for å zoome ut til
minste forstørrelse.

-Slipp knappen for å
zoome inn til den forrige
forstørrelsen

Endre forstørrelse



☾ + ☉ : Skru av og på LED lys

☾ + ☉ 3 sek : Fokuslås

(Se full manual for alle knappekombinasjoner på kameraet og fjernkontrollen)

Endre forstørrelse

Frys bilde

Trykk i ca 2 sekunder

«Finn» knapp

Hold inne for å zoome ut.
Slipp for å returnere.

Justere hvitbalanse

trykk i ca 2 sekunder

Justere øvre leselinje

På/Av standby

Fokuslås

«Modus» knapp

Endre kontrast

Leselinje

Trykk i ca 2 sekunder for å
bla gjennom alternativer

Justere nedre leselinje

