

# Tematavler - med Widgit Symboler

Tavlesett med 50 tematavler i perm

Et produkt i NorMedia **ASK-Serie**




Widgit Symbols ©Widgit Software Norsk NorMedia AS

Laget i InPrint 3 av NorMedia - alle tematavlene inneholder Widgit Symboler

# Innhold

- Forord
- Innhold og filer
- Å kommunisere med symboler
- Hvordan bruke tematavlene
- Om oppsettet i Widgit Tematavler
- Ønsker du å lage flere tematavler eller tilpasse innholdet
- Medfølgende PDF-filer
- Support

## Eksempler på Tematavler med Widgit Symboler

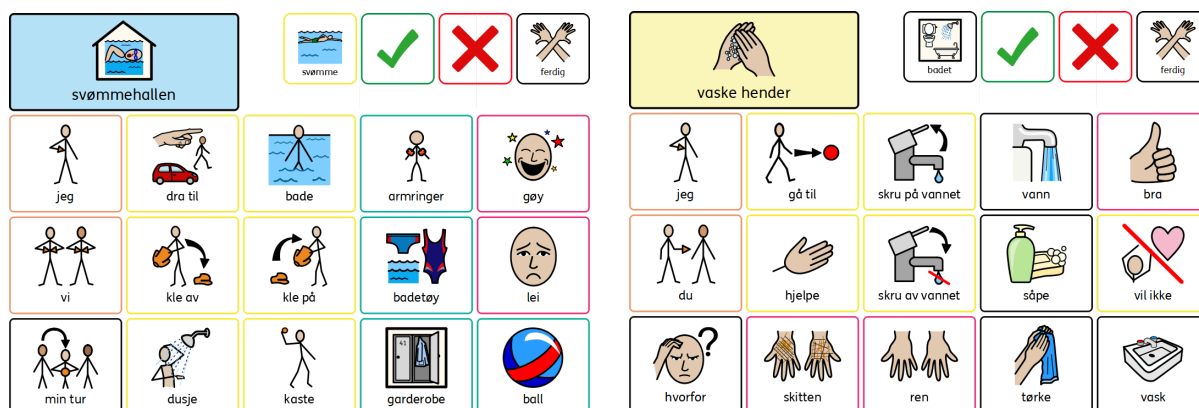

NorMedia **ASK-Serie** er en rekke papirbaserte produkter for begynnende symbolbrukere, som ofte er personer med behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon. Produktene er utformet med Widgit symboler og de kommer ferdig trykket på slitesterkt plastpapir og har mulighet til å redigeres eller videreutvikles i InPrint 3. InPrint 3 må kjøpes i tillegg. I produktserien finnes det *Symbol Startpakke*, *Tematavler*, *Snakketavler* og *Snakkeboka* i A4 og A5 format.

## Forord

Våren 2014 har vi endret Widgit Tematavler slik at de nå inneholder "snakkeord" til de ulike temaene - dette for å gjøre det enklere for brukeren av tematavlene å se hvordan en kan sette sammen ord til en meningsbærende ytring. Det er ofte viktig å legge til et ord for å forstå meningen i en ytring - sier/peker en på "genser" uten flere ord er det vanskelig å vite om en er kald/varm eller kanskje faktisk liker genseren som vennen har på.

Ordforrådet i våre ferdiglagde tematavler passer kanskje ikke alltid helt perfekt til alle brukere, men vi håper da at du vil utvide din brukers ordforråd ved å lage flere tematavler tilpasset det din bruker har på hjertet.

Widgit Tematavler er trykket og levert av NorMedia AS.

## Innhold og filer

- Perm med 50 trykte tematavler på slitesterkt plastpapir - denne permen kan settes opp som en trekant slik at det er enkelt å bla mellom tematavlene
- QR-kode på produktet som lar deg laste ned PDF-filer av alle tavler

På samme side finner du også filer som er redigerbare i InPrint 3(*krever lisens på programmet*) - *brukerveiledning og liste over hvilke temaer tematavlene inneholder.*

## Å kommunisere med symboler

For personer som trenger symboler for å kommunisere vil det fort bli en del av hverdagen deres, men for foreldre og andre nærpersoner kan det kanskje føles unaturlig og vanskelig å huske på å bruke symboler selv. Det å kommunisere med symboler er en annen måte å kommunisere på, det er ofte mer tidkrevende og det krever også ofte mer tilrettelegging.

Brukermiljøet rundt en bruker står ofte som den ansvarlige parten i å finne frem ordene som bruker kan få "si" - prøv derfor gjerne å sett deg inn i hva bruker kanskje vil si og husk at man ofte trenger det vi liker å kalle "snakkeord" og ikke bare ord tilknyttet et tema. Snakkeord er rett og slett ord som gjør at vi kan si noe om et annet ord - et ord som setter et annet i kontekst/gir mening til ytringen.

Widgit Tematavler er bygget opp med slike snakkeord til tavlens tema, ved å sette sammen ord kan en skape en fler-ordsytring. For mange brukere er det ofte nok å sette sammen 2 til 3 ord for å skape mening. Dette kalles nærkommunikasjon - kommunikasjon mellom personer i samme rom.

## Hvordan bruke tematavlene

Tematavlene er laget med tanke på å gi tilgang til et spesifikt ordforråd tilpasset en gitt situasjon, aktivitet eller tema. Tavlene er generelle og er relatert til det hverdagslige liv og begreps trening. Tematavlene kan gi bruker trening i å sette sammen to-tre ord til en meningsbærende ytring.

Er man i en spesiell situasjon, kan det være raskere å ta fram en tematavle å peke på, enn å bruke en kommunikasjonsbok eller et elektronisk hjelpemiddel. Tematavlene er ingen erstatning for noen av delene, men kan være til hjelp i en gitt situasjon. Sitter man ved bordet og spiser, kan det f.eks. være lurt å ha en tematavle om mat tilgjengelig. Den kan brukes enten ved at brukeren selv peker på det hen ønsker, eller at den som sitter i nærheten peker og får tilbakemelding fra brukeren. Tematavlene kan også egne seg bra i barnehager eller skoler som trenger materiell som kan passe til flere barn/elever. Man kan også bruke temaene i opplæring der man arbeider temabasert. Slik kan man tenke vokabularutvikling/øvelse av tegnet. Tavlene kan gjerne henges opp der de hører hjemme, på kjøkkenet, badet, soverommet osv. Eller de kan tas fram ved behov.

## Allmenne råd for å ta i bruk tematavlene:

1. Når du sier et ord det finnes bilde av på tavlene, peker du på ordet samtidig som du sier det - koble gjerne to-tre ord sammen på sikt.
2. Til å begynne med kan det være nok å peke på et eller kanskje to ord
3. Hold opp tavla slik at brukeren kan se hvor du peker.
4. Ha tavlene tilgjengelige, slik at brukeren av tavlene kan bli kjent med dem på sin egen måte. I starten kan det være nyttig å leke med dem, tullepeke eller peke flere ganger på samme bildet, da er det viktig at en hjelper er med og sier ordene høyt og samspiller med brukeren.
5. For å komme i gang med tavlene, kan det være lurt å finne en eller to kategorier man begynner med og trener på. For eksempel påkledning eller mat. Man kan også kopiere opp enkeltbilder fra tavlene og trene ordjakt i tavlene. Se hvor mange bilder man finner.
6. Vær språkmodell i kommunikasjonen, bruk symboler når du snakker


# Om oppsettet i Widgit Tematavler

Widgit Tematavlesett inneholder tematavler knyttet til 50 ulike temaer - tavlene er bygget opp med 20 felt - det ligger 5 faste felt langs øverste linje. Ruten som er større forklarer tavlens tema. Temaene strekker seg fra dagligdagse gjøremål til aktiviteter, handlinger og merkedager. Tavlene er utviklet med tanke på at en skal kunne sette sammen to eller flere ord knyttet til et tema.

## De faste feltene:

Disse feltene er alltid - i rekkefølge

Tema for tavlen - et *viktig* ord/sted/handling for tavlen - grønn hake - rødt kryss - ferdig

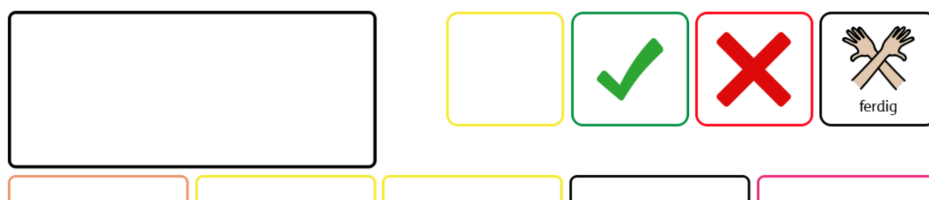


Vi har valgt å legge inn grønn hake og rødt kryss på faste plasser i alle tavler. Disse kan stå for ja/nei, eller bare være bekreftende/avkreftende. Hvis noe er riktig er det også mulig å peke på den grønne haken og si at *ja det var riktig*, eller på det røde krysset - *det var feil*. Ved å ikke legge på tekst under disse symbolene er det lettere for kommunikasjonspartneren å bruke dem til flere ord. Vi har også valgt å legge inn "ferdig" som et fast ord - det kan symbolisere at vi er ferdige med tavlen, ferdige med å prate om det temaet - eller trenger en pause mm.

## Innhold i tavlene:

Hver tavle har en tema-rute som fremhever tavlens tema, denne er litt større enn de andre og får en bakgrunnsfarge for å fremheve temaet, det er 15 mindre ruter med ord tilpasset temaet. Disse er bygget opp med pronomen, verb, substantiv, spørreord, beskrivelser etc. slik at en kan sette sammen små flerords-ytringer. Ord som jeg og du vil gå igjen på de fleste tavler, mens eksempelvis verb og substantiv varierer etter temaet.

*Se neste side for bildeeksempel.*

### Eksempel på tematavle - lese bok

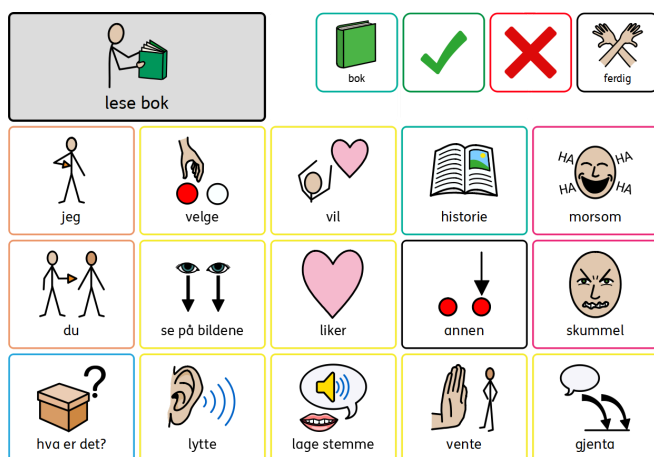

Her er eksempelvis noen ord i tavlen "lese bok" - se på bildene - lytte - velge -historie, i tillegg til jeg/du og morsom/skummel. For mange er det også viktig å kunne si gjenta, slik at vi kan se på samme side i boken en gang til.

Her kan vi si(to-ords ytring) jeg-velge du-lytte velge-annen og mye mer.

Med bare 15 felt til rådighet har vi valgt ut noen ord på bekostning av andre - savner bruker noen ord i tavlen er det mulig å få tilgang til redigerbare filer og tilpasse innholdet. Les mer på neste side.

Fargen på tavlens tema-rute følger ikke noen retning innen fargekoding, men er ment for å skille temaene fra hverandre. Noen temaer vil ha lik farge. Farger og innhold kan endres etter behov ved å bruke programmet In Print 3. (InPrint 3 følger ikke med)

Tematavlene sine innholdsord er farget langs kantlinjen, eksempelvis er pronomen oransje, verb gule og beskrivelser rosa. Dette går igjen med de samme farge i våre "Snakketavler tavlesett"

## Ønsker du å lage flere tematavler eller tilpasse innholdet


Med et begrenset ordforråd i hver tavle kan det skje at en ønsker andre ord eller tematavler på andre ting enn de som vi har laget. Det kan være behov for flere ord, eller at det mangler spesifikke ord som bruker har behov for - noen vil kanskje også trenge enkle dagsplaner, timeplaner, handlingsrekker eller kommunikasjonsbøker.

Dette kan lages i programmet InPrint 3 programmet må det kjøpes eller søkes om egen lisens til - Les mer og lag gratis prøvelisens på programmet via vår hjemmeside

[www.normedia.no](http://www.normedia.no)

Gjennom QR-koden kan en også laste ned tomme maler på oppsettet til Widgit Tematavler, på denne måten kan en lage egne tematavler med samme oppsett.

*Slik ser en tematavle ut i InPrint 3*

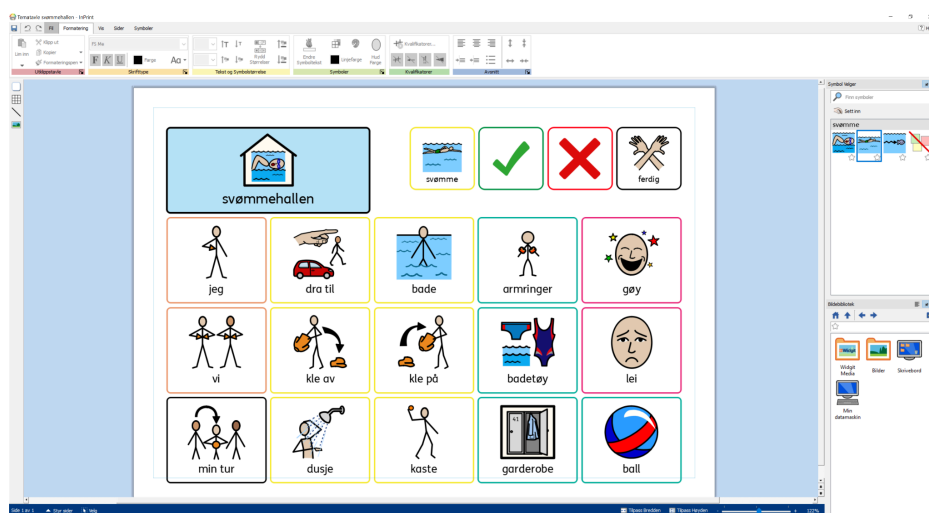

## Medfølgende PDF-filer

På permen er det satt på en QR-kode - scan denne for å få lastet ned filer. Med disse kan dere printe ut enkelte tavler på nytt ved behov.

Kontakt oss hvis du har problemer med nedlastingen.

## Copyright:

Dette produktet er utviklet av Normedia AS og kan ikke kopieres eller kommersielt videreselges uten samtykke. Produktet inneholder Widgit Symboler og er laget i programmet InPrint 3.

Widgit Software eier rettighetene til alle Widgit Symboler - Normedia AS er norsk leverandør av symbolsettet og symbolene kan ikke brukes i Norge uten deres samtykke.

Du må ikke under noen omstendighet distribuere dette til noen utenom den organisasjonen som har kjøpt denne pakken. Materialet er kun til eget bruk

**Kopiering til andre er forbudt - Widgit Symboler er kopibeskyttet og kan ikke brukes fritt.**

Ved tilgang til produktet gjennom NAV hjelpemiddelsentral gjør vi oppmerksomme på at pakken kun er tiltenkt den enkelte bruker den er søkt til. Det å dele produktet og erstatningsfiler med personer utenfor brukers miljø er strengt forbudt. Det er heller ikke tillatt å skrive ut filer som følger med pakken til andre.

**Widgit Symboler © Widgit Software Ltd 2002 – 2024**

**Norsk versjon © NorMedia 2016-2024**

Symbol Startpakke er utviklet og produsert av NorMedia AS.

### **Anerkjennelse av symbolene ved bruk**

- dette gjelder ved deling av alle ressurser utover eget bruk.

Det er viktig for Widgit og Normedia at ved deling av symboliserte ressurser settes det på korrekt informasjon om symbolene. Dette gjøres ved å merke ressursen at symbolene er:

**Widgit Symboler © Widgit Software Ltd 2002 – 2024 (eller det faktiske året) - Norsk ©**

**NorMedia AS - normedia.no**

For med informasjon om Widgit Symbols copyright på Widgit Software sin hjemmeside:

<https://www.widgit.com/symbol-services/copyright.htm>

# Support

Har du spørsmål eller trenger hjelp kontakt oss på e-post

[kontakt@normedia.no](mailto:kontakt@normedia.no)

eller ring oss på

Tlf 66 91 54 40.

Se "Brukerstøtte" på våre hjemmesider

[www.normedia.no](http://www.normedia.no)

Følg oss gjerne på Facebook!

**Lykke til!**

