

sensio

PIA

606330 PIA PIR Motion Sensor

606331 PIA PIR Passage Sensor

606329 PIA PIR Passage Narrow Sensor

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Feilsøking	5
Spesifikasjoner	6
Vedlikehold	7
Resirkulering	7
Symboler	8
Godkjenninger	9
Support	9

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom
- Skal ikke monteres der den kan påvirkes av direkte sollys

Introduksjon

I esken

- PIA PIR Motion Sensor/ PIA PIR Passage Narrow Sensor/ PIA PIR Passage Sensor
- Bruksanvisning
- Spritserviett

Produktbeskrivelse

PIA PIR Motion Sensor

En liten bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse i et rom eller område. Denne er beregnet for veggmontering. Oppfatter når en person vandrer inn i eller gjennom deteksjonsfeltet. Rekkevidde 5-10 meter, avhengig av rommets utforming. Kobles sammen med FlexiBlink-sender

PIA PIR Passage Narrow Sensor

En bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse innenfor et begrenset område, for eksempel under seng, i døråpning, eller i en smal gang. Har et smalt vifteformet deteksjonsområde og oppfatter når en person beveger seg gjennom dette. Kobles sammen med FlexiBlink-sender

PIA PIR Passage Sensor

En vegg- eller takmontert bevegelsessensor for deteksjon av bevegelse i et rom. Benyttes der det er behov for å detektere passasje i et bredt felt. Deteksjonsfeltet er ca. 1 meter tykt og 120grader i vifteform. Kobles sammen med FlexiBlink-sender

Kom i gang

Montering

Velg hvor PIA skal monteres. Vask festepunktet med spritserviett og vent 1 minutt før PIA tapes fast.

PIA PIR Motion Sensor

- Deteksjonsfeltet er ca. 102° vertikalt og ca. 92° horisontalt. Rekkevidden er 5-10 meter avhengig av rommets utforming.
- PIA monteres rett på vegg eller i et hjørne med skumtape som er festet på baksiden.

PIA PIR Passage Narrow Sensor

- Deteksjonsfeltet er begrenset i en retning som en gardin. Denne monteres typisk over eller på siden av en dør eller passasje. Den monteres med dobbeltsidig tape til vegg eller dørkarm. Rekkevidde er ca. 6 meter.

PIA PIR Passage Sensor

- Taksensor som oppdager passasje gjennom et rom eller en gang. Sensoren monteres med dobbeltsidig tape eller ved bruk av skruer i taket og lager en usynlig romdeler. Deteksjonsfeltet kan tenkes som en stripe med bredde på ca. 1 meter ved montering i 2,5meter høyde. Lengden på stripen vil være ca. 4 meter i hver retning ut fra sensoren.

Kontaktplugg monteres i potensialfri signalinngang på en FlexiBlink-sender som for eksempel SOFUS smart activity transmitter eller AXEL activity transmitter. Det kan ta opp til et minutt før PIA er klar til bruk.

Testing

Gå ut av området PIA dekker. Vent i 30 sekunder og gå inn i området igjen og se at FlexiBlink-mottakeren varsler.

Feilsøking

Bevegelse detekteres ikke

- Sjekk at sensorens kontaktplugg er godt koblet til FlexiBlink-senderen
- Sjekk at sensoren peker i riktig retning
- Sensoren trenger 1 minutt på å bli klar etter oppsett
- FlexiBlink-senderen bruker ca. 30 sekunder på seg til å gjøre seg klar til å varsle på nytt

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Temperatur: -10 °C – 40 °C
- IP-grad: IP20

Dimensjoner

PIA PIR Motion Sensor

- Høyde: 32 mm
- Bredde: 32 mm
- Dybde: 29 mm
- Lengde: 230 mm ledning
- Vekt: 16 g

PIA PIR Passage Narrow Sensor

- Høyde: 52 mm
- Bredde: 24 mm
- Dybde: 15 mm
- Lengde: 1950 mm ledning
- Vekt: 52 g

PIA PIR Passage Sensor

- Høyde: 50 mm
- Bredde: 180 mm
- Dybde: 20 mm
- Lengde: 1950 mm ledning
- Vekt: 52 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Vær forsiktig



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47