


Starte opp Luna Eye

Koble strømforsyningen til den medfølgende strømkabelen og koble til strøm.

Strøm på: Trykk Knappen strøm av/på, kontroll panelet i 2 sekunder til du ser Luna Eye starter opp.

Slå av: Trykk på strøm av/på, kontroll panelet i 2 sekunder til du ser Luna Eye slår seg av.

Grunnleggende funksjoner på kontrollpanelet

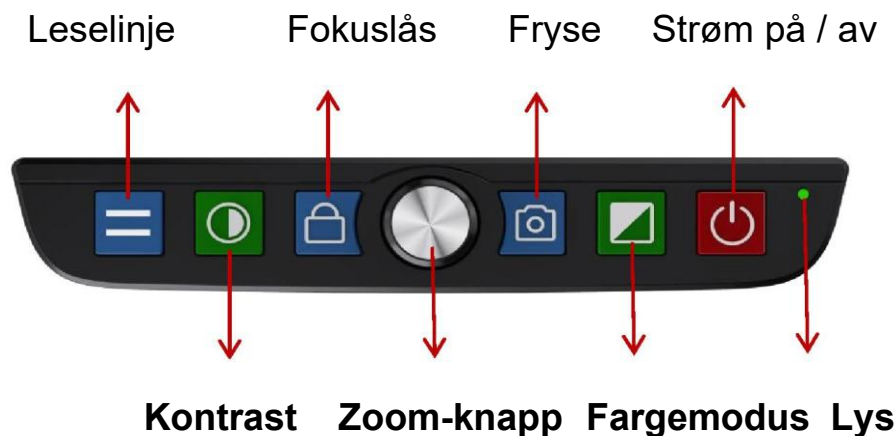

Lese med nær kamera.

Legg det du skal lese under kameraet.

1. Bruk Zoomknapp for å forstørre/forminske.
2. Velg kunstige farger med Knappen fargemodus.
3. Hold Knappen fargevalg inne i 3 sek for å gå direkte til live bilde.

Bruk avstandskamera og speilfunksjon.

1. Vipp linsen på kameaet slik at den er åpen.
2. Vri kamera i ønsket posisjon.
3. Forstørr/ forminsk med Zoom Knappen.

Andre funksjoner

Innstilling av fargemodus	Trykk kort på kontrastknappen og fargemodusknappen og roter zoomknappen for å velge
Lese linjeposisjon	Hold inne leselinjeknappen mens du dreier zoomknappen
Panorering av fryst bilde	Panorerer til venstre og høyre: Hold inne fryseknappen og roter
	Panorerer opp og ned: Hold inne fokuslåseknappen og roter zoomknappen
Galleri	Dobbeltrykk på fryseknappen for å åpne/gå ut av
Slett bildet	Trykk kort på zoomknappen når view bildet
Gjenopprette	Trykk lenge på fryseknappen i 1.0 sekunder

Se hoved manual for flere funksjoner