

LUNA EYE

Bruksanvisning



Modell: Luna Eye

Tiltenkt bruk:

Luna Eye brukes til å hjelpe personer med nedsatt syn med å forstørre og lese tekst samt se på bilder. Luna Eye kan brukes av alle. I jobb, på skole, hjemme eller i annet sted du har behov for et forstørings apparat.

ZOOMAX Technology Co., Limited

9F, bygning D, Paradise Software Park, nr. 3 Xidoumen Road, Xihu

Distrikt, Hangzhou, Kina 310012

Opphavsrett © 2019 ZOOMAX Technology Co., Limited. Alle rettigheter

Reservert. ZOOMAX® er et varemerke for ZOOMAX Technology Co. Begrenset i

USA og andre land. Informasjon i

Dette dokumentet kan endres uten varsel. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i enhver form eller ved enhver metode, elektronisk eller mekanisk, for ethvert formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ZOOMAX.

1. Introduksjon og bruk

Tusen takk for at du valgte Luna Eye, en alt-i-ett stasjonær Lese TV fra Zoomax.


Luna Eye vil gi deg bilder av høy kvalitet, komfortabel bruk, forstørring, kunstige farger. Nær og avstandskamera og et stort og godt skriveområde.

Luna Eye har en 24» skjerm, mulighet for enkelt å flytte lese TV om det er ønskelig.


1.1 Hva er i esken


Luna Eye	x1	Brukermanual	x1
Strøm adapter	x1	Hurtigstartveiledning	x1
USB-kabel	x1	Rengjøringsklut	x1

1.2 Produktdetaljer

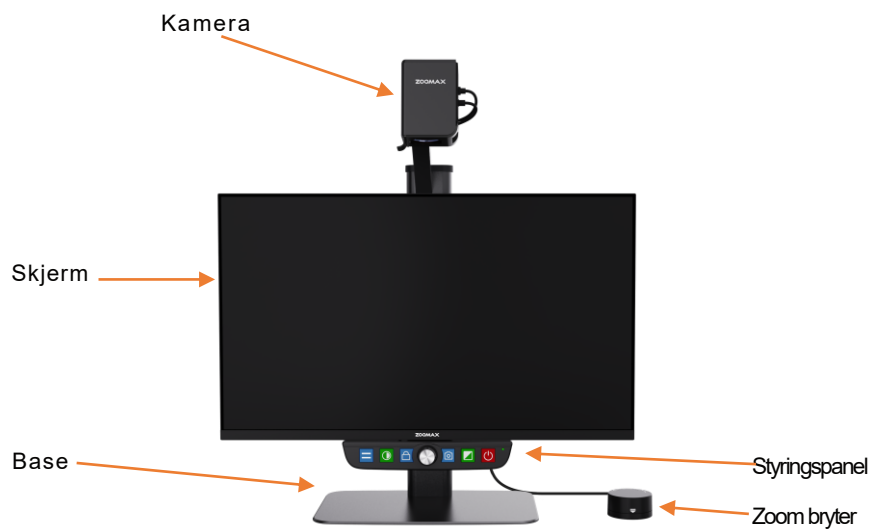

1.3 Styringspanel

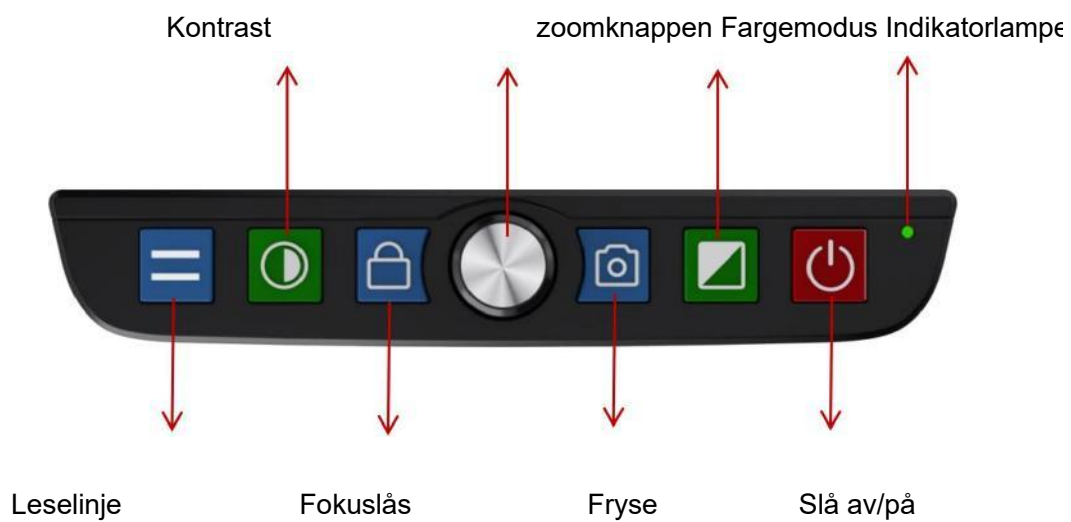

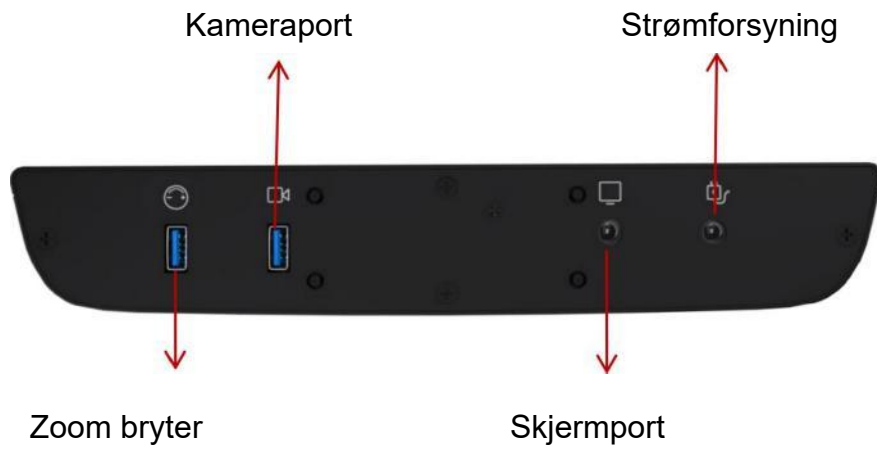

kom igang

2.1 Strøm av/på

Koble Luna Eye til strømkontakten.

Slå på: Trykk lenge på av/på-knappen på styringspanelet

Etter 2 sekunder når du hører summelyd og indikatorlampen blir grønn..



Slå av:

Trykk i ca 2 sek på av/på-knappen for at Luna Eye skal slå seg av.



Minnefunksjon: Luna Eye vil huske verdiene som er satt tidligere.

Etter omstart, vil som forstørring, fargemodus, kontrast, leselinjemodus, være slik du avsluttet siste økt.

2.2 Justering av visningsmodus



-Nærvisningsmodus




-Avstandsvisningsmodus

Snu kameraet slik at kamera peker ned mot bordet og lukk nærobjektivet for nærvisning.

Snu kameraet tilbake og åpne nærbildeobjektivet for avstandsvisning.

Snu kameraet mot deg selv og lukk nærbildeobjektivet når vil se deg selv.

2.3 Zoom inn/ut


Vri  med klokken for å zoome inn og mot klokken for å zoome ut. zoommultiplikatoren når maksimum eller minimum ved å fortsette å vri. Du vil se forstørings nivået du er i med tall på skjermen.

Du vil høre en pipelyd og se **Min** **Max** i høyre hjørne av skjermen når du har nådd max/min forstørring. Du kan også bruke den eksterne knappen på bordet til å zoom med.

Minste forstørring er er 1x, og forstørrelsesområdet er 1x–72x.

Trykk og hold inne Zoom knappen 

for å memorere en forstørrelse.

Trykk deretter kort på zoomknappen etter zooming 

for å gå direkte tilbake til den lagrede forstørrelsen.

Trykk kort igjen på zoom knappen for å gå til gjeldende forstørrelse.

2.4 Innstilling av fargemodus


Det er totalt 18 fargemoduser med høy kontrast i Luna Eye.

første gang du bruker enheten, brukes ekte farger som standard, samt fire



høykontrastfarger: hvitt på svart, svart på hvitt, gult på svart, gult på blått.


Trykk kort på fargemodusknappen 

For å bla deg gjennom de forskjellige kunstige fargene.

Trykk lenge på fargemodusknappen  i ca 2s

for å gå tilbake til normale farger.

Trykk kort på  og fargeknappen  samtidig for å gå inn på siden for valg av fargemodus, og deretter

roter zoomknappen  for å velge, trykk deretter kort på


fargemodusknapp  for å lagre.



2.5 Panorering

Live visning: Støtte for panorering på 11–72x

Frosset bilde: Støtte for panorering på 1,5–72x


Panoreringsmodus: Trykk og hold inne 

vri deretter på zoomknappen  for å panorere opp og ned.


Trykk og hold inne frysknappen  og vri  på

Zoomknappen for å panorere høyre venstre.


2.6 Finn

I live visning trykk lenge på fokuslåseknappen  for å gå inn i finn
modus og slipp knappen for å gå ut.

I søkemode vises en oransje ramme på skjermen, og Forstørrelsen av bildet er 1x.

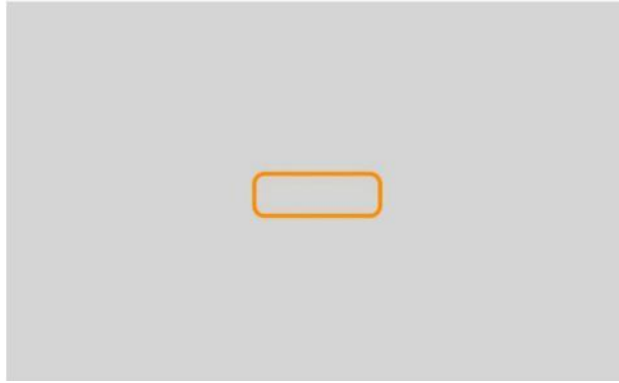

Flytt lesestoffet ditt og behold innholdet du vil se

Slipp fokuslåseknappen i den oransje rammen 

Du vil se at dette innholdet er forstørret i fullskjerm for å gjøre det enklere for deg å lese.

2.7 Frys og galleri

Frys: I live visning, trykk kort på frysknappen



Skjerm bilde fryser, og et kameraikon vises nederst til venstre hjørne. Det frosne bildet støtter zoom inn/ut og fargemodus

Justering. Du kan også bruke den eksterne knappen til å fryse eller åpne opp.


Trykk kort på fryseknappen
bilde.




igjen for å frigjøre skjerm



Lagre:

Trykk på fryseknappen  for å lagre det frosne bildet til galleriet,
Skjermen går deretter tilbake til live visning.

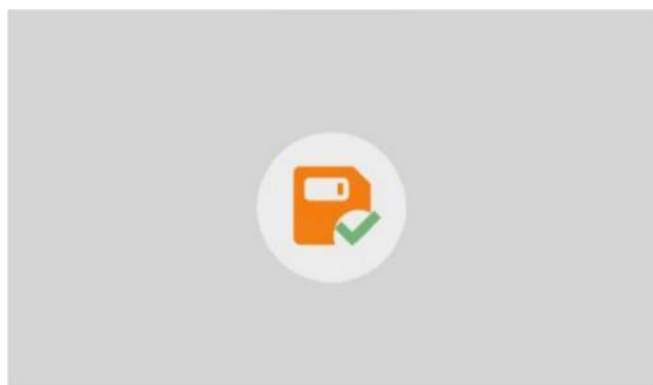

Galleri: Dobbeltrykk på fryseknappen i live visning



For å gå inn/ut av galleriet, roter




Slett bildet: Velg bildet du vil slette. Kort trykk


på zoomknappen




for å slette det.

Du kan også slette alle bildene i galleriet hvis du velger alle.

Et kort trykk på  frys knappen for å slette bilde, for deretter å gå tilbake til galleri.

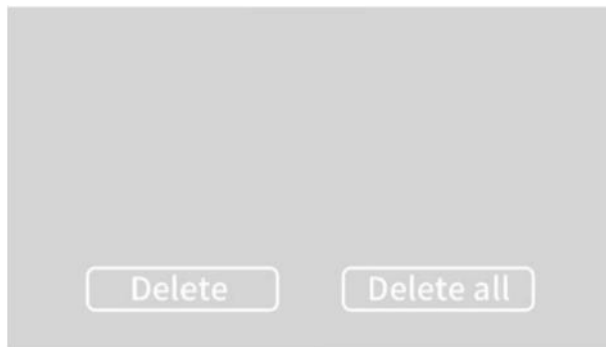

2.8 Leselinje og maskering

I live visning, kort trykk  på knappen for å veksle mellom leselinjene.


Du har 5 leselinjemoduser: ingen leselinje eller maske, horisontal leselinje, vertikal leselinje, horisontal maske, og vertikal maske.






Juster leselinjens posisjon: Trykk og hold inne knappen for leselinje



mens du roterer zoomknappen  med klokken til høyre og opp. Mot klokken til venstre og opp.

Juster maskeområdet:

Trykk og hold 

Rotere zoomknappen  med klokken for å øke


område (visningsområdet reduseres) og mot klokken for å redusere maskeområdet (visningsområdet øker).

2.9 Justering av kontrastverdi

I fargemodus med høy kontrast, trykk kort på kontrastknappen



skjermen viser ikonet og gjeldende verdi, roter

zoomknappen  for å justere kontrastverdien.


Kontrastverdien lagres automatisk.

Ikonet forsvinner automatisk etter 3 sek ved inaktivitet.



Justering av kontrastverdi er ugyldig i ekte fargemodus

2.10 Fokuslås

I live visning, trykk kort på fokuslåseknappen 

I nederste høyre hjørne av skjermen vises ikonet for låst fokus.

Denne gangen fokuset er låst, vil ikke skjermen være gjentatte ganger fokusert.

Trykk kort på fokuslåseknappen  igjen for å avslutte.



3.1 Frekvens

Fabrikkinnstillingen for Luna Eye er 60 Hz.

Trykk lenge på kontrastknappen  omtrent 3 sekunder, øverst til høyrehjørnet av skjermen viser gjeldende frekvens. Trykk kort

kontrastknapp  For å endre frekvensen

Verdien vil automatisk bli lagret

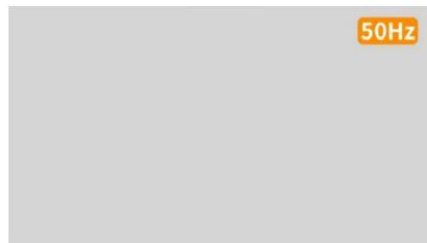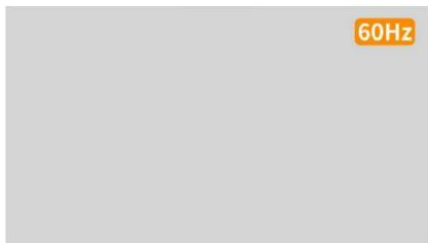

6. Spesifikasjoner

Forstørrelse: 1–72x

Fargemodus: 18 fargemoduser med høy kontrast

Størrelse (24 tommer): LW 540 * 302 * 626 mm, skrivehøyde 520 mm

Kamera: 11x optisk zoomobjektiv, autofokus, 1920*1080, 60 FPS

Skjerm: 24-tommers skjerm med en oppløsning på 1920 * 1080

Vekt: ca. 6,8 kg / 14,9 lbs

Adapter: inngang 100–240 V; utgang 19 V/3 A

LOGISENSE AS

Avd Årnes

Høvlerigata7, 2150 Årnes

www.logisense.no

post@logisense.no

Telefon: +47 22 12 00 86

