

# SALERNI

---



ERGOSEAT

BRUKERMANUAL  
STR 1 & 2




CE

[WWW.ERGOSEAT.NO](http://WWW.ERGOSEAT.NO)

# FORORD

---

Gratulerer med ditt nye Salerni understell fra Ergoseat. Vi håper du blir fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i brukermanualen før produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

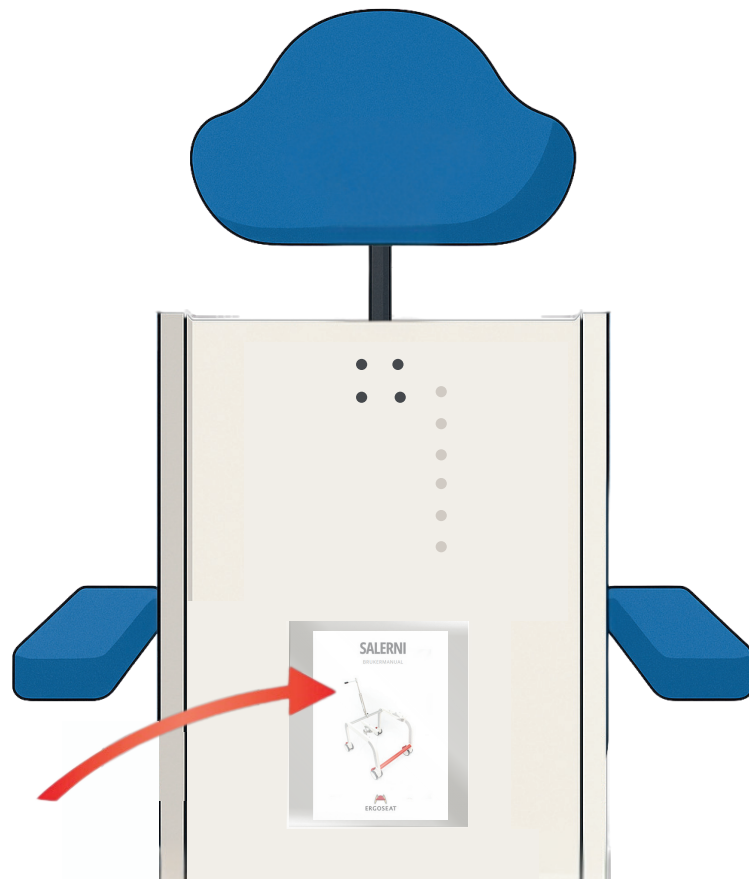

Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)



# INNHALDSFORTEGNELSE

---

Forord	2
Innholdsfortegnelse	3
Sikkerhet	4
Tiltenkt bruk	6
Understell	7
Tilpasning	10
Tilbehør	11
Rengjøring	12
Vedlikehold	13
Teknisk informasjon	15
Resirkulering og Gjenbruk	16
Utlevering med instruksjon i bruk	17

---

Bilder merket med (\*) inneholder komponenter som ikke er standard for dette produktet. Disse komponentene kan kjøpes som tilbehør direkte hos Ergoseat.

# SIKKERHET

---

- Enhver som skal benytte seg av dette produktet må lese gjennom brukermanual før bruk.
- Produsenten av produktet tar ikke ansvar for skader og feil som skulle oppstå dersom brukermanual ikke er fulgt.
- Benytt kun produktet dersom det er i forskriftsmessig stand.
- Dersom en feil eller skader blir oppdaget, skal produsent kontaktes før videre bruk.
- Følg alle instruksjoner og advarsler merket på produktet.
- Bruk bare produktet som angitt i kapittelet om tiltenkt bruk.
- Understellet skal ikke transporteres over terskler eller hindringer høyere en 0.5 cm med bruker i setet.
- Ikke gjør endringer i konstruksjonen.
- Produktet er ikke godkjent for brukere over 190cm.

# SIKKERHET

---

- Ikke fjern deler eller komponenter fra produktet uten avklaring med produsent, da dette kan påvirke produktets egenskaper.
- Produktet må ikke bygges om, tilpasses eller modifiseres slik at dets originale egenskaper endres. I slike tilfeller bortfaller garantier og opprinnelig produktansvar.
- Ettermontering og endringer av produkt eller tilbehør uten Ergoseats godkjenning vil endre produktet og dets godkjenninger. Slike modifikasjoner kan føre til farlige situasjoner både for ledsager og bruker.
- Ikke benytt produktet i rulletrapp.
- Den som betjener produktet må ha fått opplæring i bruk, være tilregnelig og ikke påvirket av rusmidler.
- Produktet må følges opp ihht. rutiner for ettersyn beskrevet i servicemanual.

# TILTENKT BRUK

---

Denne brukermanualen gir en generell veiledning til hvordan produktet skal brukes trygt og korrekt. Ikke bruk understellet uten å lese denne manualen først.

Produktet har lovfestede reklamasjonsrettigheter ihht. EU/EØS.

Salerni understell er ikke godkjent for brukertransport i kjøretøy.

Salerni er et understell for benyttelse i bad og toalett situasjoner sammen med Ergoseat sitt Toaseat individuell tilpassede sete.

Om produktet er sammenkoblet med et sete fra en annen produsent skal det foreligge kombinasjonsavtale eller full risikovurdering fra godkjent produsent. Det skal også tydelig fremgå av merking på produktet hvem som er ansvarlig for sammenkobling.


Ergoseat tilbyr en rekke tilbehør til Salerni. Dersom det benyttes tilbehør fra annen produsent gjelder samme retningslinjer som i foregående punkt.

Dersom bruker av dette produktet ikke er i stand til å betjene det fullt og helt selv må det aldri benyttes uten tilsyn av person som er ansvarlig for bruk av produktet.

Salerni er kun til bruk i et begrenset miljø på bad og toalett, og er ikke et understell for transport.

# UNDERSTELL

---

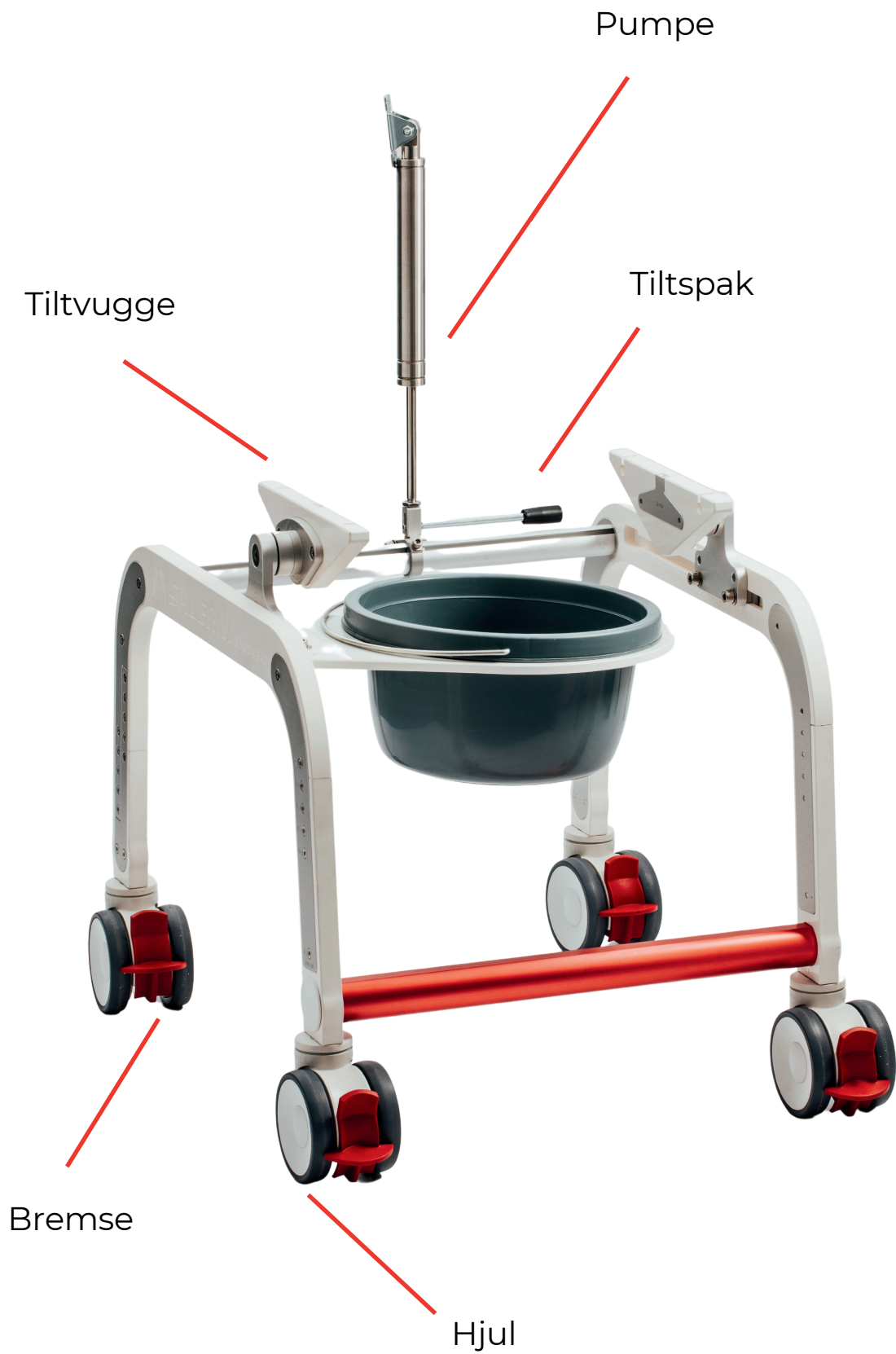

# UNDERSTELL

---


## Hjul

Salerni leveres med fire individuelt låsbare hjul, alle kan rotere fritt rundt sitt eget festepunkt. Dette gjør det enkelt å manøvrere, kjøre og plassere understellet på mindre flater.

## Bremser

Alle hjulene på Salerni understell er utstyrt med individuelle låser. Ved å presse ned den røde delen som anvist på bildet, låses hjulet for både rulling og rotasjon. Bremsene brukes som parkeringsbrems, og alle fire må være låst ved plassering av bruker i påmontert sete. Hjulene skal også låses når bruker benytter understellet til toalettbesøk eller dusj.

Når bremsene skal løses igjen, heves enkelt den røde hendelen igjen med foten i motsatt retning. Husk å løsne alle brems før du forsøker å flytte på understellet.

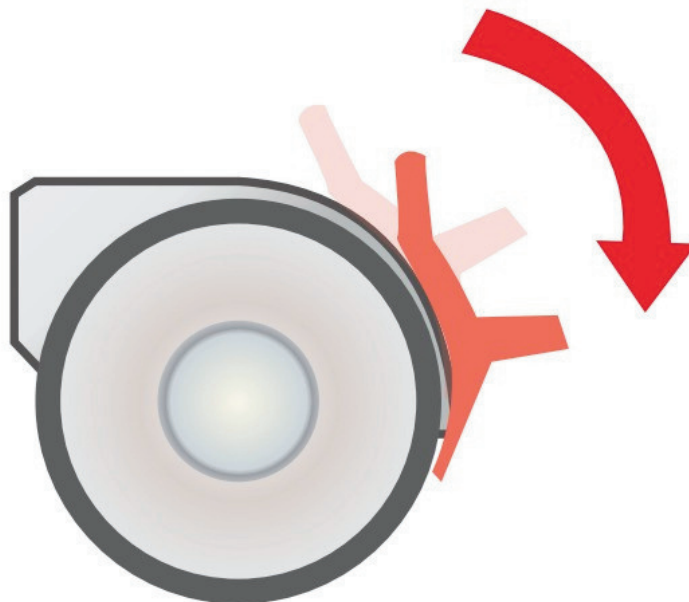

# UNDERSTELL

---

## Tilt

Når det monteres seteløsning på Salerni understell, står man fritt til å definere utgangs vinkel for tilt. Pumpen ligger utslaget til ca 20°, men merk at dette alltid må funksjonstestes før bruker benytter seteløsning på understellet.

Salerni understell er tatt frem med tanke på benyttelse sammen med Toaseat fra Ergo. Se mer på [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)



Den manuelle tilten betjenes via spaken som er lokalisert på baksiden. Klem inn håndtaket, samtidig som du har et godt grep i understellets rygg. Setet tiltes deretter til ønsket posisjon. Når ønsket tilt er oppnådd, slippes tilhørende delen, og setet er justert. For lengst levetid er pumpen monter med håndtaket ned. Om ønskelig kan denne monteres med hendel opp!




# TILPASNING

## Høydejustering

For at Salerni skal fungere best mulig i alle dagliglivets situasjoner, følger det med et kit som gjør det mulig å tilpasse høyden perfekt over det toalettet der den skal benyttes. For å heve stolen må distansestykker monteres i mellom anvist sted for å holde på understellets stabilitet.

Distansestykkene kommer i to ulike størrelser, på 2 og 4 centimeter. Disse kan benyttes sammen eller hver for seg for å justere Salerni i høyden fra 2- 6 cm opp fra grunnposisjon. Dette utføres uten bruker i setet. Merk at distansestykkene er nummerert for hvert ben, og må plasseres på korrekt plass. For å heve setet, fjern skruene på bildet fullstendig, og plasser de ønskede distansestykkene. Sett fast skruene igjen, og gjenta dette på alle fire ben til korrekt og lik høyde er oppnådd. Ta vare på distansestykkene slik at stolen kan justeres tilbake til utgangshøyde ved en senere anledning om det er behov for det.

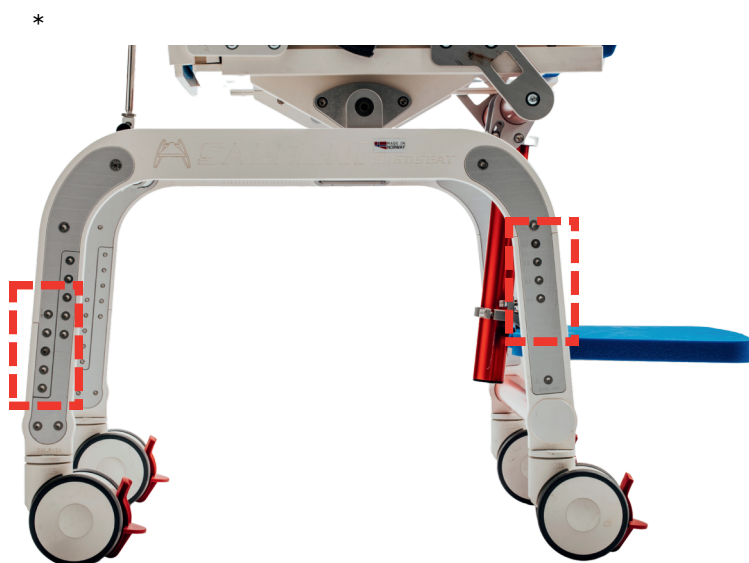

# TILBEHØR

---

## Bekken

Før montering, se til at bekken er satt sammen som illustrert på bildet. Monter bekken på innfestning under setet, sett den godt inn på halvsirkelen.

Før bruk må lokket fjernes.

Etter bruk, sett lokket på igjen. Deretter fjern bekken fra understellet.

Gjør godt rent etter bruk, dette for å unngå bakterie utvikling.

\*



# RENGJØRING

---

## Daglig renhold

- Etter hvert sanitære besøk skal understellet rengjøres, dette inkluderer bekken og toalettsete som er montert.
- For å forebygge kalkavleiringer, og ansamling av såpe bør understellet jevnlig spyles og tørkes, uten bruker i setet.

# VEDLIKEHOLD

Sjekkpunkter	Beskrivelse	Intervall
Rengjøring	For å forebygge kalkavleiring og ansamling av såpe og sjamporester bør setet og understell jevnlig tørkes av.	Daglig
Desinfisering	Setet og understell kan desinfiseres med godkjent klorbasert desinfiseringsmiddel, f.eks Kloramin.	Ved behov
Kontroller slitasje	Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoneringsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlener, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etter behov.	Ukentlig
Ryggpumpe	Test at ryggpumpen ekspanderer når man presser hendelen opp. Test at pumpen sperrer når hendelen presses opp og ryggen samtidig belastes. Sjekk ryggpumpens sitter fast.	Ukentlig
Sjekk at alle skruer og er strammet	Etterstram ved behov.	Ukentlig
Nakkestøtte	Sjekk at nakkestøtten sitter fast og har riktig vinkel. Etterstram skruer og gantagreper ved behov.	Ukentlig
Armlener	Sjekk at armlener er justert i riktig vinkel, høyde og at de er stramme.	Ukentlig

# VEDLIKEHOLD

---

## Feilsøking

Dersom det skulle oppstå problemer med noen av komponentene, anbefaler vi å kontakte autorisert personell for veiledning og utbedring.

Før du kontakter autorisert personell er det noen punkter som kan undersøkes:

- Tilse at ingen skruer eller bolter er løse.
- Sjekk at alle festepunkter er stram og festet korrekt.
- Kontroller at setet er fastmontert på understellet, og sitter korrekt.
- Kontroller de aktuelle komponentene for slitasje.
- Se over alt tilbehør til både sete og understell for skader.

# Resirkulering og Gjenbruk

---

## Lang levetid og reparasjonsfokus

Som en del av vårt bærekraftarbeid tilstreber vi maksimal levetid for hvert produkt gjennom målrettet vedlikehold og reparasjon, der dette er teknisk og funksjonelt forsvarlig. Vi tilbyr et bredt utvalg av reservedeler og utskiftbare komponenter som kan tilpasses individuelt uten at det går på bekostning av brukerens funksjonelle behov eller komfort. På denne måten forlenges produktets totale livssyklus betydelig

## Gjenbruksordning

I tråd med vårt miljøansvar tilbyr vi en strukturert gjenbruksordning for alle våre produkter og tilhørende komponenter. Produkter som returneres til gjenbruksprogramet etter endt bruk, gjennomgår en kontrollert prosess der de demonteres, rengjøres og inspiseres. Komponenter som tilfredsstillt krav til funksjon og sikkerhet, reintegreres i produksjonsprosessen og benyttes i nye leveranser, i samsvar med gjeldende standarder og retningslinjer.

## Resirkulering av materialer

Produkter som ikke oppfyller kriteriene for gjenbruk, håndteres i samarbeid med vår lokale avfalls og gjenvinningsleverandør. Alle deler sorteres i henhold til materialtype og behandles videre i tråd med nasjonale forskrifter for miljømessig forsvarlig avfallshåndtering. Målet er å sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning.

Vi har bærekraftige løsninger i produksjonen, blant annet gjennom bruk av resirkulert aluminium og andre miljøvennlige materialer. Vårt mål er å være en aktiv deltaker i den sirkulære økonomien, derfor tilbyr vi både reparasjonsmuligheter, reservedeler og en returordning som ivaretar både gjenbruk og resirkulering.

Vi oppfordrer alle til å benytte returordningen ved endt bruk, slik at ressursene kan forvaltes i tråd med våre langsiktige bærekraftsmål.

# TEKNISK INFORMASJON

---

BESKRIVELSE	Salerni
Vekt understell	19 kg
Maks bruker høyde	190 cm
Maks bruker vekt	70 kg
Utvendig bredde	53 cm
Utvendig lengde	60 cm
Høyde	Sittehøyde: 63 cm Totalhøyde: 101 cm
Hjul diameter bak	4"
Hjul diameter framme	4"
Tilt	20°

# UTLEVERING MED INSTRUKSJON I BRUK

---

**Dato:** .....

**Personell fra Ergoseat:** .....


**Vi bekrefter å ha gjennomgått instruksjoner i daglig bruk sammen med terapaut fra Ergoseat.**

**Vi er gjort oppmerksom på faremomenter, og hvor vi skal søke ytterligere opplysninger om produktet dersom det er behov for dette.**

**Til stede:**





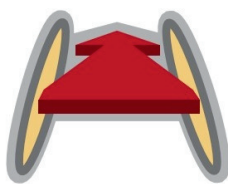

# ERGOSEAT

## Kontakt oss



WWW.ERGOSEAT.NO



POST@ERGOSEAT.NO



55101600



LØNNINGSFLATEN 28  
5258 BLOMSTERDALEN

# CE



ERGOSEAT