

# AZAR



ERGOSEAT

---

BRUKERMANUAL




CE

[WWW.ERGOSEAT.NO](http://WWW.ERGOSEAT.NO)

# FORORD

---

Gratulerer med ditt nye Azar understell fra Ergoseat. Vi håper du blir fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i brukermanualen før produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

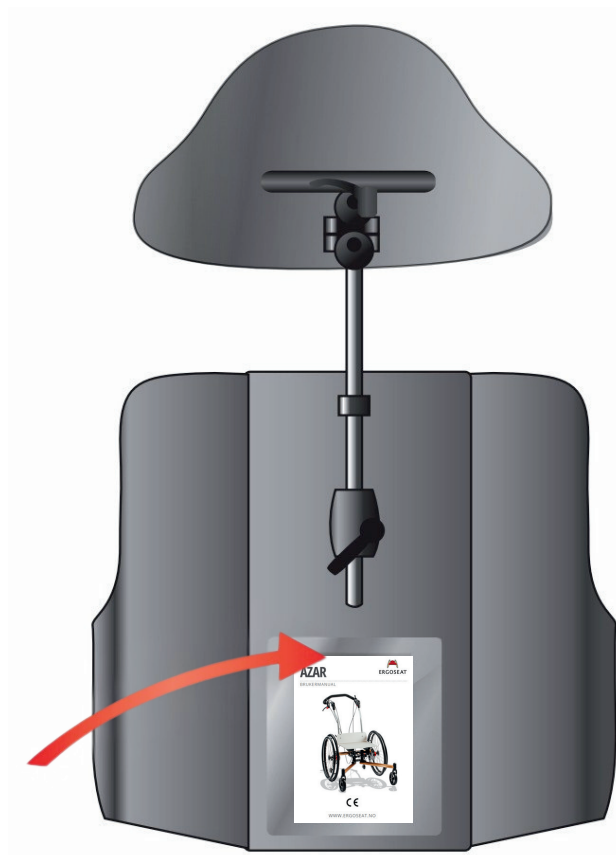

Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)



# INNHOLDSFORTEGNELSE

---

Forord	2
Innholdsfortegnelse	3
Sikkerhet	4
Tiltenkt bruk	6
Understell	7
Transport	12
Rengjøring	13
Vedlikehold	14
Teknisk informasjon	15
Resirkulering og Gjenbruk	17
Utlevering med instruksjon i bruk	18

Bilder merket med (\*) inneholder komponenter som ikke er standard for dette produktet. Disse komponentene kan kjøpes som tilbehør direkte hos Ergoseat.

# SIKKERHET

---

- Enhver som skal benytte seg av dette produktet må lese gjennom brukermanual før bruk.
- Produsenten av produktet tar ikke ansvar for skader og feil som skulle oppstå dersom brukermanual ikke er fulgt.
- Benytt kun produktet dersom det er i forskriftsmessig stand.
- Dersom en feil eller skader blir oppdaget, skal produsent kontaktes før videre bruk.
- Følg alle instruksjoner og advarsler merket på produktet.
- Bruk bare produktet som angitt i kapittelet om tiltenkt bruk.
- Ikke gjør endringer i konstruksjonen.
- Azar understell er ikke godkjent for brukertransport i kjøretøy dersom bruker overskrider 120kg.
- Produktet er ikke godkjent for brukere over 190cm.

# SIKKERHET

---

- Ikke fjern deler eller komponenter fra produktet uten avklaring med produsent, da dette kan påvirke produktets egenskaper.
- Ettermontering og endringer produkt eller tilbehør uten Ergoseats godkjenning vil endre produktet og dets godkjenninger. Slike modifikasjoner kan føre til farlige situasjoner både for ledsager og bruker.
- Ikke benytt produktet i rulletrapp.
- Den som betjener produktet må ha fått opplæring i bruk, være tilregnelig og ikke påvirket av rusmidler.
- Produktet må følges opp ihht. rutiner for ettersyn beskrevet i servicemanual.

# TILTENKT BRUK

---

Denne brukermanualen gir en generell veiledning til hvordan produktet skal brukes trygt og korrekt. Ikke bruk understellet uten å lese denne manualen først.

For å kunne benytte produktet til brukertransport i bil eller buss, er det avgjørende at kravene i kapittel "Transport" følges.


Azar er et understell for benyttelse sammen med Ergoseat sitt Softseat individuell tilpassede sete.

Om produktet er sammenkoblet med et sete fra en annen produsent skal det foreligge kombinasjonsavtale eller full risikovurdering fra godkjent produsent. Det skal også tydelig fremgå av merking på produktet hvem som er ansvarlig for sammenkobling.

Ergoseat tilbyr en rekke tilbehør til Azar. Dersom det benyttes tilbehør fra annen produsent gjelder samme retningslinjer som i foregående punkt.

Dersom bruker av dette produktet ikke er i stand til å betjene det fullt og helt selv må det aldri benyttes uten tilsyn av person som er ansvarlig for bruk av produktet.

Azar er kun til bruk i et begrenset miljø på flatt underlag, inne eller ute, og skal ikke benyttes i terrenget.

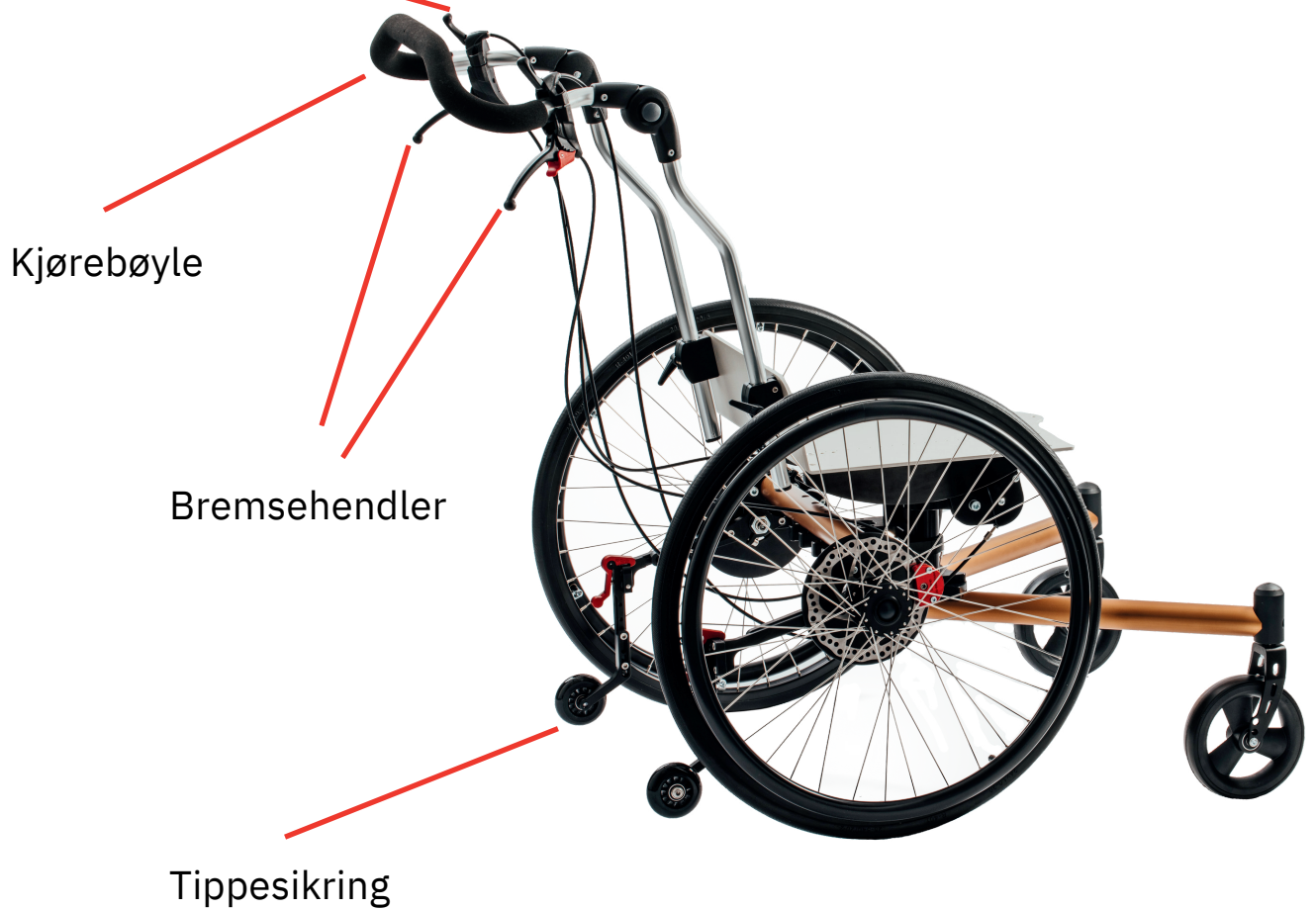


# UNDERSTELL

---

## Bremser

Azar understell er utstyrt med integrerte Shimano skivebremser. De kan brukes til å bremse i fart, men også som en parkeringsbrems. De mindre røde hendlene er aktivering for låsing til parkeringsbrems.

Vær forsiktig ved bremsing i høyere hastighet, slik at bremsene ikke låser seg.

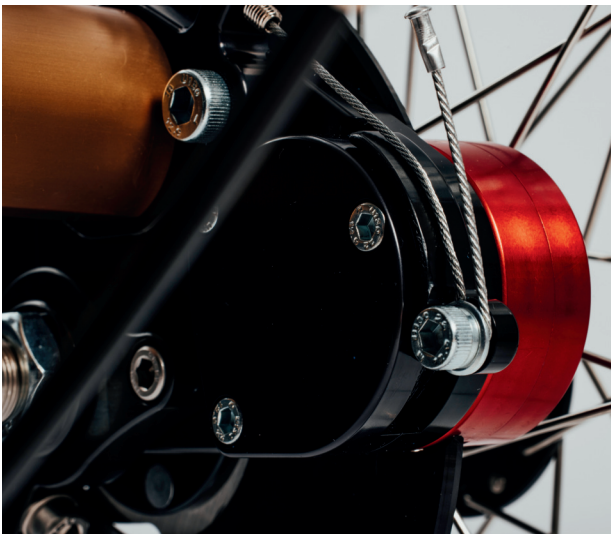

Unngå rask oppbremsing ved rygging eller sidehelning, dette kan føre til at understellet tipper.


# UNDERSTELL

---

## Tilt

Understellet er utstyrt med en mekanisk tiltvugge som opereres manuelt. Denne gjør at setet kan tiltes opp til 34° bakover. For å justere tilt må du først låse bremsene på drivhjulene. Begge hendlene merket tilt må betjenes samtidig for å aktivere tiltfunksjon! Juster til ønsket tilt er oppnådd, deretter slipp hendelenene.



 Ved benyttelse av tilt forskyves brukers tyngdepunkt i stolen fremover og ned, dette for å hindre at stolen tipper bakover. Sett deg allikevel grundig inn i hvordan dette fungerer før du tilter stolen med bruker i setet. Utvis alltid forsiktighet ved benyttelse av tilt funksjon, og hold alltid med begge hender i kjørebøyle.

# UNDERSTELL

---

## Hjul

Det er lett å ta av og på drivhjulene, da disse er montert med hurtigkobling på aksler. Før demontering av drivhjulene skal bremsehendlene låses.

For å ta av drivhjul trykk på knappen som vist på bildet, og trekk hjulet fra rammen.

For å ta på drivhjul, trykk inn den samme knappen, deretter før akslingen inn i hjulnavet og skyv mot rammen. Roter hjulet til det låser med et hørbart "klikk".



Hurtigutløser aksel



Pass på for klemfare ved av og på montering av drivhjul

# UNDERSTELL

---

## Tippesikring

Tippesikring er montert på innsiden av begge drivhjulene. Tippesikringen kan felles inn ved å trykke foten på den røde delen som er synlig. Denne vil da felles inn under rullestolen, noe som gjør det lettere å forsere hindringer, som fortauskanter eller trapper. For å aktivere tippesikringen igjen, svinges den tilbake i utgangsposisjon ved bruk av foten.



! Tippesikringen skal låse ved et hørbart "klikk". Tippesikringen kan ikke aktiveres/deaktiveres av bruker selv.

ErgoSeat anbefaler at tippesikring alltid er aktivert ved all benyttelse av understellet.


# TRANSPORT

---

Softseat eller baseplate fra Ergoseat i kombinasjon med Azar understell er godkjent som sete i motorvogn i henhold til ISO 7176-19. Dette medfører at bruker kan sitte i rullestolen under transport, dersom lovpålagt ordinært sikkerhetsbelte benyttes i tillegg. Dette er godkjent dersom rullestolen er utstyrt med 4 røde transportfester.

Sørg for å sette bremsen i lås etter at rullestolen er plassert riktig i kjøretøyet, med bruker i kjøreretning. De 4 røde transportfestene er montert i hvert sitt hjørne av rullestolen. Tilse at du bruker fire individuelle godkjente stropper for rullestoltransport. Monter stroppene med kroker, én i hvert feste. Kroken i motsatt ende, må monteres i et godkjent festepunkt i bilens karosseri.

Typegodkjenning bortfaller ved montering av andre seteløsninger fra andre produsenter.

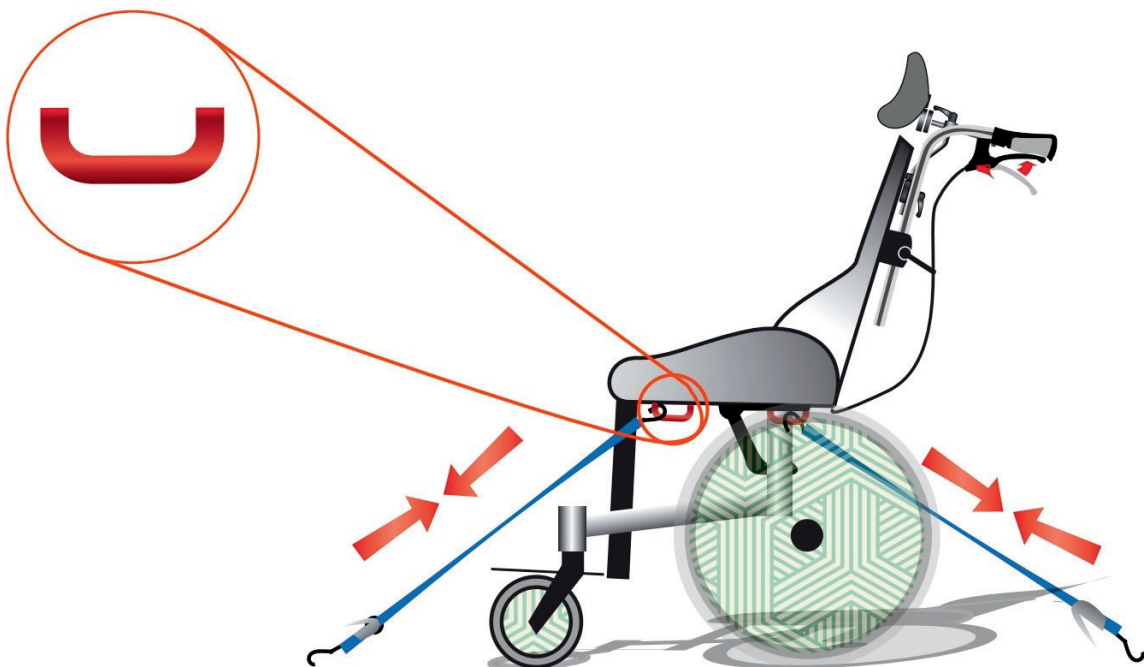

Sjekk alltid at din rullestol er godkjent for persontransport i bil.

# RENGJØRING

---

## Daglig renhold

Rengjøring av understellet må gjøres regelmessig med varmt vann og såpe. Tørk bort skitt og smuss med en klut eller svamp.

Pass på å ikke spyle vann direkte inn i viktige komponenter og deler som bremseser og hjullager.



Unngå å spyle vann direkte mot lagrene i hjul, da dette kan gjøre skade. pH-nøytralt vaskemiddel skal benyttes.

# VEDLIKEHOLD

---

## Regelmessig vedlikehold og tilsyn

Understellet må vedlikeholdes riktig for å sikre pålitelig og sikker drift.

Ikke bruk høytrykkspyler, da det kan skade understellet.

Sjekkpunkt	Beskrivelse	Intervall
Rengjøring	Desinfiser understellet med f.eks. kloramin. Tørk med fuktig klut.	Månedlig
Hjul	Sjekk at trinser snurrer fritt og at låsing fungerer på hvert hjul.	Månedlig
Tiltvugge	Test tilt og sjekk at vinkelen ikke endres etter justering.	Månedlig
Tiltvaier	Sjekk for rust, bøyd eller skadet vaier. Bytt ved tegn til slitasje.	Månedlig
Tiltendel	Kontroller at hendelen ikke er løs og at vaieren sitter riktig.	Månedlig
Skruer og grep	Sjekk at alle skruer og grep er stramme, spesielt etter ujevn kjøring.	Månedlig

# VEDLIKEHOLD

---

Produktet har lovfestede reklamasjonsrettigheter ihht. EU/EØS.

## **Feilsøking**

Dersom det skulle oppstå problemer med noen av komponentene, anbefaler vi å kontakte autorisert personell for veiledning og utbedring.

Før du kontakter autorisert personell er det noen punkter som kan undersøkes:

- Tilse at ingen skruer eller bolter er løse.
- Sjekk at alle wirene er stram og festet korrekt.
- Kontroller at setet er fastmontert på understellet, og sitter korrekt.
- Kontroller de aktuelle komponentene for slitasje.
- Se over alt tilbehør til både sete og understell for skader.

# Resirkulering og Gjenbruk

---

## Lang levetid og reparasjonsfokus

Som en del av vårt bærekraftarbeid tilstreber vi maksimal levetid for hvert produkt gjennom målrettet vedlikehold og reparasjon, der dette er teknisk og funksjonelt forsvarlig. Vi tilbyr et bredt utvalg av reservedeler og utskiftbare komponenter som kan tilpasses individuelt uten at det går på bekostning av brukerens funksjonelle behov eller komfort. På denne måten forlenges produktets totale livssyklus betydelig

## Gjenbruksordning

I tråd med vårt miljøansvar tilbyr vi en strukturert gjenbruksordning for alle våre produkter og tilhørende komponenter. Produkter som returneres til gjenbruksprogramet etter endt bruk, gjennomgår en kontrollert prosess der de demonteres, rengjøres og inspiseres. Komponenter som tilfredsstillers krav til funksjon og sikkerhet, kan reintegreres i produksjonsprosessen og benyttes i nye leveranser, i samsvar med gjeldende standarder og retningslinjer.


## Resirkulering av materialer

Produkter som ikke oppfyller kriteriene for gjenbruk, håndteres i samarbeid med vår lokale avfalls og gjenvinningsleverandør. Alle deler sorteres i henhold til materialtype og behandles videre i tråd med nasjonale forskrifter for miljømessig forsvarlig avfallshåndtering. Målet er å sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning.

Vi har bærekraftige løsninger i produksjonen, blant annet gjennom bruk av resirkulert aluminium og andre miljøvennlige materialer. Vårt mål er å være en aktiv deltaker i den sirkulære økonomien, derfor tilbyr vi både reparasjonsmuligheter, reservedeler og en returordning som ivaretar både gjenbruk og resirkulering.

Vi oppfordrer alle til å benytte returordningen ved endt bruk, slik at ressursene kan forvaltes i tråd med våre langsiktige bærekraftsmål.

# TEKNISK INFORMASJON

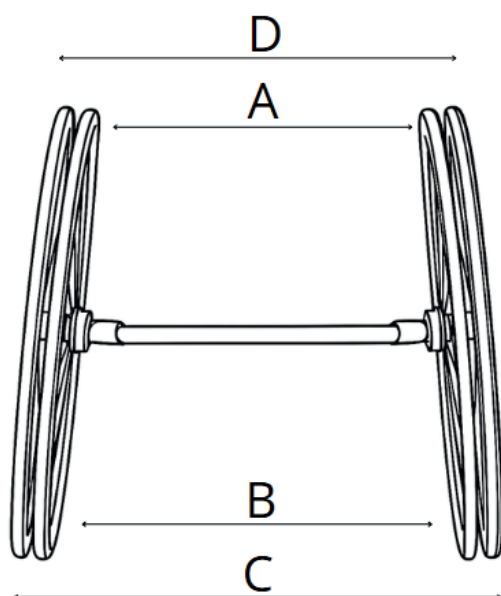

A = Innside oppe

B = Innside ned

C = Utside ned

D = Utside oppe

Beskrivelse	IA	XS (12" - 16")	XL (16" - 24")
Vekt understell (kg)	-	19,4 kg	22,4 kg
Maks brukervekt (kg)	120 kg	120 kg	120 kg
Maks brukerhøyde (cm)	150 cm	150 cm	190 cm
Tilt	34°		
Vinkel fotbrettinnfestning	45°		
Vinkel ankel	0-18°		
Legglengde fotstøtte (cm)	11-40 cm		
<b>Størrelser:</b>	<b>12" - 16" - 22"</b>	<b>16" - 20" - 22" - 24"</b>	
A	44-47 cm	66,5-68 cm	
B	46-47 cm	71-72 cm	
C	58-59 cm	83-84 cm	
D	54-56 cm	78,5-79 cm	



Levert i kombinasjon med Softseat og originalt tilbehør er Azar godkjent etter ISO7176-19 for brukertransport i bil med maks brukervekt 120 kg.

# UTLEVERING MED INSTRUKSJON I BRUK

---

**Dato:** .....


**Personell fra Ergoseat:** .....

**Vi bekrefter å ha gjennomgått instruksjoner i daglig bruk sammen med terapaut fra Ergoseat.**

**Vi er gjort oppmerksom på faremomenter, og hvor vi skal søke ytterligere opplysninger om produktet dersom det er behov for dette.**

**Til stede:**



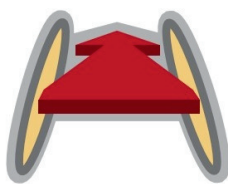

# ERGOSEAT

## Kontakt oss



WWW.ERGOSEAT.NO



POST@ERGOSEAT.NO



55101600



LØNNINGSFLATEN 28  
5258 BLOMSTERDALEN

# CE



ERGOSEAT