

Otiom-appen

Kvik - Guide

Viktig informasjon

Vi utvikler Otiom-appen kontinuerlig. Derfor kan enkelte aspekter ved Otiom-appen avvike fra det som presenteres i denne hurtigveiledningen.

Denne veiledningen ble sist oppdatert 07.09.23

Betydningen av symbolene



De tre nivåene i Otiom-enheten



Hjemme: Innenfor basestasjonens rekkevidde. Når en Otiom-bruker er hjemme, viser systemet følgende eller lignende.



Utgang: Personen er ute av huset. Når en Otiom-bruker er ute på tur, vises den gule fargen. Systemet viser vedkommendes siste kjente sikre posisjon, vanligvis hjemmet. Vi sporer ikke personen aktivt på dette tidspunktet.



Advarsel: Alarmmodus. I alarmmodus brukes den røde fargen til å indikere mulig fare. Når systemet er i alarmmodus, sporer og viser vi aktivt de fem siste kjente posisjonene til Otiom-brukeren.

Kortets funksjoner



Plassering: Kartfunksjonen viser hvor Otiom-enheten befinner seg. Fargene har samme betydning som de 3 nivåene beskrevet ovenfor.



Avstand tilbakelagt: Avstanden som Otiom-enheten har tilbakelagt. De siste 0-4 punktene på kartet vises og forbindes med streker.



Informasjonsfelt: Informasjon om symbolene på skjermen og om plasseringen.



Velg mellom satellitt- og enkel kartvisning



Vis smarttelefonens plassering (smarttelefonens plassering vises med et blått symbol).

Batteristatus



Fullstendig ladet



Lavt batterinivå



Høyt batterinivå



Batteriet er utladet




Middels batterinivå


Oversikt over Otiom-appen

Startskjerm

Når du er logget inn i Otiom-appen, er dette standardskjermbildet ditt som administrator og hjelper. Her ser du en liste over alle brukere og Otiom-komponenter som er koblet til kontoen.

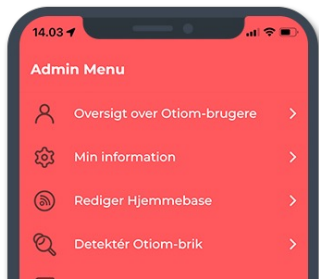

Her kan du se Otiom-menyen

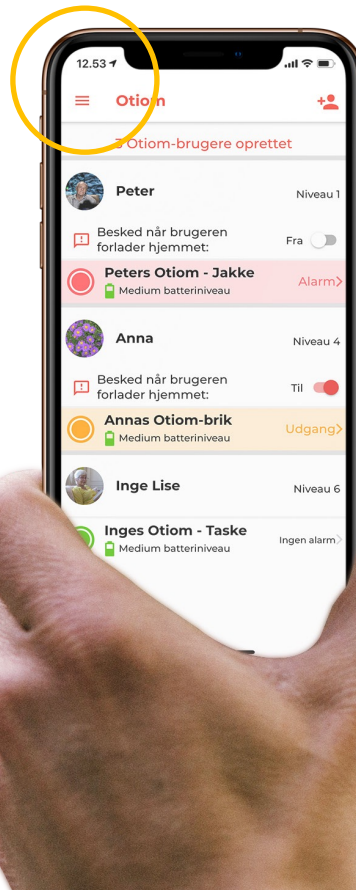

Dette er standardskjermen og den skjermen du trenger til daglig.

De tre tilstandene til Otiom-enheten



Grønn [Ingen alarm] Innenfor basestasjonens rekkevidde. Når en Otiom-bruker er hjemme, viser systemet følgende eller lignende.



Gul [Utgang] Personen er ute. Når en Otiom-bruker går en tur, vises den gule fargen. Systemet viser vedkommendes siste kjente sikre posisjon, vanligvis hjemmet. Vi sporer ikke personen aktivt på dette tidspunktet.




Rød [Alarm] Alarmmodus. I alarmmodus brukes den røde fargen til å indikere mulig fare. Når systemet er i alarmmodus, sporer og viser vi aktivt de fem siste kjente posisjonene til Otiom-brukeren.

Otiom-enhet i alarmmodus

Motta alarmvarsling

Otiom sender en melding via push-e-post til alle Hjelpere som er koblet til en Otiom-bruker når brukeren overskrider sikkerhetsgrensen.

I varselet blir hjelperne bedt om å åpne Otiom-appen og angi om de kan hjelpe.

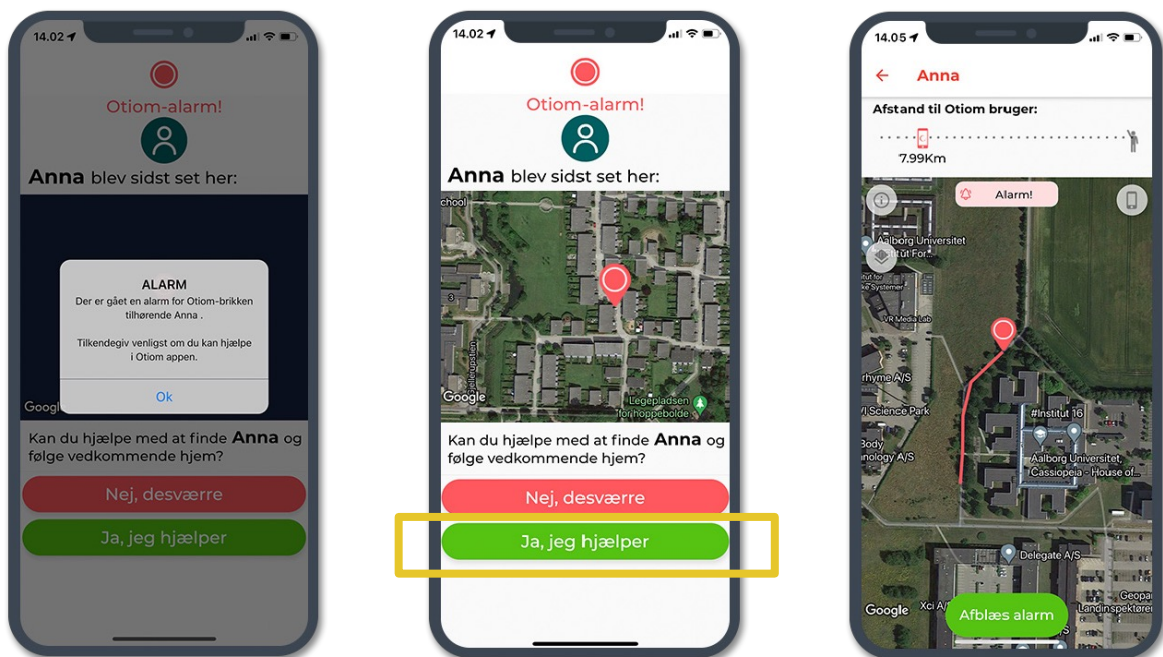

Den røde retningspilen viser hvilken retning personen er på vei.


Når en bruker er funnet og eskortert tilbake, kan du gå inn i Otiom-appen og deaktivere alarmen eller vente på at systemet automatisk avbryter alarmen.

VIKTIG: Hvis du trykker på knappen Stopp alarm, vil du ikke lenger motta oppdaterte posisjonsdata. Otiom sender bare posisjonsdata til appen når en alarm er aktiv.

For å sikre maksimal sikkerhet anbefaler vi at du lader Otiom-enheten helt opp etter hver alarm.

Kartets egenskaper

Nærhetssensor

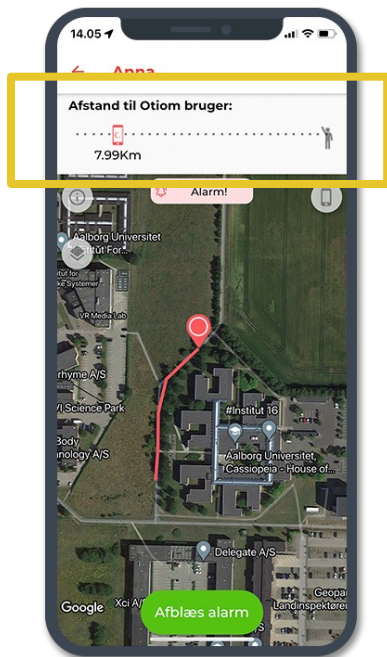


Grafikken øverst på skjermen viser om du nærmer deg eller fjerner deg fra brukeren.

Funksjonen "Avstand til Otiom-bruker" i Otiom-appen aktiveres når du er minst 10 km fra Otiom-brukeren. Den viser avstanden mellom deg (telefonen din) og Otiom-enheten.

Funksjonen er beregnet på situasjoner der det er mange mennesker i nærheten, eller der brukeren kan gjemme seg eller gå seg vill i en bygning.

Den bruker Bluetooth-tilkoblingen til smarttelefonen. Derfor må Bluetooth være aktivert for at funksjonen skal være tilgjengelig.

Innendørs beliggenhet

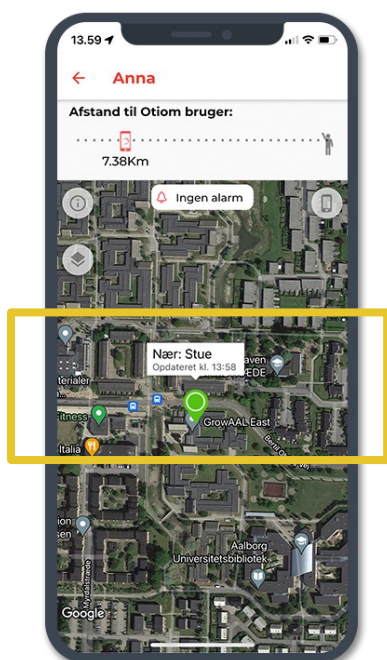

Hvis det ikke er mulig å finne brukeren i omsorgsboligen, viser informasjonsfeltet hvilket hjem det gjelder.

Base Otiom-taggen er nærmest. Klikk på ikonet for å åpne feltet på skjermen.

Gå inn på dette stedet og bruk funksjonen "Avstand til Otiom-bruker" for å finne personen i omsorgsboligen.

Dette er også nyttig hvis en Otiom-tag har gått tapt og fortsatt er aktiv.

Otiom-varsler



Typer varsling

Otiom-appen sender varsler i følgende tilfeller:

- Alarm (starter)
- Når Otiom-brukeren går fra hjemmet til sikkerhetssonen (valgfritt)
- Brukeren er hjemme (etter en alarm).
- Batteriet på Otiom-enheten er svakt (fortsatt ca. 30 %).
- Otiom-batteriet er tomt (0 %).



Eksempel på varsel når appen er lukket. Alarmen lyder bare når telefonens lyd er på.



Eksempel på et varsel når appen er åpen. Alle varsler vises i et popup-vindu når appen er åpen.

Laderen



Typer varsling

Otiom-enheten lades trådløst. Den trenger bare å plasseres på laderen som er koblet til strømnettet.

Plasser Otiom-enheten i midten av laderen. Den er i riktig posisjon når lyset på laderen lyser permanent blått (2).

Når batteriet er fulladet, skifter lyset til grønt.

OBS Hvis Otiom-enheten ligger opp ned på laderen, vil den ikke lyse.

Laderen kan se ut på to måter. Du kan se dem på bildene til høyre.



Grønt lys:

Otiom-enheten er fulladet.



Blått lys:

Otiom-enheten lades.