

Bruksanvisning

Sender og bærbar nærlydshøytaler

NÆRLYD1

VARENR.: 1845



Sender og bærbar nærlydshøytaler for bruk sammen med Sensio forsterkere, som VOX UNO, VOX DUO og VOX BASE eller lignende. Kan også brukes til TV lytting. Senderen tilkobles forsterker, TV o.l. med den medfølgende mini-jack kabelen, og sender lyden direkte til nærlydshøytaleren. Overføringssystemet er av "studiokvalitet" og benytter EU-godkjente radiofrekvenser.

Innholdsfortegnelse

1. I pakken	3
2. Koble til	3
Senderen	3
Nærlydshøytaleren.....	3
3. Kanalvalg	4
4. Tilkoblinger.....	5
Lydinngang	5
Lydutgang	5
5. Sendereffekt.....	5
6. Vedlikehold	6
7. Resirkulering	6
8. Samsvarserklæring	6
9. Tekniske spesifikasjoner	6
10. Leverandør	6
11. Feilsøking	7


1. I pakken

- Sender type VAS
- Strømadapter med USB kabel
- Mini-jack /4p mini XLR kabel
- Nærlydshøytaler VOX UNO1

2. Koble til

Senderen


Senderen benytter en batterieliminitor, som plugges inn i USB-C kontakten i bunnen av senderen.

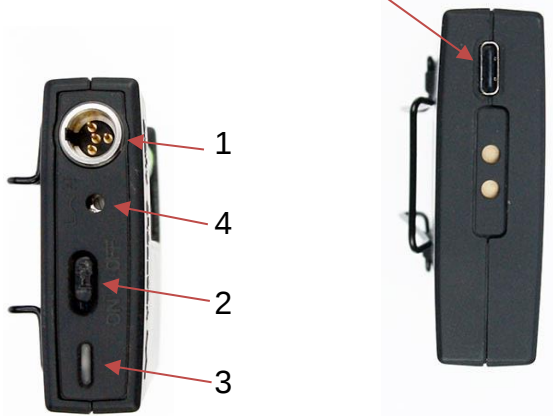


1. Sett tilkoblingskabelen inn i senderens mini-XLR kontakt på toppen og koble jack-pluggen til lydkilden.
2. Senderen slås på/av med-bryteren (2) på toppen.
3. Når den er i bruk lyser en grønn indikatorlampe (3) på toppen av senderen.
4. For å kompensere for høyt/lavt signalnivå i lydkilden, kan følsomheten justeres med en liten skrutrekker.

Senderen bør være avslått når den ikke er i bruk.


Nærlydshøytaleren

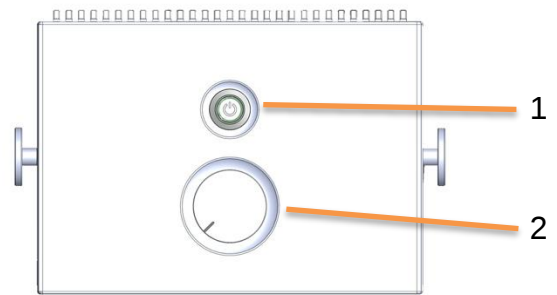

Topp

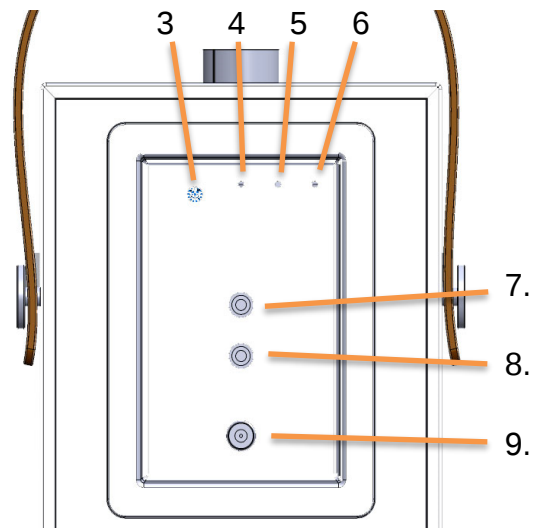

Bakside

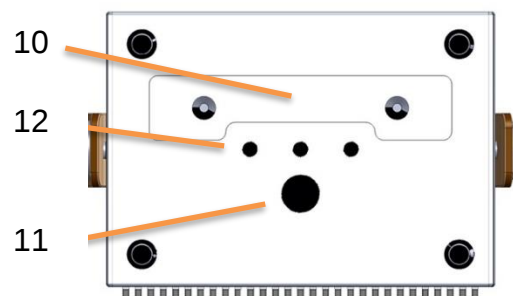

Underside

1. På/Av-knapp. Grønt lys: PÅ
2. Volumkontroll
3. Justering av signalnivå på linje ut (7) for tilpasning til eksternt utstyr.
4. Lading pågår – rødt lys
5. Batteri oppladet – grønt lys
6. Mikrofon på / signal mottatt – gult lys
7. Linje ut (stereo jack)
8. Linje inn (stereo jack)
9. Ladekontakt 15VDC (+ på senter)
Høytaleren kan brukes mens den lader.
10. Åpning til kanalvelger
11. Feste for stativ (1/4" UNC)
12. Ladekontakter for ladestasjon (tilbehør)

3. Kanalvalg

Kanalen man skal benytte må være forskjellig fra kanaler benyttet av trådløse mikrofoner i systemet/nærliggende system.



Du kan benytte VOX UNO for å lytte etter ledig kanal.

Skyv av lokket over batteri-rommet på senderen, og still inn valgt kanal og kanalbank.



Still inn samme kanal og kanalbank på nærlydshøytaleren slik:

På undersiden av VOX UNO1 er det et lokk over kanalvelgeren (10). Vipp av lokket slik at du får tilgang til kanal- og kanalbank-velgere.



VOX UNO1 har en mikrofonmottaker.

Bruk en liten flat skrutrekker.
Gyldige kanalvalg:

Kanalbank 1

Kanal 0-F

Kanalbank 2

Kanal 0-F

Kanalbank 3

Kanal 0-4

Bank 4-9 er ikke i bruk.

Dersom bankvelger stilles til 4-9, eller kanalvelger stilles til en kanal høyere enn 4 i bank 3, vil indikatorlampen gi en feilvarsling.

4. Tilkoblinger

Lydinngang

UNO har en kontakt (8) for tilkobling av eksterne lydkilder, som f.eks.

mobiltelefon, TV, PC o.l.

Du kan benytte 3-polet minijack-plugg.

Lydutgang

Lydutgangen (7) er justert til standard linjenivå fra fabrikk.

Hvis linjenivået er for kraftig for den enheten du kobler til, kan nivået justeres ved å vri på kontrollen (3). Bruk en liten skrutrekker.

5. Sendereffekt



Bryter for å endre sendereffekten.

(under kanalvelger)

N = Normal

L = Redusert effekt

Sendereffekten skal normalt ikke endres, da den normale effekten generelt gir riktig rekkevidde.

6. Vedlikehold

Høytaleren og senderen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk
Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

7. Resirkulering

Produkter og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.
Ved riktig håndtering vil store deler av produktene kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Høytaler front: Resirkulert aluminium
Høytaler kasse: Svanemerket MDF

8. Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfold.sensio.io/samsvar

9. Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Frekvensområde: 100 – 11000 Hz
Sendereffekt: 5 – 20 mW
Radio båndbredde: 823 – 832 MHz
Rekkevidde: Opp til 120 meter, fri sikt

Sender

Dynamikk, sender: >95dB
Strømfors. Sender: 5VDC

Nærlydshøytaler:

Dim (HxBxD): 188x132x96 mm
Vekt: 1,5 Kg
Brukstil: >10t
Frekvensområde: 125-16000 Hz
Uteffekt (max): 7W
Strømforsyning: 15VDC/230VAC

10. Leverandør

Sensio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no

11. Feilsøking

Problem	Feilretting
Ikke lys i av/på knapp på VOX UNO	Lad opp batteriet.
Ikke lys i lampen på senderen.	Er senderen slått på? Kontroller at strømmen er riktig tilkoblet.
Sender blinker rødt	Feil kanal/kanalbank-innstilling.
Ingen lyd i høyttaleren	Skru opp volumet for sterkere signal i høyttaleren. Er sender og mottaker innstilt på samme kanal? Se om det lyser gult i lampen på VOX UNO1 Er senderen riktig tilkoblet lydkilden og er det signal på lydutgangen.
Brumming/støy	Tilkoblingskabelen til senderen er ikke koblet skikkelig inn i lydkildens utgang.



Sensio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfold.sensio.io

tel. 33 47 33 47

