

sensio

# Portable løsninger

Vozono™ Uno

Vozono™ Duo

Bruksanvisning



# Innhold

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sikkerhet                 | 3  |
| Introduksjon              | 3  |
| Kom i gang                | 4  |
| Justering og tilkoblinger | 6  |
| Feilsøking                | 7  |
| Spesifikasjoner           | 8  |
| Vedlikehold               | 9  |
| Resirkulering             | 9  |
| Symboler                  | 10 |
| Godkjenninger             | 11 |
| Support                   | 11 |

# Sikkerhet

---

## Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys

## Introduksjon


---

### I esken


- Vozono Portabel
- Strømkabel
- Lydkabel med 3,5 mm jack
- Bruksanvisning

## Produktbeskrivelse


Dette er hovedenheten i Vozono portabelt lydutjevningsanlegg. Denne enheten sammen med Vozono mikrofoner og høyttalere bidrar til god og tydelig talelyd i rommet det benyttes. Vozono Portabel har tilkoblingsmuligheter for andre lydkilder, innebygget Auracastsender, samt utganger til utstyr for annen trådløs lydoverføring til høreapparater eller lignende.

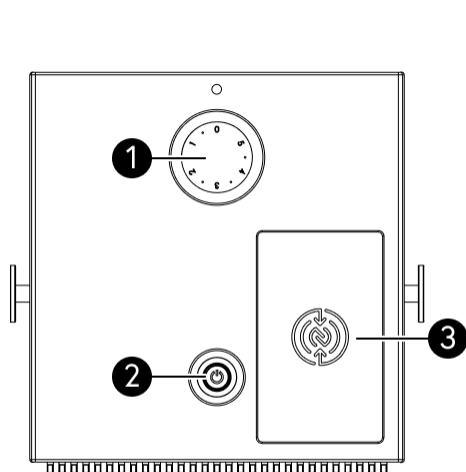

**Vozono Uno/Duo**

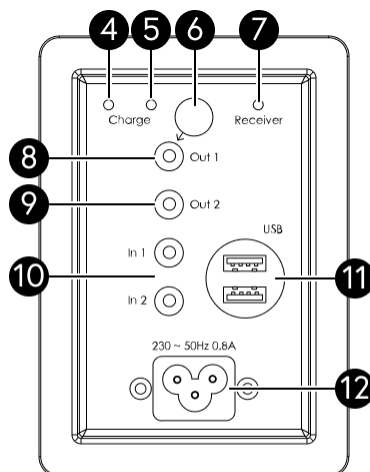

**Vozono Duo**

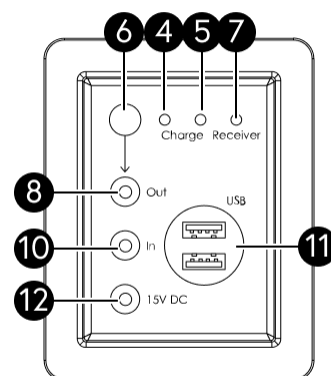

**Vozono Uno**

1. Volumkontroll
2. Av/på-knapp med lysindikasjon
3. NFC-felt
4. Rød lysindikator for lading pågår
5. Grønn lysindikator for lading ferdig
6. Nivåjustreing for «Out 1»
7. Lysindikator for aktive mikrofoner
8. Out 1
9. Out 2 (Kun Vozono Duo)
10. Linjeinngang (To innganger på Vozono Duo og en inngang på Vozono Uno)
11. USB x 2
12. Tilkobling for ladekabel

# Kom i gang

---

## Plassering

Høytaler plasseres foran i rommet, og minst i hodehøyde til lyttere.

# Sammenkobling

Alle mikrofoner må sammenkobles med Vozono portabel. Sammenkoble én mikrofon om gangen.

1. Sett inn ladekabel
2. Slå på Vozono Portabel med av/på-knapp ① og vent på fast grønt lys i knappen.
3. Sammenkoble én mikrofon om gangen:
  - a. For håndholdt mikrofon, trykk inn betjeningsknappknappen.
  - b. For beltesender, sett bryteren i posisjon I
4. Mikrofonens indikatorlampe vil blinke:
  - a. gult ved førstegangs sammenkobling eller
  - b. grønt hvis den allerede er sammenkoblet med et annet system.
5. Hold mikrofonen inntil Vozono portabel slik at NFC-feltene  peker mot hverandre. Sammenkoblingen bekreftes med 3 sekunders lys i mikrofonens indikatorlampe.
6. Gjenta punkt 2-4 til alle mikrofoner er sammenkoblet

Sammenkobling gjennomført.

## Testing

Test én og én mikrofon:

1. Slå på hodebøylemikrofon og kontroller at gul lampe tennes bak på Vozono portabel. Snakk i mikrofon og still inn volum til ønsket nivå
2. Slå på neste hodebøylemikrofon dersom dette finnes og sjekk at samme lampe Vozono portabel tennes. Snakk i mikrofon for å bekrefte lyd.
3. Slå på an av de håndholdte mikrofonene dersom dette finnes, og sjekk at samme lampe tennes. Snakk i mikrofonen for å bekrefte lyd

Gjenta til alle mikrofoner er testet. Anlegget er nå klart til bruk

# Justering og tilkoblinger

---

## Volumjustering

Mikrofon- og medialyd ①

## Utganger

- Out 1 ⑧: Linjeutgang med nivåjustering
- Out 2 ⑨: Linjeutgang med fast linjenivå (Kun Vozono Duo)

## Innganger

- In 1 ⑩: For tilkobling av ekstern lydkilde
- In 2 ⑩: For tilkobling av ekstern lydkilde

Alle linjeutganger og lydinnganger har kontakt for 3,5 mm jackplugg.

## USB

2 × USB-A ⑪ til strømforsyning for eksterne enheter eller lading av beltpack

## Auracast™

Vozono base har innebygd sender for Auracast. Lydstrømmens navn er angitt på etikett. For tilkobling til denne lydstrømmen se mottageren bruksanvisning for tilkobling. Passord er ikke påkrevd.

# Feilsøking

---

## Får ikke lyd fra noen av mikrofonene

- Sjekk at Vozono portabel er påslått, og at det lyser grønt i av/på-knapp ②
- Sjekk voluminnstilling på Vozono portabel ①

## Får ikke lyd fra en av mikrofonene

Dersom mikrofonen blinker gult, er den utenfor rekkevidde eller er ikke sammenkoblet. Se punkt om sammenkobling.

## Får ikke lyd fra tilkoblet lydkilde

- Sjekk at Vozono portabel er påslått, og at det lyser grønt i av/på-knapp ②
- Kontroller lydinnstilling på den tilkoblede lydkilden, PC mobil eller lignende
- Sjekk voluminnstilling på Vozono portabel ①

# Spesifikasjoner

---

## Tekniske data

- **Driftsspenning:** 120 – 240 VAC
- **Temperatur:** 0 °C – 40 °C
- **Impedans høyttalerutgang:** 2 ohm
- **Utgangseffekt:** 7 W (Vozono Uno) / 14 W (Vozono Duo)
- **Mottagerfrekvens:** 5170 – 5725 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW
- **Rekkevidde:** 15 meter i fri sikt
- **Driftstid:** 10 timer
- **Batteri:** LiPO 11,1 V

## Dimensjoner

### Vozono Duo

- **Høyde:** 290 mm
- **Bredde:** 130 mm
- **Dybde:** 140 mm
- **Vekt:** 3,7 kg

### Vozono Uno

- **Høyde:** 188 mm
- **Bredde:** 132 mm
- **Dybde:** 96 mm
- **Vekt:** 1,8 kg

# Vedlikehold

---

## Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

## Resirkulering

---

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

# Symboler

---

## Symbol      Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer




Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato

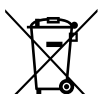

Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.



Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

# Godkjenninger

---

## MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

## Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

# Support

---

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

## Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- **E-post:** [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)
- **Nettside:** [vestfold.sensio.io](https://vestfold.sensio.io)
- **Telefon:** +47 33 47 33 47