

sensio

LEIF Timer

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606324

Dokument: 9170-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	5
Bruk	7
Feilsøking	8
Spesifikasjoner	9
Vedlikehold	10
Resirkulering	10
Symboler	11
Godkjenninger	12
Support	12

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må kun skrus fra hverandre for bytte av batteri
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys

Introduksjon

I esken

- LEIF Timer med innebygget batteri
- 2 doble borrelåser
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

LEIF Timer er et digitalt tidsur som varsler i FlexiBlink-systemet når den innstilte tiden er utløpt.



1. Display
2. Innstilling av minutter
3. Innstilling av sekunder
4. Start/Stop
5. Funksjonsvelger
6. Pairing-knapp
7. Lysindikator for sammenkobling

Kom i gang

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På LEIF: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Funksjonsvelger

Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel LEIF skal sende:

- **0:** Timer alarm
- **1:** Timer alarm nr. 2
- **2:** Timer daglig
- **3:** Generell daglig
- **4:** Generell alarm
- **5:** Ta medisinen din
- **6:** Kaffen er klar

Montering

LEIF monteres normalt på veggen eller der brukeren trenger den

1. LEIF monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen
2. Vask stedet den skal monteres med den medfølgende spritservietten
3. Vent i 30 sekunder
4. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder

Borrelåsen har veldig kraftig tape. Når borrelåsen fjernes, kan det forårsake at tapeten følger med.

Testing

Test LEIF ved å starte tidsuret på 2 sekunder og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne.

Bruk

Nullstilling

Trykk samtidig på **MIN** og **SEC**

Valg av tid

MIN øker antall minutter. **SEC** øker antall sekunder.

Start / stopp

For å starte og stoppe tidsuret, trykkes start/stopp-knappen.

Statusindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren på forsiden:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
- **Blinkende rødt etter trykk:** Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Bytt batteri. LEIF benytter et spesialbatteri som kan kjøpes hos produsenten. For å bytte batteriet, må de fire små skruene på baksiden av LEIF skrues ut og baklokket fjernes. Bytt batteri og skru baklokket på plass igjen.
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å trykke på LEIF og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys
2. [Sammenkoble på nytt](#)

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og sammenkoble på nytt

Feil varsling i mottakeren

Vri på [funksjonsvelgeren](#) til rett posisjon

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Innebygd litium, 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP54
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 145 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Dybde:** 31 mm
- **Vekt:** 205 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

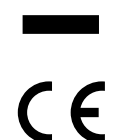

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47