

BodyWand BW110



BRUKERVEILEDNING

BodyWand BW110

Vibrator for kvinner og menn

Oktober 2024

Brukerveiledning

Forsiktighetsregler:

Det er alltid viktig å følge grunnleggende forsiktighetsregler når du bruker et elektrisk apparat, inkludert følgende:

Les alle instruksjonene før bruk av apparatet.

- 1) Ikke ta i et apparat som har falt i vann. Koble apparatet fra strømkilde umiddelbart.
- 2) Ikke bruk apparatet i dusjen eller i badekaret.
- 3) Ikke oppbevar apparatet der det kan falle eller bli trukket ned i en vask eller et kar.
- 4) Ikke plasser eller mist apparatet i vann eller annen væske.
- 5) Alltid koble apparatet fra strømkilde umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
- 6) Et apparat skal aldri være uten tilsyn når det er koblet til strømkilde. Koble fra apparatet når det ikke er i bruk og før du setter på eller tar av deler.
- 7) Unngå bruk av apparatet under en pute eller dyne på grunn av fare for overoppheting og brann, eller personskaade.
- 8) Tilsyn kan være nødvendig når apparatet brukes på eller i nærheten av personer med funksjonsnedsettelse.

BodyWand – Vibrator for kvinner og menn

- 9) Apparatet skal kun benyttes til sitt tiltenkte bruk som beskrevet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk deler som ikke er anbefalt av produsent.
- 10) Ikke bruk apparatet dersom ledning eller støpselet er ødelagt, hvis det ikke virker ordentlig eller har falt ned i vann eller blitt skadet..
- 11) Ikke bruk ledningen som et bærehåndtak for apparatet.
- 12) Hold ledningen unna varme overflater.
- 13) Ikke bruk apparatet med blokkerte luftåpninger. Hold luftåpningene fri for hår, krem og lignende. Ikke bruk mot et mykt underlag som sofa eller seng der luftåpningene kan blokkeres.
- 14) Ikke bruk apparatet utendørs.
- 15) Ikke benytt apparatet i omgivelser der oksygen eller aerosol (spray) er i bruk.
- 16) Når du skal koble fra, skru alle knapper i AV posisjon før du fjerner støpselet fra stikkkontakten.
- 17) Ikke bruk massasjeapparatet i nærkontakt med løse klær eller smykker. Hold langt hår borte fra apparatet mens det er i bruk.

Bruerveiledning

Slik bruker du BodyWand:




Sett støpsel inn i stikkontakt. (bilde)

1) Slå på apparatet ved å dreie hjulet i midten av Bodywand nedover.

2) Fortsett å dreie skiven nedover for å øke vibrasjonen.

3) For å minske vibrasjonen eller skru av apparatet dreies hjulet oppover. (bilde)

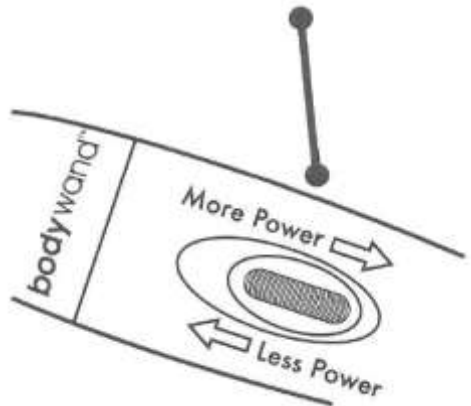

BodyWand – Vibrator for kvinner og menn

ADVARSEL: Skal kun benyttes av voksne til utvortes bruk. Fjern sjal og smykker før bruk.

VIKTIG: Gravide eller personer med pacemaker, diabetes, trombose, øket risiko for å utvikle blodpropp eller som har implantater i kroppen bør konsultere en lege før massasjeapparatet tas i bruk hjemme.

Spesifikasjoner:

Lengde:	25,4 cm
Diameter (hode):	5,1 cm
Batteritype:	ledning
Lengde, ledning:	210 cm
Vekt:	300 gram
Frekvens:	60-120 Hz
Vibrasjon:	maks 8000 rpm

Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør apparatet med en fuktig klut eller bruk nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk av med en tørr klut. IKKE bruk alkoholholdig og annet kjemisk rengjøringsmiddel eller legg apparatet i vann!
- Service på apparatet bør utføres av autorisert reparatør.
- Rull sammen ledningen dersom apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Ikke rull ledningen rundt apparatet når det oppbevares.
- Ikke utsett apparatet for varmekilder som ovner og peiser eller direkte sollys. Hold apparatet unna støvete og fuktige omgivelser. Slå av og koble fra ledningen før rengjøring.



BodyWand – Vibrator for kvinner og menn

Kundeservice

Vi er glade for alle henvendelser vedrørende Bodywand, og vil gjerne hjelpe deg på beste måte.

Ta derfor gjerne direkte kontakt med oss i Quintet AS.

Postadresse Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen

Besøksadresse Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes

Telefon 55 98 15 55

E-post post@quintet.no

Hjemmeside www.quintet.no

Ved behov for forbruksmateriell, problemer med produktet eller råd, send en e-post til post@quintet.no.

www.quintet.no. Besøk vår hjemmeside www.quintet.no eller ring oss på 55 98 15 55.

Brukerveiledning

Vi i Quintet AS har spesialisert oss på behandlingshjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse. Vi vet at det finnes gode løsninger for disse plagene. Innen inkontinensbehandling tilbyr vi en serie elektrostimulatorer og EMG-biofeedbackapparater som kan rekvireres kostnadsfritt via din lege. Vi har også enkle og svært effektive hjelpemidler for bekkenbunnstreningen. Innen smertelindring og muskelrehabilitering har vi et utvalg av både TENS og TEMS apparater. Innen seksuell helse tilbyr vi en serie produkter for både kvinner og menn med nedsatt seksuell funksjon.

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse - quintet.no - 55 98 15 55 -

QUINTET