

Cognicare

CalExotics Petite trusevibrator - brukermanual

Om produktet:

CalExotics Petite trusevibrator er en diskret og kroppsvennlig vibrator utviklet for ekstern stimulering av intimsonen. Produktet er særlig egnet for personer med nedsatt seksuell funksjonsevne der direkte klitoris- og vulvastimulering kan være vanskelig å oppnå på egenhånd.

Stimulatoren festes sikkert i undertøyet ved hjelp av magnetiske vinger, og sikrer presis og stabil plassering mot intimsone's nerverike områder uten behov for manuell holding. Dette gjør produktet spesielt egnet for personer med begrenset hånd- eller armfunksjon.

Produktet tilbyr 12 ulike stimuleringsprogrammer med varierende intensitet, frekvens og vibrasjonsmønster, noe som gir mulighet for individuell tilpasning etter brukerens behov og toleranse. Den medfølgende fjernkontrollen med 10 meters rekkevidde gjør det mulig for bruker eller omsorgsperson å justere innstillingene uten direkte kontakt med stimulatoren.

Stimulatoren er produsert i medisinsk silikon, fri for ftalater og allergifremkallende stoffer. IPX7-sertifiseringen sikrer at produktet tåler full nedsenking i vann, noe som forenkler grundig rengjøring og ivaretar god hygiene. En innebygd låsefunksjon forhindrer utilsiktet aktivering, og minnefunksjonen gjenoppretter sist benyttede innstilling ved oppstart.

Både stimulator og fjernkontroll lades via USB, og én times lading gir opptil 70 minutters bruk.

Lading:

Sett ladekabelen inn i ladeuttaket på vibratoren og i tilsvarende uttak på fjernkontrollen. Kabelen er en standard USB-kabel og kan kobles til PC eller USB-adapter i stikkontakten. Pass på at vibratoren er helt tørr før lading, og at kabelen er satt helt inn. En times lading gir opptil 50 minutters bruk på høy intensitet og 70 minutters bruk på lavere intensitet.

På/Av:

Hold inne knappen på vibratoren i 3 sekunder for å slå den på. Et lys indikerer at den er aktiv. Bruk deretter fjernkontrollens knapp for å starte vibrasjon. Slå av ved å holde inne samme knapp i 3 sekunder – enten på vibratoren eller fjernkontrollen. Denne funksjonen fungerer også som reiselås mot utilsiktet aktivering.

Bruk:

Påfør litt vannbasert glidekrem på stimulatoren for økt komfort. Plasser stimulatoren i undertøyet over klitorisområdet, og fest de magnetiske vingene over trusekanten så den sitter stabilt på plass. Bruk fjernkontrollen til å justere intensitet og vibrasjonsmønster. Produktet har 12 ulike innstillinger som endres ved korte trykk på knappen.

Rengjøring:

Stimulatoren er vanntett (IPX7) og kan skylles under rennende vann eller nedsenkes helt. Bruk mild såpe og skyll grundig. La den lufttørke før lagring eller lading.

