

sensio

SONIC Travel Clock

Monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Bruk	6
Spesifikasjoner	7
Vedlikehold	7
Resirkulering	8
Symboler	8
Godkjenninger	9
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Unngå å eksponere enheten for direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.


Introduksjon

I esken

- SONIC Travel Clock
- 1 stk AAA Batteri
- 2 stk AA Batterier
- Reiseveske
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

SONIC Travel Clock er en vekkerklokke som varsler med lyd og eller vibrasjon. Varsling blir utløst ved satt alarmtidspunkt og har repeteringsfunksjon (SNOOZE) og led lys som kan lyse opp displayet for å kunne se tiden i mørke omgivelser.

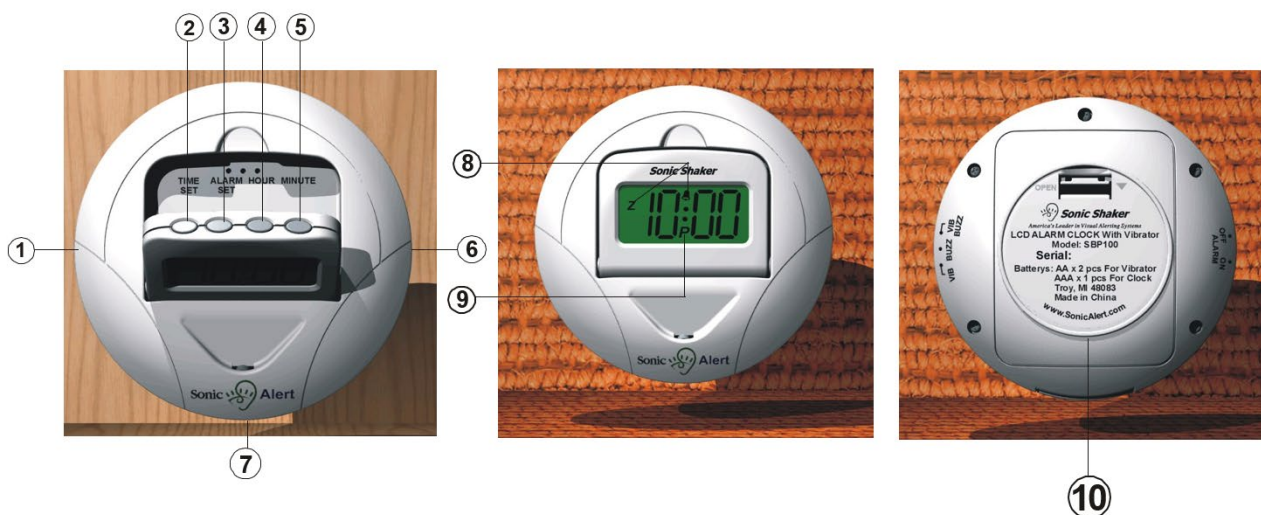

1. Alarm av og på bryter.
2. TIME SET – Trykk her for å stille tiden
3. ALARM SET – Trykk her for å stille alarmtidspunkt
4. HOUR – Trykk her for å stille timer
5. MINUTE – Trykk her for å stille minutter
6. Bryter for å velge mellom de tre varslingstypene vibrasjon, lyd eller vibrasjon og lyd
7. Repeteringsknapp (SNOOZE/LIGHT) for vekking og aktivering av lys. Lyset er tent når knappen holdes inne
8. Alarmindikator
9. PM visning ved 12 timersklokke
10. Batteriluke
11. Stille 12/24 timers klokke



Hovedfunksjoner

SONIC Travel Clock er et digitalt reisevekkeur

- Vibrasjonsvarsling
- Varslingslyd
- Display med tall og belysning
- Repeteringsfunksjon
- 12 eller 24 timers klokke

Kom i gang

Plassering

SONIC Travel Clock plasseres i sengen et sted du kan føle vibrasjonen og festes i laken med klypen, eller på et bord eller annen flat overflate. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø. Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Montering og oppsett

Åpne batteriluken (illustrasjon nr 10) sett inn 1 stk AAA batteri for klokken og sett inn 2 stk AA batterier for vibrasjonsmodul. Vær nøye med å se at pluss og minus på batteriene står rett vei i batteriholderen. Batteriholderen indikerer hvilke retning pluss og minus skal være.

Når du tar med deg klokken på reise, anbefales det å ta ut AA batteriene for å forhindre at batteriet tømmes for strøm, hvis repeterings/lys(SNOOZE/LIGHT) knappen uheldigvis skulle ligge i mot noe.

Testing

Testknappen kan brukes til å demonstrere lyd og vibrasjon uten å måtte aktivere varsling. For å bruke testknappen sett først type varsel med bryteren «Stille type varsel» (8) og trykk testknappen inn for å demonstrere lyd, vibrasjon, eller både lyd og vibrasjon.

Bruk

Stille klokken

1. TIME SET – Trykk og hold inne for å stille tiden med HOUR og MINUTE knappene
2. HOUR – Trykk her for å stille timene, du må holde inne TIME SET knappen
3. MINUTE – Trykk her for å stille minutter, du må holde inne TIME SET knappen

Stille vekketidspunkt

1. ALARM SET – Trykk og hold inne for å stille alarmtidspunkt med HOUR og MINUTE knappene
2. HOUR – Trykk her for å stille timene, du må holde inne ALARM SET knappen
3. MINUTE – Trykk her for å stille minutter, du må holde inne ALARM SET knappen

Betjene alarmen

1. Aktiver alarmen ved å skyve bryter nummer 1 til ON. Et bjellesymbol vil synes i displayet og indikere at alarmen er aktivert.
2. Ved å benytte knappen på motsatt side (6) kan du velge om alarmen skal vekke deg med; kun vibrasjon, kun lyd eller vibrasjon og lyd
3. Du kan avbryte et varsel ved å trykke på knappen «Stille tid for varsling» (2). Varsel vil da bli sendt ut neste dag på samme tid
4. Du kan avbryte et varsel midlertidig ved å trykke på knappen «Slumre og lys» (7). Varselet vil da starte igjen etter cirka 4 minutter. Du kan gjenta dette så mange ganger som du ønsker.
5. For å stanse varsling permanent settes bryteren «Alarm on/off» (6) til «off»

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Temperatur bruksområde: -10 °C – 40 °C
- Batteri: 1 alkalisk AAA og 2 alkaliske AA

Dimensjoner

- Høyde: 133 mm
- Bredde: 69 mm
- Dybde: 27 mm
- Vekt: 140 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen.

[Se oppdateringer på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/update)

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato

Symbol Beskrivelse



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.



Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

Godkjenninger

MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettside](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47