



medemagruppen



Medemagruppen
Fitform 576 Nordica4 / Nordica4 SMART
- stoler med oppreisingsfunksjon

Fitform 576 Nordic4

- Komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse

Fitform Nordic4 har en løftemekanisme som skiller seg fra andre stoler og gjør det enklere å komme seg opp i stående stilling, fordi benstøtten gir rom til å sette bena bedre «under seg». Det H formede understellet gir også en ekstra stabilitet når man skal ut og inn av stolen og gir en viktig trykghetsfølelse.

Stolen har elektrisk regulering av ryggvinkel, setevinkel og benstøtte i tillegg til oppreisingshjelpen. Man kan der-for enkelt finne en god og trygg sitte- eller liggestilling for en liten hvil. Sete- og ryggputer oppleves som komfortable samtidig som de gir god trykkavlastning og stabilitet. For at stolen skal kunne tilpasses den enkelte best mulig, finnes det et stort utvalg av både sete- og ryggputer som enkelt lar seg bytte. Alle stoler har justerbar setehøyde, setedybde og lengde og vinkel på benstøtte. Vinkling av toppdel på rygg og høyderegulering av armene. Man kan også regulere stolen til ulike løftevinkler inkl. rettløft.

Svingfunksjon med lettbetjent hendel som kan justeres i ønsket vinkel. Kan monteres på begge sider. På en standard stol er det mulighet for ekstra lang benlengde, samt ulike rygghøyder. Se utvalget av tilbehør lenger bak i brosjyren.

Fitform 576 Nordic4 har også en tiltfunksjon på hele 35 grader som gjør det mulig å få bruker i sjokkleie om det er behov.

Unngå fallulykker og kom trygt inn og ut av godstolen.



Fitform 576 Nordic4 SMART

- Ny og enklere versjon

Ny og enklere versjon av Fitform 576 Nordic 4 – Perfekt for eldre brukere

Fitform 576 Nordic 4 kommer nå i en ny, forbedret versjon hvor stolens funksjoner – som heving, tilting og benløft – aktiveres **synkront**. Dette betyr at stolen justeres i én og samme bevegelse, noe som gir en **enklere og mer intuitiv brukeropplevelse**.

For mange eldre kan det være krevende å håndtere flere knapper og funksjoner separat. Med den nye synkrone løsningen blir det enklere å finne en behagelig sittestilling – **med bare ett trykk**. Stolen følger kroppens bevegelser på en naturlig og skånsom måte, som gir både **økt komfort og trygghet** i hverdagen. Denne oppgraderingen gjør Fitform 576 Nordic 4 til et enda bedre valg for personer med redusert styrke eller kognitiv funksjon – eller for alle som ønsker en **brukervennlig og ergonomisk riktig hvilestol**.

Nordic4 SMART kan programmeres til fire ulike løfte-/hvile sekvenser.

Mykere skum i standard setepute og endrede armlene for bedre grep ved oppreisning er andre nyheter på alle modellene.



Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

Sittestilling

Det å sitte rett stiller høye krav til innstilling og posisjonering. Ettersom stolen tilpasses til brukerens kroppsbygning får bekkenet riktig stilling, ryggen får god støtte, samtidig som bena avlastes. Slik at man oppnår en trygg og komfortabel sittestilling.



Oppreisingsstilling

Unik oppreisingsfunksjon som skiller seg fra andre stoler i markedet. Under løfteprosessen dreier setet litt bakover slik at man får satt bena godt under seg når man skal reise seg opp. Dette gjør det enklere å komme opp i stående på en sikker måte og forebygger fare for uhell. Stolen er også meget stabil og oppleves som trygg.



Avslapningsstilling

Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapningsstilling.

Ryggraden avlastes og musklene, senene og leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over en større flate og dette reduserer faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å benytte tiltfunksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig. Samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket sittebalanse og sittestilling.



Hvilestilling

Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belastningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir fordelt, og man oppnår en behagelig og avslappet posisjon. Bena kan posisjoneres høyere enn hjertet og vil derfor kunne gi en ekstra avlastning. (såkalt sjokkleieposisjon).



Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

-ulike størrelser og modeller

En forutsetning for at en stol med oppreisingsfunksjon skal fungere optimalt, er at den må passe godt til brukeren.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand mellom armene. Dette er viktig for at bruker best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved oppreising, og samtidig kunne sitte stabilt og komfortabelt.

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder (45, 51, 57, 63, 69 og 75cm) for å sikre at alle får en stol som passer optimalt, uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasningsmuligheter slik at man kan justere inn ønsket setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel.

Vi anbefaler primært å benytte tiltfunksjonen ved regulering av sittestillingen, dette er oftest mest behagelig for brukeren og det som best opprettholder ønsket sittebalanse og sittestilling.

Bruk av tilt er også beste måte å sørge for trykkavlastning og dermed beskyttelse mot trykksår.

Tiltfunksjonen gir også mulighet for å komme i såkalt sjokkleie, hvor bena kommer høyere enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og rygg er videre uavhengige slik at man kan fininnstille ønsket sittestilling.

Det er lagt stor vekt på at all bruk skal være både enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer.

Alle modellene kan leveres med eller uten sving, med eller uten tilt og med trekk i stoff eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser (sb 69, og 75cm) samt spesialløsninger kan leveres på bestilling.




FIT-MOTION

- Innovativt dynamisk sitte- og antidecubitussystem

Hvorfor FIT-MOTION


bevegelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har vist seg å ha positiv effekt på blodomløp og surstoffopptak i huden. Slow-motion funksjonen bidrar også til å forhindre hevelser i benene. Bevegelserne bidrar også til trykk- forandring som kan ha positiv effekt ved forebygging og leging av trykksår. Gyngebevegelserne med FIT-MOTION (og andre tilsvarende stoler med gyngebevegelse) har også vist seg å ha beroligende effekt på bl.a demente og personer med smerte. FIT-MOTION's positive effekter er vitenskapelig underbygget. (bl.a. Roessingh Research & Development, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. L.L.J.M. van Deursen)

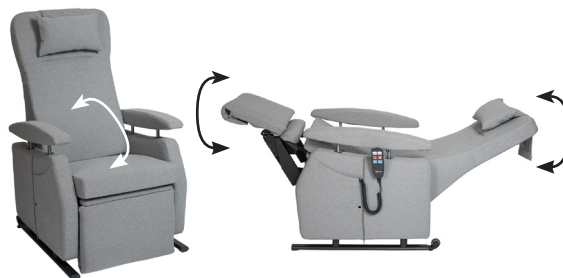

Fit-Motions teknikk

Stoler med FIT-MOTION er utstyrt med spesiell elektronikk og betjeningsboks som avviker fra stolens standard -utrustning. Elektronikken er programmert slik at den gjenkjenner i hvilken posisjon brukeren befinner seg, og starter stolens bevegelser basert på dette. Man kan alltid selv sette i gang / deaktivere bevegelsene med betjeningsboksen.

Vi gjør oppmerksom på at Fit-Motion ikke kan kombineres med batteridrift, trådløs betjening, elektrisk regulering av korsrygg- støtte og toppdel på rygg, setebredde over 63cm og setedybde over 55cm, samt coxittsete

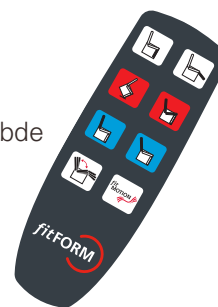

FIT-MOTION er et innovativt bevegelsessystem som nå kan leveres til Fitform løfte- og hvilestoler. Systemet blir aktivisert automatisk når man setter seg i stolen, men kan om man ønsker det deaktiveres ved hjelp av stolens betjeningsboks.

FIT-MOTION består av to bevegelsesmoduler:

TRYKKAVLASTING:

Denne bevegelsesmodulen blir automatisk satt i gang når man sitter med benene på gulvet (benstøtten kjørt ned). Hvert minutt tiltes stolen 2x2grader bakover, og deretter 2x2grader tilbake igjen til utgangsposisjonen. Dette gjentar seg kontinuerlig.



SLOW MOTION GYNGEFUNKSJON:


Denne bevegelsesmodulen blir automatisk aktivisert når benstøtten er kjørt opp. Stolen varsler da hvert 15 minutt med et vibrasjonssignal at bevegelse settes i gang. Man kan da velge å bruke stolens oppreisingfunksjon og reise seg selv. Skjer ikke dette setter stolens tiltfunksjon i gang en langsom gyngebevegelse, med 30% av vanlig hastighet på motorene. Stolens ryggvinkel forblir uendret. Slow-motion bevegelsen kan man selv sette i gang eller deaktivere med betjeningsboksen.



Se video av FIT-MOTION på vår hjemmeside medema.no eller scan qr-kode.

ILPM

- Ved behov for ekstra støtte

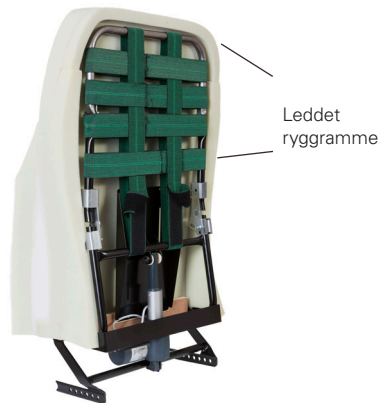

Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittestilling til de aller fleste personer med balanse- problemer og behov for posisjonering i stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggen har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar rem regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter.

Med hver rygg følger det i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, varme, minnefunksjon (x2) og elektrisk regulert korsryggstøtte. Dette gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittestilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte. Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

ILPM Extra

– med ekstra stabile sidestøtter

- når behov for fastere tilpasning



Avansert tilpasningsrygg fra Fitform, med egenskapene til ILPM ryggen men i tillegg ekstra avstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan høydereguleres ved hjelp av ratt bak på ryggen. Man kan også velge tykkelse på sidestøttepolster.

Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

- Alternative seteløsninger



Benstøtteforlenger +8cm for lange personer (legglengde opptil 63 cm)

Gir mulighet for god støtte under hele legg/fot/hæl også for lange personer.

Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i gulvet.

Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde



Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende trekk til sete og benstøtte

Benstøtten kan bestilles med ekstra polstring, dersom ekstra trykk av lastning ønskes. Kan kombineres med sammenhengende heldekkende trekk sete og benstøtte.

Alternativ styring


Fitform Nordic 4 kan leveres med flere typer styringer for å møte alle brukeres behov. Ved bruk av RF (radiofrekvens) signaler kan vi i prinsippet styre stolen med de kontroller vi ønsker. Alle stolens funksjoner kan styres i tillegg til spesialløsningene våre som Elektrisk sving og elektriske oppfellbare armlener.

Har du for eksempel en progredierende sykdom som gjør at man etter hvert mister håndfunksjon, kan man i en Fitform Nordic 4 stol gå fra å bruke stolens standard håndkontroll til en lettbetjent trådløs håndkontroll, som man senere kan styre ved bruk av kun en ekstern knapp som plasseres der bruker greier å betjene en knapp. Denne håndkontrollen kan enkelt programmeres til å styre andre ting som døråpner TV osv.



Styring ved bruk av Telefon eller nettbrett.

Fitform Nordic 4 kan styres med Mobiltelefon eller nettbrett. Klarer bruker å styre telefon eller nettbrett kan bruker også styre en Fitform nordic 4. Ved bruk av Iphone/Ipad kan man også bruke den innebygde talekontrollen til å styre stolen ved bruk av stemmestyring.

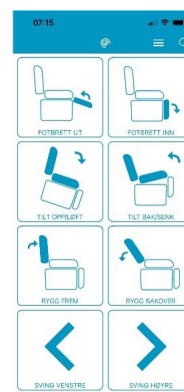

Øyestyring, en teknologi som gjør det mulig å betjene kommunikasjonsenheter, internett, underholdning og stolens funksjoner også for personer med store fysiske funksjonsnedsettelser. Monteres enkelt med en tilbehørsbrakett.

Trådløs (RF) styring av stolens funksjoner med brytere som krever lite kraft.



Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

- Alternative seteputer

Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.


Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. Anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget flerkammeret luftpute i ramme av skum, som sørger for at puten fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk som har med mye stretch og pustende egenskaper.



Setepute Intelligel

Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker). Leveres også i lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

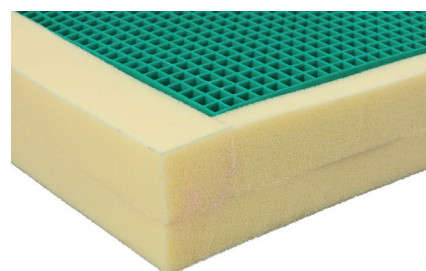

Setepute myk Latex

Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen. Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk som har mye stretch.



Myk Latex

Setepute trykkavlastende skumbasert med minneskum, ekstra myk

Avanserte lagdelte skumbaserte puter som har et topplag med minneskum. Putene leveres i 3 ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt, hvit / gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og gul/grønn for over 90kg til sb57 og større.

Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel (hvit/gul er mykest).

Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) trekk med mye stretch og gode pustende egenskaper



Ekstra myk < 70kg



Ekstra myk 70-90kg



Ekstra myk < 90kg

Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

- Diverse sitteløsninger

Sving, manuell eller elektrisk betjent

Fitform leveres som standard med manuell låsing på svingfunksjonen. Det er også mulighet for å montere en automatisk mekanisk funksjon på utløseren. Her kan man dreie stolen når den er i nedre posisjon, og svingen låser seg automatisk når stolen begynner på oppreisningen. Vi kan også tilby elektrisk sving via egen håndkontroll, eller ved bruk av for eksempel Tobii øyestyling.

Kan ettermonteres på alle stoler.



Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent

En meget god løsning for sideveis forflytning inn og ut av stolen, for eksempel til/fra rullestol. Her er det lett å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen. Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll.

Kan leveres på en eller begge sider av stolen.




Alternative armlenløsninger

Armlene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning kan armlenene breddes 2 cm innover eller utover.



Hjulsett Vario

En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver håndtaket bak på ryggen ned. Stolen står støtt når ikke håndtaket skyves ned. Velegnet til forflytning med bruker sittende i stolen. Kan ikke kombineres med svingkive.

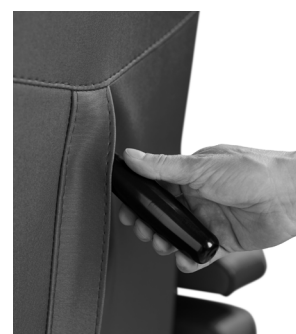

Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

- Diverse tilbehør



Nakkepute nr 3
Stor m/fiberfyll, formbar. Kan leveres med bånd rundt seterygg.



Nakkepute nr 5
Dråpeform m/fiberfyll, formbar. Kan leveres med bånd rundt seterygg.



Nakkepute nr 13
Hodestøtte med sidestøtte formbar i skum



Bord fellbart og svingbart.
Regulerbart i høyde, dybde og vinkel.



Bord transparent svingbart



Inkontinestreck



Batteri Back Up
(stol fungerer ved strømbrydd)



Inkontinestreck, sete og benstøtte



RF-styring
Betjeningsboks til RF styring Fitform trådløs lettbetjent.
Stolen kan også styres med spesialstyringer som f.eks øyestyling Tobii etc.
Be om mer info.

Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART

Setebredde standard størrelser	45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser	69, 75 cm
Setedybde std modeller	43-53cm (38-59cm med tilbehør)*
Setedybde dyp modell	49-59cm (evt. m tilbehør)
Setehøyde u rotasjon	40-60cm (fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon	41-61cm (fra 37cm m tilbehør)
Rygghøyde	84cm (72,94cm m tilbehør)
Rygghøyde modell Mini	72cm
Armlenshøyde regb u verktøy	15-29cm (fra 12cm m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar)	44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv	83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist	59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist	60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45, 51 og 57	150kg
Maks brukervekt sb63	250kg
Tilt	5-35 grader
Ryggvinkling	95-135 grader
Rotasjon	Manuelt låsbar m hendel, alt med automatisk låsing
Ryggoverdel	Regulerbar u verktøy (evt el betjent)
Trekk std	Brunt stoff / antrasit hud
Nakkepute	std (m fiberfyll)

* Kortere setedybde på forespørsel

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Balanseproblemer, stort behov for posisjonering i stolen	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt • ILPM/ILPM Extra tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.
Balanseproblemer og kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • ILPM eller ILPM Extra tilpasningsrygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Nakkepute nr 5 dråpeformet
Balanseprobleme, mindre behov for posisjonering	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred) • Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt
Kyfose	<ul style="list-style-type: none"> • ILPM eller ILPM Extra rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter) • Nakkepute nr 5 dråpeformet.
Scoliose / feilstillinger	<ul style="list-style-type: none"> • ILPM eller ILPM Extra rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell plassering av sidestøtter)
Trykksår sete (EPUAP grade 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex trekk (forbyggende pute) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering med Uniform eller Sarcotex trekk • Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.
Risiko for trykksår sete	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) • APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering • Trykkavlastende sittepute med minneskum • Uniform eller Sarcotex trekk • Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem • Stolen har plansete som standard, med fjæring som muliggjør bruk av alle typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning
Risiko for trykksår rygg (nedre del)	<ul style="list-style-type: none"> • Rygg med lag av minneskum (tilpasning) • ILPM/multitilpasningsrygg med sidestøtte.
Risiko for trykksår på ben / legger	<ul style="list-style-type: none"> • Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning)
Risiko for trykksår på underarmer	<ul style="list-style-type: none"> • Armlener med ekstra minneskum (tilpasning)
Ingen eller liten håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Stolen kan klargjøres med spesialelektronik for f.eks øyestyling eller andre former for lett betjente håndkontroller. Be om mer informasjon
Inkontinens og risiko for trykksår	<ul style="list-style-type: none"> • Inkontinensstrekk evt Sarcotex trekk • Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk
Store personer med høy brukervekt	<ul style="list-style-type: none"> • Setebredde 57cm med max brukervekt 150kg (std størrelse) • Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse) • Spesialbestilt stol med setebredde 69 og 75cm (225kg brukervekt)
Lange personer	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra dyp stol sd49-59cm (sb51) (stol har tilstrekkelig setehøyde justering sh40-60cm) • Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59cm (øvrige setebredder) • Alternativ rygg med høyere rygghøyde 94 cm) • Benstøtteforlenger (+8cm)

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic4 / Nordic4 SMART løfte- og hvilestoler

Sitteproblemer	Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol
Små/korte personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med rygg høyde 72cm Ekstra lav setehøyde 36, 37, 38, 39cm (ved bruk av ekstra lav setepute med Intelligel) Ekstra kort setedybde fra 38cm (Rygg med 2 alt 6cm tykkere polstring) Kortere setedybder som spesialtilpasning ned til 25cm på forespørsel Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)
Smale/tynne personer	<ul style="list-style-type: none"> Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde) ILPM rygg som fikserer hoften ved bruk av justerbare ryggputer.
Mentalt nedsatt (alzheimer, parkinson)	<ul style="list-style-type: none"> Smart-kontroll med sammenkoblede elfunksjoner og kun 2 knapper på hånd-kontroll.
Nakkeproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Nakkepute med meget mykt fyll Elektrisk regulering av ryggoverdel
Behov for bredere armlener, problem med at armene faller ned	<ul style="list-style-type: none"> Bredere armlener + 2cm (innover og utover)
Behov for å bli kjørt i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Hjulsett Vario komplett (automatisk bremsefunksjon), ikke i kombinasjon med svingskive
Behov for varme	<ul style="list-style-type: none"> Varme i sete og rygg
Behov for å arbeide, lese eller spise i stolen	<ul style="list-style-type: none"> Ulike bordløsninger
Behov for mer/bedre støtte for ben / heler	<ul style="list-style-type: none"> Benstøtteforlenger Sammenhengenede trekk for sete og benstøtte Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)
Dårlig håndfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Trådløs RF løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller øyestyring Tobii Elektrisk betjent svingfunksjon. Ulike spesialstyringer (be om info).
Risiko strømbrudd og for å snuble i kabler	<ul style="list-style-type: none"> Batteri back up
Ønske om myk sittekomfort	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex) Ekstra myk rygg eller ILPM rygg (vår mykeste rygg)
Ønske om korrekt korsryggstøtte	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte, manuell (std) eller elektrisk betjent.
Ekstra følsom hud på sete og lår	<ul style="list-style-type: none"> Setepute ekstra myk (latex)
Ekstra følsom hud på armer/albuer	<ul style="list-style-type: none"> Armlen trukket med latex Trekk med skinn
Ekstra følsom hud på rygg	<ul style="list-style-type: none"> Rygg ekstra myk eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg
Ekstra følsom hud på legger og knehase	<ul style="list-style-type: none"> Sammenhengende trekk på sete og benstøtte. Ekstra lag med latex på benstøtte
Forflytning til/fra rullestol, sideveis forflytning	<ul style="list-style-type: none"> Sidevanger oppfellbare, manuelt betjent, alt el-betjent
Problemer med å betjene svingfunksjon	<ul style="list-style-type: none"> Elektrisk betjent svingfunksjon, kan også kombineres med øyestyring Tobii
Ryggproblemer, smerter i korsrygg	<ul style="list-style-type: none"> Regulerbar korsryggstøtte, manuell (std) eller elektrisk betjent



medemagruppen