



Yes, you can.®



Kom i gang med din nye
viamobil V25!

TAKK - OG GRATULERER!

Først og fremst: Gratulerer med å ha tatt et godt valg!

Når du velger et drivaggregat fra Alber, velger du også optimal komfort, bunnsolid kvalitet, økt frihet og uante muligheter! Med et elektrisk drivaggregat påkoblet rullestolen får du og ledsageren din ekstra krefter, økt rekkevidde, og ikke minst får dere muligheten til å sanke nye og spennende opplevelser sammen!

Alber er markedsleder internasjonalt på brukervennlige og praktiske drivaggregat til manuelle rullestoler, og vi i Invacare er stolte av å kunne levere disse kvalitetsproduktene i Norge. Vi håper denne guiden kan gi deg en best mulig start med ditt nye drivaggregat, og at du på en enklere måte kommer i gang med ditt nye Alber-produkt.

Takk for at du valgte oss! Og gratulerer igjen med et godt valg.



Få en god start!

For å komme best mulig i gang med din nye viamobil V25, anbefaler vi deg å ta en titt på de generelle sikkerhetsinstruksjonene under:

- Les brukermanualen og følg sikkerhetsinstruksjonene før første gangs bruk.
- Husk å overholde og respektere maksimal personvekt for produktet. Maksimal brukervekt for viamobil V25 er 160 kg
- Ikke bruk rullestolen og drivaggregatet i brattere terreng enn det det er ment for.
- Prøvekjør alltid i et åpent område og i god avstand fra potensielle faresoner som trapper, vann og høye kanter/hindringer.
- Kjør kun med lav hastighet mot og over hindringer.
- Start og stopp rolig og kontrollert i spesielt oppover- og nedoverbakker.
- Viamobil skal alltid brukes på en rullestol som er utstyrt med to parkeringsbremseser.
- Se til at både din fysiske og psykiske helsetilstand gjør deg i stand til å bruke et elektrisk drivaggregat




**Se video av
viamobil V25**



**Last ned
brukermanual**

AV- OG PÅMONTERING AV VIAMOBIL


Kjøreenheten til viamobil av- og påmonteres enkelt ved hjelp av hurtigkoblinger og låsepinner. Ledsagerstyringen til viamobil festes enkelt til batteriet med en magnetkontakt.

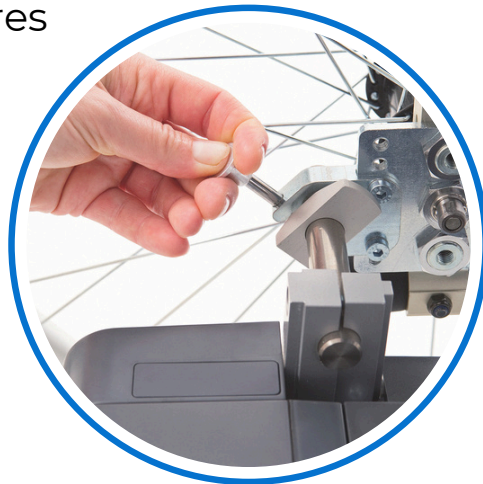

Se video, fra 28 sekunder, for å få dette demonstrert.

TA INN OG UT BATTERIET

Batteriet kan enkelt tas ut ved å ta tak i det grå håndtaket og løfte batteriet opp. For å sette batteriet tilbake, plasser batteriet på skrå ned i kjøreenheten, og klikk batteriet på plass ved å presse fremre del av batteriet ned. Magnetic Plug-systemet gjør at batteriet automatisk finner sin riktige posisjon.

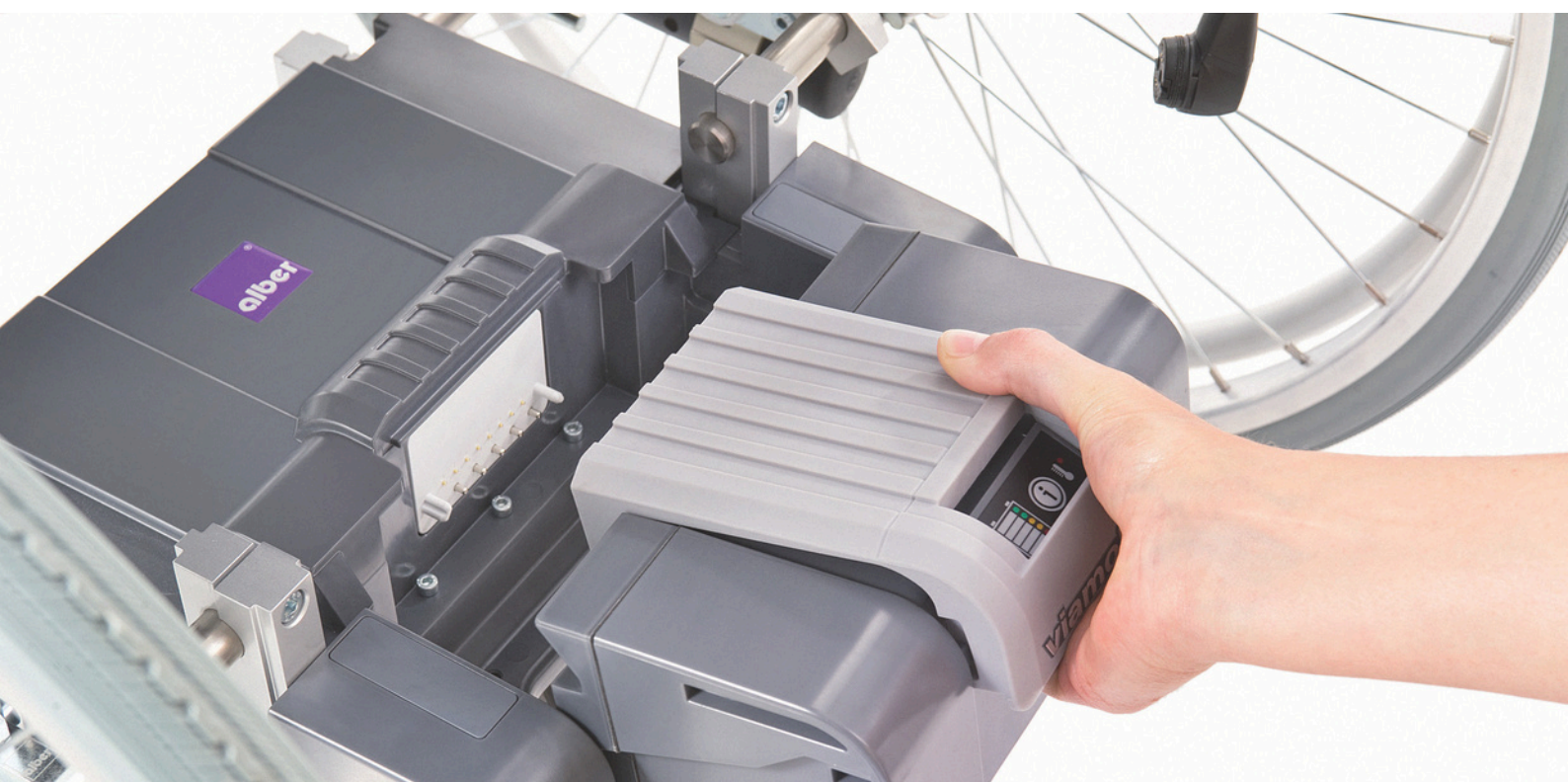

BRUK AV LEDSAGERSTYRINGEN

Skru av og på viamobil ved å trykke på av-/på-knappen øverst på ledsagerstyringen (1).

Kjøreretningen til viamobil bestemmer man enkelt ved å bruke den grå knappen helt til høyre på ledsagerstyringen (2). Pil fremover (3) tilsier at viamobil gir drivkraft fremover. Pil bakover tilsier at drivaggregatet vil rygge.



For å aktivere viamobil, trykk helt enkelt inn hendelen som du finner på undersiden av ledsagerstyringen. **Merk:** Ved å trykke denne hendelen hardt inn, vil den aktivere nødbremsfunksjonen.



TRANSPORT OG REISE

Transport av viamobil V25 i bil

Viamobil er enkel å demontere til flere, lette og håndterlige deler - helt uten bruk av verktøy.

Fest de enkelte delene så de blir liggende trygt og i ro i bilen.



Se video, fra 1 minutt og 26 sekunder, for å få dette demonstrert.

Transport av viamobil V25 på fly

Lithium-ion-batteriet og -teknologien til viamobil er godkjent for flytransport. *Husk likevel å kontakte flyselskapet du skal reise med i god tid før avreise, og husk også å medbringe flysertifikatet for ditt drivaggregat.*



Les mer og last ned ditt flysertifikat her

