

# Milestone 212 Ace WiFi – hurtigguide

## Spillerens utseende - tasteplassering



### Generelt:

Denne guiden tar for seg applikasjonene Audio, Bøker og Stemmeopptaker. Trykk gjentatte ganger på applikasjonsknappen for å bla mellom disse.

Audio: Her kan man spille av lydfiler (f.eks. MP3-filer) og få lest opp tekst-dokumenter.

Bøker: Daisyspiller.

Stemmeopptaker: Her kan man spille inn egne opptak, og siden spille dem av.

### Generell bruk:

*Oversikt for generelle tastefunksjoner:*

Funksjon	Tastetrykk	Respons
Slå PÅ etter at spilleren har slått seg AV.	START/STOPP.	Applikasjon (og gjeldende mappe).
Velge applikasjon.	APPLIKASJON.	Applikasjonens navn.
Øke lydstyrken.	MODUS + PIL-HØYRE.	«Opp» (hvis avspilling er stoppet).
Senke lydstyrken.	MODUS + PIL-VENSTRE.	«Ned» (hvis avspilling er stoppet).
Øke avspillings-hastigheten.	APPLIKASJON + PIL-HØYRE.	Hastigheten endres.
Senke avspillings-hastigheten.	APPLIKASJON + PIL-VENSTRE.	Hastigheten endres.
Slå tastelåsen PÅ.	MODUS + OPPTAK.	«Tastelås PÅ».
Slå tastelåsen AV.	MODUS + OPPTAK.	«Tastelås AV».
Få informasjonslisten opplest.	MODUS i 1,5 sekunder.	Informasjonslisten leses opp.
Avbryte informasjonslisten.	APPLIKASJON.	Kort pip.

### Arbeide med spilleren fra en datamaskin

Koble spilleren til en datamaskin og bruk utforskeren for å vise spillerens innhold, SD-kortet vises som «Flyttbar disk». Det er også mulig å ta SD-kortet ut av spilleren og sette det inn i en PC. Med hensyn til mapper og filer, håndteres disse på samme måte som på datamaskinen.

## Audio

I Audio-applikasjonen kan du spille av musikkfiler og få lest opp dokumenter.

*Navigering:* Bruk de 4 knappene rundt Start/Stopp-knappen til å flytte deg rundt i mappene. Opptak-knappen tar deg ett nivå ut av en mappe eller oppover i mappestrukturen, mens Modus-knappen tar deg inn i en mappe eller nedover i strukturen. Du flytter deg mellom mapper eller filer på samme nivå med Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-knappene. Mapper er sortert foran filer.

*Oversikt over tastefunksjonene i Audio:*

Funksjon	Tastetrykk	Respons
Starte avspilling / Pause.	START/STOPP.	
Spille av neste fil.	PIL-HØYRE.	
Spille av forrige fil.	PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten før 3 sekunder er avspilt).	
Spille av gjeldende fil fra starten.	PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten etter at 3 sekunder er avspilt).	
Spole fremover.	PIL-HØYRE (trykk og hold nede).	
Spole bakover.	PIL-VENSTRE (trykk og hold nede).	
Hoppe til siste fil i gjeldende mappe.	PIL-HØYRE + START/STOPP.	
Hoppe til første fil i gjeldende mappe.	PIL-VENSTRE + START/STOPP.	
Forflytning i en mappe-struktur – Høyre.	PIL-HØYRE.	Mappens navn.
Forflytning i en mappe-struktur – Venstre.	PIL-VENSTRE.	Mappens navn.
Forflytning til annet nivå i en mappe-struktur – Nedover.	MODUS.	Mappens navn.
Forflytning til annet nivå i en mappe-struktur – Oppover.	OPPTAK.	Mappens navn.
Forflytning i en mappe-struktur – Gå inn i mappen.	MODUS.	
Slette gjeldende fil.	MODUS + START/STOPP.	«Slettelyden».
Slette gjeldende og alle påfølgende filer i gjeldende mappe.	MODUS + START/STOPP + PIL-HØYRE.	Pipelyd ved start av sletting + «Slettelyden» ved avslutning.
Slette gjeldende og alle forutgående filer i gjeldende mappe.	MODUS + START/STOPP + PIL-VENSTRE.	Pipelyd ved start av sletting + «Slettelyden» ved avslutning.
Slette gjeldende mappe.	Holde nede MODUS + kort START/STOPP + kort START/STOPP.	Repeterende lydsignal etter første gang Start/Stopp og «Slettelyden» etter andre gang.
Navngi mappe med et opptak.	OPPTAK (vent på klikkelyden) + MODUS (vent på responsen «Mappe»), les inn mappenavnet og slipp opp tastene.	Klikkelyd, «Mappe» og pipetone «lys tone – mørk tone» ved slutt.

## Bøker

Ut fra størrelsen på minnekortet, kan man ha mange bøker på minnekortet. Hver bok **må** ligge i egen mappe. Opptak- og Modus-knappen brukes for å velge hvordan man vil flytte seg i en bok, dette være seg i sider eller kapitler. Alt ettersom hvordan daisyboken er produsert, vil valgene man kan få her være: *Nivå 1 til Nivå 6, Fraser, Sider, Tid, Start eller Slutt, Bokmerke, Bokhylle, Fotnoter, Margtekster, Historikk, Sovetimer og Innstilling sovetimer.*

## Online-bibliotek og internettilkobling (WiFi)

Du kan koble deg til din Tibi bokhylle og søke etter bøker, eller laste ned bøker som du allerede har i din Tibi bokhylle. For å bruke online-biblioteket må du være koblet til internett. *Les fra punkt 6.1 i manualen for mer informasjon.*

Oversikt over tastefunksjonene i Bøker:

Funksjon	Tastetrykk	Respons
Starte eller stoppe avspilling.	START/STOPP.	
Spille av neste del.	PIL-HØYRE.	
Spille av forrige del.	PIL-VENSTRE (dersom du trykker på tasten før 3 sekunder er avspilt).	
Sette bokmerke.	OPPTAK i minst 2 sekund.	«Bokmerke satt».
Slette bokmerke.	MODUS + START/STOPP.	«Bokmerke slettet».
Slette alle bokmerker	MODUS + START/STOPP + PIL-HØYRE + PIL-VENSTRE.	«Alle bokmerker slettet».
Velge annet, høyere Nivå for navigering.	OPPTAK.	Navn på Nivået.
Velge annet, lavere Nivå for navigering.	MODUS.	Navn på Nivået.
Slette en bok.	Fra navigeringsnivået «Bokhylle»: Holde nede MODUS og trykke START/STOPP.	Tikkelyder og «Slettelyden» når sletting er fullført.

### Bluetooth:

- Sett enheten (høytaler, ørepropper) du ønsker å koble til i parringsmodus.
- Sett Milestone i Audio eller Bøker, og trykk Modus (X) i to sekunder (Hovedmeny). Vent så til du hører; «Bluetooth enhet, Pil venstre for å søke, Pil høyre for å velge», trykk deretter umiddelbart på pil venstre for å søke etter enheten. Milestone søker nå i 10 sekunder etter tilgjengelige enheter. Trykk deretter pil venstre for å bla i listen over tilgjengelige enheter, og så Start/Stopp-knapp for å velge. Bluetooth tilkobling avsluttes når høytaler slås av, eller ørepropper legges tilbake i etuiet (eller skrues av).

## Stemmeopptaker

Med applikasjonen Stemmeopptaker, kan man gjøre opptak, slik som handlelister, telefonnumre etc. i inntil 5 adskilte mapper.

*Oversikt over funksjonene i Stemmeopptaker:*

Funksjon	Tastetrykk	Respons
Kort opptak.	OPPTAK (trykk og hold nede til opptaket er ferdig).	Klikkelyd.
Starte kontinuerlig opptak.	OPPTAK + START/STOPP.	Klikkelyd og deretter pipetone «mørk tone – lys tone».
Pause/starte igjen et kontinuerlig opptak.	START/STOPP mens et kontinuerlig opptak er i gang.	Kort pip.
Avslutte kontinuerlig opptak.	OPPTAK.	Pipetone lys tone – mørk tone.
Spille av/ Pause/ Starte igjen avspilling av et opptak.	START/STOPP.	Avspilling startes eller pauses.
Spille av neste opptak.	PIL-HØYRE.	Neste opptak spilles av.
Spille av forrige opptak.	PIL-VENSTRE.	Forrige opptak spilles av.
Hoppe til siste opptak i mappen.	PIL-HØYRE + START/STOPP.	
Hoppe til første opptak i mappen.	PIL-VENSTRE + START/STOPP.	
Slette gjeldende opptak.	Under avspilling eller max 10 sekunder etter av avspilling er ferdig: Holde MODUS nedtrykket og trykke START/STOPP.	«Slettelyden».
Slette alle påfølgende opptak i mappen.	MODUS + START/STOPP + PIL-HØYRE.	Kort pipelyd ved start av sletting og «Slettelyden» når sletting er fullført.
Slette alle forutgående opptak i mappen.	MODUS + START/STOPP + PIL-VENSTRE.	Kort pipelyd ved start av sletting og «Slettelyden» når sletting er fullført.
Velge mappe.	Holde inne APPLIKASION og trykke en av de fem funksjons-tastene.	Mappe 1 til Mappe 5 leses opp.
Navngi mappe med et opptak.	OPPTAK (vent på klikkelyden) + MODUS. Vent på responsen «Mappe», les inn mappenavnet og slipp opp tastene.	Klikkelyd, «Mappe» og pipetone «lys tone – mørk tone» ved slutt.

## Informasjonsliste

Hva som leses opp fra Informasjonslisten, vil variere ut fra hvilken applikasjon man står i. Her blir det f.eks. lest opp total og ledig kapasitet på minnekortet, samt gjenværende batterikapasitet, programversjon og serienummer. Fra Informasjonslisten for Stemmeopptaker har man også mulighet til å ta backup av opptakene sine.



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindforbund

