


## Installasjon

### Transmitter

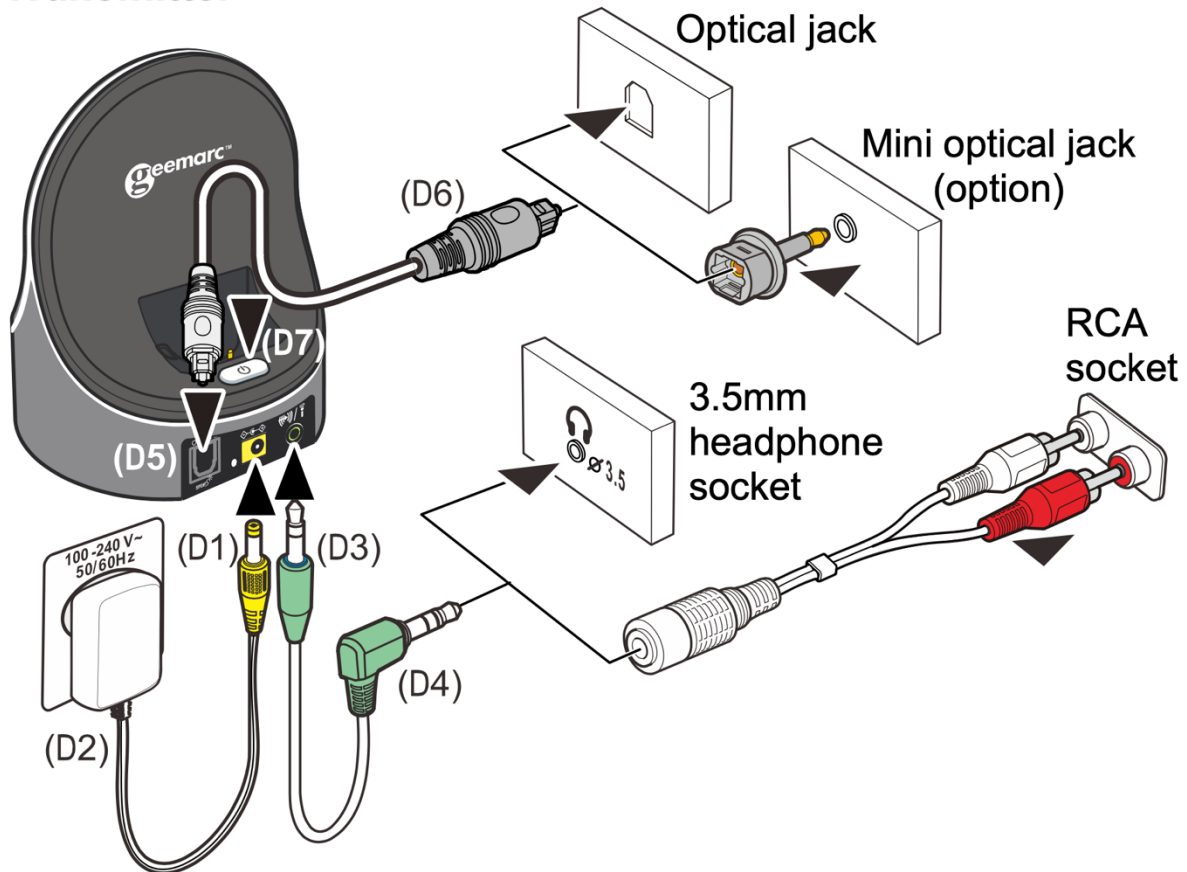

**(D1)** Koble strømadapteren

**(D2)** Koble strømadapteren til en stikkontakt

**(D3)** Koble den ene enden av lyd-kabelen til analog lydinnngang på baksiden av Basen.

**(D4)** Koble den andre enden av lyd-kabelen til lyd-kilden din (f.eks. TV, Hi-Fi-system, MP3-spiller eller iPhone).

Hvis lyd-kilden din ikke har en egnet kontakt for lyd-kabelens 3,5 mm stereoplugg, bruk en av de medfølgende adapterne:

- RCA-adapterkabel; **eller**

**(D5)** Koble den ene enden av Toslink-kabelen til digital lydinnngang på baksiden av Basen.

**(D6)** Koble den andre enden av Toslink-kabelen til lyd-kilden din med optisk digital lyduttgang (f.eks. TV, Hi-Fi-system).

Hvis nødvendig, kan du bruke en mikro-Toslink-kontakt for å koble til lyd-kilden din.

**(D7)** Trykk på AV/PÅ-knappen på baksiden av basen for å slå den på. Den røde LED-lampen vil lyse opp.