

sensio

BALDER Baby Call

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606309

Dokument: 9043-2

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Feilsøking	8
Spesifikasjoner	9
Vedlikehold	9
Resirkulering	10
Symboler	10
Godkjenninger	11
Support	11

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- BALDER Baby Call
- Batteri
- Festeskrue for lokk
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

BALDER Baby Call fanger opp lyder nært i rommet og sender varsler til FlexiBlink-mottakere. Den benytter et spesialbatteri med svært lang levetid. Varslingsmottaker melder fra ved lavt batterinivå.

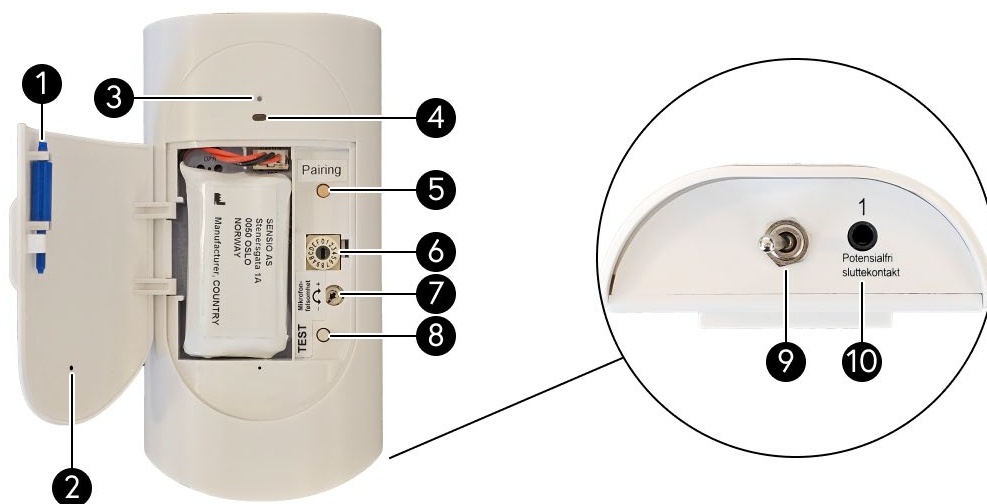

1. Skrutrekker for innstillinger
2. Skruehull for sikkerhetsskrue
3. Mikrofon
4. Lysindikator
5. Pairing-knapp
6. Funksjonsvelger
7. Følsomhetsjustering
8. Testknapp
9. På/Av-bryter
10. Signallingang for potensialfri kontakt (Sammenkobling av lederne gir signal)

Kom i gang

Montering

Enheten monteres normalt på veggen eller legges på et nattbord ved senga til barnet. Der festes den med den vedlagte borrelåsen.

Batteriet settes inn ved å sette inn konnektoren, trykke ledningen opp i åpningen på venstre side og legge inn batteriet. Lukk igjen lokket.



Sørg for at barnet ikke får tak i BALDER. Fest lokket med sikkerhetsskruen slik at barnet ikke får tak i batteriet.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På BALDER: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Montering

1. Vask området der enheten skal monteres med spritservietten som følger i pakka
2. Vent 1 minutt før dekkpapiret på borrelåsen fjernes
3. Trykk enheten på plass og hold den fast i 30 sekunder

Testing

1. Slå på med av/på-bryteren.
2. Trykk på testknappen.
3. Se at mottakeren varsler.
4. Om nødvendig, juster mikrofonens følsomhet. Velg det laveste nivået som fortsatt gir sikker deteksjon av relevante lyder.
 - a. **Øke følsomhet:** Vri hjulet med klokka
 - b. **Redusere følsomhet:** Vri hjulet mot klokka

Utfør ALLTID en test etter at BALDER er montert for å verifisere at enheten fungerer og at den klarer å fange opp lyden. Sjekk også at det varsler i mottakerne som ønsket.

Lysindikasjon

Når enheten er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Rødt/grønt blinkende lys:** Bytt batteri

Funksjonsvelger



Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel som skal sendes:

- 0:** Barnet gråter (0,5 s tidsforsinkelse)
- 1:** Barn 1 gråter (0,5 s tidsforsinkelse)
- 2:** Barn 2 gråter (0,5 s tidsforsinkelse)
- 3:** Barnet gråter (1 s tidsforsinkelse)
- 4:** Barn 1 gråter (1 s tidsforsinkelse)
- 5:** Barn 2 gråter (1 s tidsforsinkelse)
- 6:** Barnet gråter (1 s tidsforsinkelse)
- 7:** Barn 1 gråter (1 s tidsforsinkelse)
- 8:** Barn 2 gråter (2 s tidsforsinkelse)
- 9:** Barnet gråter (3 s tidsforsinkelse)
- A:** Barn 1 gråter (3 s tidsforsinkelse)
- B:** Barn 2 gråter (3 s tidsforsinkelse)
- C:** Assistanse ønskes (0,5 s tidsforsinkelse)
- D:** Assistanse ønskes (1 s tidsforsinkelse)
- E:** Assistanse ønskes (3 s tidsforsinkelse)

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt/det blinker rødt. Bytt batteri
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. Slett sammenkoblingen og sammenkoble på nytt.
- Senderen får ikke signal fra kilden
 - Sjekk at mikrofonen er tett opp til lydkilden. Eventuelt juster følsomheten
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å trykke testknappen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen ved å trykke **5 ganger** på **Pairing**-knappen. Slettingen bekreftes med rødt og grønt blinkende lys.
2. Sammenkoble på nytt.

Blinker rødt etter varsel

Enheten er ikke sammenkoblet. Se [Sammenkobling er feil](#)

Det lyser eller blinker oransje lys

Mikrofonen hører lyd, men ikke godt nok til å varsle. Juster følsomheten eller legg BALDER nærmere barnet.

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og sammenkoble på nytt

Falsk varsling

Følsomheten er for høy. [Reduser følsomheten](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Litium 3V (HMS: 244816)
- **Batterilevetid:** 5 år
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 133 mm
- **Bredde:** 69 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 140 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- E-post: post@vestfoldaudio.no
- Nettside: vestfold.sensio.io
- Telefon: +47 33 47 33 47

Skann QR-koden for mer informasjon



- Produktinfo
- Bruks- og monteringsanvisning (PDF)
- Hjelpvideoer