

sensio[®]

ALMA Alerter

Bruksanvisning

Produkt: 606228

Dokument: 9016-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

ALMA Alerter varsler med lys, tekst, symbol, lyd og talemelding om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. Systemet skiller mellom alvorlige hendelser, definert som alarmer, og daglige hendelser som dørklokke og telefon. ALMA varsler også ved lavt batterinivå hos tilknyttede sendere.

Varsling

Hendelser som oppstår i boligen varsles automatisk på ALMA med blinkende lys, bilde, tekst og lyd – samt tale dersom dette er aktivert. Ved å ta på skjermen innen to minutter etter at varslingen er ferdig, vil siste varsel vises. For å se klokken i denne perioden – trykk på skjermen for å skjule varslingen.

Alarmer, som brannvarsling, varsler alltid med full lydstyrke.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen, stopper varslingen. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Justere volum



Gå inn i menyen på ALMA for å justere lydstyrke på daglige varslinger, som varsling for dørklokke og mobiltelefon.

Klokke

Klokke og dato vises når skjermen berøres.

Ønsker du at klokken alltid skal vises, naviger til

 Meny →  Innstillinger →  Utseende
→ Skjerm alltid på 

Apper

For å åpne apper, berør skjermen og deretter

 Meny →  Apper

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov
for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer