

sensio

ALMA Alerter

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606228

Dokument: 9015-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	5
Bruk	6
Apper	7
Innstillinger	7
Feilsøking	8
Spesifikasjoner	9
Vedlikehold	10
Resirkulering	10
Symboler	11
Godkjenninger	12
Support	12

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.


Introduksjon

I esken

- ALMA Alerter
- Strømforsyning 15VDC
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

ALMA Alerter varsler med lys, tekst, symbol, lyd og talemelding om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. Systemet skiller mellom alvorlige hendelser, definert som alarmer, og daglige hendelser som dørklokke og telefon. ALMA varsler også ved lavt batterinivå hos tilknyttede sendere.

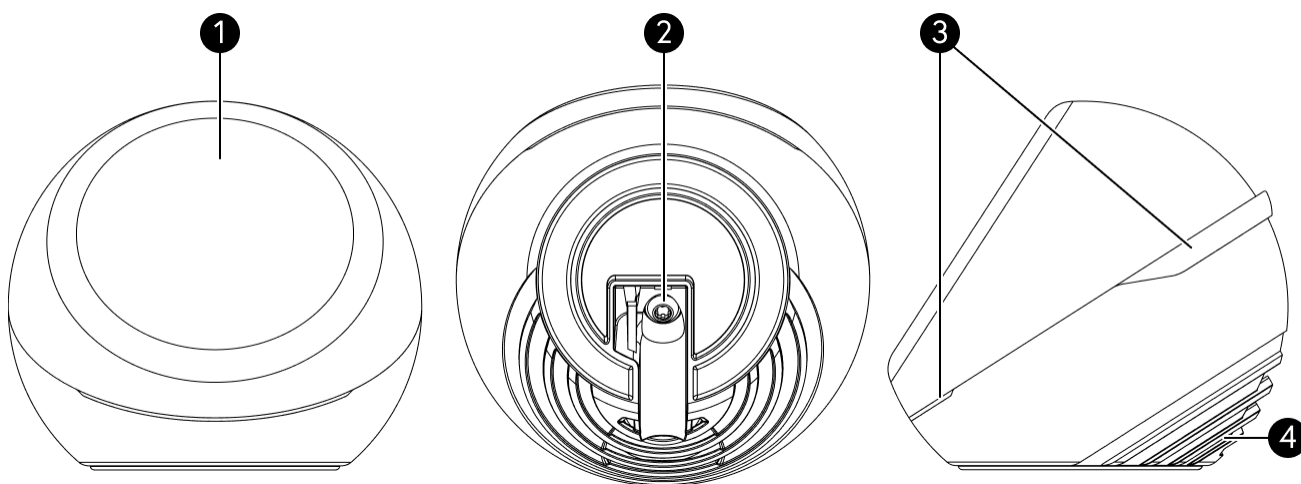

1. Berøringsskjerm
2. Strømtilkobling
3. Varslingslys
4. Høytaler

Kom i gang

Montering

Plasser ALMA godt synlig på et bord eller lignende. Sett strømforsyningen i kontakten og vri pluggen for å låse den.

Oppsett

ALMA starter veiledningen for innstillinger når den startes for første gang.

1. **Start oppsett**
2. **Språk:** Sveip for å velge ønsket språk
3. **Sammenkobling:** Følg instruks for [sammenkobling](#) under
4. **Dato:** Sveip for å stille dato
5. **Tid:** Sveip for å stille klokke
6. **Lukk vindu:** ALMA er klar til bruk

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På ALMA, når den ikke er hovedenhet: Velg **Bli med** på skjermen.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjednen «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Testing

Utløs en sender i FlexiBlink-systemet og observer at ALMA varsler med rett symbol.

Bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i boligen varsles automatisk på ALMA med blinkende lys, bilde, tekst og lyd – samt tale dersom dette er aktivert. Ved å ta på skjermen innen to minutter etter at varslingen er ferdig, vil siste varsel vises. For å se klokken i denne perioden – trykk på skjermen for å skjule varslingen.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen, stopper varslingen. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Justere volum

Gå inn i menyen på ALMA for å justere lydstyrke på daglige varslinger, som varsling for dørklokke og mobiltelefon.

Alarmer, som brannvarsling, varsler alltid med full lydstyrke.

Klokke

Klokke og dato vises når skjermen berøres. Ønsker du at klokken alltid skal vises, naviger til

 Meny →  Innstillinger →  Utseende → Skjerm alltid på 

Apper

For å åpne apper, berør skjermen og deretter

 Meny →  Apper

Ved å installere tilgjengelige apper kan du tilføre ALMA nye funksjoner.

Innstillinger

For å åpne innstillinger, berør skjermen og deretter

 Meny →  Innstillinger

Varsler

- **Lyd:** Justering av volum på varslingslyd
- **Tale:** Aktivering av talevarsling ved alarmer
- **Lysblink:** Aktivering av lysblink ved alarmer

Utseende

- Velg mellom **analog** og **digital** klokke
- **Skjerm alltid på:** Velg om ALMA skal vise klokke eller være helt mørk i dvalemodus

Tid og språk

- **Still automatisk:** ALMA må være tilkoblet GURO Gateway for å justere klokken automatisk
- **Dato:** Sveip for å stille dato
- **Tid:** Sveip for å stille klokken
- **Sommertid:** Dersom sommertid skal benyttes
- **12-timers klokke:** Velg mellom 12- eller 24-timers klokke
- **Språk:** Velg ønsket språk

Sammenkobling

Her kan du sammenkoble ALMA til andre FlexiBlink-enheter. [Se instruks for sammenkobling](#)

Info

- Oversikt over firmware-versjon og serienummer.
- **Testmodus:** Funksjonen brukes når systemet skal testes. Når denne er aktivert, vises siste varsling på skjermen inntil skjermen berøres.
- **Nullstill:** Nullstiller ALMA og setter den tilbake til fabrikkinnstillinger.

Feilsøking

ALMA varsler ikke

Avstanden mellom sender og mottaker er for lang

1. Sett enhetene nærmere hverandre, eller sett inn en repeater for å utvide rekkevidden.
2. Trykk på **TEST**-knappen på senderen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottakeren.

Enhetene er ikke riktig sammenkoblet

1. Slett sammenkoblingen ved å velge **Forlat** i sammenkoblingsmenyen.
2. Sammenkoble på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Strømforsyning:** 15VDC
- **Batteri:** innebygd litium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 86 mm
- **Bredde:** 100 mm
- **Dybde:** 100 mm
- **Vekt:** 200 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

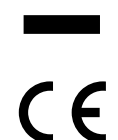

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47