

MANO 6

Hurtigstartguide

Dette er en forenklet veiledning for å komme i gang med ditt elektroniske forstørrelsesglass MANO 6.

1. Før Første Bruk (Lading)

For å sikre optimal ytelse, må MANO 6 lades helt opp før du bruker den for første gang. Bruk kun den medfølgende strømadapteren.

- **Under lading:** Strømknappen lyser **Grønt**.
- **Fulladet:** Ladingen tar ca. **2,5 timer**. Lyset slukkes når batteriet er fullt.


2. Oppstart & Hovedfunksjoner

Handling	Beskrivelse
Slå PÅ	Trykk og hold inne Av/På-knappen i 2 sekunder ELLER Brett ut stativet.
Slå AV (Standby)	Trykk og hold inne Av/På-knappen i 3 sekunder . Velg deretter Slå AV/Standby i menyen som dukker opp.


Lesemodus

Bruksmåte	Instruksjon
På bord	Brett ut stativet (enheten slår seg på automatisk) og plasser den stabilt over materialet.
Håndholdt	Sørg for at stativet er foldet inn. Bruk håndtaket for å holde enheten over materialet.

Oversikt over knapper

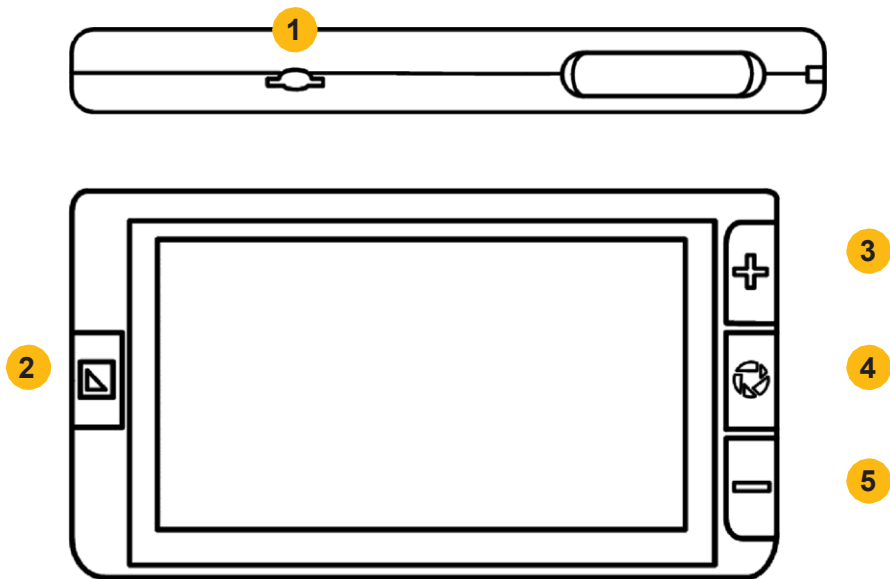

1. MicroSD-minnekort spor
2. Fargemodus
3. Zoom inn (+)
4. Frys-knappen
5. Zoom ut (-)
6. Av/på-knapp

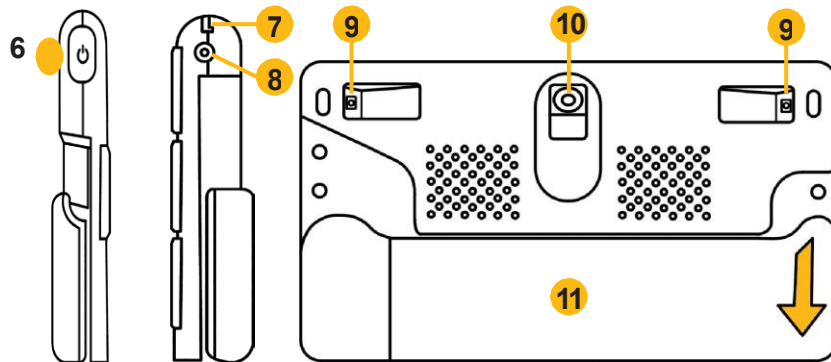

7. Festing for håndstropp
8. Strømport
9. LED-belysning
10. Kamera
11. Stativ/håndtak

Hovedknapper (Høyre side)

- **Zoom Inn (Forhøyet knapp):** Øker forstørrelsen.
- **Zoom Ut (Nedsunken knapp):** Reduserer forstørrelsen.
- **Fargemodus-knapp:** Veksler mellom fargemoduser.
- **Frys-knapp:** Fryser bildet (tar stillbilde).
- **Av/På-knapp:** Slår PÅ/AV, og gir tilgang til **Meny** (kort trykk).

3. Daglig bruk & justeringer

Forstørrelse (Zoom)

- Bruk **Zoom Inn** og **Zoom Ut** knappene på høyre side.
- **Berøringsskjerm:** Du kan også bruke **klyp-og-zoom**-bevegelsen.
- **Navigering:** Ved høy forstørrelse: Skyv fingeren over skjermen for å flytte på bildet (uten å flytte enheten).

Fargemodus

Trykk på **Fargemodus-knappen** for å veksle raskt mellom standard fargevisninger:

- Ekte Farge-modus
- Svart på Hvit / Hvit på Svart


- Gul på Svart / Svart på Gul

Frysбилde og Galleri

1. **Frysбилde:** Trykk kort på **Frys-knappen** for å ta et stillбилde. Trykk igjen for å gå tilbake til live-modus.
2. **Lagre билde:** Hold inne **Frys-knappen** i **3 sekunder**.
3. **Åpne Galleri:** Trykk kort på **Av/På-knappen** for å åpne **Menyen**, og velg deretter **Galleri-ikonet**.

4. Feilsøking (Troubleshooting)

Problem	Løsning
Enheten slår seg ikke PÅ	Koble til strømadapteren og lad batteriet.
Bildet endrer seg ikke	Sjekk om enheten er i Frysemodus (trykk Frys-knappen).
Enheten fryser / virker ikke	Utfør Maskinvaretilbakestilling: Trykk og hold inne Av/På-knapp + Frys-knapp + Zoom Ut-knapp samtidig.

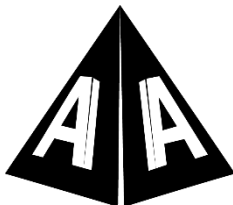

AbleCon.no
enable you!

Behov for mer hjelp, kontakt oss gjerne på telefon 40082011 eller se våre nettsider www.ablecenter.no