

△ HelpSoq ▽



Armforlenger Bruksanvisning

CE     www.helpsoq.nl

Armforlengeren er et ekstra hjelpemiddel som brukes til å ta på kompresjonsstrømper. Armforlengeren brukes sammen med det elektriske HelpSoq On-apparatet.

Armforlenger Bruksanvisning

Les sikkerhetsanvisningene nøye og grundig før du bruker armforlengeren. Hvis det oppstår skader fordi anvisningene ikke følges, bortfaller garantien.

⚠ Forsiktig

- Armforlengeren må kun brukes av personer over 12 år. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, bør kun bruke dette apparatet under tilsyn.
- Ekstra oppmerksomhet er påkrevd når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Barn må ikke bruke armforlengeren som leketøy. Barn må ikke rengjøre eller utføre service på armforlengeren.
- Armforlengeren har bevegelige deler som hår, smykker og fingre kan sette seg fast i. Vær forsiktig ved bruk.
- Bruk ikke armforlengeren til andre formål enn å ta på kompresjonsstrømper sammen med det elektriske HelpSoq On-apparatet.
- Ikke alle typer kompresjonsstrømper eller alle størrelser og lengder er egnet for bruk med armforlengeren. Svært stramme, smale eller lange strømper kan skade armforlengeren. Du finner en oppdatert liste over strømper som er egnet for armforlengeren på vår nettside helpsoq.nl/kousen.
- Vedlikehold: Armforlengeren kan rengjøres med en fuktig mikrofiberklut. Hvis det ved et uhell søles væske på eller i enheten, skal dette også tørkes av med en mikrofiberklut.
- Armforlengeren oppfyller alle påkrevde sikkerhetsstandarder. Reparasjoner må kun utføres av servicepersonell fra HelpSoq. Mangelfullt eller ufaglært reparasjonsarbeid kan skade armforlengeren.
- Armforlengeren er utviklet for daglig bruk, for å ta på de vanligste kompresjonsstrømpene (se listen på helpsoq.com/sockings) sammen med det elektriske HelpSoq On-apparatet.

Feilsøking

Armforlengeren gir en «løs» følelse, som om noe ikke sitter fast.

Det er meningen at armforlengeren skal føles løs og fleksibel. Den skal bevege seg sammen med deg og strømpen. Derfor er følelsen av at noe sitter løst helt normal. Alt sitter likevel godt fast.

Et av festene med håndtak på armforlengeren har løsnet fra enheten.

Festene med håndtak sitter normalt godt fast på enheten. Skulle et feste løsne, er det enkelt å klikke det tilbake i enhetens plastskinne. Hvis dette fortsetter å skje, ber vi deg kontakte oss.

Kan jeg ta av strømpen igjen med armforlengeren?

Armforlengeren er dessverre kun egnet til å ta på strømper. Det finnes andre hjelpemidler for å ta dem av.

Hvordan rengjør jeg best armforlengeren?

Enheten kan rengjøres med en fuktig mikrofiberklut. Hvis det ved et uhell søles væske på eller i enheten, skal dette også tørkes av med en mikrofiberklut.

Hvis rådene ovenfor ikke fører til en løsning, ber vi deg kontakte vår serviceavdeling. Kundeservice er tilgjengelig i åpningstiden på +31 800-3377337 (NL) og også via e-post: info@helpsoq.com

Kontakt vår supportavdeling

For alle øvrige spørsmål eller henvendelser kan du kontakte vårt servicesenter via:

 HelpSoq Servicecentrum
Hondiusstraat 28C, 6827DE Arnhem (NL)
Online: helpsoq.nl/support

Hjelpemiddelpartner A/S
post@hmp.no
Online: www.hmp.no



Følg våre blogger på helpsoq.com/news for å holde deg oppdatert med nye innsikter og erfaringer.

Denne manualen er utarbeidet av HelpSoq B.V. HelpSoq er ikke ansvarlig for skader forårsaket av mangler eller feil i denne manualen. Den er ikke et tillegg til de generelle vilkårene, og det kan ikke utledes rettigheter av den. De fullstendige service- og garantibetingelsene som gjelder for ditt utstyr, er deponert hos Handelskammeret i Nederland. Nyeste versjon kan rekvireres via vår serviceorganisasjon og kan også lastes ned direkte fra helpsoq.com/support.

Bruksanvisning: Hvordan brukes armforlengeren?

Følg disse trinnene etter at du har satt strømpen på ringen ved hjelp av det elektriske HelpSoq On-apparatet.

- Plasser armforlengeren ved siden av HelpSoq på bordet. Det kan også være et annet praktisk sted i nærheten av deg.
- Hvis ringen med kompresjonsstrømpen fortsatt sitter på HelpSoq-apparatet, plasser tomlene oppå apparatet og bruk fingertuppene til å løfte ringen med kompresjonsstrømpen av HelpSoq.
- Fingertuppene dine vil forhindre at strømpen begynner å gli av ringen.
- Se inn i ringen for å finne ut hvilken side hælens strikkede stoff er på. På den andre siden er det en åpning for tærne (eller for noen strømper: lukkede tær).
- Flytt ringen med den opprullede strømpen mot armforlengeren, og la ringen med strømpen gli inn i armforlengeren (fig. A). Tærne (eller de åpne tærne) vil da ende opp på den åpne siden av armforlengeren.
- Armforlengeren klemmer ringen med strømpen på plass, slik at strømpen ikke kan gli av (fig. B).
- Ta nå armforlengeren i håndtakene og sett den på gulvet ved siden av føttene. Håndtakene vender nå mot deg, og den åpne siden av armforlengeren vender bort fra deg. Ringen med strømpen sitter fast i sirkelen.
- Trå nå forsiktig inn i strømpen med foten. Du kan styre påtrekkingen noe ved å flytte håndtakene (frem, tilbake, til venstre eller høyre). Sørg for at fotens hæl også kommer riktig ned i strømpens hæl. Du vil umiddelbart merke om den sitter korrekt (fig. C).
- Nå som foten sitter riktig i strømpen, kan du løfte håndtakene så høyt som ønskelig eller mulig (fig. D). Når du gjør dette, vil strømpen rulle seg ut oppover benet.
- Når strømpen med ringen er kommet høyt nok opp, kan du sette armforlengeren tilbake på gulvet og slippe den. Nå har du hendene fri til å gripe ringen og trekke strømpen helt opp.
- Strømpen rulles nå hele veien opp langs benet, til det ikke er mer strømpe igjen på ringen (fig. E). Bryt deretter ringen opp og fjern de to delene fra benet. Du kan deretter klikke de to delene sammen igjen og sette dem på HelpSoq, klar for den andre strømpen.
- Dermed har du tatt på strømpen uten å måtte bøye deg.
- Gjenta nå alle trinnene som er beskrevet i HelpSoq-veiledningen for å ta på den andre strømpen.

