


Kort brukerveiledning for HelpSoq (1/2)


Denne korte brukerveiledningen erstatter ikke den fullstendige bruksanvisningen. Les den vennligst grundig før du bruker HelpSoq.

1

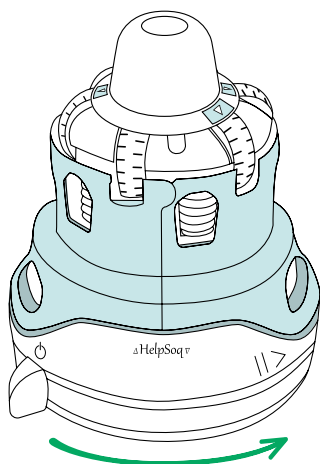


Koble til apparatet og plasser HelpSoq-logoen vendt mot deg. Sett på ringen. Skyv skyvebryteren helt til høyre, og hjulene begynner å rotere.

2

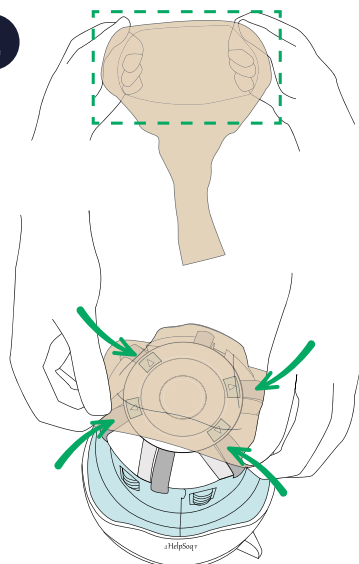

Plasser fingertuppene et lite stykke inn i strømpen og form et rektangel. Plasser strømpen ovenfra på de fire angitte hjulene. Ikke bruk makt.


3

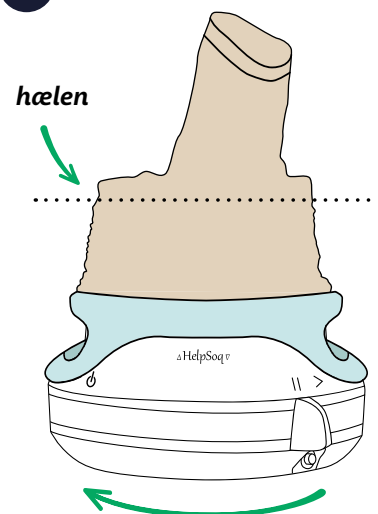

Vent til hælen er rett over kanten av ringen. Stopp enheten.


Kort brukerveiledning for HelpSoq (2/2)

4

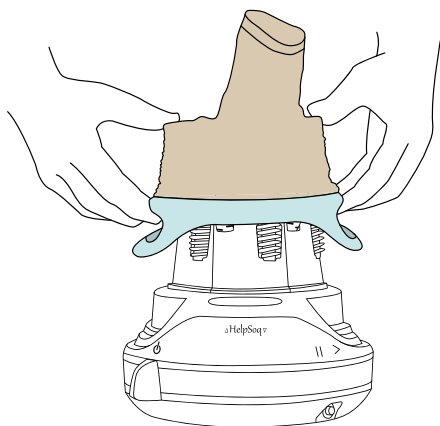


Skyv ringen forsiktig av mens du holder tomlene på toppen.

5

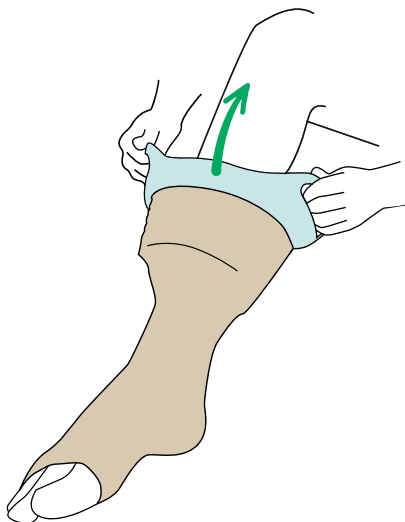

Plasser foten inn i strømpen. Hold strømpen med fingertuppene til hælen er på plass.

6

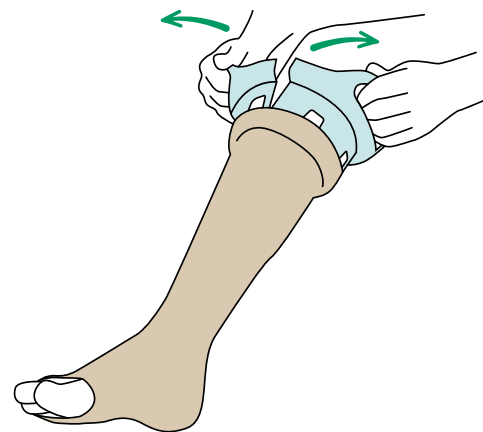

Slipp med fingrene og trekk ringen opp sammen med strømpen. Når strømpen er langt nok opp, åpne ringen.