

sensio[®]

BRITT Bed Shaker

Bruksanvisning

606182 BRITT Bed Shaker

606298 BRITT Bed Shaker Small

Dokument: 9028-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

BRITT Bed Shaker varsler med vibrasjoner om hendelser som brann eller dørklokke, ved mottak fra FlexiBlink-sensorer. Ved brann aktiveres kraftige vibrasjoner for økt oppmerksomhet. Enheten kan også kobles til en vekkerklokke.

BRITT Bed Shaker Small er en variant med en ekstern vibrasjonsenhet som gir enklere plassering i sengen.

Vibrasjonsmønster

Brann



Røykvarsler




Alarmer



Telefon



Dørklokke

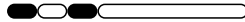

Porttelefon



Annet



Funksjonsbrytere



1: Trådløs vekking fra IRIS på kanal A (standard)

2: Trådløs vekking fra IRIS på kanal B

3: Viderevarsling av vekkerklokke

(analog eller digital)

Vipp bryter opp for å aktivere

6: Tvungen driftsstans (for eksempel ved transport)

Vipp bryter opp eller ned før strømkontakten tas ut, for å aktivere.

BRITT vekkes ved strømtilkobling.

Funksjonsvelger



Velg hvilke typer hendelser som skal varsles

0: Alle varslinger

1: Kun alarmer og vekkerklokke

2: Kun brann og vekkerklokke

Statusindikasjon

- Et grønt lys lyser konstant ved strømdrift og blinker ved batteridrift.
- Under lading vil det lyse rødt.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer