

Trapperullatoren.

TUPRO
STEP

Trygg & Aktiv i eget hjem

Helt mekanisk og
kompatibel med
nesten alle trapper



Vinner
i sin post hos NAVs
Hjelpemiddelsentral

made in Norway



“

*Etter jeg fikk TOPRO Step
føler jeg meg endelig trygg
igjen i trappen min.*

Line (68),
TOPRO Step-bruker siden 2016

*Jeg har falt i trappen
flere ganger tidligere,
men det stoppet etter jeg
fikk montert TOPRO Step*

Otto (82),
TOPRO Step-bruker siden 2017



Hold deg **aktiv** og **selvstendig**

For mange kan trappen oppleves som en vanskelig barriere for å fortsette å bo i eget hjem, men trappa er også et **effektivt verktøy** for å fortsette å holde seg **fysisk aktiv og i bevegelse**. Å falle i trappen kan ha svært negative konsekvenser, og rundt 30.000 nordmenn må årlig få medisinsk hjelp som følge av fall i trapp. TOPRO Step er trapperullatoren som lar deg fortsette å bruke trappen med økt støtte og trygghet.

... med den innovative trapperullatoren

TOPRO Step er utviklet i samarbeid mellom ingeniører og terapeuter ved NTNU i Trondheim og består av en håndløper som et håndtak er festet til. Håndtaket gir lignende **støtte som en rullator** på flatt underlag, og står alltid fastlåst om du kommer i ubalanse eller trenger økt støtte på vei opp eller ned.

TOPRO Step er et rent mekanisk hjelpemiddel, **og trenger ingen strøm**, ingen periodisk ettersyn, og heller ikke regelmessig service etter montering. Den **kan monteres i svært smale trapper**, helt ned til 60 cm bredde.

120 kg

maksimal brukervekt

Bærekraftig

Laget av høykvalitetsmaterialer og produsert med fornybar norsk vannkraft.

120–200 cm

anbefalt brukerhøyde

Modulært

TOPRO Step er 100% modulært og har derfor svært rask leveringstid.



Ett håndtak, mange muligheter...

TOPRO Step monteres tilpasset brukerens høyde og dine individuelle behov. Håndtaket er **ergonomisk utformet**, og tilbyr **to ordinære grepshøyder** i tillegg til gripeområder på begge sidene. Du finner derfor alltid et komfortabelt grep.



Én hånd

TOPRO Step kan brukes med bare én hånd, enten venstre eller høyre, både på vei opp og ned trappen.



Kombiner håndtaket og håndlisten

Bruk håndløperen for ekstra støtte når du flytter håndtaket foran deg.



Hold i vertikal del av håndtaket

På vei ned trappen foretrekker enkelte å holde i den vertikale delen av håndtaket.



... og praktiske funksjoner

Håndtaket kan **lett foldes til siden** når det ikke er i bruk. Det betyr at TOPRO Step ikke tar opp unødvendig plass i trappen din. Trykk på den oransje knappen og skyv håndtaket opp til siden. Av sikkerhetsgrunner, kan håndtaket kun foldes oppover.



Lett å folde til siden

TOPRO Step kan foldes til siden og **veier kun 1,3 kg**, som er betydelig mindre enn én rullator.



Foldeknappen





Knagger for poser

Knagger tilbys som tilbehør på begge sidene av rullamodulen, og gjør at du kan ta med deg lette gjenstander mellom etasjene.

TOPRO Step – passer den i trappen min?


TOPRO Step består av et skinneresystem og et håndtak som følger skinneresystemet. **Modulene til skinneresystemet** er tilpasset nesten **alle mulige utforminger av trappeløpet**, også i situasjoner der det ikke er en vegg å montere på langs trappen.

TOPRO Step krever **ingen strøm, ingen byggeomeldinger** til kommunen og dermed er det betydelig raskere og rimeligere å få montert en en trappeheis. TOPRO Step kan leveres både innendørs, og utendørs dersom det er tak over trappen.

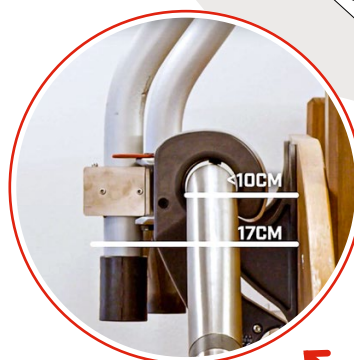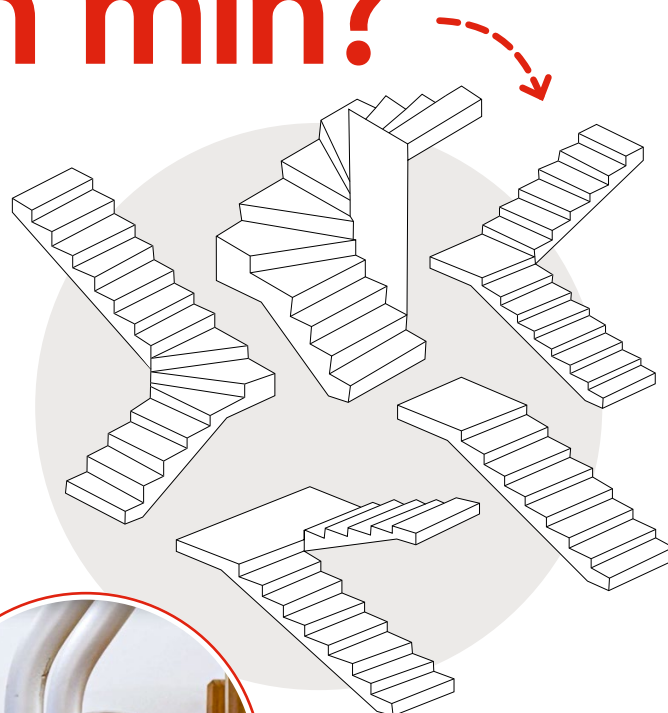

Bygger lite ut fra vegg

Håndløperen bygger under 10 cm ut fra vegg, og håndtaket bygger kun 17 cm ut når det er foldet til siden.

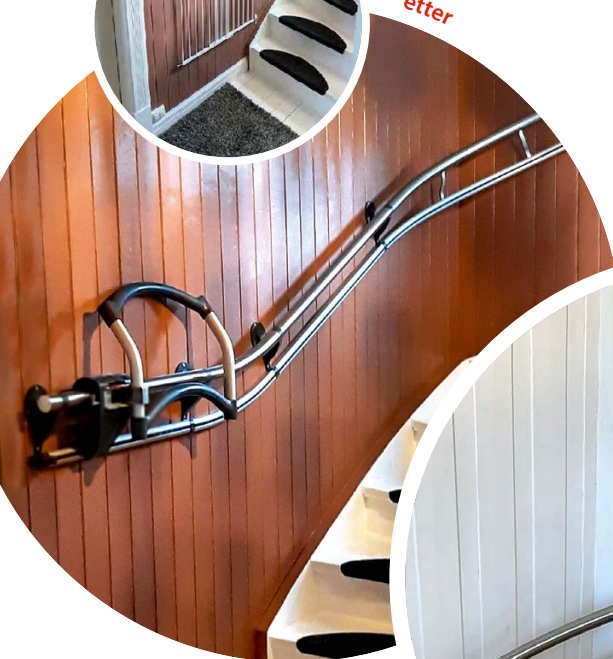

La våre installasjons-eksempler inspirere deg ...

Effektiv **trappe-** **trening**

TOPRO Step er perfekt for trappetrening uavhengig om det er på **rehabiliteringssenter, kortidsavdelinger eller i hjemmet ditt**. Håndtaket kan også brukes bak brukeren i opptreningssammenheng, slik at fallrisiko bakover elimineres.

Brukere som har begrenset gangfunksjon, eksempelvis grunnet frakturer eller hjerneslag, kan bruke TOPRO Step som en kilde til aktivitet og egenmestring i hverdagen. TOPRO Step er i dag montert i hjemmet til tusenvis av slagrammede, slik at de kan bruke produktet for å holde **vedlike eller forbedre** funksjon i kroppsdeler med begrenset funksjon.



Brukes av **store** og **små**



TOPRO Step brukes i dag av personer i alle aldre.

Den yngste brukeren er i dag 4 år, og den eldste er 98 år. Løsningen kan være godt egnet for slagrammede, personer med nevrologiske sykdommer, barn med CP og personer med fallhistorikk. Alle brukere har gjerne én ting til felles: De trenger økt støtte og trygghet for å fortsette å være uavhengig av hjelp når de går i trappen.





Leverandør:



TOPRO Industri AS avd. Trondheim
Fossegrenda 30B
7038 Trondheim

Telefon: 902 93 100

E-post: kontakt@toprostep.no

Lær mer



TOPRO Step

Din leverandør:

Alle illustrasjoner og dimensjoner kan forandres uten nærmere beskjed.
Toleranser, fargevariasjoner og tekniske løsninger inkluderes i dette.

www.toprostep.no
www.topromobility.com

TOPRO Step nært deg



Tilgjengelig i hele Norge:

**Demoinstallasjoner,
rådgivere og montører**

Designet og
produsert i Norge.



made in Norway

