



Trappeassistenten

24.11.2023
toprostep.no

Brukermanual



Les
før
bruk!

Garanti og betingelser

Hva dekkes

Denne garantien dekker defekter i materialer og konstruksjonen av dette produktet.

Hva dekkes ikke

1. Denne garantien dekker ikke skade som oppstår ved uautoriserte forsøk på modifikasjon, reparasjon eller andre endringer av produktet.
2. Garantien dekker heller ikke at produktet vil bli utdatert en gang i fremtiden.

Hvem er dekket

Denne garantien dekker kun den opprinnelige kjøperen av produktet. Garantien kan ikke overføres til ny eiere eller kjøpere av dette produktet.

Fjerning / avinstallering

Fjerning eller avinstallering av produktet med den hensikt å gjenbruke det i brukt tilstand skal, av sikkerhetsmessige årsaker kun gjøres av sertifiserte installatører. Gjeninstallering av brukte produkter som ikke er sertifisert og testet av produsenten medfører betydelig sikkerhetsrisiko og skal ikke gjøres under noen omstendigheter.

Sikkerhetsinformasjon

Ved signering av feltet under bekrefter jeg at jeg har lest gjennom og forstått sikkerhetsinformasjonen om hvordan å bruke, og hvordan å ikke bruke TOPRO Step som beskrevet i denne manualen.

Varighet av garantidekning

Denne garantien varer i to (2) år fra opprinnelig kjøpsdato av dette produktet.

Hvordan be om service

Kontakt vår distributør.

Hva gjør vår lokale montør

1. Reparerer produktet.
2. Erstatter deler i produktet etter behov.
3. Utfører service på produktet.

Ingen andre garantier er gjeldende

Denne garantien er den eneste som gjelder for dette produktet. Ingen ansatte, forhandlere, agenter eller andre personer er autorisert til å endre denne garantien eller tilby andre garantier på vegne av oss.

Serienummer (på rullemodulen)

Installasjonsdato

Adresse

Kundesignatur / bruker

Installatørsignatur

Viktig sikkerhetsinformasjon




Les alle instruksjoner før du tar TOPRO Step i bruk

- Bruk produktet kun som beskrevet i denne brukermanualen.
- Ikke utfør endringer eller justeringer av produktet. Justeringer skal kun utføres av sertifisert servicepersonell.
- Om du mistenker potensielle feil eller mangler med produktet skal du avstå fra å bruke det til det er gjennomgått av servicepersonell.
- Når håndtaket løftes i den ytre enden er det bevegelig/flyttbart i begge retninger.
Ikke løft håndtaket når du er på vei opp trappen.
- Dette produktet er en personlig trappeassistent og skal ikke brukes av personer det ikke er tilpasset til.
- Produktet skal utelukkende installeres av sertifiserte og profesjonelle installatører.
- Påse at installatøren har testet produktet før det overleveres til deg.
- Om en hendelse oppstår, rapporter dette til produsenten og den relevante lokale myndighet.
- Om en bruker opplever redusert balanse, muskelstyrke eller andre medisinske begrensninger som kan medføre risiko ved bruk av produktet burde man oppsøke helsefaglig konsultasjon før man gjenopptar bruken av TOPRO Step.
- Personer med redusert kognitiv kapasitet, særs redusert muskelstyrke i armer eller ben, ufrivillige muskelspasmer eller andre ukontrollerte bevegelser som kan medføre risiko ved bruk av produktet burde ikke bruke det.


Ved bruk av TOPRO Step, vær oppmerksom på:

- Om du ikke fullstendig strekker ut armene ved bruk av håndtaket risikerer du å komme for nær håndtaket når du går opp eller ned trappetrinnet. På vei opp kan dette føre til at du utilsiktet løfter håndtaket ut av låst posisjon. **Strekk derfor armene godt ut før du går etter.**
- I toppen av trappen må du være forsiktig slik at håndtaket ikke sperrer dører eller vinduer. Om dette er tilfellet kan du føre rullemodulen litt lenger ned trappen slik at det foldede håndtaket stopper der håndløperen ender.
- Når håndtaket er foldet enten til siden eller til bruksposisjon er det klemfare mellom rullemodulen og dekselet som sammenkobler håndtaket og rullemodulen. Vær forsiktig når du utfører denne handlingen.





TOPRO Step - opp trappen

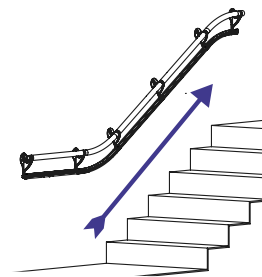




1 Hold i nedre del av håndtaket – håndtaket er lettere å skyve når du skyver oppover nær håndløperen

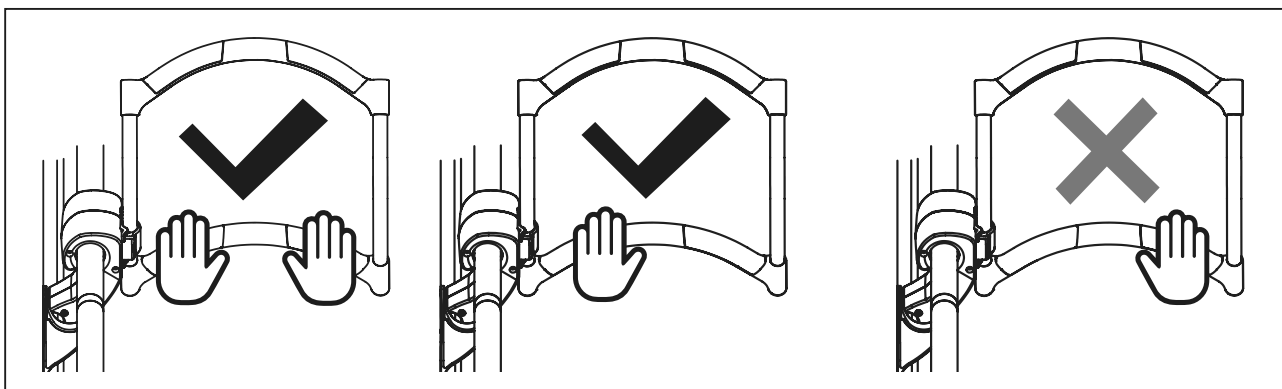


2 Skyv håndtaket langs med håndløperen så langt du kan strekke ut armene

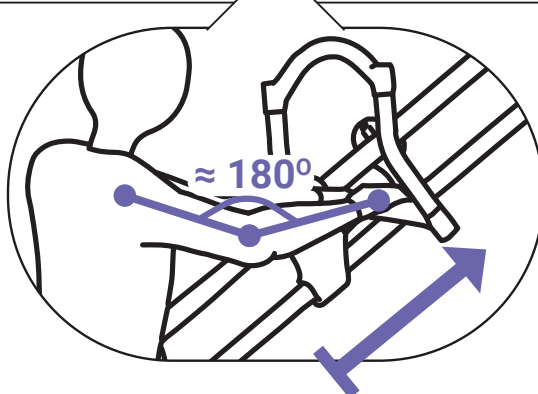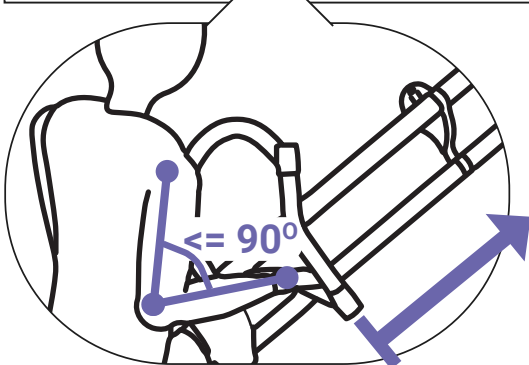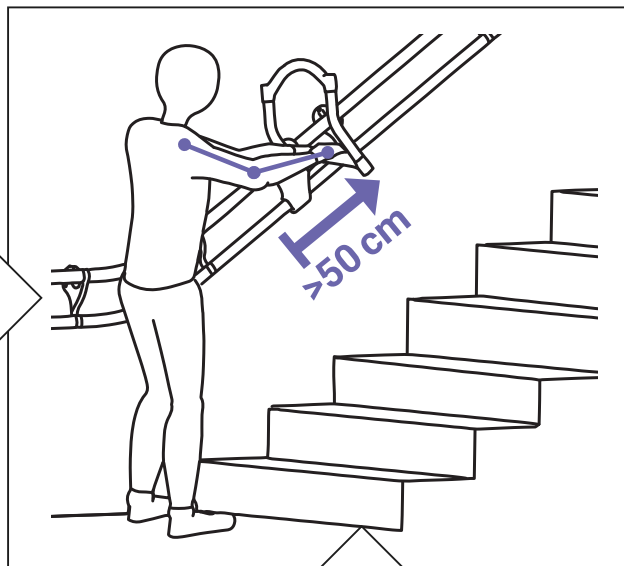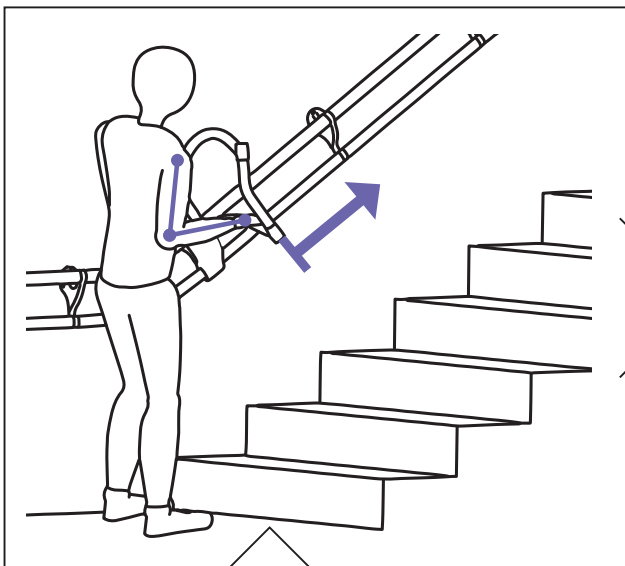


3 Legg vekt på håndtaket og ta et steg opp

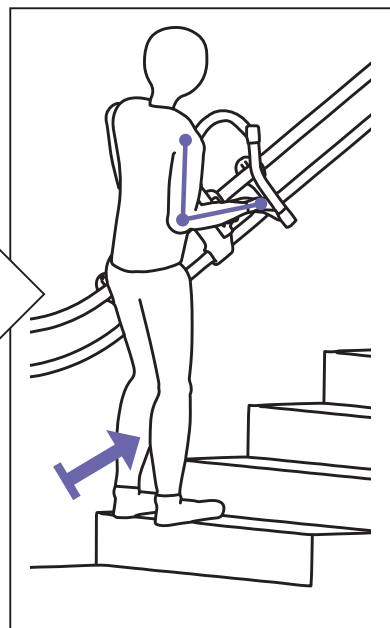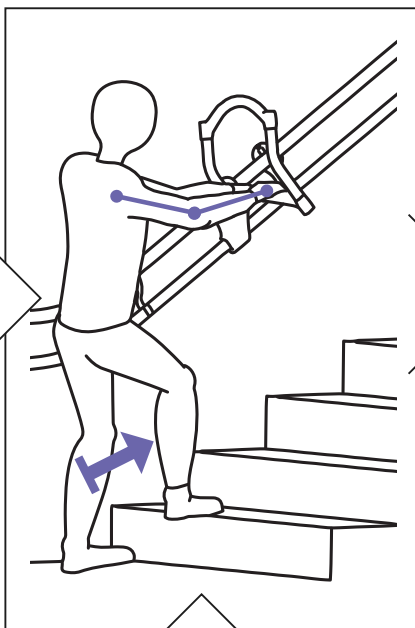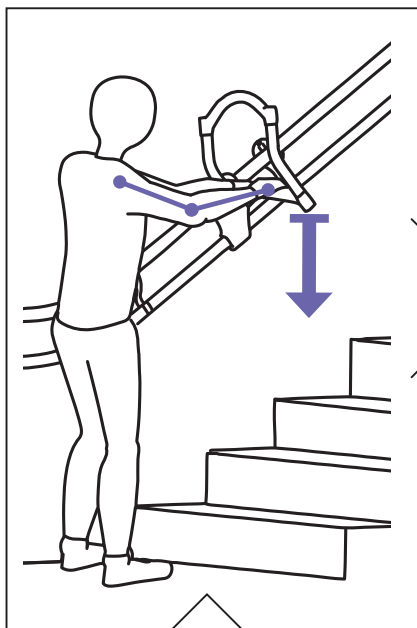


! Ikke løft håndtaket på vei oppover

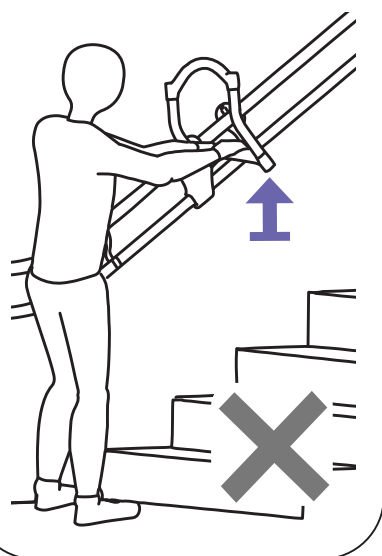

! Ikke gå oppover før armene er helt utstrakte

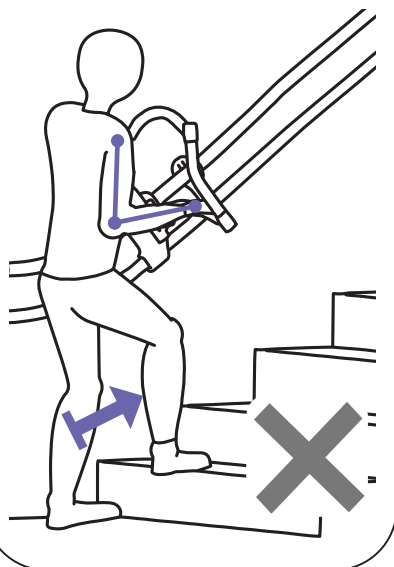


Skryv med hånden som er nærmest håndløperen i buede trapper

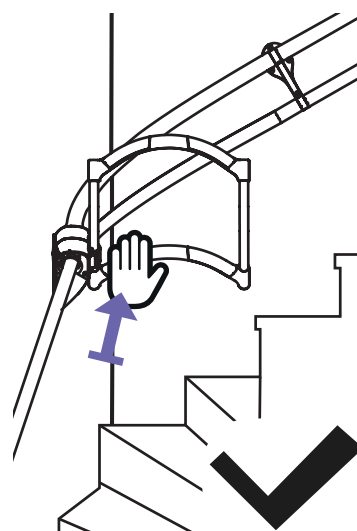


4 Gjenta steg 2 og 3 mot toppen av trappen


TOPRO Step - ned trappen

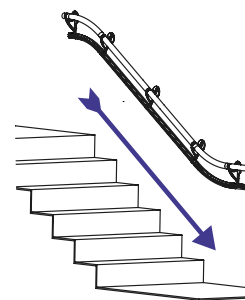




1 Hold i øvre del av håndtaket med én eller begge hender

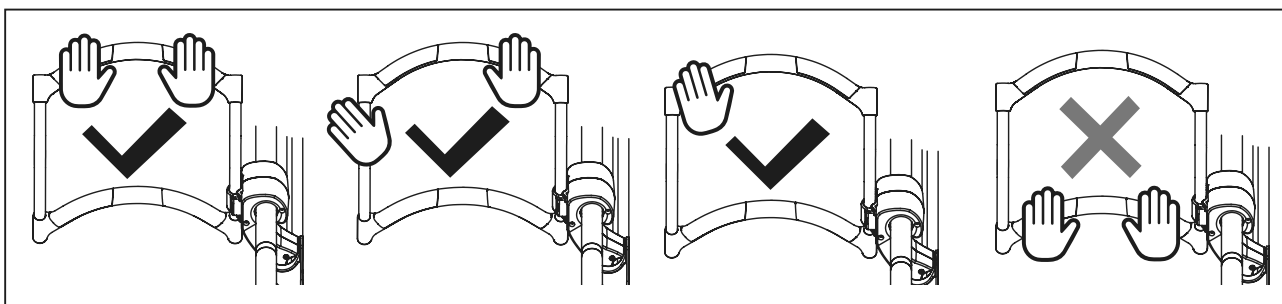


2 Løft håndtaket opp ytterst og flytt det ned trappen så langt du kan strekke armene

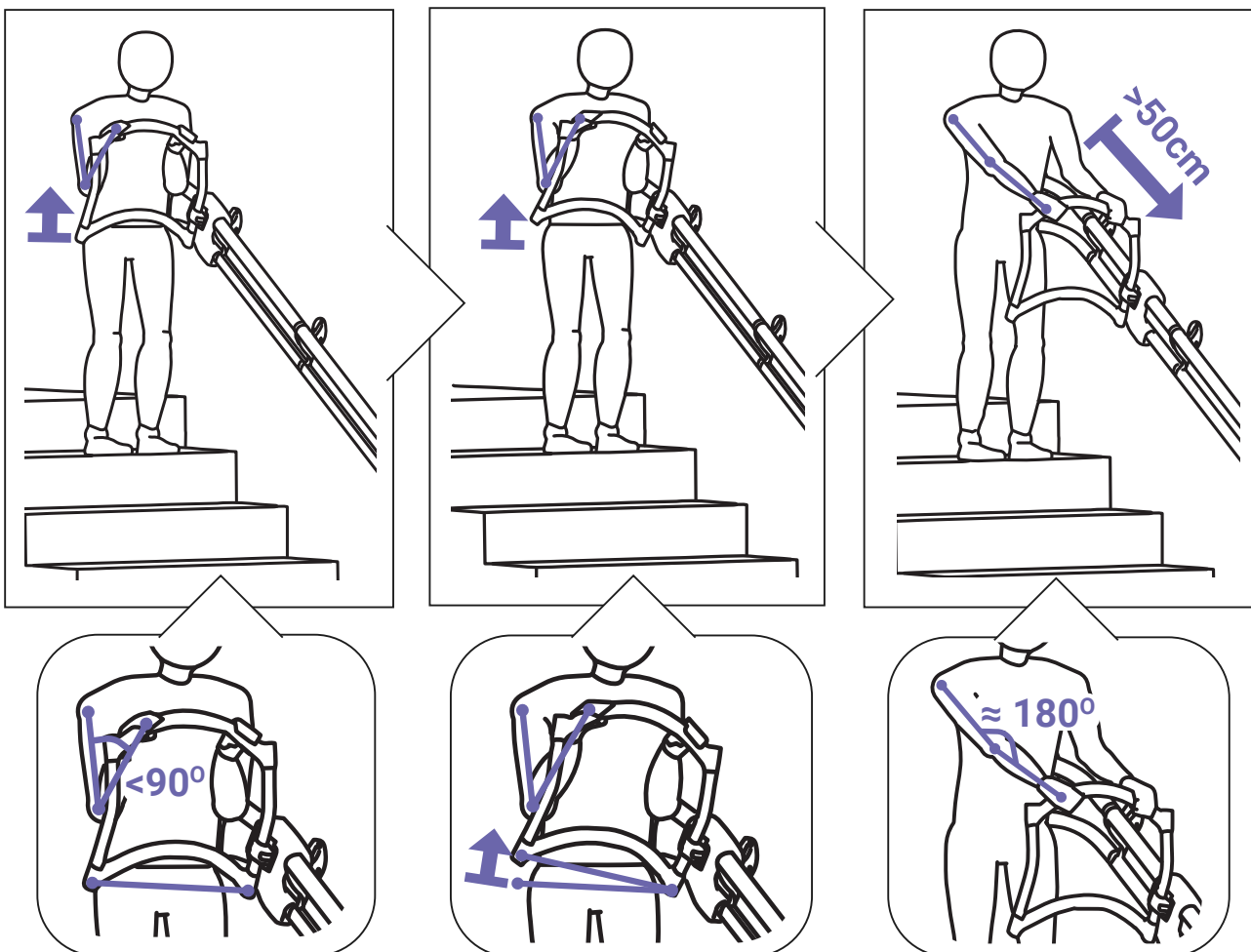


3 Legg vekt på håndtaket før du tar et skritt ned

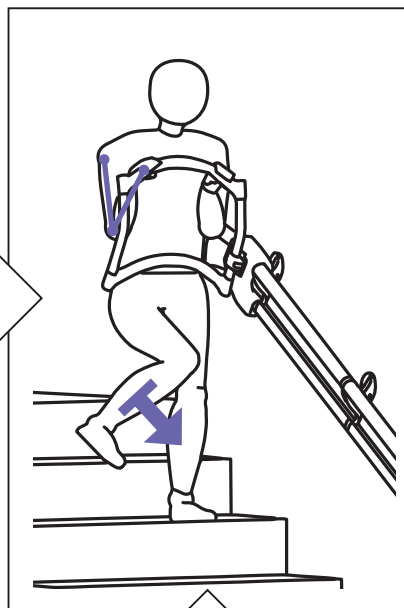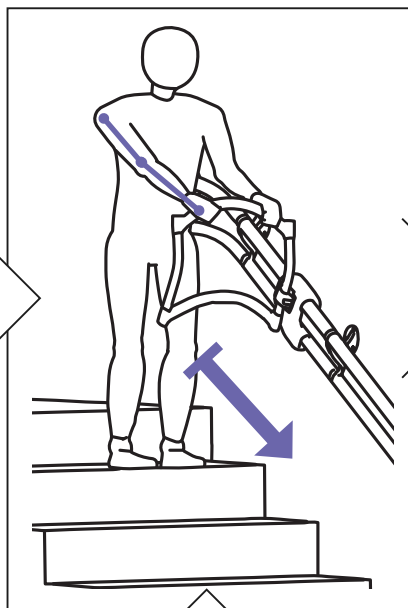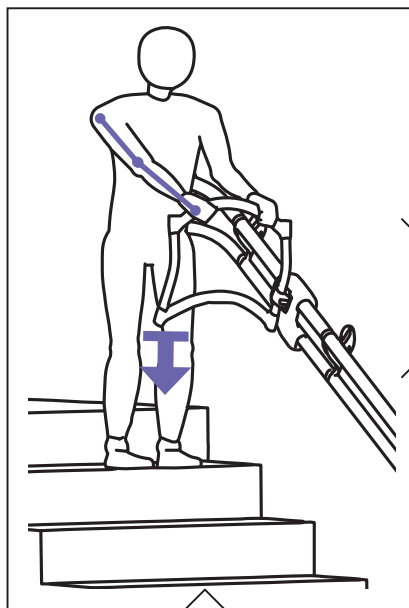


! Ikke gå nedover før armene er helt utstrakte

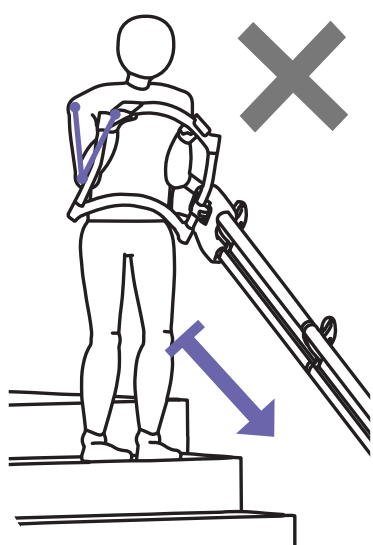

! Ikke løft håndtaket opp før du går nedover

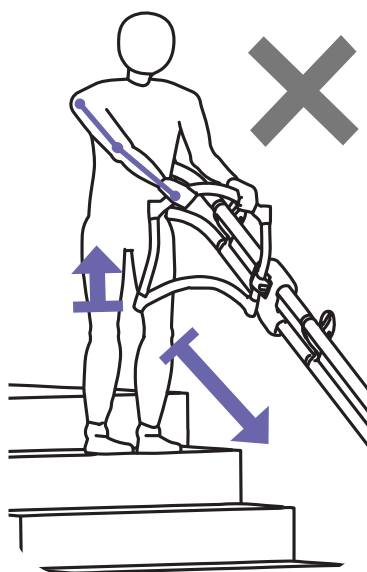

! Ikke hold håndtaket oppe mens du går

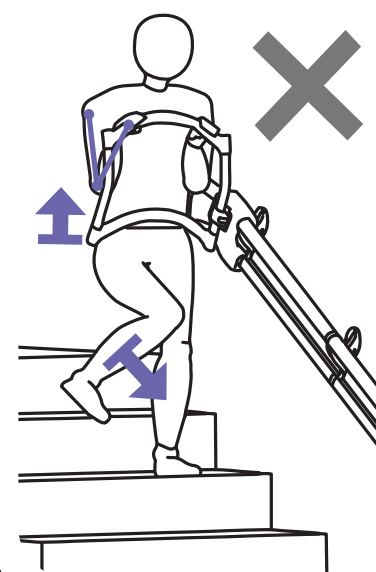

4 Gjenta steg 2 og 3 mot bunnen av trappen

Tilleggsfunksjoner i TOPRO Step

Sammenfolding av håndtaket når det ikke er i bruk:

Når du er ferdig å bruke TOPRO Step kan du folde håndtaket til siden slik at TOPRO Step tar mindre plass i trappen. Håndtaket kan kun foldes inn i retning mot toppen av trappen.

1. Trykk den oransje knappen helt ned. Ikke dytt eller legg vekt på håndtaket før knappen er trykket helt ned.



2. Hold knappen nede og dytt eller dra i den ytre enden av håndtaket og fold det i retning mot toppen av trappen.



Før du igjen tar i bruk TOPRO Step, fold håndtaket ut igjen. Det vil da låses i posisjon automatisk.

Tillegg: Veskekrok

Om du har kjøpt en veskekrok vil disse bli montert på begge sider av rullemodulen. Da kan du henge vesken eller andre små lette gjenstander på denne og få det med deg opp eller ned trappen. Ikke heng noe som veier mer enn 2 kilo da dette vil øke vekten på rullemodulen og gjøre bruken av håndtaket tyngre.



Velg ditt grep

Håndtakets høyde blir justert til din høyde og er ergonomisk utformet med to høyder. Dette gir deg en komfortabel høyde på vei opp og ned trappen. I beskrivelsen for å gå opp og ned trappen med TOPRO Step er det instruksjoner for hvordan man skal bruke håndtaket og hvordan man ikke skal bruke håndtaket. Det finnes ytterlige alternativer som beskrevet under, avhengig av støttebehovet ditt. Velg det som er best for deg!

1. Kombiner bruk av håndtak og håndløper. Ved å holde én hånd på håndløperen og én på håndtaket kan du øke støtten du får når du flytter håndtaket foran deg. Dette kan gjøres både på vei opp og ned trappen.



2. Bruk én hand på håndtaket.

TOPRO Step kan benyttes med kun én hånd, venstre og høyre både på vei opp og ned trappen. Vi anbefaler at du holder hånden på midten av håndtaket når du dytter det oppover eller løfter det nedover.



Aktivitet er kroppens medisin


Trappegåing = fjellklatring

Å gå i trappen på egenhånd har dokumentert effekt på muskulatur og balanse, så hvorfor ikke gå så mye som mulig?

Å gå i trappen kan være fysisk utfordrende. Hver gang du går i trappen, så klatrer du noen meter, akkurat som en fjellklatrer. Hvert steg du tar fører deg nærmere toppen av trappen og nærmere toppen av et fjell. Hvorfor ikke prøve å nå toppen av fjellet i din egen trapp?

TOPRO Step er utviklet og produsert i Norge, så hvorfor ikke klatre til et av våre mest spektakulære steder: «Preikestolen». Dette fjellplatået måler 25x25 meter og befinner seg i Lysefjorden på 608 meters høyde. Klatrepartiet utgjør 339 høydemeter.

For å holde oversikt over hvor langt du har klatret i trappen din og for å holde deg motivert for å fortsette klatringen har vi laget et klatrespill til deg. Hver gang du går opp og ned trappen kan du huke av én av boksene.

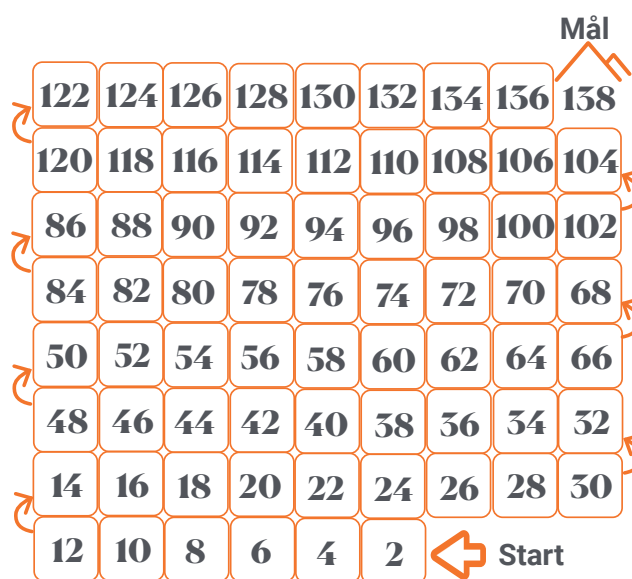

Lykke til med klatringen!

Teknisk informasjon

TOPRO Step er CE-merket i henhold til EU 2017/745 Regulation on Medical Devices. TOPRO Step er et klasse 1-produkt og er utviklet og testet i henhold til:

- NS-EN ISO 21856:2022 Hjelpemidler - Generelle krav og prøvingsmetoder
- EN ISO 14971:2012 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring

Variasjoner

Art. Nr. Beskrivelse

10201	Rullemodul og håndtak Høyre
10203	Rullemodul og håndtak Venstre
10205	Rullemodul og håndtak Høyre (45g)
10206	Rullemodul og håndtak Venstre (45g)
10207	Rullemodul og håndtak Høyre (utendørs)
10208	Rullemodul og håndtak Venstre (utendørs)



Maksimal brukervekt 120 kg



Brukerhøyde 120-200 cm

resirkulering

Håndtak: Aluminium og ABS-plast

Toppskinne: Rustfritt stål

Sikkerhetsskinne: Aluminium


Veggbraketter: Aluminium

Andre deler: Stål, POM, ABS, gummi, aluminium


Alle deler må resirkuleres i henhold til lokale bestemmelser; vennligst kontakt din lokale resirkuleringsetat.

Spesifikasjon:


1. Håndtak, sett forfra [mm]

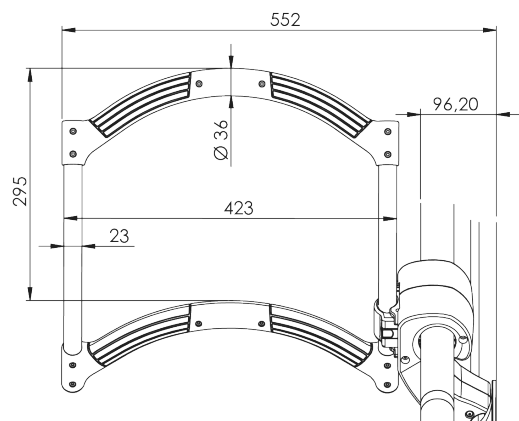

2. Håndtak foldet, sett fra siden [mm]

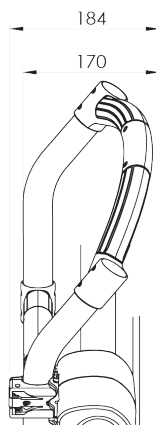

3. Håndtak, sett fra siden [mm]

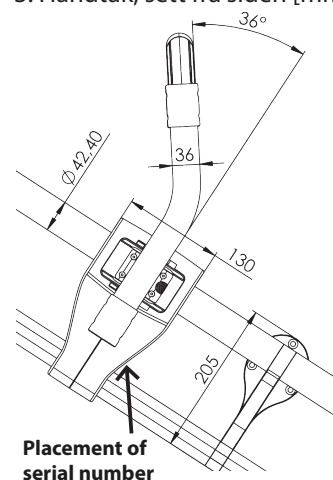

Bredden av håndtak i bruk	55,2 cm (57,2 cm med bakplate)
Bredden av håndtak foldet	18,4 cm (20,4 cm med bakplate)
Diameter håndløper	42,4 mm
Masse, håndtak og rullemodul	3,5 kg
Materialer	Aluminium, rustfritt stål, stål, ABS, POM, gummi
Brukstemperatur	0 - 30 Grader Celsius
Transporttemperatur	0 - 40 Grader Celsius
Bruksmiljøer	Innendørs i private hjem eller institusjoner. Kan installeres utendørs om det ikke er risiko for at snø eller is kommer i kontakt med produktet.
Garanti	2 år om installasjon og service er utført av sertifisert personell og hvor produktet er brukt i henhold til beskrivelsen i denne brukermanualen.
Renhold	Bruk såpevann og en myk klut. Ikke bruk løsningsmidler, høytrykkspyler eller andre rengjøringsmetoder som kan skade produktet.

Hva er din erfaring med TOPRO Step?

Vi vil gjerne høre om dine erfaringer og
historier med TOPRO Step.
Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt

+47 61 13 46 00
kundeservice@topromobility.com
www.toprostep.no

Topro Industri As
Rambekkveien 5
2816 Gjøvik
Norge

