

sensio

IRIS Alerter

Bruksanvisning



Produkt: 605859

Dokument: 9021-1

Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Mottaker som varsler med lys, lyd, tekst og symbol om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. Systemet skiller mellom alvorlige hendelser, definert som alarmer, og daglige hendelser som dørklokke og telefon. IRIS varsler også ved lavt batterinivå hos tilknyttede sendere eller en tilknyttet enhet mister driftsspenning.



1. HJEM-knapp
2. Mikrofon for taleinnspilling
3. Høytaler
4. Volum opp/ned

Varsling

Hendelser som oppstår i boligen varsles automatisk på IRIS med blinkende lys, bilde, tekst og lyd – samt tale dersom dette er aktivert. IRIS viser varslinger i to minutter etter at varslingen er ferdig. For å se klokken i denne perioden – trykk på **HJEM**-knappen.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen eller **HJEM**-knappen, stopper varselet. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Justere volum

Benytt volumbryter for å justere lydstyrke på daglige varslinger, som dørklokke og telefon. Alarmer varsles alltid med full styrke.

Klokke

Dersom klokken er aktivert, vises klokke og dato når skjermen berøres, eller ved å trykke på **HJEM**-knappen. Ved aktivert talende klokke, vil også tidspunkt og dag leses opp automatisk.

Vekkerklokke



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
Hold **HJEM**-knappen inne til Kontrollpanel åpnes, og velg **Vekkerklokke**.

Sett ønsket vekkertidspunkt, hvilke dager den skal gjelde for og om slumring skal være aktiv.

Første alarmtidspunktet oppgis ved siden av vekkerklokkesymbolet nederst til høyre. Trykk på dette symbolet for å komme tilbake til Vekkerklokke.

Vekkerklokken varsler med lyd og lys. Den varsler også trådløst til:

- BRITT Bed Shaker,
- BRITT Bed Shaker Small,
- NORA Alert Watch og
- JUNIOR Portable Alerter.



Tidsur



Hold **HJEM**-knappen inne til Kontrollpanel åpnes, og velg **Tidsur**. Sett ønsket nedtellingstid og varslingsvolum. Deretter trykk **Start**.

Når tidsur brukes, vises gjenstående tid på skjermen. Alle mottakere i FlexiBlink-systemet varsler når tiden er utløpt.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer