

sensio

IRIS Alerter

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 605859

Dokument: 9010-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Daglig bruk	6
Tilpasninger	8
Feilsøking	11
Spesifikasjoner	11
Vedlikehold	12
Resirkulering	12
Symboler	13
Godkjenninger	14
Support	14

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys


Introduksjon

I esken

- IRIS alerter
- Strømforsyning
- Veggbrakett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Mottaker som varsler med lys, lyd, tekst og symbol om hendelser som brann eller dørklokke, fra FlexiBlink-sensorer. Systemet skiller mellom alvorlige hendelser, definert som alarmer, og daglige hendelser som dørklokke og telefon. IRIS varsler også ved lavt batterinivå hos tilknyttede sendere eller en tilknyttet enhet mister driftsspenning.

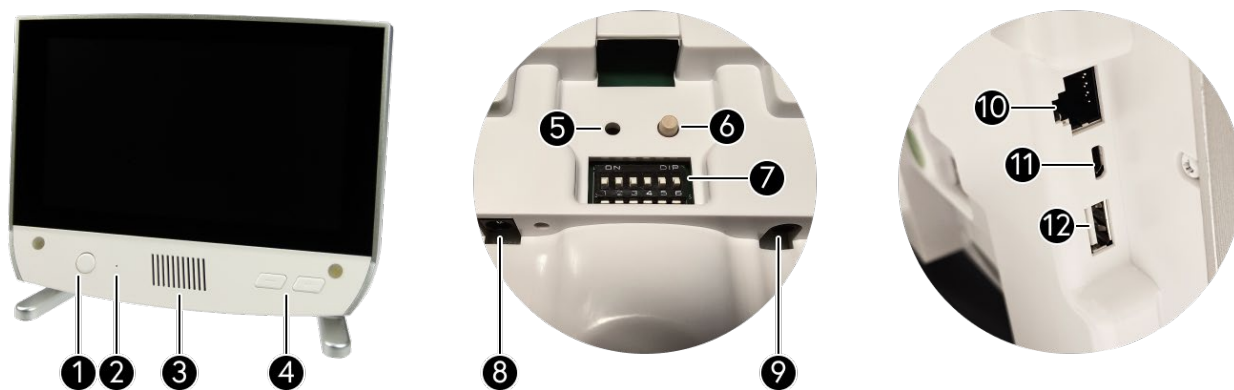

1. HJEM-knapp
2. Mikrofon for taleinnspilling
3. Høyttaler
4. Volum opp/ned
5. Lysindikator
6. Pairing-knapp
7. Funksjonsbrytere
8. Strømtilkobling
9. Lydutgang
10. Internett-tilkobling
11. *Ikke i bruk*
12. USB

Kom i gang

Plassering

IRIS kan stå på et bord i den medfølgende sokkelen eller skrus opp på vegg med den medfølgende braketten.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På IRIS, når den ikke er hovedenhet: Velg **Bli med** på skjermen.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Testing

Etter at FlexiBlink-utstyret er montert, utløs en sender i FlexiBlink-systemet og observer at IRIS varsler

Daglig bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i boligen varsles automatisk på IRIS med blinkende lys, bilde, tekst og lyd – samt tale dersom dette er aktivert.

IRIS viser varslinger i to minutter etter at varslingen er ferdig. For å se klokken i denne perioden – trykk på HJEM-knappen ①.

Stoppe varsel

Ved å trykke på skjermen eller HJEM-knappen, stopper varselet. Dersom det stoppes på denne måten, vil et nytt varsel av samme type innen ett minutt, varsles med kun symbol og lys.

Justere volum

Benytt volumbryter ④ for å justere lydstyrke på daglige varslinger, som dørklokke og telefon. Alarmer varsles alltid med full styrke.

Klokke

Dersom klokken er aktivert, vises klokke og dato når skjermen berøres, eller ved å trykke på HJEM-knappen. Ved aktivert talende klokke, vil også tidspunkt og dag leses opp automatisk. Se [Innstillinger](#)

Vekkerklokke

IRIS har en innebygget vekkerklokke. For å komme til denne, trykk på HJEM-knappen, og velg Vekkerklokke.

Dersom vekkerklokke allerede er aktivert, kan du trykke på vekkerklokkesymbolet nede i høyre hjørne. Her kan vekkerklokka slås av og på, samt velge tidspunkt.

Det kan velges slumre-funksjon og hvilke dager alarmen skal gjelde. Trykk på HJEM-knapp når innstillingen er ferdig. Første alarmtidspunktet oppgis ved siden av vekkerklokkesymbolet.

Vekkerklokken varsler med lyd og lys på skjermen. Den varsler også trådløst til BRITT bed shaker, BRITT bed shaker small, NORA alert watch og JUNIOR portable alerter.

Tidsur

Hold HJEM-knappen inne til Kontrollpanel åpnes, og velg Tidsur. Sett ønsket nedtellingstid og varslingsvolum. Deretter trykk Start.

Når tidsur brukes, vises gjenstående tid på skjermen. Alle mottakere i FlexiBlink-systemet varsler når tiden er utløpt.

Tilpasninger

Funksjonsbrytere



Under dekselet bak på IRIS finnes funksjonsbrytere med følgende funksjoner:

1. Daglige signaler/Kun alarmer - Med bryter 1 ON (opp) varsler IRIS kun alarmer – som for eksempel komfyrvakt og brannalarm
2. Ikke i bruk
3. Tale – Med bryter 3 ON er talevarsling aktivert
4. Velg sengevibrator – Dersom det benyttes 2 sengevibratorer i boligen og en eller to IRIS for vekking, still sengevibratorene inn på hver sin kanal, slik at vekkingen fra en IRIS ikke forstyrrer den andre.
 - a. Første IRIS og sengevibrator settes på kanal A, OFF. Dette er standard for IRIS, og sengevibratoren settes til kun kanal A.
 - b. Den andre sengevibratoren settes i kanal B. Dersom denne sengevibratoren skal benytte en egen IRIS som vekkerklokke, må funksjonsbryter 4 settes ON på IRIS.
5. Skjermlås – Med bryter 5 ON, låses volumknapper og tilgang til menyer.
6. Ikke i bruk

Innstillinger

IRIS har innstillingsmeny på skjermen. Disse benyttes for å stille vekkerklokke, justere klokke, starte nedtelling og andre tilpasninger.

Kontrollpanel

For å komme inn i Kontrollpanel, hold HJEM-knappen inne til Kontrollpanel åpnes. Bruk piltastene for å bla mellom sidene.

Side 1:

- Vekkerklokke
 - Alarm kan stilles på/av
 - Alarmtidspunkt
 - Velge ukedager
 - Slumring
- Tidsur
 - Tid
 - Velg mellom lav eller høy lyd på varslingen
- Justere klokke
- Informasjon
 - Programvareversjon

Side 2:

- Skjerminnstillinger
 - Lysstyrke på skjermen
 - Skjermsparer
- Klokkeinnstillinger
 - Klokkevisning
 - Analog eller digital klokke
 - Talende klokke
 - Ukedager og periode av døgnet
- Vekkerklokkeinnstillinger
 - Mulighet for flere alarmtidspunkt
 - Forenklet alarmklokke
 - Slumretid
 - Lydløs alarmklokke (Kun vibrasjon i sengevibrator)
- Språk
- Driftsstatus
 - Oversikt over alle enheter i FlexiBlink-systemet
 - Varsel dersom IRIS mister kontakten med enheter i FlexiBlink-systemet. Dette kan være at de har mistet driftsspenning eller batteriet er utladet
- Feilmeldinger
- Varslingsaktivitet
 - Logg over siste mottatte varslinger

Avansert kontrollpanel

Avansert kontrollpanel benyttes ved installasjon og ved behov for tilpasninger til brukeren. For å komme inn i Avansert kontrollpanel:

1. Trykk kort på HJEM-knappen for å vekke skjermen
2. Gjør samtidig:
 - a. Trykk og hold HJEM-knappen inne
 - b. Trykk én gang på VOLUM NED og én gang på VOLUM OPP i en rask og jevn sekvens
 - c. Fortsett å holde HJEM-knappen inne til Avansert kontrollpanel vises

Avansert kontrollpanel inneholder:

Side 1:

- Tilpasse varsel
 - Trykk på blyanten ved aktuelt varsel for å endre tekst, bilde eller lese inn egen talemelding
- Sammenkobling
- Lys og lyd
- Informasjon

Side 2:

- Konfigurer RUT
 - Benyttes for konfigurering av RUT relay output
- Konfigurer ARM
 - Benyttes for konfigurering av ARM portable alerter og ELLA portable call button
- Vedlikehold
 - Softwareoppgradering
 - Sikkerhetskopiering
 - Fabrikkinnstilling
- Status funksjonsbryter
 - Vise hvordan funksjonsbryterne ⑦ er satt
- Avanserte innstillinger
 - For å komme inn i denne menyen, tast **3347**
 - Mulighet for å låse volumknappene
 - Vise alarmtidspunkt

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

Avstanden mellom sender og mottaker er for lang.

Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Trykk på testknappen på senderen og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Enhetene er ikke riktig sammenkoblet.

1. Slett sammenkoblingen: Trykk 5 ganger på Pairing-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys eller tekst på skjerm: Sammenkobling slettet
2. Sammenkoble på nytt. Se [Sammenkobling](#)

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Strømforsyning:** 15VDC
- **Batteri:** innebygd litium 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 180 mm
- **Bredde:** 220 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 830 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

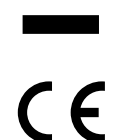

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47