

sensio

NOA No-Touch Button

Bruksanvisning

Produkt: 606314

Dokument: 9162-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

NOA No-Touch Button er en berøringsfri sensor med sender som benyttes for å varsle til FlexiBlink-mottakere at brukeren trenger assistanse.

Den har innebygget en bevegelsessensor, som aktiveres ved at en hånd beveges foran øyet til sensoren.

NOA benytter et spesialbatteri med lang levetid.

Funksjonsvelger



- 0: Assistanse ønskes
- 1: Assistanse ønskes - soverom
- 2: Assistanse ønskes - bad
- 3: Assistanse ønskes - stue
- 4: Hjelp meg nå!
- 5: Hjelp meg nå! - soverom
- 6: Hjelp meg nå! - bad
- 7: Hjelp meg nå! - stue
- 8: Dørklokke
- 9: Barnet har stått opp

- A: Kom snart!
- B: Hjelp meg nå!
- C: Sykesignal
- D: Sykesignal 2

Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel NOA skal sende.

Testing

Test NOA ved å holde hånden rett foran sensoren og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne.

Statusindikasjon

Når NOA er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:

-  **Grønt lys:** Varsel sendt
-  **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
-  **Blinkende rødt lys etter trykk:**
Ikke koblet sammen med et
FlexiBlink-system

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer