

sensio

NOA No-Touch Button

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606314

Dokument: 9161-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	4
Kom i gang	5
Bruk	7
Feilsøking	8
Spesifikasjoner	9
Vedlikehold	10
Resirkulering	10
Symboler	11
Godkjenninger	12
Support	12

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.


Introduksjon

I esken

- NOA No-Touch Button
- Veggbrakett
- Pose med to skruer
- Borrelås
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

NOA No-Touch Button er en berøringsfri sensor med sender som benyttes for å varsle til FlexiBlink-mottakere at brukeren trenger assistanse. Den har innebygget en bevegelsessensor, som aktiveres ved at en hånd beveges foran øyet til sensoren. NOA benytter et spesialbatteri med lang levetid.

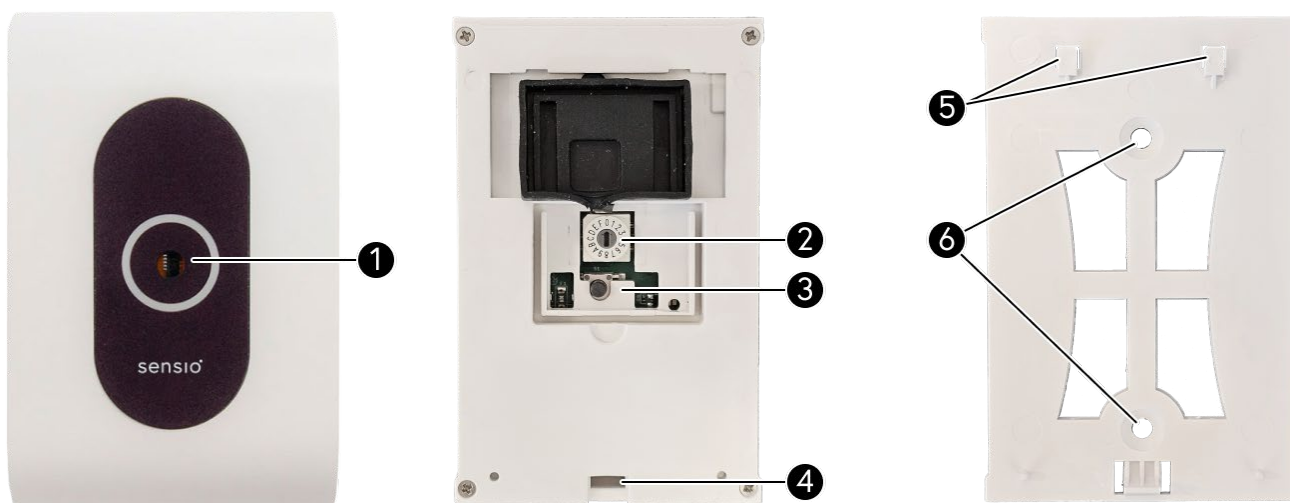

1. Berøringsfri sensor med lysindikator
2. Funksjonsvelger
3. Pairing-knapp
4. Festepunkter for NOA
5. Skruehull til feste av veggbrakett

Kom i gang

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen på IRIS, ALMA eller BRITT
2. På NOA: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Funksjonsvelger

Vri på funksjonsvelgeren for å velge hvilket varsel NOA skal sende:

- **0:** Assistanse ønskes
- **1:** Assistanse ønskes - soverom
- **2:** Assistanse ønskes - bad
- **3:** Assistanse ønskes - stue
- **4:** Hjelp meg nå!
- **5:** Hjelp meg nå! - soverom
- **6:** Hjelp meg nå! - bad
- **7:** Hjelp meg nå! - stue
- **8:** Dørklokke
- **9:** Barnet har stått opp
- **A:** Kom snart!
- **B:** Hjelp meg nå!
- **C:** Sykesignal
- **D:** Sykesignal 2

Montering

NOA monteres normalt på veggen eller der brukeren trenger den. Den kan monteres med eller uten veggbraketten.

Med veggbrakett:

1. Benytt den vedlagte veggbraketten og skru denne ⑤ fast på veggen.
2. Flexiknapp kneppes deretter på plass ④ i braketten

Uten veggbrakett:

1. NOA monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen
2. Vask stedet den skal monteres med den medfølgende spritservietten
3. Vent i 30 sekunder
4. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder

Demontering fra veggbrakett

1. Trykk inn et flatt skrujern i åpningen på midten under på NOA
2. Skyv samtidig NOA oppover for å løsne fra veggbrakett

Testing

Test NOA ved å holde hånden foran sensoren ① og se at det kommer riktig varsel i FlexiBlink-mottakerne.

Bruk

Statusindikasjon

Når NOA er i bruk, vises statusen i lysindikatoren ①:

- **Slukket:** Standby
- **Grønt lys:** Varsel sendt
- **Blinkende rødt/grønt lys:** Bytt batteri
- **Blinkende rødt etter trykk:** Ikke koblet sammen med et FlexiBlink-system

Strømsparing

For å spare batteriet bør NOA slås av om den ikke skal være i bruk i en periode. Dette gjøres ved å [nullstille sammenkoblingen](#). Da skrus sensoren av og enheten går i strømsparemodus.

Feilsøking

Det varsler ikke i mottakerne

- Batteriet er tomt. Bytt batteri. NOA benytter et spesialbatteri som kan kjøpes hos produsenten. For å bytte batteriet, må de fire små skruene på baksiden av NOA skrues ut og baklokket fjernes. Bytt batteri og skru baklokket på plass igjen.
- Enhetene er ikke riktig sammenkoblet. [Slett sammenkoblingen](#) og [sammenkoble på nytt](#)
- Avstanden mellom sender og mottaker er for lang. Sett da enhetene nærmere hverandre, eller sett inn repeater. Test ved å holde hånden foran bevegelsessensoren på NOA og sjekk at det varsler i FlexiBlink-mottaker

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen: Trykk **5 ganger** på **Pairing**-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys.
2. [Sammenkoble på nytt](#)

Rødt lys i enheten ved sammenkobling

Sammenkobling mislyktes. [Slett sammenkoblingen](#) og sammenkoble på nytt.

Feil varsling i mottakeren

Vri på funksjonsvelgeren til rett posisjon.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Batteri:** Innebygd litium, 3V
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP54
- **Radiofrekvens:** 2400,0 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 100 mm
- **Bredde:** 64 mm
- **Dybde:** 20 mm
- **Vekt:** 140 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio Vestfold sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning



Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47