

Bruksanvisning

Whitecane IO

Modell 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167





Stokken består av 3 deler: et håndtak og to rørsegmenter.


Når den er foldet, holdes den enkelt og godt sammen ved hjelp av to magneter.



Start med å brette ut den nederste delen (den med tuppen på) og la den henge løs ned mot gulvet. Denne vil nå henge løs i strikken som den er festet i.

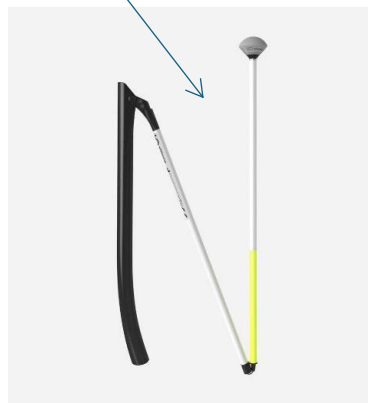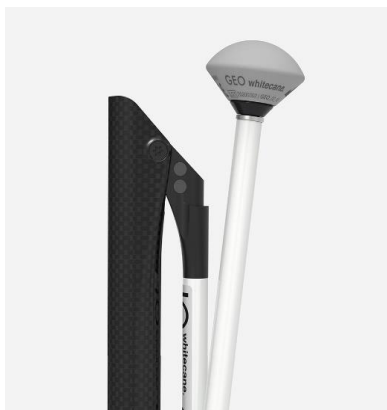



Plasser hånden på det midterste rørsegmentet og fold ut håndtaket mens stokken peker nedover mot gulvet.

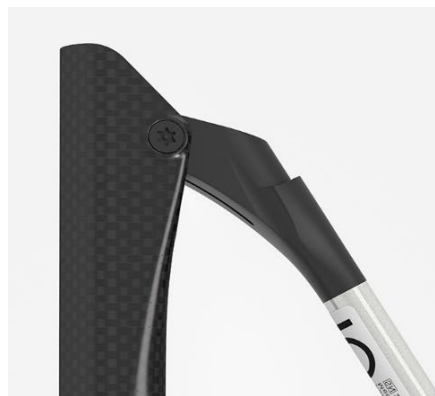


Strikken vil nå stramme seg og det nederste leddet vil feste seg i det midterste segmentet, og stokken er klar til bruk.



Når stokken skal foldes sammen, må man starte med å folde inn håndtaket.

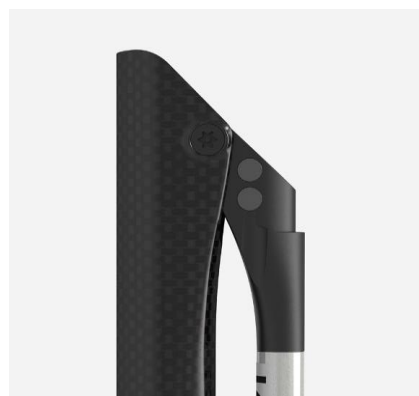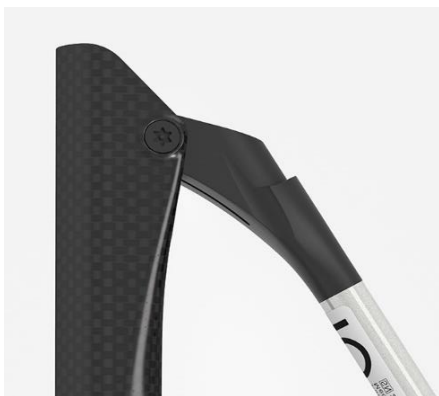

Da vil strikken løsne mellom de 2 nederste rørementene og den nederste delen kan brettes opp

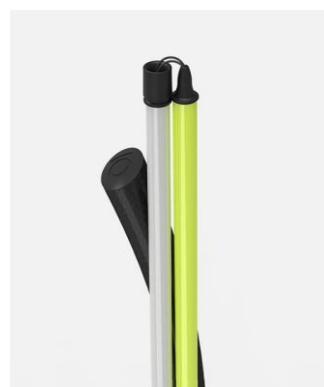

Stokken er nå samlet igjen.

Bytte av GEO tupp.

Tuppene består av to komponenter, holderen og selve tuppen.



Tuppen byttes enkelt med plug-in-prinsippet. Hold godt i stokken og dra tuppen ut.

Den kan føles noe hard. Sett så inn den nye tuppen og trykk den godt inn til du kjenner et knepp.



Tilleggsutstyr Whitecane IO stokk.

Whitecane LOOP Transportlås



LOOP er en hendig løkke laget av skli sikker silikon.

Den åpnes og lukkes med en enkel mekanisme. Enten som fingerløkke, henger eller transportsikkerhet: LOOP er et praktisk tilbehør i hverdagen. Med LOOP kan du sikre din foldede IO for transport.



Whitecane CAP Transporthette tupp



CAP festes til GEO up eller GEO flat rullespissene med bare ett klikk. En innovativ trykkobling holder hetten på plass så lenge du trenger den.

CAP fanger opp forurensninger som sitter fast på den rullende spissen. Dette betyr at du kan oppbevare din White Stock IO pent i vesken, og den vil alltid gjøre et ryddig inntrykk når den plasseres på bord og benker.



Med CAP kan du enkelt bytte ut den brukte GEO-rullespissen uten å måtte berøre den.