

Grid Pad Go 10

Standard- og slimline-utgaver

Brukerhåndbok og sikkerhet

Smartbox

Communication is life

Denne enheten produseres av Smartbox Assistive Technology Ltd.

Storbritannia

Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

USA

Smartbox Assistive Technology Inc
167 Hillcrest Shopping Center
Lower Burrell, PA, 15068

Europa

REHAVISTA GmbH
Konsul-Smidt-Str. 8c
28217 Bremen
Tyskland

Document: Grid Pad Go 10 - Standard - UK ENG - A
Product: ST10E, SG10E (Standard)
SS10E (Slimline)
Language: Norwegian
Date: August 2024

Copyright © 2024 Smartbox Assistive Technology



Standard- og slimline-utgaver

Denne veiledningen inneholder grunnleggende informasjon om å komme i gang med Grid Pad Go 10.

Du kan finne en komplett guide til alle funksjonene til Grid Pad Go 10 på Smartbox Hub:



<https://hub.thinksmartbox.com/topic/grid-pad/>


Grid Pad Go 10: Standard


Fronthøytaler



Fronthøytaler

Frontkamera

Håndtak

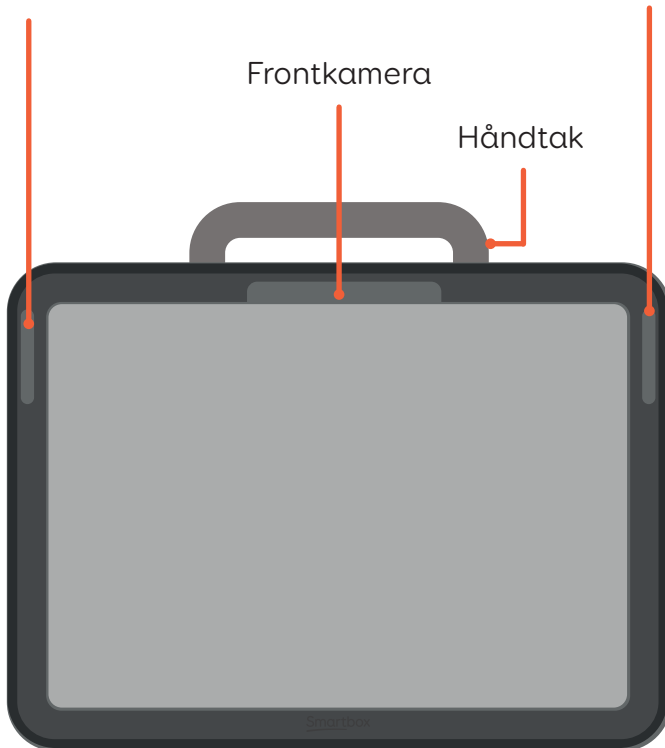

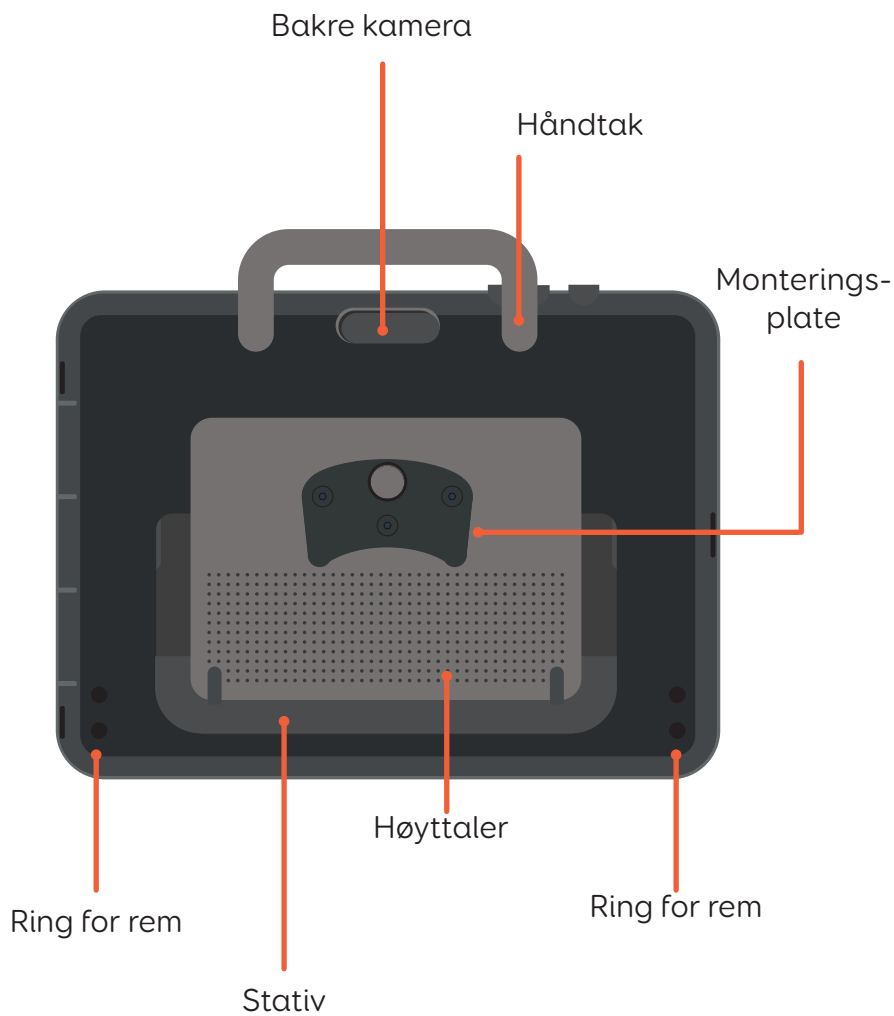

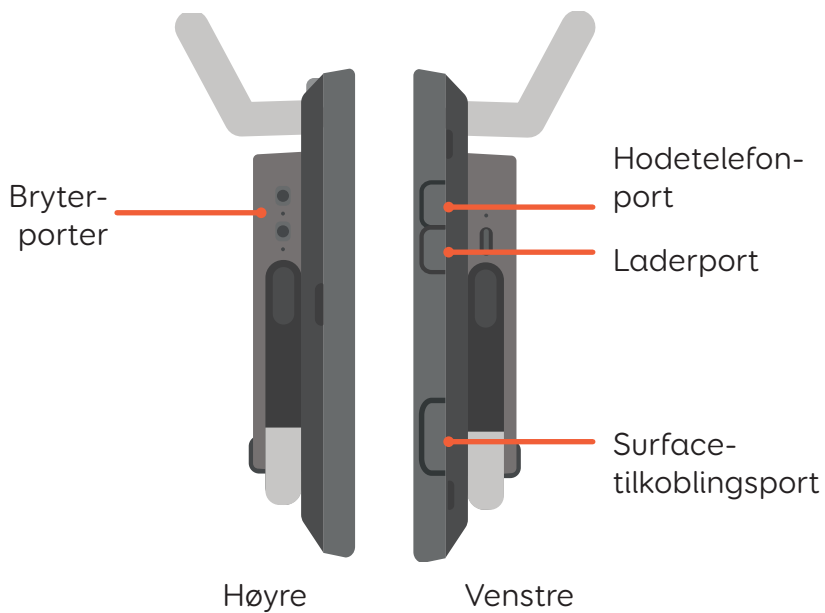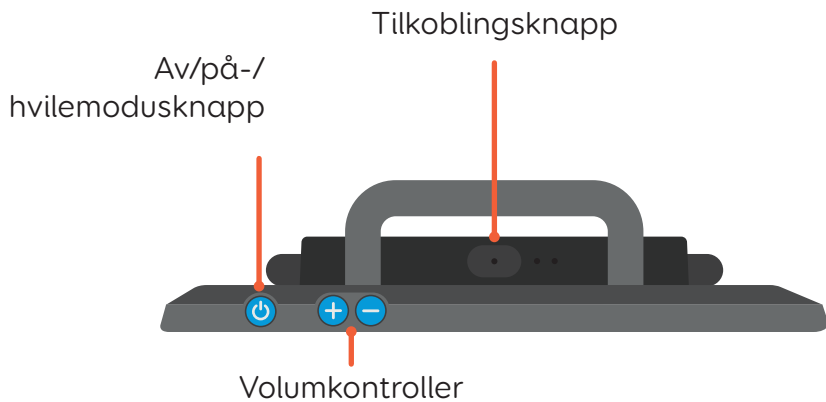


Grid Pad Go 10: Slimline

Fronthøytaler

Frontkamera


Av/på-/
hvilemodusknapp

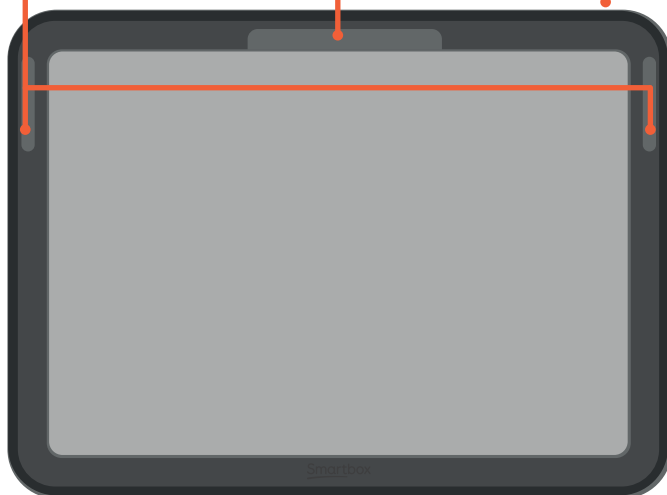

Av/på-/
hvilemodusknapp

Volumkontroller



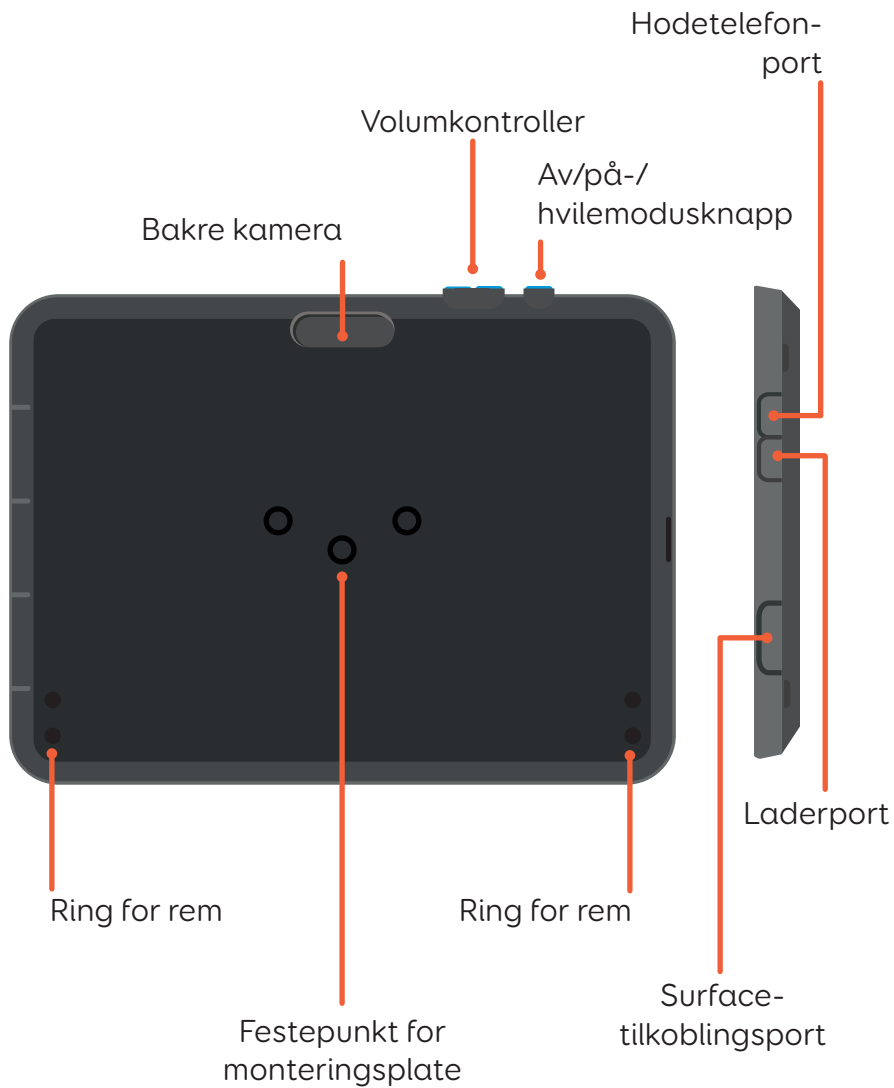

Hva inneholder esken

Standard

Microsoft Surface-nettbrett

Smartbox-etui

Rem

Bag

Skjermbeskytter

Ladekabel

Nettadapter

Grid

Slik finner du ut mer om Grid Pad-valget ditt

Innstillinger - Generelt - Om

Slimline

Microsoft Surface-nettbrett

Smartbox-etui

Rem

Bag

Skjermbeskytter

Ladekabel

Nettadapter

Grid

Slik finner du ut mer om Grid Pad-valget ditt

Innstillinger - Generelt - Om



**Les mer om spesifikasjonene for
Grid Pad Go**



**Finn ut mer om materialene
som brukes i Grid Pad og
emballasjen:**



**Gå til Smartbox Hub for å få en
versjon med stor skrift av Grid
Pad Plus-håndboken**




[illegible]

Av/på Standard

Trinn 1

Slå på Grid Pad G 10 med av/på-knappen på toppen av enheten.

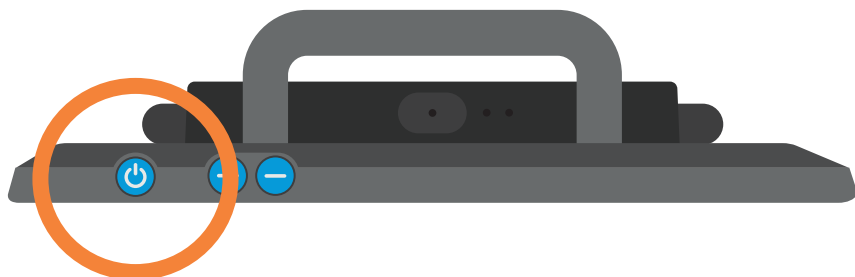

Trinn 2

Slå på høyttaleren ved å trykke på og holde inne tilkoblingsknappen i 3 sekunder.



Trinn 3

Grid Pad Go 10 kan leveres klar til bruk eller for egenkonfigurasjon

En kort veiledning følger med for å hjelpe deg med konfigurasjonen.

Husk å notere deg kontoopplysningene dine.

Av/på: Slimline

Enhetens av/på-knapp finner du øverst til venstre på Grid Pad.

Når du skal slå på enheten, trykker du på og holder nede av/på-knappen i 3 sekunder.



Sette Grid Pad i dvale

Hvilemodus er en modus med lavt strømnivå der enheten er inaktiv og skjermen er av.

Trykk på av/på-knappen for å sette enheten i hvilemodus.

Trykk på av/på-knappen igjen for å aktivere enheten.

Slå av

Når du skal slå av enheten, trykk på og hold inne av/på-knappen.

Sveip «Slide to power off»-bryteren på skjermen. Trykk på krysset for å avbryte.

For Grid Pad Go 10 (Standard) trykker du på og holder inne tilkoblingsknappen i 3 sekunder for å slå av høyttaleren.


Lading - Standard

Når du lader Grid Pad 10 Go, må du påse at enheten og høyttaleren lades samtidig. Grid Pad-laderen har en dobbel USB C-kabel.

Koble Grid Pad-strømadapteren til et nettuttak.

Koble ladekabelen til strømadapteren

Koble begge USB-tilkoblingene til ladepunkt 1 og 2

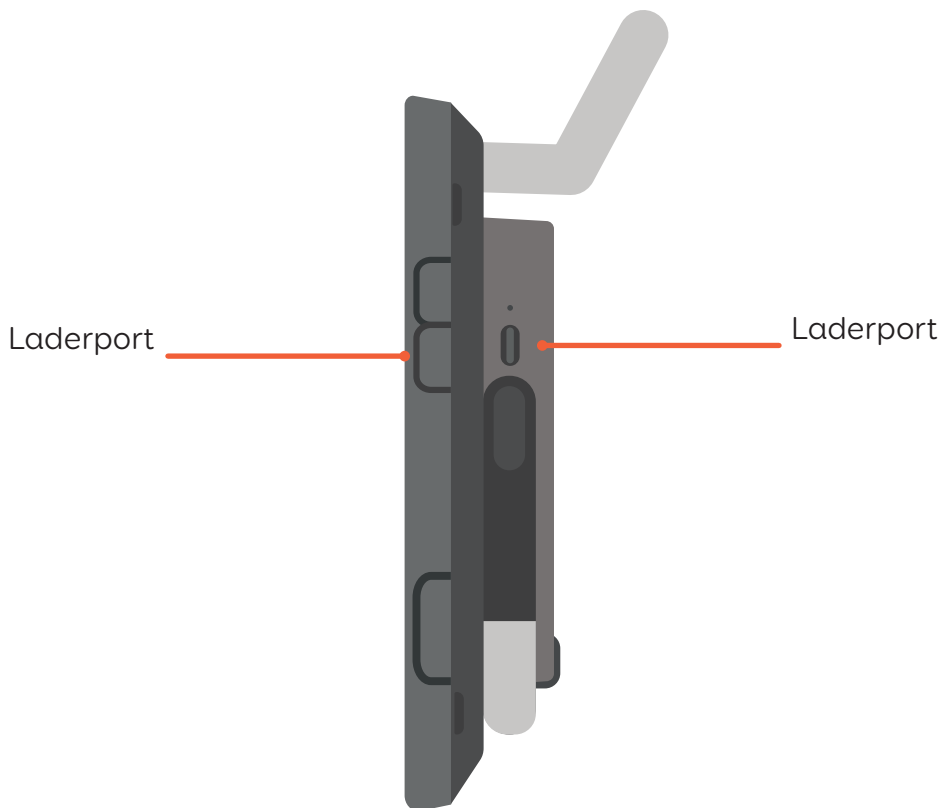


Lading: Slimline

Koble Grid Pad-strømadapteren til et nettuttak.

Koble ladekabelen til strømadapteren.

Koble lynkabelen til laderport 1.

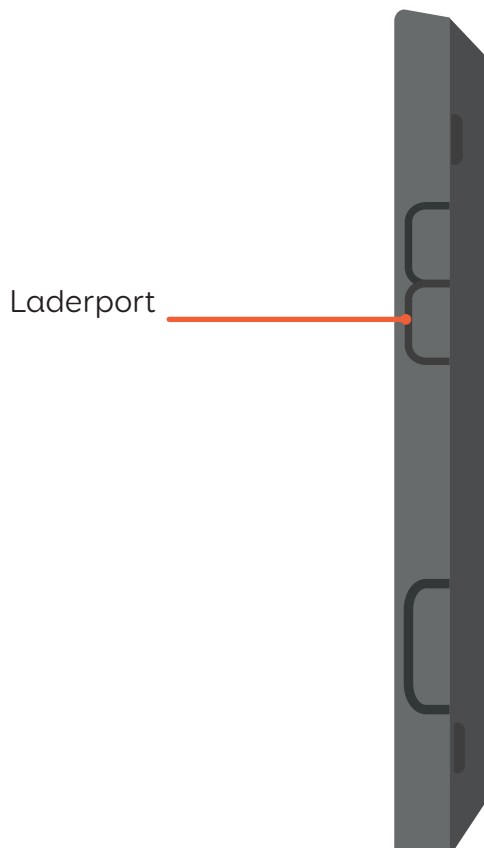

Bluetooth-paring: Standard

Avhengig av oppsettet ditt vil høyttaleren enten være paret når du pakker ut enheten, eller du må pare høyttaleren som en del av oppsettsprosessen.

For å parkoble høyttaleren må du sørge for at høyttaleren er slått av (trykk på tilkoblingsknappen i 3 sekunder).

Trykk og hold inne tilkoblingsknappen i 10 sekunder for å slå på enheten og starte paringsmodusen.


Bluetooth-innstillingene finner du i Innstillinger-appen. Velg Innstillinger og deretter Bluetooth for å se en liste over alle tilkoblede enheter. Høyttaleren er oppført som **Smartbox AAC - XXXX**.

Trykk og hold inne tilkoblingsknappen i 3 sekunder for å slå høyttaleren av.

Tips: Koden etter Smartbox AAC samsvarer med nummeret som er trykt på høyre side av høyttaleren, under stativet.

Bruke stativet: Standard


Stativet til Grid Pad Go 10 (Standard) kan brukes til å sette den på et skrivebord eller bord, slik at den kan brukes i alle vinkler.

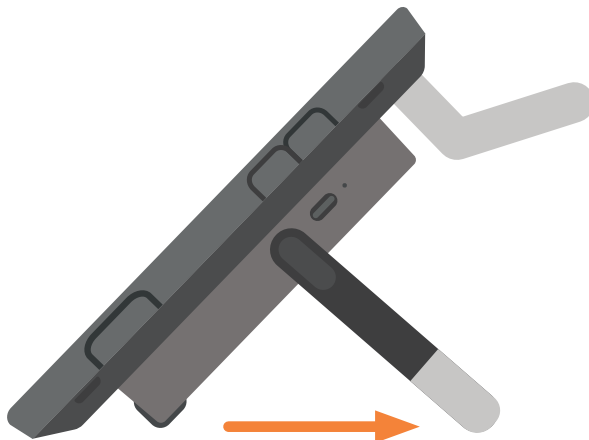

Monterings-


Grid Pad Go kan monteres til en Rehadapt- eller Deassy-tilkobling (monteringsplate selges separat).

Den doble monteringsplaten kan festes med skruene og skrutrekkeren som følger med monteringssettet, til de tre hullene på baksiden av høyttaleren.

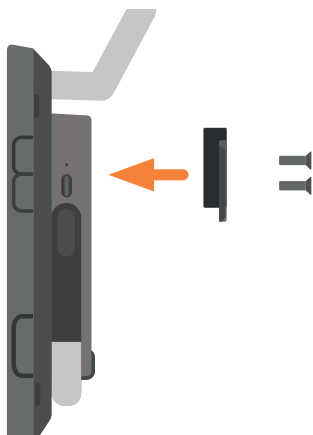

Standard



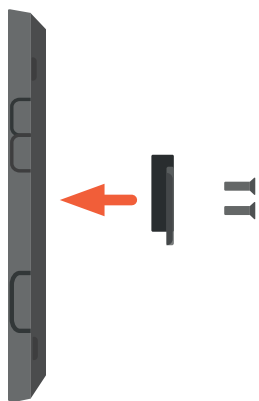


Slimline




Feste remmen

For å feste remmen til Grid Pad Go, før enden av remmen gjennom festepunktet, løsne koblingen og skyv den gjennom løkken. Fest koblingen igjen og gjenta på motsatt side.

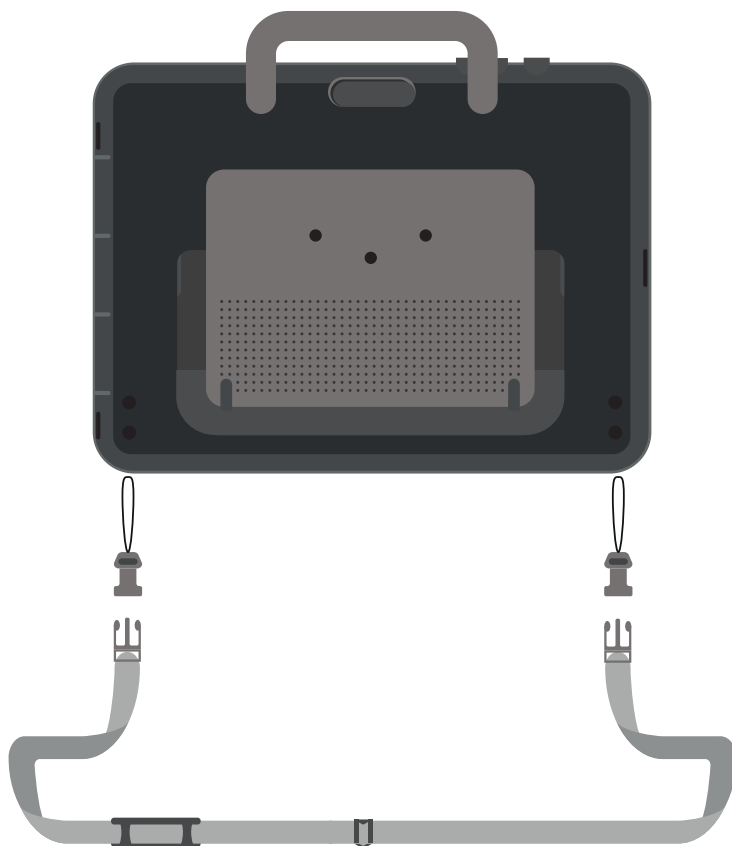

Standard

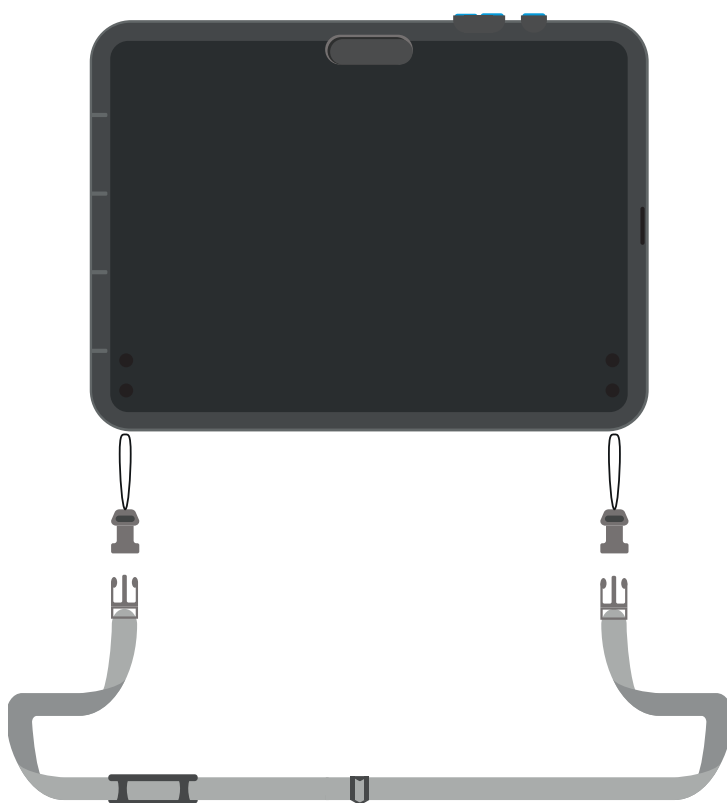


Slimline

Finne modell- og serienummer

Ha modell- og serienummeret for hånden når du kontakter brukerstøtte. Dette hjelper oss med å identifisere enheten du har problemer med!

Du finner både modell- og serienummeret på baksiden av Grid Pad.

Enhetens modell- og serienummer står under stativet. Løft stativet opp, og du finner serienummeret her:

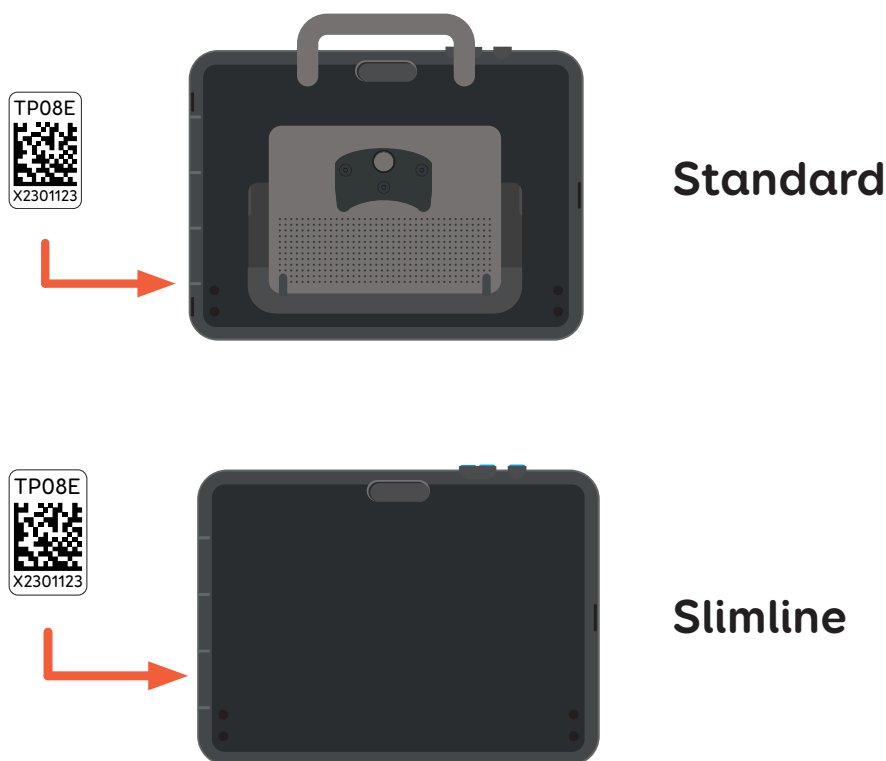

Fastvareoppdateringer

Fra tid til annen utsteder Smartbox fastvareoppdateringer for Grid Pad-høytaleren.

Gå til Smartbox Hub for mer informasjon om feilsøking av fastvareproblemer.



hub.thinksmartbox.com/knowledgebase/how-do-i-check-and-update-the-firmware-for-the-grid-pad-speaker/

Rengjøring, dekontaminering og lagring

Rengjøring og dekontaminering av enheten

- Slå av enheten og koble fra laderen før rengjøring.
- Fjern eventuelle kabler som er koblet til enheten
- Rengjør alle ytre overflater med en fuktig klut eller spritserviett.
- La enheten tørke.
- Gjenta prosessen for alt tilbehør du kan bruke med enheten.
- Når den er tørr, kan skjermen også rengjøres med en mikrofiberklut.
- Hard smuss og rester kan

fjernes med en tannbørste eller lignende.

Ikke bruk sprayrensevæske, gel eller polish direkte på enheten, og senk den ikke ned i vann.

Oppbevaring av enheten

Når enheten ikke er i bruk, bør den oppbevares trygt. Ikke len eller trykk harde gjenstander mot skjermen. Koble fra eventuelle enheter som er koblet til portene på enheten, inkludert USB-porter, bryterporter og strømledningen.

Enhetsspesifikasjon

Omgivelser

Temperatur	0–35 °C
------------	---------

Oppbevarings- og transportmiljø

Temperatur	-20 °C – 45 °C
------------	----------------

Symbolforklaring

Symbol	Betydning
	Hodetelefonport
	Laderport 1
	Laderport 2
	Tilkoblingsknapp
S1	Bryterport 1
S2	Bryterport 2
	Samsvar europeisk symbol for å erklære samsvar med EU-lovgivningen.
	Federal Communications Commission-symbol for å erklære samsvar med amerikansk lovgivning.
	Symbol for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr for å indikere at du skal kaste dette utstyret i samsvar med lokale forskrifter.
	Symbol for av/på-knapp
+	Symbol for å skru opp volumet
-	Symbol for å skru ned volumet
	Symbol for å lese brukerhåndboken
IP22	Inntrengningsbeskyttelsesgrad 22
	UK Conformity Assessed-symbol for å erklære samsvar i Storbritannia
	Unik enhetsidentifikator
	Medisinsk enhet
	EU-autorisert representant
	Sveitsisk autorisert representant
	Modellnummer
	Serienummer
	Min./maks. oppbevarings- og transporttemperatur
	Min./maks. oppbevarings- og transportfuktighet

Sikkerhet

Grip Pad er en medisinsk enhet i klasse 1.

Spesifikasjoner og standarder er oppført i delen Samsvar i denne håndboken.

Ta hensyn til disse sikkerhetsadvarslene for å sørge for sikker bruk av enheten.

Applikasjon

Tiltenkt bruk

Den brukes til å generere syntetisert tale.

Tiltenkte brukere

Er designet for personer med kommunikasjonsvansker og for de som trenger alternative betjeningsløsninger. Komplekse kommunikasjons- og/eller tilgangsproblemer kan oppstå som følge av en rekke forhold, inkludert, men ikke begrenset til,:

Utviklingsforstyrrelser, f.eks. cerebral parese, utviklingsmessig verbal dyspraksi, autistiske spektrumforstyrrelser (ASD), utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD) eller global forsinkelse. Ervervede lidelser, f.eks. kardiovaskulær ulykke (CVA/slag), demens, traumatisk/ervert hjerneskade (TBI/ABI)

Den kan også brukes av personer med komplekse

tilgangskrav ved fravær av kommunikasjonsproblemer for datamaskinkontroll, omgivelser og kommunikasjon ansikt til ansikt, for eksempel, men ikke begrenset til personer med:

- ryggmargsskade
- degenerativ nevromuskulær sykdom (f.eks. muskeldystrofi, spinal muskulær atrofi)

Tiltenkt miljø

Den kan brukes i en rekke settinger der den enkelte sannsynligvis ønsker å bruke den for den ovenfor tiltenkte bruken. Disse settingene kan omfatte, men er ikke begrenset til:

- private hjem
- omsorgshjem
- aldershjem
- skoler, høyskoler og universitet
- i samfunnet, f.eks butikker og restauranter

Signifikante kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler

Selv om den er utformet for å bidra til ekspressiv kommunikasjon, bør den brukes i kombinasjon med diverse metoder for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den bør ikke brukes isolert for å gjøre det mulig for en person å kommunisere ekspressivt.

Andre metoder for ASK kan omfatte bruk av papirbaserte systemer, tegnspråk eller annet.

Til tross for dette er det anerkjent at individer med betydelige kommunikasjons- og/eller betjeningsutfordringer er svært avhengige av en VOCA (kommunikasjonshjelpemiddel med taleutgang), i dette tilfellet Grid Pad, for å kommunisere, siden en VOCA ofte medfører betydelige forbedringer av ekspressiv kommunikasjon.

Selv om den er designet og produsert for å være ekstremt robust og pålitelig, er det mulig å miste funksjon på grunn av strømtap eller andre tekniske problemer. Av denne grunn skal den ikke

- bli brukt som et livreddende hjelpemiddel
- brukes som grunnlag for trivsel
- brukes som det eneste hjelpemiddelet brukeren har for å påkalle nødvendig hjelp eller som eneste alarm
- brukes for å administrere medisin
- brukes som den eneste måten å samhandle med EC-enheter på

Den har ikke som hensikt å benyttes for å gi informasjon eller ta viktige beslutninger i forhold til diagnose eller terapeutiske tiltak

Når enheten jobber med annet utstyr, kan det være interferens mellom enheten og tilkoblingsutstyret. Derfor skal

denne enheten ikke brukes:

- i miljøer med magnetresonanstomografi (MRI)
- i røntgenmiljøer
- i militære miljøer
- i miljøer med radiofrekvens

Unngå hørselskade

Hvis du bruker hodetelefoner og høyttalere med høyt volum, kan det føre til permanent hørselstap. Hold alltid volumet på enheten på et sikkert nivå.

Holdbarhet

Enheten din er tøff og robust, men den må behandles med forsiktighet når du beveger deg rundt. Den har blitt falltestet til en meter. Vær oppmerksom på at dette ikke inkluderer tilbehør.

Vann og væsker

Ikke få vann eller væsker på enheten, spesielt ikke i portene eller ventilasjonsåpningene.

Hendelser

Hvis det oppstår et uhell i forbindelse med enheten, må du rapportere det til Smartbox (repairs@thinksmartbox.com) og den kompetente myndigheten i ditt medlemsland.

Kontakt med bruker

Berøring av enheten med skadet hud kan forverre et sår.

Spedbarn eller høyrisikogrupper skal ikke berøre overflaten på enheten hvis det er fare for forbrenning.

Strømforsyning og batterier

Enheten din inneholder et oppladbart litium-ion-batteri. Alle oppladbare batterier forringes over tid. Brukstiden for enheten din etter full lading kan bli kortere over tid.

For å oppnå optimal ytelse bør ikke enheten lades ved ekstreme temperaturer under 0 °C eller over 45 °C. Ved disse temperaturene lader batteriet langsomt eller ikke i det hele tatt.

Ikke utsett enheten din for flammer eller temperatur over 90 °C, da disse forholdene kan føre til at batteriet ikke fungerer som det skal, antennes eller eksploderer.

Lad bare opp enheten med strømledningen som følger med. Bruk av uoffisielle strømforsyninger kan forårsake alvorlige skader på enheten og forårsake brann. Hvis enhetens strømledning går tapt eller skades, kontakter du leverandøren.

Når batteriet i enheten din er tomt og enheten ikke er koblet til en strømkilde, slås enheten automatisk av for å unngå skade på batteriet og maskinvaren. Operativsystemet vil forsøke å

gjøre dette så sikkert som mulig, men det anbefales at du kobler til strømledningen før enheten slås av.

Batteriet som driver enheten, er underlagt gjeldende forskrifter om forsendelse. Kontroller med postbudet eller budet før du sender enheten, for å sikre at den leveres på en sikker måte.

Ikke plasser enheten et sted der det er vanskelig å koble strømadapteren fra kontakten.

Det er bare vårt autoriserte personell som kan bytte batteriet. Ellers kan det oppstå personskaade eller skade på utstyret.

Ikke utfør service på eller vedlikehold på enheten mens enheten er i bruk. Sørg for å slå av enheten og koble fra alle kabler før du starter og utfører service eller vedlikehold på enheten.

Transport av enheten

Når enheten transporteres, må du forsikre deg om at den er tilstrekkelig beskyttet mot slag og støt.

Det er strenge forskrifter for litium-ion-batterier i fly. Reglene varierer mellom flyselskaper, så det anbefales å kontakte flyselskapet ditt før du reiser.

Temperatur

Forsikre deg om at du slår av enheten før du oppbevarer eller legger den i en bag.

Hvis enheten brukes i varme temperaturer eller direkte sollys, kan den nå temperaturer som kan utløse en automatisk stopp. Dette er en sikkerhetsfunksjon som forhindrer varig skade på enheten. Hvis dette skjer, må du vente til enheten er avkjølt før du starter på nytt.

Monterings-

Når du monterer enheten, må du følge instruksjonene både til enheten og i veiledningen fra produsenten av monteringsssystemet. Vi har tatt alle forholdsregler for å gjøre dette til en enkel og sikker prosess, men det er opp til deg å sikre at enheten er trygt montert.

Bruk en monteringsløsning designet for din Grid Pad (selges separat). Kontroller at monteringsssystemet du velger, er riktig for deg, og utfør en risikoanalyse hvis det er nødvendig.

Porter og tilkoblinger

Tilbehør som er koblet til porter for SIGNALINNGANG/-UTGANG, må være i samsvar med IEC-standard 60601-1 eller 62368-1.

Skade på enheten

Hvis de små delene er skadet, kan de løsne fra enheten. Dette kan medføre kvelningsfare. Barn og personer med lærevansker bør overvåkes når enheten brukes. Pass på at de også er under tilsyn når du pakker ut enheten. Emballasjen kan føre til kvelningsfare. Under ekstreme omstendigheter kan skade på enhetens skjerm resultere i skarpe kanter. Under disse omstendighetene skal enheten ikke brukes.

Ikke steril

Enheten din er ikke steril. Ikke benytt den dersom du har åpne sår, eller mens du gjennomgår intensiv medisinsk behandling.

Epilepsiadvarsel

Noen personer med fotosensitiv epilepsi er mottakelige for anfall når de blir utsatt for visse lys eller lysmønstre. Hvis du føler deg dårlig eller kvalm når du står foran apparatet, må du gå bort fra apparatet og oppsøke lege.

Garanti

Standard- og Slim-modeller: Enheten er dekket av standard 3 års garanti fra kjøpstidspunktet.

Reparasjoner og vedlikehold

Enheten er ikke en enhet som brukeren kan utføre service på. Hvis enheten trenger reparasjon, kan du ta kontakt med den lokale forhandleren.

Interferens fra medisinsk utstyr

Grip Pad inneholder magneter som kan forstyrre medisinske enheter. Rådfør deg med legen din og produsenten av det medisinske utstyret for å få informasjon som er spesifikk for ditt medisinske utstyr, og om det er nødvendig å opprettholde en sikker avstand mellom det medisinske utstyret og dette apparatet eller noe av dets tilbehør. Hvis du mistenker at denne enheten forstyrrer den medisinske enheten, må du slutte å bruke denne enheten.

Fare for kvelning

Enheten leveres med en stropp. Hvis det er fare for at brukeren kan kveles med stroppen, må du ikke bruke stroppen.

Enheten leveres med en strømkabel og kan brukes med kablet tilbehør. Disse kan utgjøre en kvelningsfare.

Feilsøking og kundestøtte

Kontakt brukerstøtten på:

hub.thinksmartbox.com

Ha serienummeret klart. Dette finner du under stativet på

enheten.

Oppussing

Hvis enheten trenger reparasjoner før den brukes på nytt, må du kontakte din lokale forhandler.

Før gjenbruk av enheten, sørg for at rengjørings- og dekontamineringsprosedyren er utført.

Det kan også bli nødvendig å fjerne personopplysninger fra enheten. Kontakt Smartbox for støtte og råd.

Hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med enheten, ber vi deg rapportere det til Smartbox

(repairs@thinksmartbox.com) og den kompetente myndigheten i ditt medlemsland.

Tilbehør

Enheten er kompatibel med ulike tilbehør som kan kombineres for å justere dens funksjon som en VOCA. For informasjon om kompatibelt tilbehør som er tilgjengelig for øyeblikket, kan du gå til:

hub.thinksmartbox.com/XXX

Kassering

Kasser i tråd med dine lokale forskrifter for elektronisk avfall.

Datasikkerhet

Enheten innlemmer elektronisk programmerbare systemer og programvare.

For den beste ytelsen anbefaler vi deg å holde operativsystemet og medfølgende programvare oppdatert med de nyeste

sikkerhetsreparasjonene og -funksjonene.

Påse at passord og passkoder oppbevares trygt for å forhindre uautorisert tilgang.

Enheten har funksjoner som krever en internettforbindelse. Tilgang til disse tjenestene kan være begrenset som del av konfigurasjonen av maskinen eller gjennom nettverksadministrasjon.

EU/CE-erklæring

SmartBox assistive Technology Ltd. erklærer herved at dette produktet samsvarer med 2017/745 EU-forordning om medisinsk utstyr, 2014/53/EU RED, 2011/65/EU RoHS og (EU) 2015/863.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig her: hub.thinksmartbox.com/XXXX

Gjeldende standarder

ISO 14971:2019 Bruk av risikostyring på medisinsk utstyr er blitt brukt på Grid Pad Go 10.

Dette produktet og - hvis aktuelt - det medfølgende tilbehøret er merket med "CE" og er derfor i samsvar med de gjeldende harmoniserte europeiske standardene som er oppført under EMC-direktivet 2014/30/EU, LVD-direktivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, Wi-Fi-enhet: RE-direktivet 2014/53/EU.

Dette produktet og - hvis aktuelt - medfølgende tilbehør er merket med "UKCA" og er derfor i samsvar med følgende direktiver: Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2016, forskrift om elektrisk utstyr (sikkerhet) 2016, forskrift om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 2012, Wi-Fi-enhet: Forskrift om radioutstyr fra 2017.



Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter merket med dette symbolet kan ikke kastes som usortert kommunalt avfall i EU. For korrekt resirkulering må du returnere dette produktet til din lokale leverandør ved kjøp av tilsvarende nytt utstyr, eller kaste det på bestemte innsamlingssteder. For mer informasjon, se: www.recyclethis.info.

I henhold til forskriftene om elektrisk og elektronisk avfall fra 2013: Produkter merket med dette symbolet kan ikke kastes som usortert kommunalt avfall i Storbritannia. For korrekt resirkulering må du returnere dette produktet til din lokale leverandør ved kjøp av tilsvarende nytt utstyr, eller kaste det på bestemte innsamlingssteder. For mer informasjon, se: www.recyclethis.info.

Samsvar med FCC- og ISED-Canada

FCC-erklæring

Inneholder: FCC ID: 2APXM-GP15V1
XCO-QCC3031

Denne enheten er i samsvar med kravene i FCC-reglene, avsnitt 15. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,

anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp

MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser som skyldes uautoriserte endringer på dette utstyret. Slike endringer kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

RF-eksponering

Dette utstyret er i samsvar med FCC-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og betjenes med en minimumsavstand på 0 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Samsvar med ISED Canada

For bruk i Canada

Inneholder: IC: 7756A-QCC3031

Denne enheten overholder CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS-er. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens.

(2) Denne enheten må tåle enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement

PSU

PD45W vegglander

Modellnr.: S-TR-182D

Modell: 34-0-000516S

Spesifikasjoner

Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, maks 1,2 A

est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

RF-eksponering

Dette utstyret er i samsvar med IC-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og betjenes med en minimumsavstand på 0 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 0 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Type-C1-/Type-C2-utgangseffekt:

5,0 V 3A, 9,0 V 3A, 12,0 V 3 A, 15,0 V 3 A, 20,0 V 2,2 5 A, 45 W

**Type-C1-/Type-C2-
utgangseffekt:**

25,0 W + 20,0 W

Total utgangseffekt:

Maks 45,0 W

Driftstemperatur

Maks: 35 °C

Størrelse: 80x43,85x31 mm

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:

85,92 %

Strømforbruk uten belastning (W):

0,254 W

Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på brukeren, produktet eller annen eiendom.

1. Koble produktet til et strømuttak som er i nærheten, og som er lett å koble fra kilden.
2. Bruk innendørs og på et tørt sted. Unngå å lade i nærheten av varme og fuktighet.
3. Produktet skal holdes unna væsker og fuktighet.
4. Koble produktet fra AC-kontakten når det ikke er i bruk.
5. Ikke oppbevar enheten på svært varme eller svært kalde steder. Det anbefales å bruke enheten i romtemperatur.
6. Ikke bruk produktet hvis det er synlige defekter på det.
7. Produktet skal ikke demonteres eller bygges om på noen måte.
8. Vær forsiktig med å bruke PSU-enheten på steder der det er sannsynlig at barn oppholder seg.

[illegible]



Grid Pad Go 10 - Standard & Slimline -
NO - A