

sensio

Mattesensorer

606602 SOFIA Bed Mat

606601 SOFIA Chair Mat

606322 FLORA Floor Mat Sensor

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	4
Feilsøking	5
Spesifikasjoner	6
Vedlikehold	7
Resirkulering	7
Symboler	8
Godkjenninger	9
Support	9

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom
- Skal ikke monteres der den kan påvirkes av direkte sollys
- Må ikke brettes
- Monteres slik at risikoen for å snuble i matten eller ledningen elimineres.

Introduksjon

I esken

- SOFIA Bed Mat (hvit)/ SOFIA Chair Mat (hvit) / FLORA Floor Mat Sensor (sort)
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

SOFIA Bed Mat og SOFIA Chair Mat brukes for å registrere om en person ligger i senga eller sitter i stolen.

FLORA Floor Mat Sensor benyttes for å registrere at en person trækker på matta.

Mattene må kobles til en FlexiBlink-sender som vil sende trådløst til mottakere i FlexiBlink-systemet.

SOFIA bør byttes etter et års bruk.

Kom i gang

Montering

1. Plassering av SOFIA og FLORA
 - a. SOFIA Bed Mat legges normalt under en overmadrass i sengas øvre del. Legg SOFIA på tvers eller eventuelt litt på skrå i senga.
 - b. SOFIA Chair Mat legges under på stolen, gjerne med en tynn madrass over
 - c. FLORA Floor Mat Sensor legges på gulvet, gjerne med et gulvteppe over
2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videresending av varsel.
3. Monter senderen som beskrevet i senderens brukerhåndbok.
 - a. Forslag til sendere:
 - i. SOFUS Smart Activity Transmitter
 - ii. AXEL Activity Transmitter
 - iii. GARD Universal Transmitter (Gjelder kun FLORA)
 - iv. KAY Speech Alerter (Gjelder kun FLORA)
4. Merk gjerne SOFIA med måned og år for når den tas i bruk.

SOFIA og FLORA må ikke brettes!

Sørg for at FLORA monteres slik at risikoen for å snuble i matten eller ledningen elimineres.

Testing

SOFIA: Test sensor og sender ved å sette deg i senga/stolen i minimum 20 sekunder før du forlater den. Sjekk at mottakeren mottar.

FLORA: Test sensor og sender ved å tråkke på matta. Sjekk at mottakeren mottar.

Feilsøking

Bevegelse detekteres ikke

- Sjekk at sensorens kontaktplugg er godt koblet til FlexiBlink-senderen.
- FlexiBlink-senderen bruker ca. 30 sekunder på seg til å gjøre seg klar til å varsle på nytt.

Spesifikasjoner

Tekniske data

- Temperatur: -10 °C – 40 °C
- IP-grad: IP20

Dimensjoner

SOFIA Bed Mat

- Lengde: 780 mm
- Bredde: 540 mm
- Tykkelse: 5 mm
- Lengde: 1 m ledning
- Vekt: 950 g
- Minimumsvekt bruker: 28 kg

SOFIA Chair Mat

- Lengde: 300 mm
- Bredde: 300 mm
- Tykkelse: 5 mm
- Lengde: 1 m ledning
- Vekt: 250 g
- Minimumsvekt bruker: 28 kg

FLORA Floor Mat Sensor

- Lengde: 700 mm
- Bredde: 390 mm
- Tykkelse: 4 mm
- Lengde: 6 m ledning
- Vekt: 350 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Les bruksanvisning og monteringsanvisning




Produsent



Produksjonsdato



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.

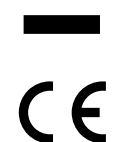

Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfold.sensio.io
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47