

sensio[®]

Universalsender

Bruksanvisning

606325 GARD Universal Transmitter

606507 ADAM Universal Audio Sensor

Dokument: 9271-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.
- Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den hvite platen ikke skades.

Produktbeskrivelse

GARD Universal Transmitter

En sender som kobles til med ledning til dørklokke, porttelefon eller annet utstyr en ønsker varsling fra. Dette sendes til FlexiBlink-mottakere.

ADAM Universal Audio Sensor

En sensor som fanger opp lydsignaler fra for eksempel dørklokke, porttelefon, telefon eller annet utstyr en ønsker varsling fra. Dette sendes til FlexiBlink-mottakere.

Funksjonsvelger



0: Dørklokken ringer

1: Dørklokke Hoveddør ringer (Lav følsomhet)

2: Dørklokke ringer (Sender kun 1 gang)

3: Porttelefonen ringer

4: Brannalarm

5: Hjelp meg nå!

6: Kom snart!

7: Assistanse

8: Barnet gråter/Barnet har stått opp

9: Vekkerklokke

A: Tidsur

B: Generell varsling (Stille, for bruk med GURO Gateway)

C: Generell varsling (For eksempel vandring, medisin)

D: Generell alarm (For eksempel epilepsi, innbrudd, gass)

E: Mobiltelefonen ringer

F: Telefonen ringer

Statusindikasjon

Når ADAM eller GARD er i bruk, vises statusen i lysindikatoren:



Grønt lys: Varsel sendt



Blinkende rødt/grønt lys: Bytt batteri

Senderne benytter et spesialbatteri med svært lang levetid. Varslingsmottakerne IRIS Alerter og ALMA Alerter melder fra ved lavt batterinivå.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio®

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer