




# GARD Universal Transmitter

Sender som tilkobles sensor eller tredjeparts produkter med utgangssignal. Alarmene varsles i FlexiBlink mottakere.

GARD benyttes i hovedsak for å koble til tredjeparts produkter med utgangssignal, men kan også benyttes sammen med passive sensorer med jack-kabel. Den varsler alarmene i FlexiBlink varslingsmottakere. Benytt varslingstabell for å definere alarmtype som skal varsles. GARD varsler de «vanligste» alarmtypene i en bolig.

## Varslingstabell:

- 0: Dørklokken ringer
- 1: Dørklokk hoveddør ringer – Lav følsomhet
- 2: Dørklokke ringer – sender kun 1 gang
- 3: Porttelefonen ringer
- 4: Brannalarm
- 5: Hjelp meg nå!
- 6: Kom snart!
- 7: Assistanse
- 8: Barnet gråter / Barnet har stått opp
- 9: Vekkerklokke
- A: Tidsur
- B: Generell varsling – Stille, for bruk med GURO Gateway
- C: Generell varsling
- D: Generell alarm
- E: Mobiltelefonen ringer
- F: Telefonen ringer

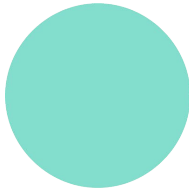

Dimensjoner (HxBxD): 133x69x27 mm  
Vekt: 140 g  
Batteri: Litium, 3V  
Temperatur: -10 °C – 40 °C  
IP-grad: IP20  
Radiofrekvens: 2400,0 – 2483,5 MHz  
Sendereffekt: maks 20 mW

## Relaterte produkter:



### ALMA Alerter

Stasjonær varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med blinkende lys, symbol, tekst og lyd.



### JUNIOR Assist Portable Alerter

Bærbar varslingsmottaker som varsler FlexiBlink signaler med lyd, vibrasjon og lysindikasjon på alarm.



### AXEL Activity Transmitter

Axel benyttes vanligvis til å varsle om vandring. Den må kobles til en bevegelsessensor, magnetbryter, sengematte o.l.



### PIA PIR Narrow Passage Sensor

Bevegelsessensor for deteksjon av passasje innenfor et begrenset område, for eksempel i døråpning, ved seng, eller i en smal gang. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### MINA Magnetic Sensor

Magnetkontakt for å detektere om vinduer eller dører åpnes eller lukkes. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### SWITCH Jellybean

Stor og lettbetjent bryter som brukes for å tilkalle assistanse. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.



### FLEXARM

Lettbetjent bryter med svanehals og bordfeste. 3,5 mm jack på ledningen som tilkobles Sensio sender.

Lær mer om  
våre løsninger →

