



hmp.no

HJELPEMIDDELPARTNER

ACTIVE UP CLASSIC

Reis deg selv – uansett
hvor du befinner deg!

1

REISE DEG OPP

- A. Plasser føttene nær stolen.
- B. Sitt oppreist og len deg forover.
- C. Plasser føttene med god avstand.
- D. Fyll puten med luft ved å trykke på knappen med pil opp.
- E. Nå kan du enkelt reise deg opp.

Merk! Ett kort trykk på pil opp-knappen løfter ett nivå.

Vent og gjenta inntil fire ganger.



2

SETTE DEG NED

- A. Sitt komfortabelt i midten.
- B. Senk puten ved å trykke på knappen med "pil ned" til luften er helt ute av puten.
- C. Du kan nå sitte komfortabelt.


Merk! Ett kort trykk på pil ned-knappen senker et nivå.

Vent og gjenta inntil fire ganger.



i

BLI KJENT MED FJERNKONTROLLEN

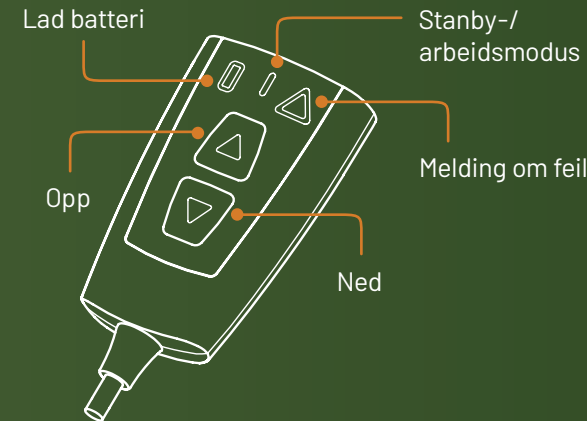

Standbymodus – blinker sakte (én blink/sek).
Arbeidsmodus – blinker raskt (fem blink/sek).
Tilbakestill ved feil – trykk begge knappene samtidig i 10 sekunder. Hvis dette ikke hjelper, vennligst kontakt oss på post@hjelpemiddelpartner.no

PLASSERING AV ACTIVE UP CLASSIC

A. Velg en passende stol.

Det anbefales å velge en stabil og solid stol som ikke lett flytter seg. En stol med armlener er å foretrekke.

B. Plasser Active Up Classic som illustrert nedenfor.



Å FLYTTE ACTIVE UP CLASSIC ER ENKELT

A. Hold begge håndtakene


B. Løft Active Up Classic fra setet

C. Plasser Active Up Classic
på det nye setet

D. Sett deg ned



Håndtak

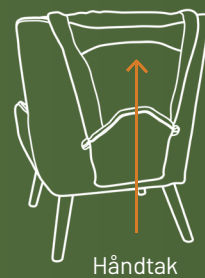

Håndtak



FØR BRUK

Når batteriet brukes for første gang,
bør det lades i minst 12 timer.



**Før bruk skal alle fire kammer fylles
med luft en gang uten belastning.**

A. Fjern batteriet ved å skyve det mot deg.

B. Koble batteriet til laderen som illustrert.



C. Når det røde lyset på laderen skifter til
grønt, er batteriet fulladet.

D. Skyv det ladede batteriet
tilbake på plass.

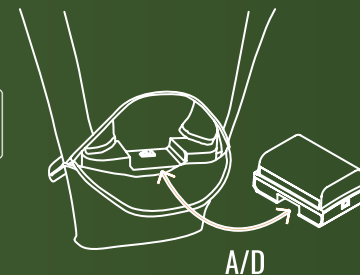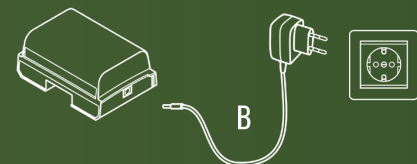

TA VARE PÅ DENNE HURTIGGUIDEN

Les mer om Active Up Easy Go og
se flere praktiske hjelpemidler
på hmp.no

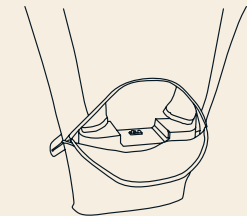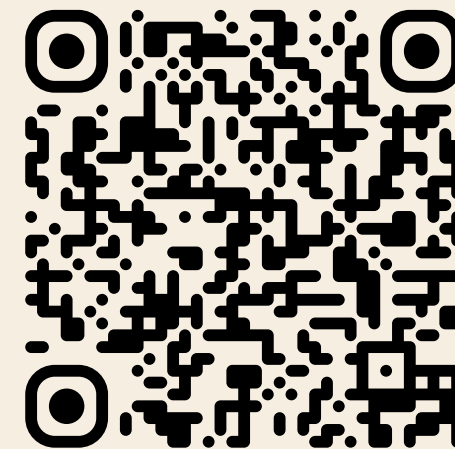

Legg hurtigguiden i
lommen til batteriet - så
har du den til neste gang.



hmp.no

HJELPEMIDDELPARTNER