

sensio[®]

ANNA Analog Alarm Clock

Bruksanvisning

Produkt: 606327

Dokument: 9177-1



Sikkerhet

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Produktbeskrivelse

Analog vekkerklokke med mulighet for slumring, som kan kobles til BRITT Bed Shaker. Når vekkerklokken er satt opp til å vekke, vil BRITT vibrere på vekkertidspunktet.

Kom i gang

1. Sett inn batteriet.
2. Fjern eventuell plastbrikke ved batteriets positive pol.
3. Still klokke og vekketidspunkt ved hjelp av dreieknappene på baksiden.
4. Koble vekkerklokkeledningen fra BRITT til vekkerklokka.

Sette på alarm

Still vekketidspunkt ved hjelp av dreieknappene på baksiden.

Slumre alarm

Trykk på knappen på toppen for å slumre alarmen i 6 minutter.

Slå av alarm

Sett skyveknappen på forsiden til *OFF* for å slå av alarmen permanent.

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS

vestfold.sensio.io

Fant du ikke det du lette etter?

Skann QR-koden for å finne ut mer!



sensio

Produktinfo

Bruks- og monteringsanvisning

Hjelpvideoer