

sensio

Vekkeløsninger

606182 BRITT Bed Shaker

606298 BRITT Bed Shaker Small

606327 ANNA Analog Alarm Clock

606328 DINA Digital Alarm Clock

Bruks- og monteringsanvisning



Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Bruk	7
Innstillinger	10
Feilsøking	11
Spesifikasjoner	12
Vedlikehold	13
Resirkulering	14
Symboler	14
Godkjenninger	15
Support	15

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- Batteriet må ikke punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

Introduksjon

I esken

Alle produkter skal ha medfølgende bruksanvisning.

BRITT Bed Shaker

- BRITT Bed Shaker

BRITT Bed Shaker Small

- BRITT Bed Shaker Small
- Borrelås
- Våtseriett

ANNA Analog Alarm Clock

- ANNA Analog Alarm Clock
- Batteri

DINA Digital Alarm Clock

- DINA Digital Alarm Clock
- Strømforsyning 5VDC


Produktbeskrivelse

BRITT Bed Shaker / BRITT Bed Shaker Small

BRITT Bed Shaker varsler med vibrasjoner om hendelser som brann eller dørklokke, ved mottak fra FlexiBlink-sensorer. Ved brann aktiveres kraftige vibrasjoner for økt oppmerksomhet. Enheten kan også kobles til en vekkerklokke.

BRITT er spesielt utviklet for personer med nedsatt hørsel og er beregnet for bruk i hjemmet.

BRITT Bed Shaker Small er en variant med en ekstern vibrasjonsenhet som gir enklere plassering i sengen. Den har ellers samme funksjonalitet som BRITT Bed Shaker.

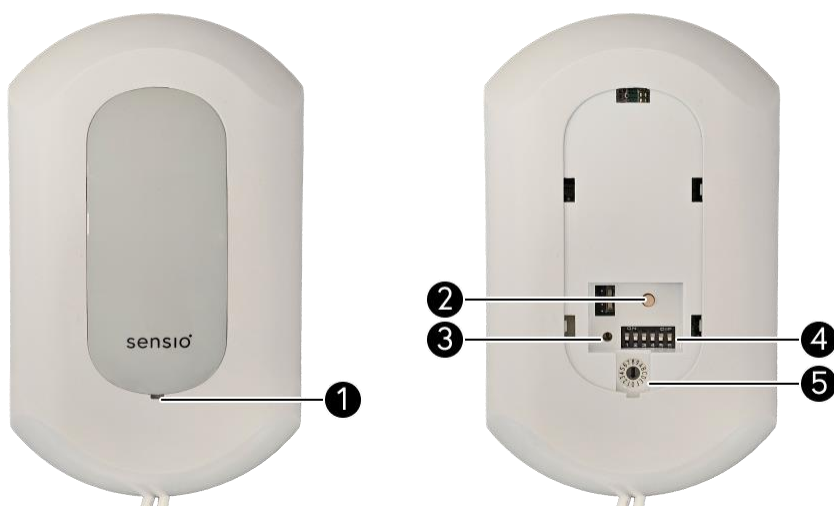

1. Spor for åpning av frontlokk
2. Pairing-knapp
3. Lysindikator
4. Funksjonsbrytere
5. Funksjonsvelger

ANNA Analog Alarm Clock / DINA Digital Clock

Vekkerklokke med mulighet for slumring. Den kan kobles til BRITT Bed Shaker. Når vekkerklokken er satt opp til å vekke, vil BRITT vibrere på vekkertidspunktet.

DINA har også mulighet for daglig repetisjon av alarm og justering av lysstyrke.

Kom i gang

BRITT Bed Shaker

1. Sett strømforsyningen i stikkontakten på veggen.
2. Gjennomfør [sammenkobling](#).
3. Plasser BRITT mellom madrassene i sengen, eller mellom madrassen og sengevangen.
4. Gjennomfør testing.

BRITT Bed Shaker Small

1. Sett strømforsyningen i stikkontakten på veggen.
2. Gjennomfør [sammenkobling](#).
3. Monter hovedenheten på sengegavlen, veggen eller nattbordet.
4. Plasser vibrasjonsenheten under overmadrassen i høyde med hodeputen, eller under hodeputen.
5. Gjennomfør testing.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På BRITT, når den ikke er hovedenhet: Trykk **1 gang** på **Pairing**-knappen
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet.

Testing


Utløs en sender i FlexiBlink-systemet ved hjelp av **TEST**-knappen og observer at BRITT varsler.

ANNA Analog Alarm Clock

1. Sett inn batteriet.
2. Fjern eventuell plastbrikke ved batteriets positive pol.
3. Still tiden på klokken ved å trekke dreieknappen litt ut og juster.
4. Still vekkertidspunktet ved å stille på dreieknappen.
5. Koble vekkerklokkeledningen fra BRITT til vekkerklokka.

DINA Digital Alarm Clock

1. Fjern den røde plaststripen for å aktivere batteribackup.
2. Sett strømforsyningen i stikkontakten på veggen.
3. Still klokka:
 - a. Flytt **SET**-bryteren til **TIME SET**.
 - b. Bruk **UP/DOWN**-knappene til å stille timen.
 - c. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille minuttene.
 - d. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille år og dato.
4. Koble vekkerklokkeledningen fra BRITT til vekkerklokka, der det er merket **Sengevib.**

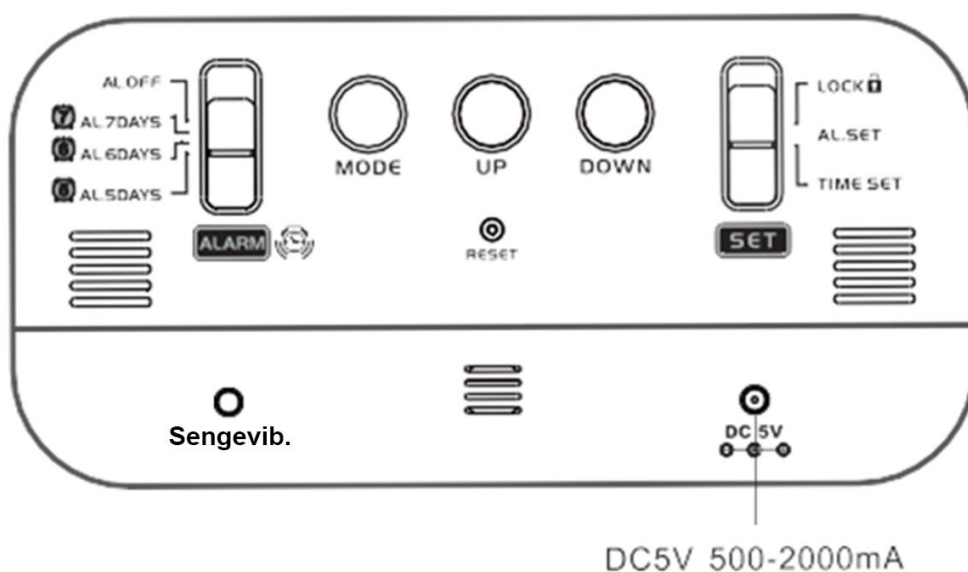

Bruk

Varsling

BRITT varsler med vibrasjon om hendelser som oppstår i boligen.

[Se innstillinger for hvordan dette kan tilpasses](#)

Vibrasjonsmønster

Varslingsmønstrene repeteres.

Brann




Røykvarsler




Alarmer (som komfyrvakt eller sykesignal)



Telefon

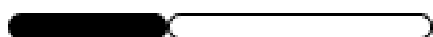

Dørklokke

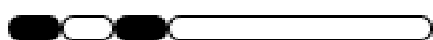

Porttelefon



Annet



Sette på alarm

ANNA Analog Alarm Clock

Still vekketidspunkt ved hjelp av dreieknappene på baksiden.

DINA Digital Alarm Clock

1. Flytt **SET**-bryteren til **AL. SET**.
2. Bruk **UP/DOWN**-knappene til å stille timen.
3. Trykk **MODE** og deretter **UP/DOWN** for å stille minuttene.
4. Sett **ALARM**-bryteren til ønsket posisjon:
 - a. **AL. OFF**: Alarm av
 - b. **AL. 7DAYS**: Alarm 7 dager
 - c. **AL. 6DAYS**: Alarm 6 dager
 - d. **AL. 5DAYS**: Alarm 5 dager

Dato må være stilt for at dette skal fungere.

5. Alarmsymbol vises i displayet når alarmen er aktivert.
6. Flytt **SET**-bryteren til **LOCK**.

Trykk på **MODE**-knappen for å se valgt alarmtidspunkt og dato.

DINA alarmerer ikke ved strømbrudd.

Slumre alarm

ANNA Analog Alarm Clock

Trykk på knappen på toppen for å slumre alarmen i 6 minutter.

DINA Digital Alarm Clock

Trykk på **SNOOZE**-knappen én gang for å slumre alarmen i 5 minutter.

Slå av alarm

ANNA Analog Alarm Clock

- **Permanent:** Sett skyveknappen på forsiden til **OFF**

DINA Digital Alarm Clock

- **Inntil neste dag:** Trykk 2 ganger på **SNOOZE**-knappen
- **Permanent:** Sett **ALARM**-bryteren til **AL. OFF**

Endre lysstyrke

DINA Digital Alarm Clock

Trykk på **DOWN**-knappen for å velge ønsket lysstyrke for dag- eller nattevisning.

Innstillinger

Funksjonsbrytere



1: Trådløs vekking fra IRIS på kanal A (standard)

Vipp bryter opp for å aktivere

2: Trådløs vekking fra IRIS på kanal B

Vipp bryter opp for å aktivere

3: Viderevarsling av vekkerklokke (analog eller digital)

Vipp bryter opp for å aktivere

6: Tvungen driftsstans (for eksempel ved transport)

Vipp bryter opp eller ned *før* strømkontakten tas ut, for å aktivere.

- BRITT går i dvale og kan kun vekkes igjen med strømtilkobling.
- Hvis bryteren vippes mens BRITT står med ladespenning på og batterieliminatoren ikke trekkes ut av veggkontakten innen 2 minutter, vil BRITT gå tilbake til normal drift.

Funksjonsvelger



Velg hvilke typer hendelser som skal gi vibrasjon.

0: Fabrikkinnstilling

BRITT vibrerer ved alle varslinger.

1: Kun alarmer + vekkerklokke

BRITT vibrerer kun ved alarmer, som komfyrvakt og røykvarsler, og ved vekkerklokke.

2: Kun brann + vekkerklokke

BRITT vibrerer kun ved brannalarmer og vekkerklokke.

Feilsøking

BRITT varsler ikke

- Sjekk at BRITT er tilkoblet strøm.
- Hvis funksjonsvelgeren er satt i posisjon **1** eller **2**, mottar den kun alarmer.
- Sjekk at BRITT er sammenkoblet med FlexiBlink-systemet.
[Se instruks for sammenkobling](#)
- Sjekk at senderen ikke er for langt unna resten av FlexiBlink-systemet.
- Sett inn en repeater i FlexiBlink-systemet for å få bedre rekkevidde.

Sammenkoblingen er feil

1. Slett sammenkoblingen ved å trykke 5 ganger på **Pairing**-knappen. Enheten svarer med rødt og grønt blinkende lys.
2. Gjennomfør sammenkobling på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

BRITT vil ikke sammenkoble

1. Trekk støpselet ut fra stikkontakten.
2. Skyv bryter 6 opp eller ned
3. La BRITT være fjernet fra stikkontakten i 30 sekunder. Trykk gjerne noen ganger på Pairing-knappen til du ikke får lysrespons.
4. Sett BRITT i stikkontakten igjen.
5. Prøv sammenkobling på nytt. [Se instruks for sammenkobling](#)

Vekkerklokken fungerer ikke

Sjekk at ledningen mellom BRITT og vekkerklokke er satt inn.

- **ANNA:** Se om det hjelper å skifte batterier
- **DINA:** Sjekk at dato er stilt riktig og ALARM-knappen står i rett posisjon.

Vekkerklokken vibrerer hvert minutt

BRITT lader ikke. Bytt BRITT

Spesifikasjoner

Tekniske data

BRITT Bed Shaker / BRITT Bed Shaker Small

- **Driftsspenning:** 15VDC / 230VAC
- **Backup-batteri:** NiMH 14,4V 400 mAh
- **Batteritid:** minimum 24 timer
- **Ladetid:** ca. 6 timer
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

ANNA Analog Alarm Clock

- **Batteri:** 1,5V LR14 / C-celle alkalisk

DINA Digital Alarm Clock

- **Driftsspenning:** 5VDC / 230VAC

Dimensjoner

Britt Bed Shaker Small (uten vibrasjonsenhet)

- **Høyde:** 150 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Dybde:** 37 mm
- **Vekt:** 420 g

Vibrasjonsenhet

- **Høyde:** 500 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Dybde:** 25 mm
- **Vekt:** 110 g

Britt Bed Shaker

- **Høyde:** 150 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Dybde:** 37 mm
- **Vekt:** 470 g

ANNA Analog Alarm Clock

- **Høyde:** 87 mm
- **Bredde:** 110 mm
- **Dybde:** 66 mm
- **Vekt:** 220 g

DINA Digital Alarm Clock

- **Høyde:** 87 mm
- **Bredde:** 110 mm
- **Dybde:** 50 mm
- **Vekt:** 320 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer

For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47