



Innvendig avkalking av bidetenhet

Utføres ved behov · Varighet ca. 30 min · Krever: Durgol 125 ml

Bidetsetet har et **innebygd automatisk avkalkingsprogram**. Bruk kun Durgol avkalkingsvæske til Geberit AquaClean (125 ml). Programmet starter automatisk når lokket settes på igjen.



1 Fjern lokket

Hold i begge sider og trekk lokket mot deg. Det sitter i klips — det krever litt kraft.



2 Løft av lokket

Løft lokket opp og legg det til side. Vanntanken med påfyllingsåpning er nå synlig.



3 Fjern proppen

Ta den hvite proppen ut av åpningen til vanntanken. Legg proppen til side — den skal brukes igjen.



4 Fyll på Durgol

Hell 125 ml Durgol i åpningen på vanntanken. Tanken er full når væske renner ned i skålen.



5 Sett proppen tilbake

Sett proppen tilbake og trykk den godt fast, slik at den sitter tett.



6 Sett på lokket

Sett lokket på plass og trykk det fast. Avkalkingsprogrammet starter automatisk.

FORLØP

Pumper væske

~2 min

Løser opp kalk

~15 min

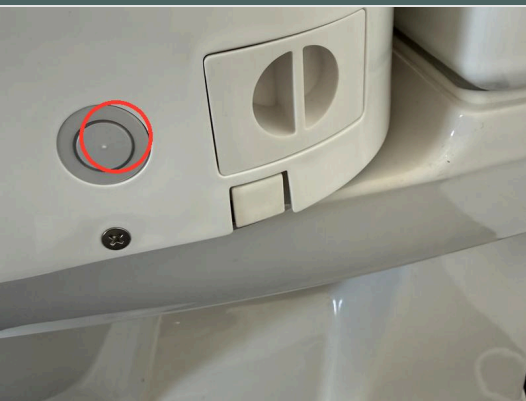
Skyller gjennom

~15 min

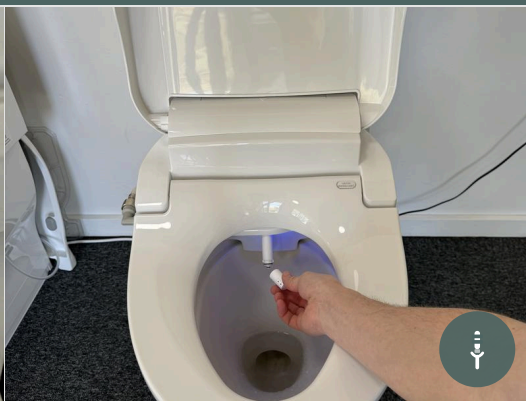
Ferdig



⚠ Viktig: Når programmet er startet, kan det **ikke avbrytes**. Vaske- og tørkefunksjoner er **utilgjengelige** under hele forløpet (ca. 30 min.).

 **Manuell rengjøring av dysearm**
Utføres regelmessig · Varighet ca. 5 min · Krever: Gammel tannbørste + husholdningseddik**1 Trykk knappen 2× raskt**

Trykk to ganger raskt på den **grå multifunksjonsknappen** (markert med rød sirkel) på siden av bidetenheten. Dysearmen kjører automatisk ut.

**2 Rengjør armen**

Bruk en gammel tannbørste med husholdningseddik til å rengjøre dysearmen grundig.

💡 Dysehodet kan trekkes av i samme retning som dysen peker. Skyll det under rennende vann.

**3 Avslutt rengjøring**

Armen trekker seg automatisk inn igjen etter **5 minutter** — eller trykk knappen **1× for å avslutte** manuelt.



Automatisk påminnelse: Produktet vil selv minne deg om å gjennomføre avkalkingsprogrammet **hver 4. måned**. Du vil se at lyset inne i toalettet begynner å **pulsere** — det er signalet om at det er på tide med avkalking.



SE VIDEOVEILEDNING
Skann QR-koden for å se en video av prosessen.