

sensio

ML Auracast Transceiver with Neckloop

Bruksanvisning



Produktnummer: 606558

Dokument:

Innhold

Innhold	2
Sikkerhet	2
Introduksjon	3
Daglig bruk	5
Spesifikasjoner	9
Vedlikehold	9
Resirkulering	9
Symboler	10
Godkjenninger	11
Support	11

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.

- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.

Introduksjon

I esken

- ML Bluetooth Auracast Audio Transceiver
- Halsslynge
- USB-C kabel
- USB-C strømadapter
- 3,5 mm audiokabel

Produktbeskrivelse

ML Audio Transceiver kan benyttes til å motta (Rx) og sende (Tx) Bluetooth Auracast lydstrømmer. Ved å koble til halsslyngen kan man motta lydstrømmer direkte til høreapparatet.



(7) Belteklips

(6) 3.5mm audio linje inn- / ut



1) Funksjonsbryter

2) LED indikator

3) Mikrofon

8) USB-C lade/USB audio kontakt

4) Send (TX) / Motta (RX) bryter

5) Volum opp/ned

Daglig bruk

Sendemodus

1. Sett bryter (4) til TX-modus.
2. Trykk og hold inne funksjonsbryter (1) i tre sekunder til LED-lyset tennes.
3. Velg lydoverføringsmodus.

Overføring med Bluetooth Classic (1-til-1):

Dobbelklikk på funksjonsbryter (1) for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Røde og blå lys blinker vekselvis.

- Når enheten er paret, blinker det blå lyset to ganger hvert 3. sekund.

Overføring med Auracast (1-til-N):

Trippelklikk på funksjonsbryter (1) for å aktivere Auracast-modus. LED-lyset vil blinke lilla.

Mottaksmodus

1. Sett bryter (4) til RX-modus.
2. Trykk og hold inne funksjonstasten (1) i tre sekunder til LED-lyset tennes.
3. Velg lydoverføringsmodus.

Motta med Bluetooth Classic (1-til-1):



- Dobbelklikk på funksjonsbryter (1) for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Røde og blå lys blinker vekselvis.
- Når enheten er paret, blinker det blå lyset to ganger hvert 3. sekund.

Motta med Auracast (1-til-N):

- Trippelklikk på funksjonsbryter (1) for å aktivere Auracast-modus. LED-lyset vil blinke lilla.



CONNECTION DIAGRAM

Bluetooth Classic

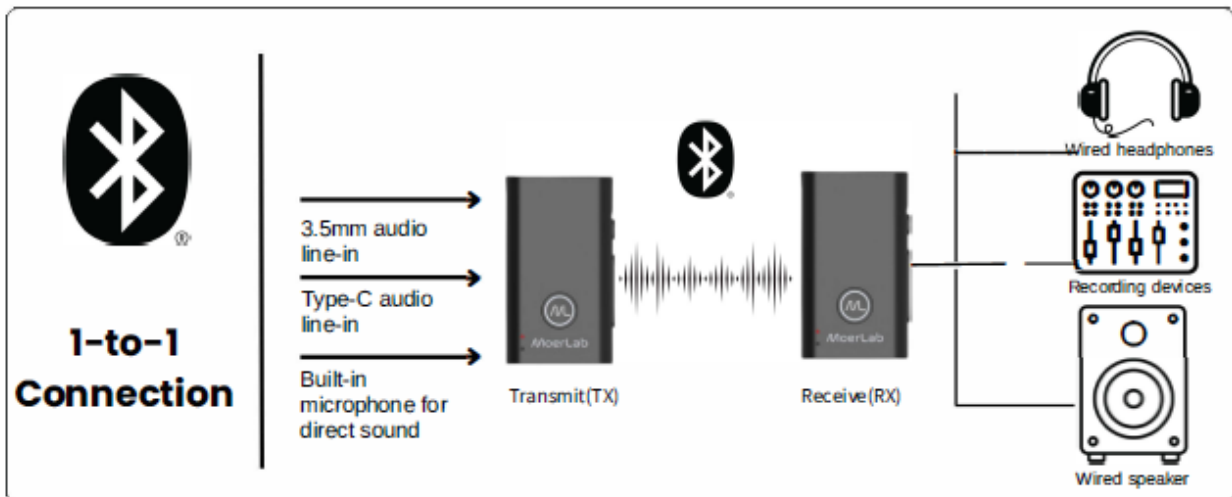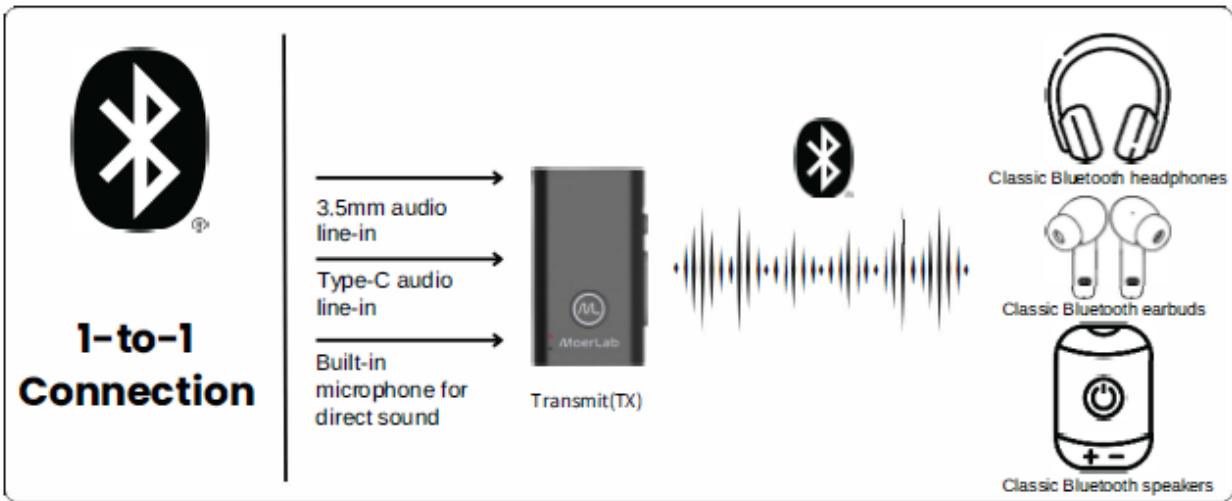

CONNECTION DIAGRAM

Auracast

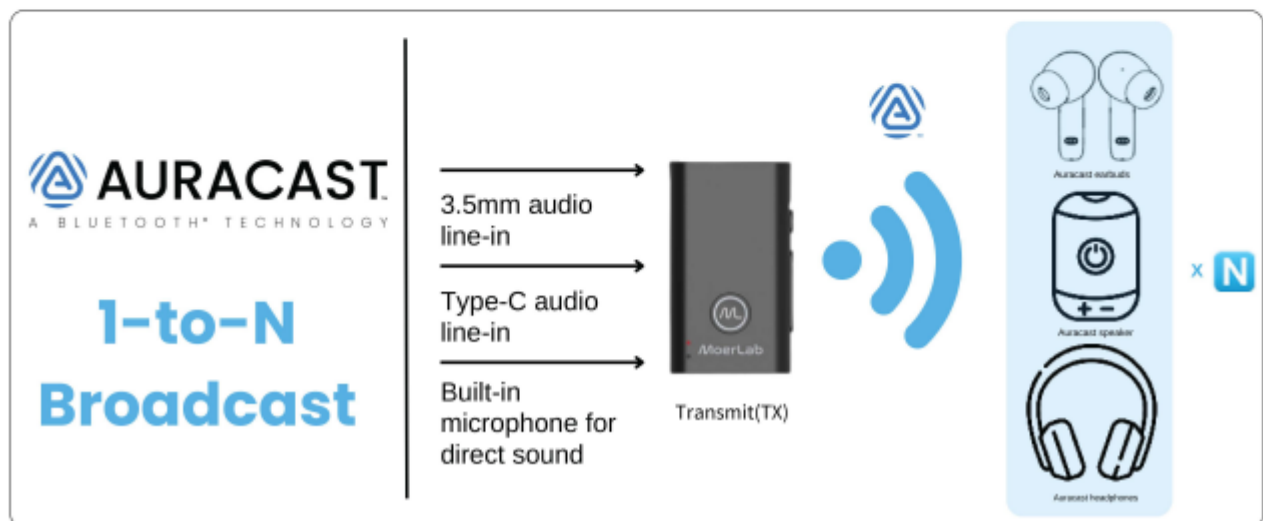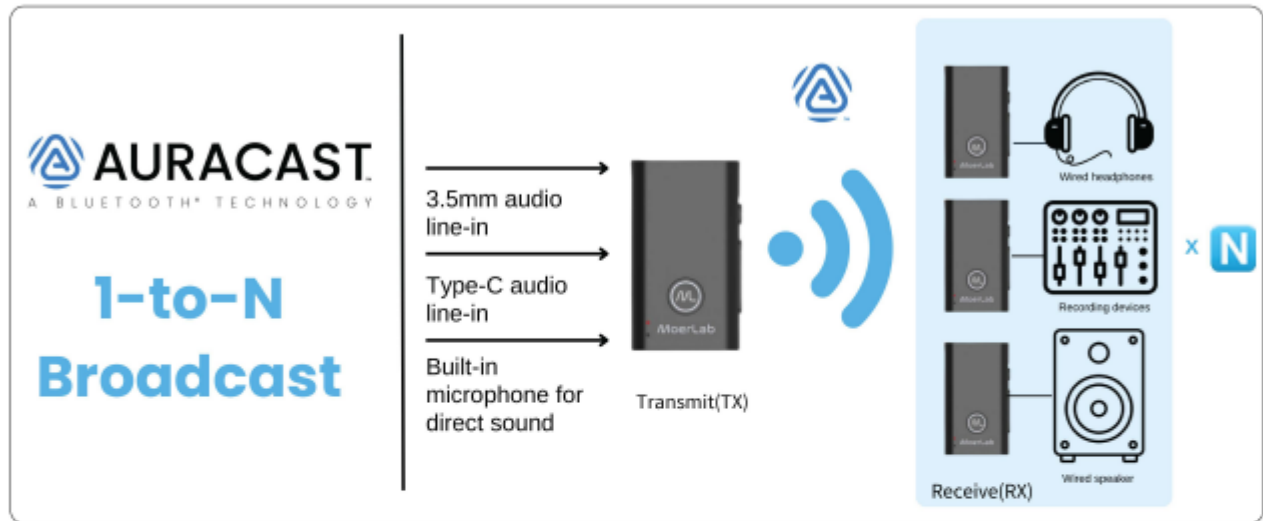

LED-INDIKATOR

Modus	Funksjon	Tilstand	LED-indikator
Send (TX)	Strømstatus	Lavt batterinivå	Rødt lys blinker hvert 5. sekund
		Lader	Rødt lys lyser konstant
		Lading fullført	Blått lys lyser konstant
	Bluetooth Classic	Sammenkobling	Blått lys blinker raskt
		Sammenkoblet	Blått lys blinker to ganger hvert 3. sekund
		Frakoblet	Blått lys blinker én gang hvert 3. sekund
		Dempet (Mute)	Rødt lys lyser konstant
	Auracast	Sammenkobling	Lilla lys blinker
		Dempet (Mute)	Rødt lys lyser konstant

Modus	Funksjon	Tilstand	LED-indikator
Mottak (RX)	Strømstatus	Lavt batterinivå	Rødt lys blinker hvert 5. sekund
		Lader	Rødt lys lyser konstant
		Lading fullført	Blått lys lyser konstant
	Bluetooth Classic	Sammenkobling	Rødt og blått lys blinker vekselvis
		Sammenkoblet	Blått lys blinker to ganger hvert 3. sekund
		Frakoblet	Blått lys blinker én gang hvert 3. sekund
		Inn-/utgående anrop	Blått lys blinker
		Under samtale	Blått lys lyser konstant
	Auracast	Sammenkobling	Lilla lys blinker raskt

Spesifikasjoner

- Blåtann versjon: 5.3
- Vekt: 10g
- Dim. 26mm*47mm*10mm
- DC input 5V/100mA
- Ladetid 2 timer
- Audio inn: 3,5mm linje inn, USB, MIC
- Audio ut: 3,5mm linje ut, USB linje ut

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol Beskrivelse



Varenummer



Serienummer



Batch-nummer



Unikt identifikasjonsnummer



Produsent



Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.



Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47