


BRUKERMANUAL

Erectus penisprotese

Komponenter i pakningen



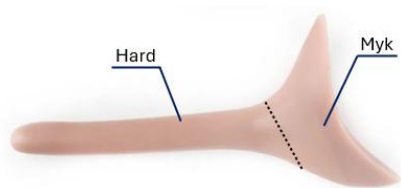

1. Klargjøring av protesen

- 1.1 Sørg for at alle komponenter er rene og tørre.
- 2.1 Påfør noe glidemiddel på tuppen av ereksjonsspinnen og sett inn ereksjonsspinnen i penisprotesen.



2. Ta i bruk festeanordning

- 2.1 Det er som oftest enklest å starte med å feste protesen til trusen før du tar på deg trusen.
- 2.2 Før penisprotesen gjennom den øvre åpningen i selen, den skal føres inn i det øverste hullet slik at den vannrette separatorstroppen hviler under.
- 2.3 Plasser pungen deretter utenfor trusen, slik at hele ligger jevnt utenfor trusen, og testiklene ligger på hver sin side av separatorstroppen.



3. Sikkerhet og komfort

- 3.1 Unngå overdreven bøyning eller vridning av silikonet.
- 3.2 Stopp bruken dersom det oppstår ubehag, gnissing eller smerte.
- 3.3 Bruk eventuelt vannbasert glidemiddel for økt komfort

4 Rengjøring og vedlikehold

- 4.1 Fjern alle løse komponenter før vask.
- 4.2 Vask protesen med mild såpe og lunke vann.
- 4.3 Skyll godt og la lufttørke helt. Ikke bruk varme.
- 4.4 Unngå slipende rengjøringsmidler.
- 4.5 Stofftruse vaskes for hånd / maskin.

Bruk alltid kondom med protesen for å redusere risikoen for seksuelt overførbare infeksjoner og for å forlenge protesens levetid. Bruk kun vannbasert glidemiddel og kondomer uten silikon for å unngå skader på protesematerialet.

5 Oppbevaring

- 5.1 Oppbevar protesen på et kjølig, tørt sted.
- 5.2 Unngå direkte sollys og trykk mot silikonet over tid.
- 5.3 Oppbevares adskilt fra sexleketøy i silikon for å unngå kjemisk påvirkning mellom materialer.

