

# Calexotics trusevibrator

Calexotics trusevibrator er en kraftig vibrator som plasseres sikkert og diskret i trusen. Vulva, som omfatter klitoris, kjønnslepper og det følsomme området fra urinrøret til skjedeinngangen er rikt forsynt med nerver. Når vibratoren er operativ gir den god stimulering av dette sensitive område.

Vibratoren benyttes av kvinner med nedsatt seksuell funksjon, ved sykdom som MS eller diabetes, etter overgangsalder, stråleterapi eller ulike operative inngrep. Vibratoren hjelper med å øke blodgjennomstrømming som igjen gir bedre følsomhet i områder med nedsatt sensibilitet.

Vibrasjon øker blodgjennomstrømning til vev og slimhinner i bekkenet, noe som er spesielt gunstig for kvinner i overgangsalder siden skjedevegger og muskler blir tynnere. Kvinner kan også oppleve ubehag i underlivet etter fødsler med stramt eller fortykket arrvev fra rifter eller klipp, underlivsoperasjoner, smerter ved samleie på grunn av stram bekkenbunn, stråleskader etter kreftbehandling og manglende evne til å oppnå orgasme. Vibrasjonsterapi er godt egnet til å behandle disse plagene.

Vibrasjon kan også redusere smerte, og en vibrator mot perineum/vulva vil derfor kunne gi smertelindring i tillegg til økt blodgjennomstrømning og avspenning.

**Lading:** Sett inn ladekabelen i utgangen på vibratoren (du finner denne ved siden av tegnet DC, i den ene enden) og i utgangen på fjernkontrollen (i enden). Ladekabelen er en USB ladekabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapter i stikkontakten. Husk å lade vibratoren når den er tørr. Ladeledning må settes helt inn i vibratoren.

**På/AV:** Slå på vibratoren ved å trykke på ON/OFF knappen i 3 sekunder. Et rødt lys vil synes, og vibratoren vil gi fra seg en liten bevegelse. Du trykker på «XO»-tegnet på fjernkontrollen for å starte vibratoren. Du slår den av på ved å trykke 3 sekunder på «XO»-tegnet på fjernkontrollen. Selve vibratoren kan du også slå av ved å trykke 3 sekunder på ON/OFF knappen.

**Bruk:** Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på vibratoren (se at det røde lyset er på). Legg vibratoren i trusen, over klitorisområdet. Brett eller skyv «vingene» over trusekanten for å holde vibratoren på plass. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren.

**Endre vibrasjonsfrekvens:** Trykk kort på ON/OFF knappen på selve vibratoren eller trykk kort på «XO» på fjernkontrollen. Vibratoren har 12 ulike vibrasjons-innstillinger.

**Etter bruk:** Vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibratorer.



## Spesifikasjoner:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Størrelse</b>         | 9,5 cm x 2,5 cm     |
| <b>Materiale</b>         | Silikon   ABS-Plast |
| <b>Oppladbar</b>         | Ja                  |
| <b>Ladetid</b>           | ca. 90 min          |
| <b>Brukstid</b>          | opptil 80 min       |
| <b>Vannbestandighet</b>  | vanntett            |
| <b>Vibreringsmoduser</b> | 12                  |

Se våre produkter for inkontinens, smertelindring, muskelplager, bekkenbunnsplager og seksuell helse - [quintet.no](http://quintet.no) - 55 98 15 55 - [post@quintet.no](mailto:post@quintet.no)

# QUINTET