

sensio

# Hodebøylemikrofoner

Vozono™ Headset Microphone 10 Complete

Vozono™ Headset Microphone 7 Complete

Vozono™ Single Ear Microphone 4 Complete

Bruksanvisning



# Innhold

---

<b>Sikkerhet</b>	<b>3</b>
<b>Introduksjon</b>	<b>4</b>
<b>Kom i gang</b>	<b>5</b>
<b>Innstillinger og bruk</b>	<b>6</b>
<b>Feilsøking</b>	<b>7</b>
<b>Spesifikasjoner</b>	<b>8</b>
<b>Vedlikehold</b>	<b>8</b>
<b>Resirkulering</b>	<b>9</b>
<b>Symboler</b>	<b>9</b>
<b>Godkjenninger</b>	<b>10</b>
<b>Support</b>	<b>11</b>

# Sikkerhet

---

## Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys

# Introduksjon


---

## I esken

- Vozono Beltpack
- Mikrofon
- Bruksanvisning

## Produktbeskrivelse

Denne mikrofonen benyttes i Vozono lydutjevningsanlegg. Enheten er oppladbar og sammenkobles med Vozono Base eller Vozono Portabel (Vozono Duo og Vozono Uno).

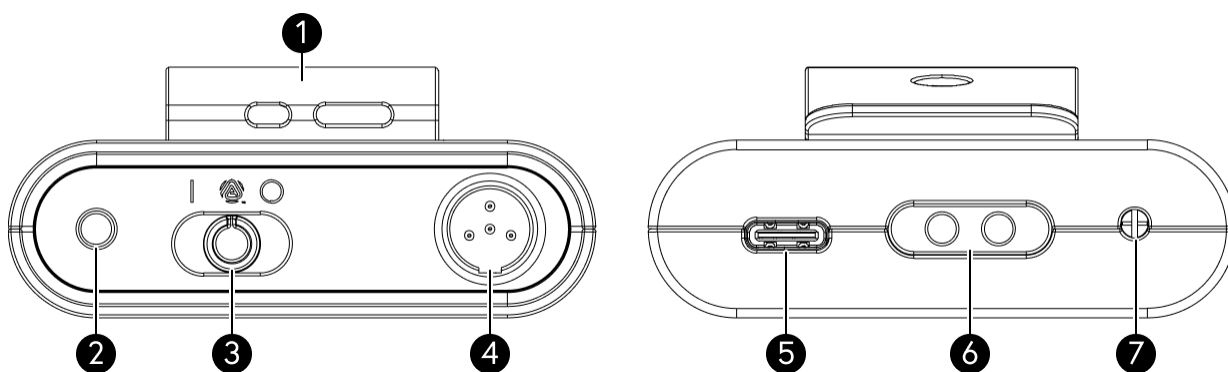


1. Belteklips
2. Lysindikator
3. Funksjonsbryter
4. Tilkobling for mikrofon
5. USB ladekontakt
6. Ladekontakter for lademodul
7. Følsomhetsjustering

# Kom i gang

---

## Sammenkobling

For at mikrofonen skal fungere må den sammenkobles med Vozono Base eller Vozono Portable. Sammenkoble én mikrofon av gangen.

1. Slå på Vozono Base eller Vozono Portable med av/på-knapp, og vent på fast grønt lys i av/på-knappen.
2. Sett funksjonsbryteren ③ på beltepack i posisjon 1.
3. Lysindikator på mikrofon ② begynner å blinke, gult lys ved først gangs oppkobling, grønt lys hvis allerede sammenkoblet til annet system.
4. Plasser mikrofonen med NFC-feltet  på mikrofon og Base/Portable pekende mot hverandre. Et grønt lys tennes på mikrofonen ② og lyser i 3 sekunder for å bekrefte sammenkobling.
5. Gjenta pkt 2-5 til alle mikrofoner er sammenkoblet.

Sammenkobling er gjennomført.

## Testing


1. Sett funksjonsbryter ③ i posisjon I.
2. Sjekk at en gul lampe tennes på Vozono Base eller Vozono Portable. Snakk i mikrofonen for å bekrefte at det er lyd.
3. Gjenta med alle mikrofoner til alle er testet.

Anlegget er klart til bruk.

# Innstillinger og bruk

---

## Funksjonsbryter ③

- **O:** Mikrofonen er avslått
-  **Auracast™:** Mikrofonen er påslått og sender kun Auracast™
- **I:** Mikrofonen er påslått og sender til Vozono Base eller Portable

Når Auracast™ er valgt, sender ikke mikrofonen til Vozono Base eller Vozono Portable. Høreapparater eller annet mottagerutstyr kan tilkobles mikrofonens Auracast™ lydstrøm. Se mottagerens bruksanvisning for tilkobling til lydstrømmen. Denne funksjonen er tiltenkt situasjoner hvor lærer og elev befinner seg utenfor klasserommet, eller i én til én situasjoner.

## Mikrofonfølsomhet ⑤

Mikrofonvolumet er fabrikkinnstilt, men det kan være behov for justering av følsomheten for å tilpasse til brukerens stemme eller ved bytte av mikrofontype. Juster følsomhet, og juster til best lyd kvalitet uten forvrenging. Nivået bør være tilnærmet likt eventuelt håndholdte mikrofoner i anlegget.

## Lysindikasjoner ②

### Under bruk

- **Grønt lys:** Indikerer at mikrofonen er påslått og sammenkoblet
- **Grønt blinkende lys:** Oppretter forbindelse
- **Rødt lys i tre sekunder:** Indikerer opptatt kanal
- **Rødt lysblink hvert 5. sekund:** Lavt batteri
- **Blått lys:** Indikerer at Auracast™ er aktivert

### Feilsituasjoner

- **Gult blinkende lys:** Utenfor rekkevidde eller ikke sammenkoblet
- **Rødt raskt blinkende lys:** Feilindikasjon


## Lading

Mikrofonen lades i Vozono lademodul ellr med USB-C ladekabel.

- **Rødt lys på mikrofonen:** Lading pågår
- **Grønt lys på mikrofonen:** Lading er ferdig

## Hodebøylemikrofon

1. Sett hodebøylens eller ørebøylens plugg i mikrofonsenderens kontakt ④. Mikrofonen bæres hengende over ørene som vist på bilde.
2. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærmere og peker mot munnen. For best passform juster vidden i nakken ved å trekke/skyve på bøylene, hvis mulig.

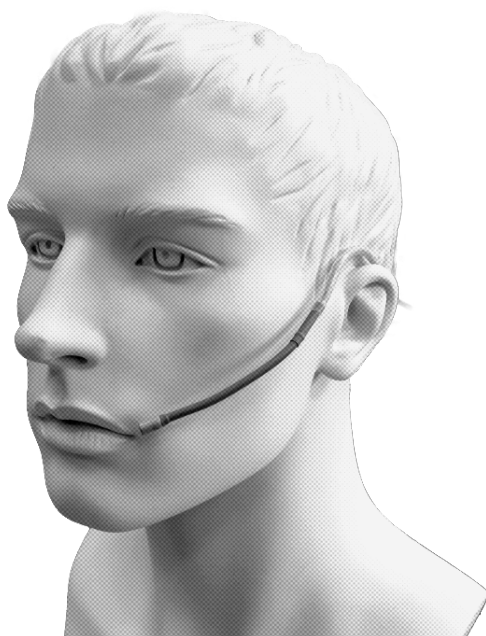

## Feilsøking

---

### Mikrofonen virker ikke og blinker gult

Mikrofonen er utenfor rekkevidde, eller er ikke sammenkoblet. [Se sammenkobling](#)

# Spesifikasjoner

---

## Tekniske data

- **Audiofrekvens:** 125 – 16 000 Hz
- **Rekkevidde:** 25 meter i fri sikt
- **Batteri:** LiFePO4-batteri 3,2 V
- **Brukstid:** 10 timer
- **Radiofrekvenser:** ISM bånd 2,4 GHz og 5,725 GHz
- **Sendereffekt:** opptil 200 mW

## Dimensjoner

### Vozono Beltpack

- **Høyde:** 98 mm
- **Bredde:** 73 mm
- **Dybde:** 27 mm
- **Vekt:** 100 g

## Vedlikehold

---

### Rengjøring

Tørk av med lett fuktet klut.








# Resirkulering





---

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## Symboler

---

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato

Symbol	Beskrivelse
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Vær forsiktig
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.
	Produktet er i samsvar med (EU) 2017/745 – forordning om medisinsk utstyr (MDR).

## Godkjenninger

---

### MDR

Medical Device Regulation (MDR) er en forskrift som regulerer produksjon og distribusjon av medisinsk utstyr i EU. For brukeren sikrer MDR at medisinsk utstyr oppfyller strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, noe som beskytter pasientenes helse og sikkerhet.

### Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

[Se hele samsvarserklæringen på Sensio Vestfolds nettsider](https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering)

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

# Support

---

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

## Produsent

Sensio AS, avdeling Vestfold

- E-post: [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no)
- Nettside: [vestfold.sensio.io](http://vestfold.sensio.io)
- Telefon: +47 33 47 33 47