



Rampe - Produkt katalog

Stepless
by Guldmann

Tilgjengelighet er viktig

Verden er full av forskjellige nivåer. Det er hindringer overalt som gjør hverdagen vanskelig for mange bevegelseshemmede. Selv en liten dørstokk kan være en hindring.

Vi leverer et bredt spekter av ramper, inkludert alt fra små dekkplater og dørstokkramper til bærbare løsninger.

Rampene brukes til å eliminere den typen mindre høydeforskjeller man ofte møter når man foreksempel skal opp trinn, trapper eller fortauskanter. En rampe sikrer bedre tilgjengelighet for alle - rullestolbrukere, folk som går vanskelig, folk som dytter barnevogner, etc.

Produkter er laget av en rekke materialer og er tilgjengelig i forskjellige lengder og bredder med forskjellige overflatefinisher. Det brede utvalget av produkter gjør oss i stand til å tilby akkurat den rette rampen for hvert enkelt behov.

Over 40 års erfaring

Produsenten Stepless er en avdeling av Guldmann - og et spesialmerke som utelukkende fokuserer på tilgjengelighetsløsninger.

De produserer et bredt utvalg av høykvalitetsløsninger designet for å eliminere hindringer og vanskeligheter forårsaket av høydeforskjeller, for å at personer med begrenset mobilitet har enkel og verdig tilgang til alle typer bygninger og transportmidler.

Guldmann er et danskbasert selskap med mer enn 40 års erfaring med utvikling, produksjon og salg av velferdsteknologi for personer med nedsatt funksjonsevne, og arbeidsverktøy for de som hjelper og bryr seg om de.





BÆRBARE RAMPER 4

Vanlig rampe	4
Teleskop rampe	4
Sammenleggbar rampe	4
Sammenleggbar teleskop rampe	4

Bred sammenleggbar Pro-rampe	8
Bred vanlig rampe	9
Bred sammenleggbar rampe	9
Dørstokk rampe	9

Teleskop EasyFold rampe	10
EasyFold Pro rampe	10
EasyFold Pro3 rampe	10

Lite rampe	12
------------------	----

Tekniske spesifikasjoner	14
--------------------------------	----

Valg af rampelængde	16
---------------------------	----

DEKK PLATER..... 17

EXCELLENT RAMPEKITS 18



Vanlig rampe

Ideell for jevne høydeforskjeller, hvor det er behov for minst mulig vekt, og hvor rampen brukes ofte på samme sted.

Artikkel nr. 30006-xxx



Teleskop rampe

En fleksibel rampe som kan brukes mange steder og med varierende høydeforskjeller hvor høyde og lengde er variabel. Tar liten plass når den ikke er i bruk.

Artikkel nr. 30016-xxx



Sammenleggbar rampe

Ideel for jevne høydeforskjeller. Tar liten plass når den ikke er i bruk og er enkel å transportere.

Artikkel nr. 30026-xxx



Sammenleggbar teleskop rampe


Kombinasjonen av sammenleggbar og teleskop gir en ekstra fleksibilitet i forhold til ulike høydenivåer. Lett å transportere og tar liten plass når den ikke er i bruk.

Artikkel nr. 30026-xxx-T



Rampene brukes til å kjøre frem trinn og fortauskanter, når rullestolen skal settes inn i et kjøretøy, eller når man skal utjevne en relativt liten høydeforskjell.



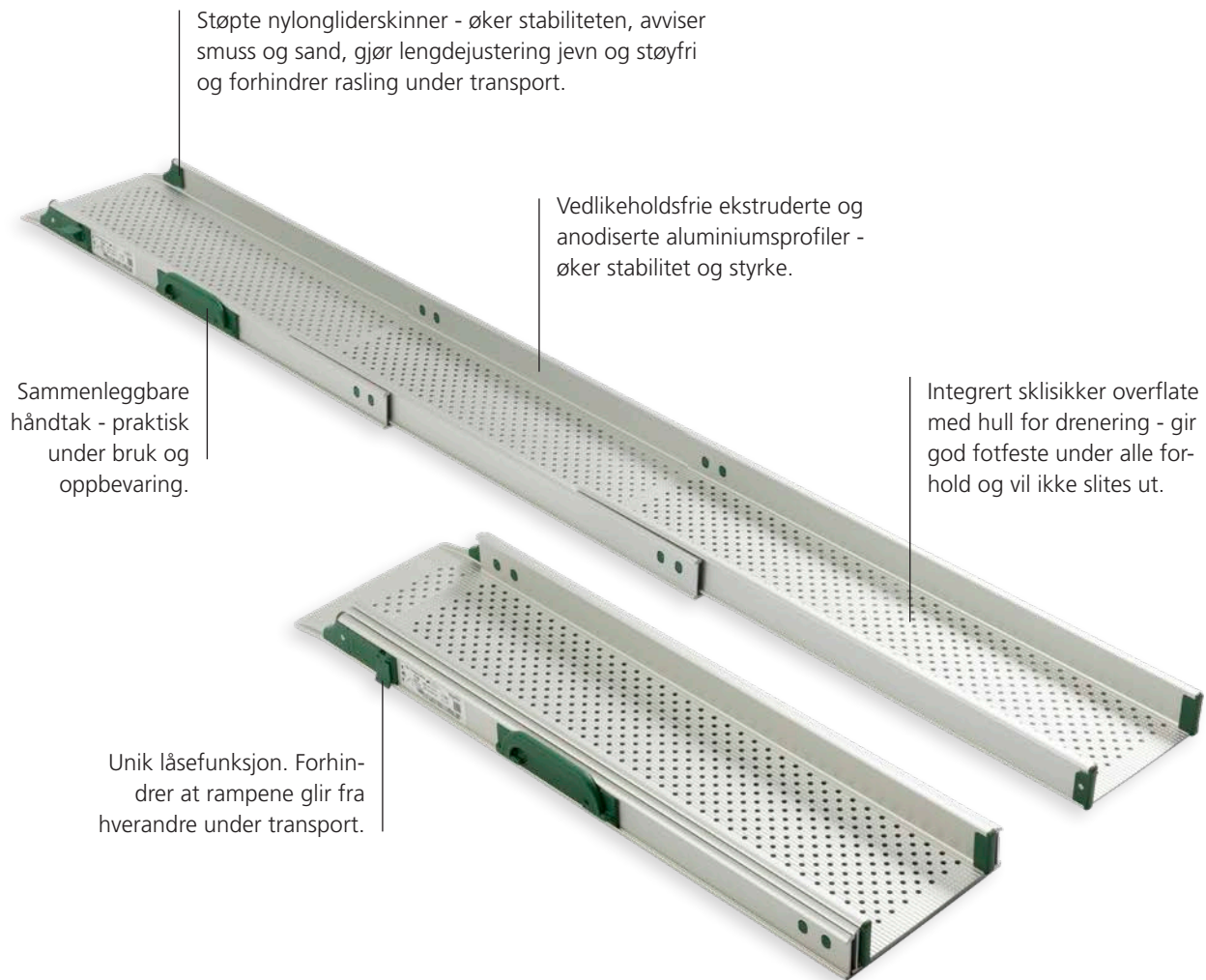

En gjennomtenkt rampe






Bred sammenleggbar Pro-rampe

Ideell for steder hvor rampen skal brukes permanent eller over lengre tid. Nettingflaten gjør rampen ekstra slitesterk og utmerket i alle værforhold. Rampen kan brukes til mange bruksområder fra rullestoler til lette industritraller.


Artikkel nr. 30046-xxx

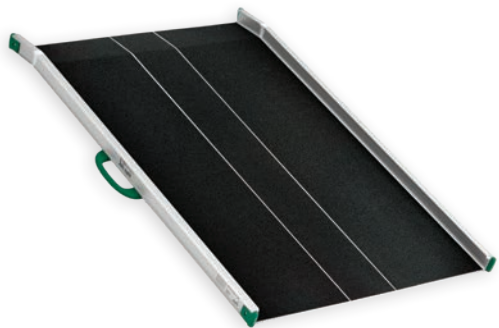

Bred slett rampe

Ideell på steder hvor rampen er permanent på plass eller alltid brukes på samme sted. Gir økt sikkerhet for brukere og hjelpere. Bra for scootere og elektriske rullestoler hvor komfort er en viktig faktor.


Artikkel nr. 30030-xxx

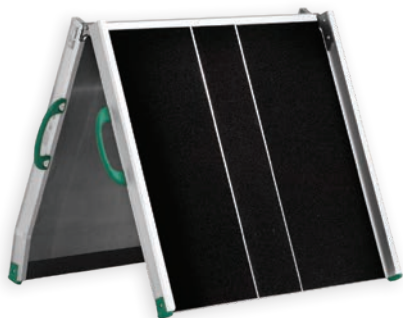

Bred sammenleggbar rampe

Ideell når rampen brukes på samme sted og for plassering i bilen. Gir økt sikkerhet for brukere og hjelpere. Bra for scootere og elektriske rullestoler hvor komfort er en viktig faktor. Tar mindre plass enn den brede flate rampen når den ikke er i bruk.

Artikkel nr. 30040-xxx

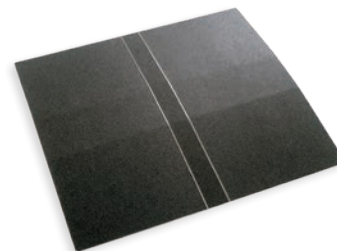

Dørstokkrampe

Dørstokkrampen plasseres over eksisterende dørstokk og letter påkjøring fra begge sider.

Material: bøyd 3 mm aluminiumsplate med sort sklisikre belegg.


Artikkel nr. 39167 / 77



Teleskopisk EasyFold-rampe

Perfekt for å overvinne større høydeforskjeller. En bred rampe som enkelt forlenges til ønsket lengde. Kan foldes sammen i bredden og utvides i lengden, og tar dermed mindre plass enn andre lange ramper - også under transport og lagring. Utmerket for scootere og elektriske rullestoler.

Artikkel nr. 30070-xxx

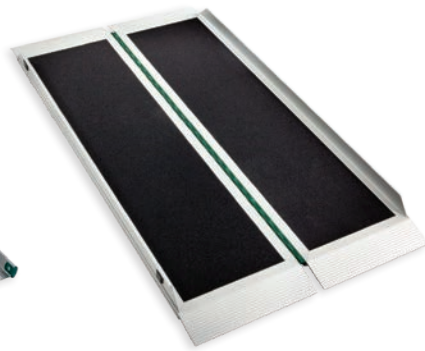

EasyFold Pro rampe

Bred rampe i enkelt og lett design for tung last. Med en maksimal belastning på 350 kg er denne rampen ideell for elektriske rullestoler og scootere. Rampen kan enkelt foldes i to, noe som betyr at den tar mindre plass under lagring. Håndtaket gjør det lettere å plassere rampen. Den kan bæres og transporteres som en koffert.

Artikkel nr. 30080-xxx



EasyFold Pro3 rampe

3-delt rampe med bred kjøreflate som sammenfoldet tar minimalt med plass under transport og lagring. Låsen sørger for at rampen forblir sammenslått under transport. Med en maksimal belastning på 350 kg er rampen egnet for elektriske rullestoler og scootere.

Artikkel nr. 30085-xxx







Lite rampe

Lav vekt - lett å transportere

Lite-ramper er de absolutt letteste rampene på markedet på grunn av deres unike materialsammensetning som består av glass- og grafittfibre.


Denne spesielle materialsammensetningen gir de samme egenskapene som en tennisracket: den er både lett og sterk.

Høyt sikkerhetsnivå - enkel håndtering

Kjøreflaten har et sklisikkert dekke. Trinnløse Lite-ramper er enkle å slå sammen og ut. Rampene har en enkel foldeskjøl, som gjør det enkelt for både brukere og hjelpere å bruke dem.


Dens lette design (for 700 mm veier rampen kun 3,5 kg) gjør også at rampen kan transporteres bak i en rullestol uten å forårsake stabilitetsproblemet.

Lite ramper er et opplagt valg for brukere/hjelpere som ønsker minimal vekt, eller for den mer aktive rullestolbrukeren. Flott for reise eller en tur til byen.

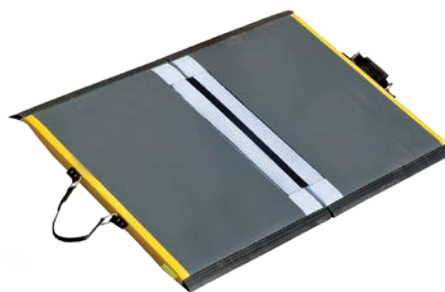

Lite rampe

Artikkel nr. 30100-xxx

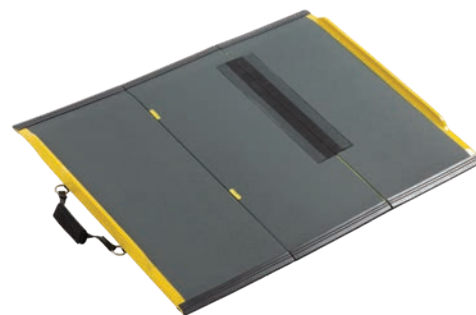


Lite rampe, 3-delt


Artikkel nr. 30200-xxx

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel nr.	Type	Maks/min lengde mm	Indre bredde mm	Ytre bredde maks mm	Bredde sammenlagt maks mm	Maks vekt kg/part	Vekt kg/stk
30006-050	Vanlig rampe	550	210	235	-	400	1,5
30006-100	Vanlig rampe	1160	210	235	-	400	3,1
30016-090	Teleskop rampe	850/580	190	235	-	400	2,8
30016-120	Teleskop rampe	1190/760	190	235	-	400	3,7
30016-200	Teleskop rampe	2020/1160	190	235	-	300	5,6
30016-200-3	Teleskop rampe 3-delt	1990/870	170	235	-	300	6,5
30016-300-3	Teleskop rampe 3-delt	2850/1160	170	235	-	250	8,2
30026-200-T	Sammenleggbar teleskop rampe	2010/770	190	235	-	300	6,8
30026-300-T	Sammenleggbar teleskop rampe	2770/1020	190	235	-	300	8,6
30026-110	Sammenleggbar rampe	1110/570	210	235	-	400	3,8
30026-150	Sammenleggbar rampe	1510/770	210	235	-	400	4,9
30026-200	Sammenleggbar rampe	2010/1020	210	235	-	300	6,3
30030-100	Bred slett rampe	1009	769	868	-	325	9,7
30030-125	Bred slett rampe	1259	769	868	-	325	12,1
30030-150	Bred slett rampe	1509	769	868	-	325	14,4
30030-200	Bred slett rampe	2009	769	868	-	325	19,1
30030-300	Bred slett rampe	3009	769	868	-	200	28,6
30040-150	Bred sammenleggbar rampe	1509/782	769	868	782	325	17,5
30040-200	Bred sammenleggbar rampe	2010/1033	769	868	782	325	22,2
30040-250	Bred sammenleggbar rampe	2510/1283	769	868	782	200	26,9
30040-300	Bred sammenleggbar rampe	3010/1533	769	868	782	200	31,7
30046-100	Bred sammenleggbar Pro rampe	1000/520	820	870	-	400	11
30046-160	Bred sammenleggbar Pro rampe	1600/850	820	870	-	400	18
30046-200	Bred sammenleggbar Pro rampe	2000/1050	820	870	-	400	21
30046-250	Bred sammenleggbar Pro rampe	2500/1300	820	870	-	400	25
30046-280	Bred sammenleggbar Pro rampe	2800/1450	820	870	-	400	29

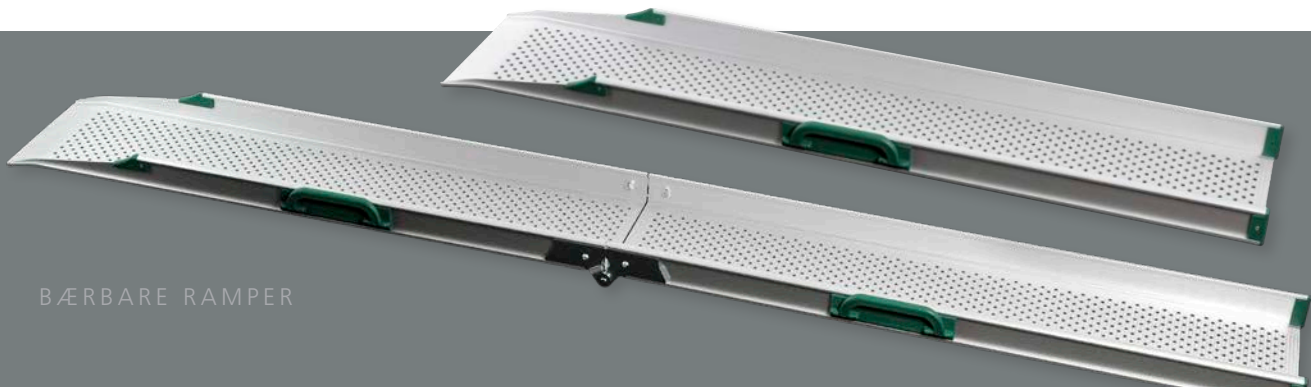

Artikkel nr.	Type	Maks/min lengde mm	Indre bredde mm	Ytre bredde maks mm	Bredde sammenlagt maks mm	Maks vekt kg/part	Vekt kg/stk
39167	Dørstokk rampe	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Dørstokk rampe	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3
30070-180	Teleskopisk EasyFold rampe	1830/1120	760	820	405	325	16,4
30070-210	Teleskopisk EasyFold rampe	2130/1270	760	820	405	325	18,9
30070-240	Teleskopisk EasyFold rampe	2440/1430	760	820	405	325	21,4
30070-300	Teleskopisk EasyFold rampe	3050/1730	760	820	405	200	26,4
30080-095	EasyFold Pro rampe	935	760	776	405	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro rampe	1185	760	776	405	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro rampe	1482	760	776	405	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro rampe	1785	760	776	405	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro rampe	2085	760	776	405	350	15,8
30085-165	EasyFold Pro3 rampe	1635	760	786	282	350	13,4
30100-070	Lite rampe	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Lite rampe	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Lite rampe	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Lite rampe	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Lite rampe	2050	760	780	390	300	9,5
30100-000	Lite bæresesle for 700 mm rampe	-	-	-	-	-	-
30200-047	Lite rampe, 3-delt	470	800	820	290	300	2,5
30200-072	Lite rampe, 3-delt	720	800	820	290	300	3,5
30200-000	Lite 3-delt bæreseske	-	-	-	-	-	-

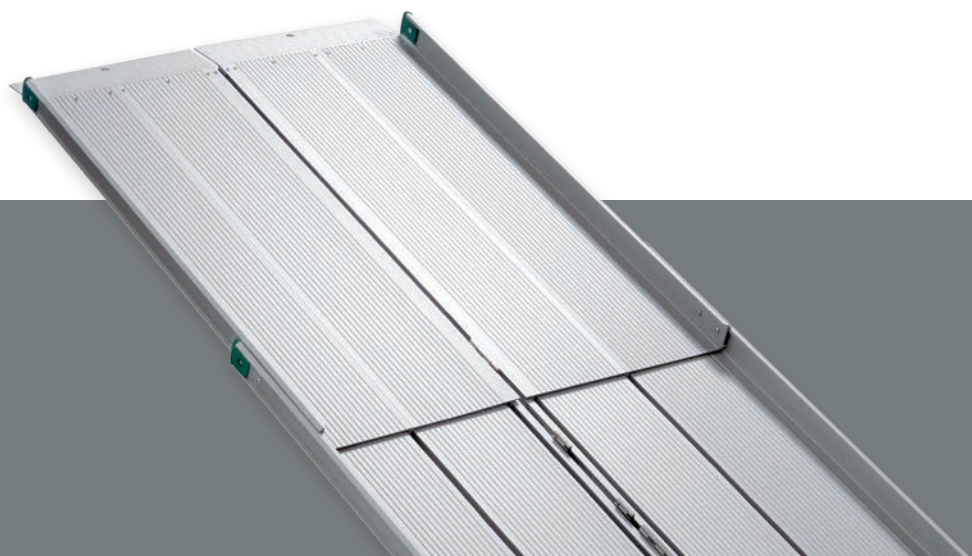

Velge den mest passende lengden på rampen

Velg alltid lengst mulig rampe. Jo lengre rampen er, jo mindre stigning å overvinne.


For selvstendige brukere av manuelle rullestoler: maks. stigning 1:7.

For manuelle rullestoler skjøvet av en hjelper og for elektriske rullestoler: maks. stigning 1:5.



Stignings diagram 1:5

Forskjell i høyde, mm

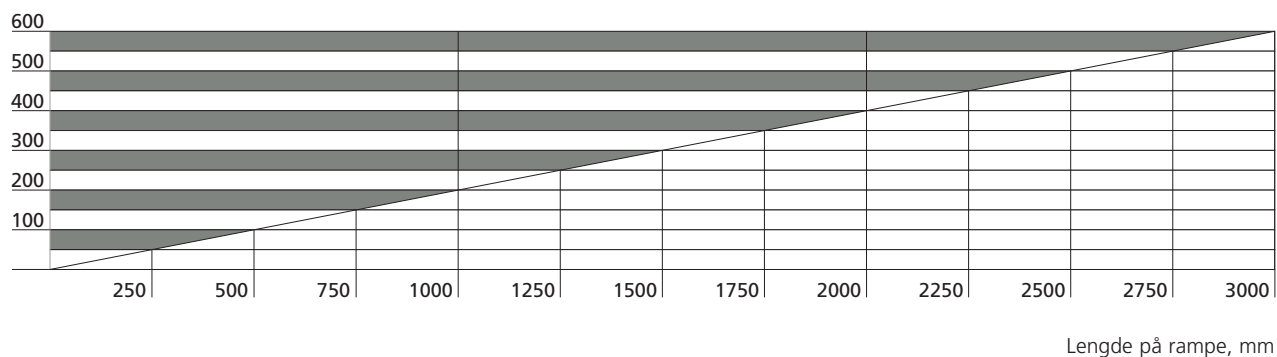

Dekkplater

– for dørstokker innendørs


Montering av trinnløse dekkplater fjerner dørstokken som en hindring for rullestol- og rollator-brukere på en diskret, estetisk tiltalende måte.

Hindringen elimineres permanent ved å fjerne den eksisterende dørstokken og installere en trinnløs dekkplate i stedet. Dekkplaten monteres helt i flukt med gulvet.

Artikkel nr.	Type	Lengde x bredde, mm
780199	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium (uten riller)	2000 x 50
780200	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium	2000 x 80
780201	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium	2000 x 105
780202	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium	2000 x 130
780204	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium	2000 x 150
780206	Dekkplate aluminiums-farget, aluminium	2000 x 180

Materiale: Ekstrudert aluminium med innarbeidet sklisikker overflate (riller)

Maks. belastning: 500 kg

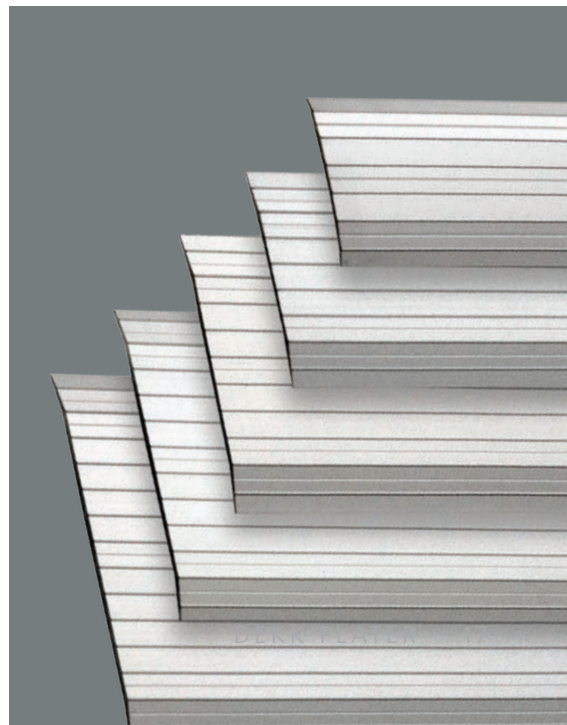



Utmerket rampesett – rampe til mange formål

Utmerkede ramper gjør det enkelt å komme seg gjennom dørstokker, både innendørs og utendørs.

Disse dørstokk-rampene selges i sett som er enkle å håndtere og installere. Settene leveres komplett med relevante instruksjoner og tilbehør for installasjon og individuell justering.

Rampesettet er tilgjengelig i to bredder: 75 cm og 100 cm. Flere sett kan takle høydeforskjeller på opptil 19,9 cm.

Utendørsversjonen er merket "S" for SlipStop - et ekstra sklisikkert lag for å gjøre utendørs ramper enda tryggere.

Utmerket rampesett er 100% PVC-fri plast og gjenbrukbare.

75 cm bredde

Artikkel nr.	Type	B x L x H cm
11-12101	Kit 1 – opptil 5,5 cm	75 x 25 x 5,5
11-12102	Kit 2 – opptil 9,1 cm	75 x 50 x 9,1
11-12103	Kit 3 – opptil 12,7 cm	75 x 75 x 12,7
11-12104	Kit 4 – opptil 16,3 cm	75 x 100 x 16,3
11-121045	Kit 5 – opptil 19,9 cm	75 x 125 x 19,9
11-12105	Kit Add-on1 – reparasjon ¹⁾	75 x 6,2 x 1,5

75 cm bredde med SlipStop (utendørs bruk)

Artikkel nr.	Type	B x L x H cm
11-12112	Kit 1S – opptil 5,5 cm	75 x 25 x 5,5
11-12113	Kit 2S – opptil 9,1 cm	75 x 50 x 9,1
11-12114	Kit 3S – opptil 12,7 cm	75 x 75 x 12,7
11-12115	Kit 4S – opptil 16,3 cm	75 x 100 x 16,3
11-121155	Kit 5S – opptil 19,9 cm	75 x 125 x 19,9

¹⁾ Kit Add-on1 - reparasjon

Brukes for ekstra høydejustering opp til 1,5 cm på Kit 1-4 eller som et reparasjonssett ved omplassering av Kit 1-4.

²⁾ Kit Add-on100 - reparasjon

Brukes for ekstra høydejustering opptil 1,5 cm på Kit 101-104 eller som reparasjonssett ved omplassering av Kit 101-104.

100 cm bredde


Artikkel nr.	Type	B x L x H cm
11-12107	Kit 101 – opptil 5,5 cm	100 x 25 x 5,5
11-12108	Kit 102 – opptil 9,1 cm	100 x 50 x 9,1
11-12109	Kit 103 – opptil 12,7 cm	100 x 75 x 12,7
11-12110	Kit 104 – opptil 16,3 cm	100 x 100 x 16,3
11-121105	Kit 105 – opptil 19,9 cm	100 x 125 x 19,9
11-12111	Kit Add-on100 - repair ²⁾	100 x 6,2 x 1,5

100 cm bredde med SlipStop (utendørs bruk)

Artikkel nr.	Type	B x L x H cm
11-12116	Kit 101S – opptil 5,5 cm	100 x 25 x 5,5
11-12117	Kit 102S – opptil 9,1 cm	100 x 50 x 9,1
11-12118	Kit 103S – opptil 12,7 cm	100 x 75 x 12,7
11-12119	Kit 104S – opptil 16,3 cm	100 x 100 x 16,3
11-121195	Kit 105S – opptil 19,9 cm	100 x 125 x 19,9

Dørstokk rampe med hjørnemoduler

Artikkel nr.	Type	B x L x H cm
11-12501	Pakke med 1 komplett sett med dørtrinnsramper med hjørnemoduler. Passer begge sider av dørstokken.	
	Dimensjoner på undersiden:	100 x 12,5 x 2,1
	Dimensjoner på oversiden:	125 x 25 x 3,9

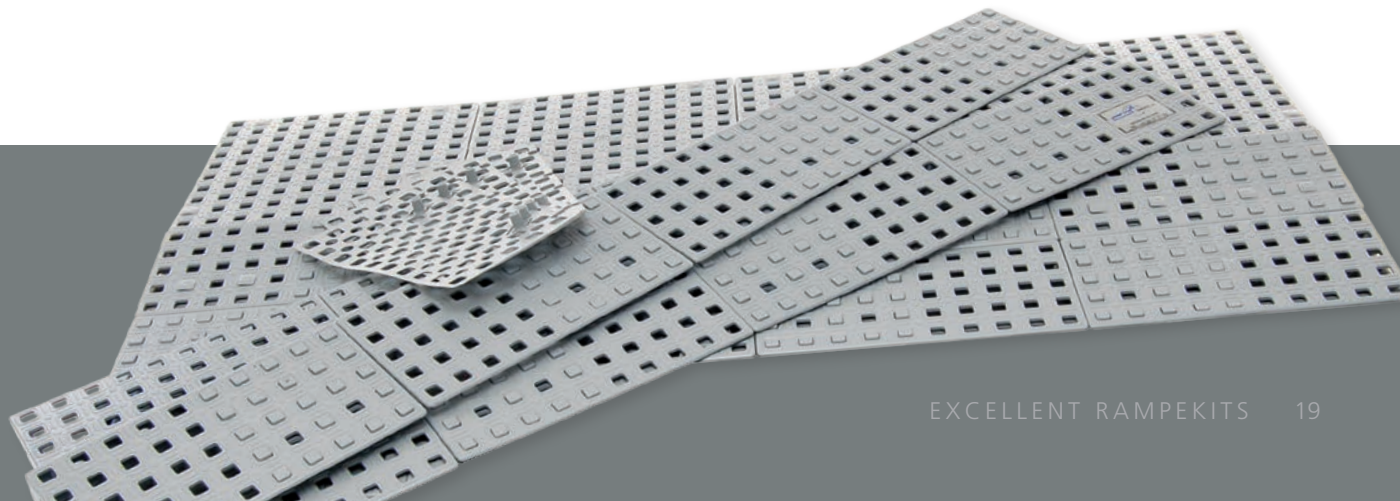

Tilgjengelighet for alle

Stepless skaper tilgjengelighet og verdige adkomstforhold for alle bevegelseshemmede



Bevaringsverdige bygninger



Offentlige og private bygg



Private hjem



Offentlig transport

Stepless
by *Guldmann*

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Norge
Tel. +47 40 000 564
norge@guldmann.com
www.guldmann.no

© Guldmann NO - 1790 - 03/2026

