

Caresse Pro Wand - massasjestav

Bruk av massasjestav kan være nyttig i forbindelse med:

Smertelindring

Massasje kan bidra til å redusere muskelspenninger og lette kroniske smerter, spesielt ved tilstander som ryggproblemer, nevrologiske smerter eller spastisitet. Økt blodsirkulasjon og avslapning kan dempe smerteopplevelsen uten behov for mer medisin.

Bedre bevegelighet og sirkulasjon

Ved å myke opp stramme muskler og bindevev, kan massasje bidra til bedre leddbevegelighet og sirkulasjon. Dette er særlig nyttig for personer med redusert aktivitet, lammelser eller nevrologiske utfordringer.

Redusere stress og fremme velvære

Mange med fysiske utfordringer opplever psykiske belastninger som stress, angst eller lavt energinivå. Massasje stimulerer parasympatisk nervesystem og gir en rolig, trygg følelse som kan ha stor positiv effekt på livskvaliteten.

Stimulering av nervesystemet

For personer med nevrologiske skader, som etter slag eller ryggmargsskade, kan massasje bidra til stimulering av hudreseptorer og økt kroppslig kontakt. Dette kan være viktig for kroppsbevissthet og nevrologisk respons.

Forebygging av komplikasjoner

Hos personer med begrenset mobilitet kan massasje bidra til å forebygge trykksår, lymfestuvning og sirkulasjonsproblemer, ved å fremme blodstrøm og vevshelse.



Spesifikasjoner:

- Materiale: Myk silikon
- Størrelse: 30,6 cm x 5,5 cm
- Oppladbar: Ja, via USB-kabel
- Frekvens/RPM: max 8000
- Vannbestandighet: vanntett (IPX7)

Forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege før du benytter Pro Wand: Under graviditet, hvis du har pacemaker, lider av diabetes, flebitt og/eller trombose, har økt risiko for å utvikle blodpropper, eller dersom du har stifter/skruer/kunstig ledd eller andre medisinske implantater i kroppen. Pro Wand er ikke ansvarlig for tilfeldige eller følgeskader etter feil bruk av produktet.

Slik lader du Pro Wand

Koble ladekabelen til ladeporten under på/av knappen ved å bruke den medfølgende USB-pin-ladekabelen. Enheten vil ikke fungere mens den lades – koble fra laderen før bruk. Blinkende LED-lys: Enheten lades, Fast LED-lys: Enheten er fulladet. Det vil ta ca. 120 minutter å lade Pro Wand. Da kan den brukes i ca. 120 minutter.


Slik bruker du Pro Wand

Hold inne på/av knappen i 3 sekunder for å slå enheten av eller på. Enheten begynner å vibrere umiddelbart når den slås på.

Det finnes 5 vibrasjonsintensiteter.

Trykk på + knappen på enheten for å øke styrkenivået.

Trykk på - knappen på enheten for å redusere styrkenivået.

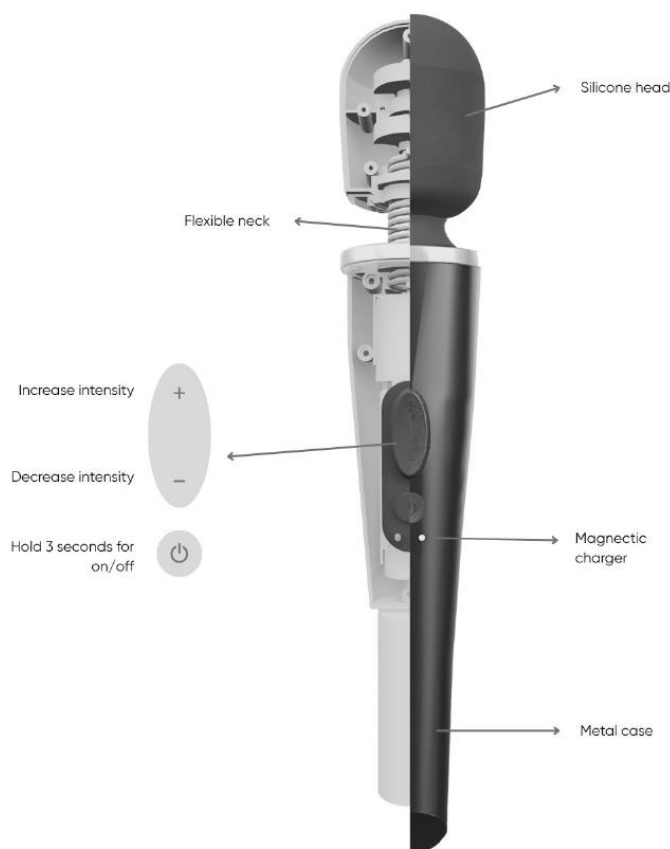

Rengjøring og oppbevaring

Rengjør alltid og tørk enheten grundig før og etter bruk. IKKE oppbevar den fuktig. Vi anbefaler å bruke et mildt rengjøringsmiddel som er egnet for silikonprodukter. Rengjør enheten med en myk, fuktig klut.

Bruk vannbasert glidemiddel etter ønske. Ikke kompatibel med silikonbasert glidemiddel. Unngå å la enheten ligge i direkte sollys, og utsett den aldri for ekstrem varme.