


## Quickguide Transformer HD (OCR)

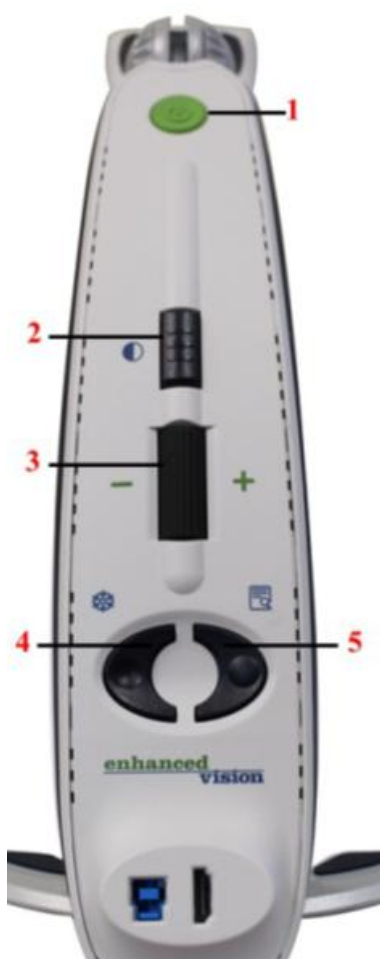

1. Av / På – kort trykk for å slå På eller sette i Standby. Langt trykk (5 sek) for å slå helt av.
2. Kontrastfarger.
3. Zoom
4. Frys bilde
5. Finn (oversiktsfunksjon), langt trykk
6. Roter bilde
7. Reset

### Sette opp / Legge sammen

### Strømkabel




### Oppstart

Etter at du har installert programvaren og koblet til Transformer HD, følg disse instruksjonene:

1. Trykk på strømknappen for å starte Transformer HD-enheten. Leselyset blinker én gang hvis du er koblet til en DC-adapter, men blinker ikke hvis enheten drives av batteri.
2. Start Transformer HD-programvaren (dette trinnet er ikke nødvendig med HDMI). Etter noen sekunder vises en statusmelding øverst til høyre som indikerer at Transformer HD kobler til.
3. Transformer HD bruker omtrent 30–35 sekunder på å starte opp. Når du får bilde på skjermen, er Transformer HD klar til bruk.

NB! Beveg musen mot venstre hjørne øverst for å få frem menyen. Klikk deretter på de ønskede valgene.

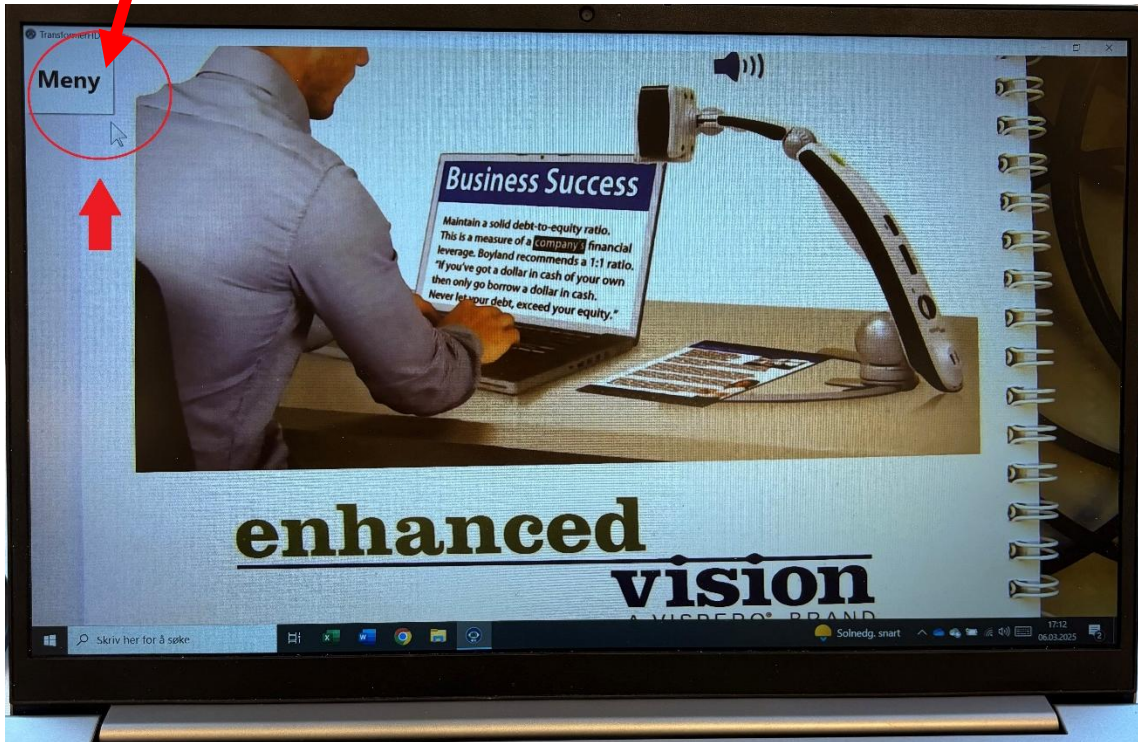

Betjening - Hurtigtaster	PC	Mac	Chrome
LeseTV kamera	CTRL + C	⌘ + C	N/A
OCR kamera	CTRL + C	⌘ + C	N/A
Frys bilde	Mellomrom	Mellomrom	Mellomrom
Ta bilde OCR	CTRL + E	⌘ + E	N/A
Ta opp video	CTRL + P	⌘ + P	CTRL + P
Zoom inn	↑	↑	↑
Zoom ut	↓	↓	↓
Oversikt	F	F	F
Lås autofokus	CTRL + A	⌘ + A	CTRL + A
Rotèr bilde	R	R	R
Øk brightness	B	B	B
Minske brightness	N	N	N
Øk kontrast	Z	Z	Z
Mindre kontrast	X	X	X
Lys Av / På	L	L	L
Bytt kontrastfarge	C	C	C
Lagre bilde	CTRL + S	⌘ + S	CTRL + S
Åpne bilde/video	CTRL + O	⌘ + O	CTRL + O
Hjelp	F1	F1	Q + 1
Maksimer vindu	CTRL + ALT + G	⌘ + ⌵ + G	N/A
Batterinivå	CTRL + B	⌘ + B	Ctrl + B
Produktinfo	F2	F2	Q + 2
Resett innstillinger	CTRL + R	⌘ + R	CTRL + R
Avslutt	ALT + F4	⌘ + R	ALT + Q + 4

# OCR Tekst til tale



Trykk for å bytte stemme



Saktere lesehastighet



Raskere lesehastighet



Start og stopp avspilling



Ta bilde

# Hovedmeny

Menu Option	
 CCTV Camera	LeseTV kamera
 OCR Camera	OCR kamera
 Freeze	Frys bilde
 Image Capture	Ta bilde OCR
 Start/Stop Recording	Ta et videoopptak
 Zoom In	Zoom inn
 Zoom Out	Zoom ut
 Find Location	Oversiktsfunksjon
 Auto Focus	Autofokus Av / På
 Rotate Image	Roter bilde