

sensio

RUBEN Repeater

Bruks- og monteringsanvisning



Produktnummer: 606599

Dokument: 9149-1

Innhold

Sikkerhet	3
Introduksjon	3
Kom i gang	5
Bruk	6
Feilsøking	6
Spesifikasjoner	7
Vedlikehold	8
Resirkulering	8
Symboler	9
Godkjenninger	10
Support	10

Sikkerhet

Sikkerhetsråd

- For produkter som inneholder batteri, må ikke batteriet punkteres eller kortsluttes.
- Unngå å eksponere enheten for flammer eller andre direkte varmekilder.
- Produktet må ikke skrus fra hverandre.
- Produktet er laget for å brukes innendørs i tørre rom.
- Produktet bør ikke stå i direkte sollys.



Introduksjon

I esken

- RUBEN Repeater
- Strømforsyning 15DC
- 2 doble borrelåser
- Våtserviett
- Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

RUBEN Repeater lytter kontinuerlig etter FlexiBlink-sendere i sitt nett. Straks RUBEN har registrert en sending, vil den – med ny styrke – sende videre informasjonen den mottok til andre repeatere, samt til mottakere innenfor rekkevidde. RUBEN krever strømtilkobling og har innebygget backupbatteri som gir opptil 8 timers drift ved strømbrudd.

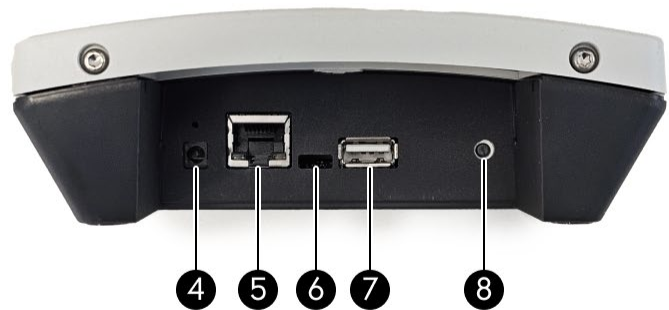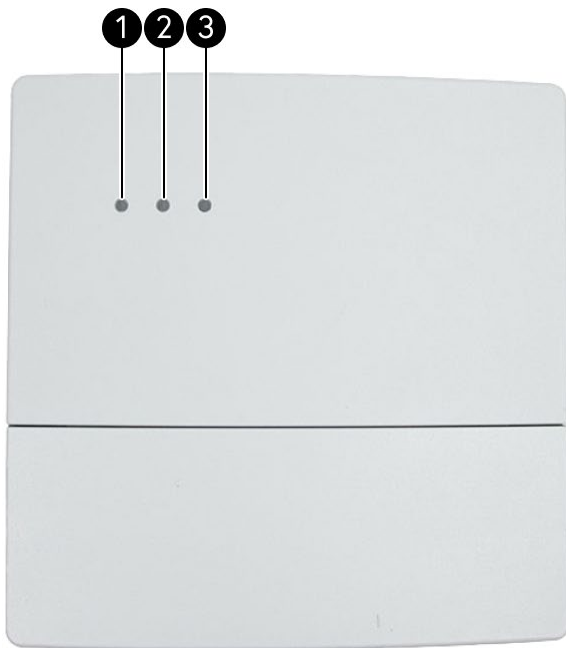

1. Rød lysindikator
2. Grønn lysindikator
3. Blå lysindikator
4. Tilkobling strømforsyning
5. Ikke i bruk
6. Ikke i bruk
7. Ikke i bruk
8. Pairing-knapp

Kom i gang

Montering

Plasser RUBEN innenfor rekkevidde til senderne/mottakerne den skal videresende varslinger fra. Monter gjerne enheten høyt og fritt på veggen for best dekning. Benytt de medfølgende borrelåsene eller skruer.

Strøm ④: Koble strømforsyningen til RUBENs strømkontakt.

Sammenkobling

Alle FlexiBlink-enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Enhetene må være i samme rom under sammenkoblingen. For å sammenkoble et FlexiBlink-system, må det alltid være en stasjonær mottaker som hovedenhet, som f.eks. IRIS alerter, ALMA alerter eller BRITT bed shaker, i systemet. For sammenkobling, følg beskrivelsen under:

1. På hovedenheten: Velg **Inviter** via skjermen eller trykk **2 ganger** på **Pairing**-knappen.
2. På RUBEN, når den ikke er hovedenhet: Velg **Bli med** på skjermen.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder eller ved beskjeden «Vellykket sammenkobling».

Skal du sammenkoble flere enn to enheter, gjenta punkt 1 til 3, ved å benytte samme hovedenhet

Testing

Utløs en sender som fysisk er i ytterpunkt i FlexiBlink-systemet og observer at mottaker i motsatt ytterpunkt varsler.

Bruk

Statusindikasjon

Når RUBEN er i bruk, vises statusen i lysindikatoren ①-③:

- **Blå:** Standby. Lyset vil blinke ved aktivitet i FlexiBlink-systemet
- **Blinkende grønt lys:** I sammenkoblingsmodus

Sette i dvalemodus

Skal RUBEN settes ut av drift, trykk en gang på **Pairing**-knappen etter at strømkontakten er fjernet. RUBEN vil da slukke den blå dioden, og den vil sette seg i dvalemodus.

Feilsøking

Varsler ikke i alle mottakere

- Sjekk at alt utstyr er tilkoblet strøm
- Dersom enhetene står for langt fra hverandre, må du sette dem nærmere hverandre eller eventuell sette inn en ekstra repeater

Spesifikasjoner

Tekniske data

- **Strømforsyning:** 15VDC / 230VAC
- **Temperatur:** -10 °C – 40 °C
- **IP-grad:** IP20
- **LAN:** 10/100 Mbps
- **Radiofrekvens:** 2400 – 2483,5 MHz
- **Sendereffekt:** maks. 20 mW

Dimensjoner

- **Høyde:** 140 mm
- **Bredde:** 140 mm
- **Dybde:** 40 mm
- **Vekt:** 400 g

Vedlikehold

Rengjøring

Tørk av med en lett fuktet klut.

Oppdateringer




For å oppdatere FlexiBlink-enheter må GURO Gateway være tilknyttet boligen. Se oppdateringer på Sensio sine nettsider.

<https://vestfold.sensio.io/update>

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Varenummer
	Serienummer
	Batch-nummer
	Unikt identifikasjonsnummer
	Les bruksanvisning og monteringsanvisning
	Produsent
	Produksjonsdato
	Skal ikke kastes i vanlig avfall, men leveres i henhold til lokale regler.
	Produktet er i samsvar med relevante EU-standarder og direktiver.

Godkjenninger

Samsvarserklæring

Sensio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse til gjeldene krav for CE-merking. Se samsvarserklæring på Sensio sine nettsider for ytterligere informasjon.

<https://vestfold.sensio.io/samsvarserklaering>

Support

Ta kontakt med din leverandør ved behov for support.

Produsent

Sensio AS, Møllergata 4, 0179 Oslo

- **E-post:** post@vestfoldaudio.no
- **Nettside:** vestfold.sensio.io
- **Telefon:** +47 33 47 33 47