



Gratulerer med din Phoenix Systembag /sett!


Phoenix Instinct representeres i Norge av Efekton AS. Dersom det er spørsmål om deler/service eller annet, ta kontakt med oss via www.efekton.no post@efekton.no / Telefon 41 19 50 50

BRUKERMANUAL PHOENIX SYSTEMBAG

For å tilpasse /montere ditt Phoenix-system, følg denne brukermanualen nøye. Denne manualen gir veiledning og tips til mulige/og/eller nødvendige justeringer og tilpassinger for at systembag og rullestol skal passe best mulig til hverandre.

TILKOBLING:

1. Åpne klemmene (7) på trallens teleskophåndtak (8) og forleng vognen til ønsket høyde – (IKKE UTOVER RØD LINJE) slik at undersiden av braketten (5) hviler på ryggstøtten. Lukk klipsene slik at håndtaket sitter godt fast.

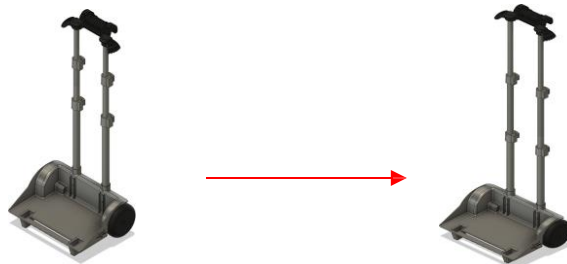

- !** Trallen/vognen skal stå i en vinkel som ikke er større enn 60°. En større vinkel kan føre til at vognen setter seg fast under rullestolen når den kjøres bakover. Forleng trallen/vognen ytterligere for å få en mindre vinkel.

2. Hvis braketten (5) er satt til riktig størrelse for diameteren på stolryggstangen, vil du kunne skyve ned med håndflatene til braketten klikker over ryggstøtten.

FORSIKTIG, FINGERFELLE



Sørg for at fingrene ikke kommer i klem før du trykker ned på braketten

1. Bruk håndflatene til å presse ned sammen og bestemt. Braketten skal være tettsittende og krever litt innsats for å klikke over stangen. Jo strammere passform, jo bedre ytelse. En annen metode for tilkobling er å koble til den ene siden og deretter den andre ved å trykke ned på de øverste hjørnene på vognen en side om gangen. Denne fremgangsmåten kan gjøre tilkobling av tette beslag enklere for noen. Hvis braketten er for stram til å klikke over ryggstøtten på stolen din eller koblingen ikke er stram nok når den er koblet til, bør du følge anvisningen for bytte av rørhylse, som beskrevet under.

FRAKOBLING:

For å fjerne vognen fra stolen, hold i **ett** av sidehåndtakene (6) plassert på venstre og høyre side av vognbraketten og trekk oppover.



Hvis en Phoenix System-veske er koblet til vognen, kan du også bruke et av de øvre sidehåndtakene på venstre eller høyre side på av vesken og trekke oppover.



Når vognen ikke er festet til stolen og du har en veske festet, anbefaler vi at du skyver inn/ned vognhåndtaket og beskytter det med beskyttelsesdekslet på toppen av Phoenix System-vesken. Dette bør gjøres når du sjekker inn en bag for å fly.

INNHold

Reserveskruer, avstandsstykker og rørformet innsats ligger inne i av Phoenix System-vesken/e.

Med ditt Phoenix-system vil du ha mottatt:



1.



1 x rørhylse 18 mm (tykk konstruksjon) / 1 x rørhylse 22 mm (tynn konstruksjon)

(En av disse er montert)

2.



2 x M6 x 20 mm skruer
2 x M6 x 25 mm skruer

3.



2 x M6 Låsemutter

4.



14 x Nylon avstandsstykke


4A.



2 x festeskive

5.

1x brakett montert på vogn.

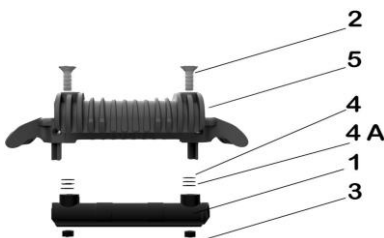

6.

1x Phoenix System-vogn



Det anbefales ikke å fjerne braketten (5) fra vognen med mindre den er skadet og må skiftes ut. Hjulene på vognen kan også byttes hvis de er skadet.



TIPS:

Den beste ytelsen oppnås med den tettteste forbindelsen du kan klemme over ryggstøtten på stolen.

Når du flytter tung last over tykt teppe, kreves det en tett kobling slik at vognen ikke løsner fra stolen.

For å oppnå en god passform til stolen din, må du finne en fungerende kombinasjon av hylsevalg 18mm eller 22mm kombinert med riktig antall avstandsstykker.

Jo flere avstandsstykker plassert mellom hylsen og braketten, jo løsere blir passformen. Jo færre avstandsstykker som brukes, jo tettere vil passformen være.

Den tetteste passformen (tilpasset den smaleste mulige ryggstangen) oppnås med den tykke 18 mm rørformede hylsen i kombinasjon med mindre avstandsstykker. Den løseste passformen (passer på bredest mulig ryggstang) kommer fra bruk av den tynne 22 mm rørformede hylsen i kombinasjon med de lengste skruene (25 mm) og maksimalt antall avstandsstykker.



Hvis diameteren på ryggstøtten på stolen din er 18 – 20 mm, anbefales 18 mm hylse. Ryggstang med diameter 21-23 mm bør bruke 22 mm hylse.

OPPSETT:

Plassert i toppen av braketten (5) som er koblet til vognen, er det to skruer (2). Bruk en 4 mm sekskantnøkkel (følger ikke med) løsne de to skruene og fjern den rørformede hylsen (1) (pass på så du ikke mister M6-mutrene) (3) Fjern festeskiven (4A) plassert på skruesakslene på hver side bak den rørformede hylsen.



For å gjøre tettere passform/trangere:

Fjern like mange plastavstandsstykker (4) fra hver skruesaksel til venstre og høyre (2) Skift festeskive (4A) før du setter den rørformede hylsen (1) tilbake på plass i braketten (5) Sett inn M6-mutteren i det sekskantede hulrommet i hylsen, og sørg for at den hvelvede toppen av mutteren vender utover og de to øvre skruene. Gjenta prosessen ovenfor til ønsket passform er oppnådd. Hvis du finner at tuppene på skruene (2) stikker ut under hylsen og vil berøre stangen på stolen din, bruk de kortere skruene som følger med.



En liten justering kan gjøre stor forskjell. Unngå å stramme toppskruene for hardt når du setter opp, da det vil gi rom for finjustering av kapasiteten til å stramme ytterligere. Selv en halv omdreining av disse skruene vil ha en merkbar effekt.

For å gjøre en mindre tett passform/løsere:

Legg til plastavstandsstykker (4) til akslene til de to skruene (2) og bruk om nødvendig de lengre skruene som følger med. Når du har funnet den riktige kombinasjonen av hylse (1) og avstandsstykker (4) som fungerer best for deg, skal koblingen være stiv til å skyve på plass og passe tett til ryggstøtten. Når du har oppnådd riktig tilkobling for stolen din, trenger du ikke justere braketten igjen.




Bruk riktig lengde på skruene som følger med for å unngå riper i ryggstøtten. Hvis spissene på skruene (2) stikker ut under hylsen (1), bruk kortere skruer.

FESTING AV BAG TIL TRALLE

Phoenix System Bag festes til vognen ved hjelp av klaffer med borrelås. Disse er festet plassert på baksiden og i bunnen av bagen/e.


1. Åpne klaffen/e på baksiden og bunnen av vesken og sett bagen på trallen (9).
2. Tre klaffen som er i bunnen av vesken gjennom sporet/spalten nederst på vognen (10) og tett mot borrelåsen foran på vesken
3. Pakk klaffene på baksiden av vesken rundt trallerørene (8) og fest dem sammen.

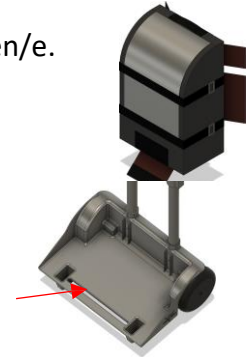

KOBLE TIL EKSTRA PHOENIX SYSTEMBAG

Hvis du har mer enn én Phoenix System Bag, kan de kobles sammen for å brukes på vognen. Fest den største bagen du bruker til trallen ved å følge instruksjonen over. Så:

- Løsne de to lange stroppene foran på vesken på vognen.
- Tre de to stroppene gjennom løkkene på baksiden av den andre bagen – to øverst (de to gripehåndtakene) og to lenger ned på sidene av bagen.
- Tre de to stroppene tilbake gjennom løkken spenner den originale posen.
- Trekk disse så stramt du kan for en sikker tilkobling.

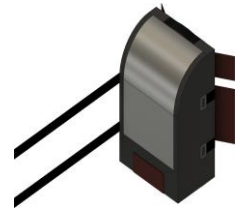

Det er best å prøve å koble den andre bagen slik at den er på linje med bunnen av den første bagen som allerede er på trallen/vognen. Dette vil hjelpe settet til å stå oppreist.



JUSTERE PHOENIX SYSTEM TRALLEKLIPS

Du trenger:
2,5 mm unbrakonøkkel/ sekskantnøkkel (medfølger ikke)

Du kan hende ut at klipsene (7) på din Phoenix System Tralle etter en tid må justeres. Vi anbefaler at man sørger for at disse er "trange" og litt krevende å lukke- for å unngå at de åpner seg under reise/bruk. Kontroller regelmessig tettheten og juster etter behov. Dette kan gjøres med en unbrakonøkkel (medfølger ikke).

