

Behov og bestillingsveiledning for SmartBrake

Februar 2026



Hvorfor velge SmartBrake?

Dette er ikke en brems for å sykle fortere. Det er en brems for å **sykle tryggere**.

SmartBrake er laget for mennesker som opplever at vanlige bremses ikke alltid strekker til. Når grep blir for tungt. Når reaksjonstid varierer. Når kroppen har gode og mindre gode dager. Eller når en ledsager må kunne hjelpe i øyeblikket.



Dette er typiske saker

Når bremsen blir for tung

Mange opplever smerte, utmattelse eller redusert kraft i hendene. Da kan vanlig bremsing bli slitsomt – eller utrygt.

SmartBrake gjør det lettere å:

- dosere farten
- holde jevn kontroll over tid
- spare krefter til selve turen

SB
WIRELESS

Mindre kamp i hendene. Mer flyt i bevegelsen.

Når kroppen trenger løsninger – ikke standarder

Noen trenger alt samlet på én side. Noen trenger betjening der kroppen faktisk fungerer best.

SmartBrake kan tilpasses:

- ensidig funksjon
- ulike grep
- individuelle behov

Det handler ikke om teknologi. Det handler om å tilpasse løsningen til mennesket.

Når ledsager må kunne hjelpe

I noen situasjoner er det avgjørende at en ledsager kan gripe inn raskt og kontrollert, uten dramatikk.

SmartBrake gjør det mulig å:

- hjelpe diskret
- stoppe fort, men mykt
- bevare følelsen av selvstendighet for brukeren

SB
HYBRID

Alle føler seg tryggere. Det merkes.

Når ro og forutsigbarhet betyr mer enn mål

For noen er jevn fart, tydelige stopp og færre overraskelser helt avgjørende for å kunne være ute.

SmartBrake bidrar til:

- mindre stress
- tydeligere start og stopp
- mer forutsigbare situasjoner

SB Alle
varianer

Noen ganger er det nettopp det som gjør at turen blir mulig.

Når noe uventet kan skje

Noen lever med uforutsigbarhet. Anfall. Impulsivitet. Kognitiv svikt. Eller bare situasjoner der det er godt å ha en ekstra sikkerhetsmargin.

SmartBrake gir:

- trygg stopp i øyeblikket
- mindre stress for bruker
- større trygghet for familie og ledsager

SB
SWITCH

Slik at turen kan være tur – ikke konstant beredskap.

Diagnoser/tilstander/brukere der behovet ofte dukker opp

- **Autisme / kognitiv sårbarhet** → ro, forutsigbarhet og ledsagerens trygghet blir avgjørende.
- **Ledsagere** (foreldre, familie, assistent) som må kunne hjelpe uten å fysisk gripe sykkel.
- **Slag / hemiparese / amputasjon / ensidig funksjon** → behov for å samle styring og brems på én side.
- **Epilepsi / anfall / uforutsigbarhet** → ekstra sikkerhetsmargin hvis grepet slipper.
- **MS / nevrologiske tilstander med variabel kraft** → dagsform varierer, grep/utholdenhet svikter.
- **Parkinson / andre tilstander med tregere reaksjon** → behov for forutsigbar stopp og jevn dosering.
- **Smerte/leddproblematikk (f.eks. artritt)** → vanskelig å klemme standard bremsehendel over tid.
- **Eldre** eller personer med tregere reaksjon, redusert kraft/utholdenhet, eller økt fall-/risikoopplevelse.
- **Barn/unge** som kan være impulsive, ha uforutsigbart tempo eller trenger ekstra trygghet i trafikk og overganger.

Når du bør vurdere SmartBrake

SmartBrake hjelper:

- **Mestring og selvstendighet:** Brukeren får mer frihet, samtidig som **ledsager kan bistå på avstand** ved behov.
- **Ubehag ved klem/grep:** Vanlig bremsehendel blir for tung eller smertefull å bruke over tid.
- **Behov for alternativ betjening:** Standard hendel eller plassering fungerer ikke – bremsen må kunne aktiveres på en annen måte.
- **Trygg stopp når det trengs:** Ledsager må kunne gi en sikker oppbremsing i øyeblikket, uten å fysisk gripe sykkelen.
- **Sikkerhetsmargin når grepet kan slippe:** Reduserer risiko i kritiske situasjoner (f.eks. ved plutselige episoder).
- **Stor sideforskjell:** Det er behov for å samle styring og brems der man har best kontroll.
- **Når omgivelsene krever ekstra trygghet:** Mange stopp, kryssinger, nedoverbakker eller tett miljø gjør at kontroll og forutsigbarhet blir viktig.
- **Når sykling “nesten går”:** Den ekstra tryggheten gjør at man tør å sykle oftere – og opplever mer ro, mestring og kontinuitet i aktiviteten.

Hjelper / hjelper ikke

Hjelper mindre når ...

- Ledsager ikke kan ta et **stabilt og ansvarlig** hovedansvar for bremsing på vegne av syklisten.
- Bruker/ledsager har lav toleranse for ny rutine, og det er stor risiko for at det blir **mer forvirring enn nytte** (f.eks. behov for lading og å forstå signaler).
- Bruker ikke har tilstrekkelig **kognitiv kapasitet** til å lære og bruke løsningen trygt. (f.eks. forstå kraftfølelse på bremsehendel mot bremsekraft)
- Bruker ikke tåler å bli bremset, eller ikke klarer å **holde igjen** ved en oppbremsing (risiko for utrygg kroppslig reaksjon).
- Forventningen er at bremsen alene gjør at man kan ta større risiko

Noe teknisk på slutten

Fail-safe (hvorfor den bremser av seg selv)

SmartBrake er laget for å være “trygg først”. Derfor kan den **bremse automatisk** hvis noe ikke stemmer, f.eks.:

- **kritisk lavt batteri** (fail-safe under ca. 15%)
- **tapt signal** mellom hovedkontroller (administrator) og bremseenhet

Dette er med vilje, for å unngå at sykkelen ruller ukontrollert.

Estimert batteribruk ved 6 timer sykling i uken.

- Bremseenhet: **Lad omtrent hver 4–8 uke** (typisk).
 - Bremsekontroll: **flere måneder** (ofte **3–6 mnd**).
-

Opplevelse: SmartBrake vs. vanlig mekanisk brems

1) Hendelen føles annerledes

SmartBrake-hendelen har **lite/ingen motstand**. Derfor trenger man litt **tilvenning** for å lære hvor mye brems man får når man klemmer inn hendelen.

2) SmartBrake kan oppleves litt tregere enn en vanlig mekanisk brems

fordi bremsetrykket bygges opp av en motor. På en vanlig brems presser du direkte med hånden, og trykket kommer nesten umiddelbart. Med SmartBrake blir oppbremsingen derfor ofte litt mer gradvis og mindre “brå”.

SmartBrake er godkjent som erstatning for bremsen den byttes ut med. Det betyr at man forventer omtrent samme eller bedre bremseeffekt og stopplengde når systemet er riktig montert og brukt.

Bestillingsveiledning

Hvordan bestille SmartBrake?

SmartBrake til sykler levert av:

- Schuchmann AS
- Sunrise Medical AS
- Quality Care AS
- Inpo Active AS

For nye sykler eller ettermontering, kontakt **sykkeldistributøren** direkte.

SmartBrake til sykler levert av:

- Hjelpemiddelspesialisten AS
- Bano Life AS
- Privatkjøpte sykler

For nye sykler eller ettermontering, kontakt oss, **SmartGroup AS** direkte.

Ved bestilling, vennligst oppgi:

SmartBrake behov:

- Wireless, Hybrid eller Switch (Se side 10).
- Hvilken / hvilke **trådløse kontrollere som skal medfølge:**
 - Hand Controller, Brake Lever Slim eller Thumb Brake (Se side 11).

Resten ordner distributøren. De vet hvilken bremsetype som passer den aktuelle sykkelmodellen.

Hvilken SmartBrake skal du velge?

Velg Hybrid når...

Du trenger **ledsagerbrems**, men syklisten skal kunne bruke **vanlig bremsehendel** selv.

Hybrid passer når:

- ledsager må kunne stoppe trygt i øyeblikket
- brukeren kan og vil bremse selv i hverdagen
- dere ønsker en løsning som **fungerer uavhengig av strøm**

Hva er Hybrid?

Hybrid betyr at **brukerens brems er en vanlig hydraulisk hendel**, kombinert med **håndkontrolleren for ledsagerstyring**.

Det innebærer at:

- brukeren bremser med **helt vanlig bremsehendel**
- bremsen fungerer **selv uten at SmartBrake er aktivert**
- bremsen fungerer også **hvis SmartBrake er tom for strøm**
SmartBrake brukes **kun som ledsagerbrems**

Velg Wireless når ...

Du trenger **brukerbrems** som ikke er en vanlig bremsehendel. Kan **kombineres** med ledsagerbrems

Wireless passer når:

- Brukeren ikke klarer å bruke normale bremsehendler
- Styring på en side av kroppen
- Behov for en løsning uten kabler

Hva er Wireless?

Wireless betyr at **bremsekommandoen sendes trådløst** - fra **bruker**, og eventuelt også **ledsager** (avhengig av oppsett).

Det innebærer at:

- bremsen aktiveres **kun via SmartBrake-systemet**
- den brukes derfor **alltid sammen med en sekundær originalbrems**, for eksempel frambrems
- (praktisk å vite) funksjonen er **avhengig av at SmartBrake har strøm**

Velg Switch når ...

Du vil ha **ekstra sikkerhetsmargin hvis grepet slipper**.

Switch passer når:

- det kan skje noe uventet (f.eks. anfall, plutselig utmattelse eller "glipp" i grepet)
- det viktigste er at sykkelstoppet hvis brukeren mister taket
- dere ønsker at brukeren kan styre fart selv, men med en innebygd "failsafe"

Hva er Switch?

Switch er en brukerbrems med en sikkerhetslogikk som gjør at:

- **holder du inne hendelen:** bremsen er åpen (frie hjul)
- **slipper du hendelen:** bremsen aktiveres og stopper trygt

Det betyr at hvis grepet slipper, stopper sykkelstoppet **fort, men mykt**.

Trådløse bremsekontrollere

Ledsagerkontroll

Denne knappkontrollen kommer med en nakkestropp, noe som gjør den enkel å bære i hånden eller lommen – ideell som en trådløs ledsagerkontroll. Signalrekkevidden er omtrent 30 meter ved fri sikt.




Brake Lever Slim

Designet for de som synes det er vanskelig å bruke en standard bremsehendel, er denne hendelen lettere å klemme, noe som gjør den egnet for personer med redusert hånd/grepsstyrke.



Tommelbrens

Denne bremsen er perfekt for de som har bedre fingerferdighet i tommelen enn i de andre fingrene, eller for de som trenger å betjene begge bremsene fra den ene siden av styret.

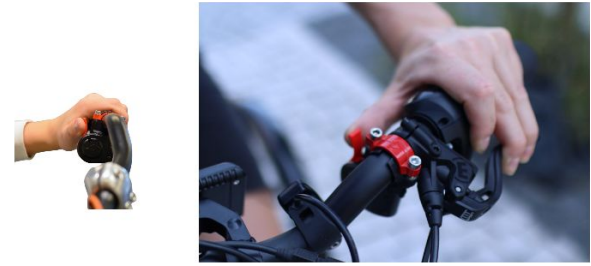

Viktig presisering

- **Ledsagerkontrollen** er laget for å stoppe trygt i øyeblikket.
- **Brukerbremsen** er for å dosere og holde jevn fart.

I et oppsett med **én kontroll**, er denne kontrollen **administratoren**. I et oppsett med **to eller flere kontrollere**, er **ledsagerkontrollen** alltid **administratoren**. De andre kontrollene blir da **assistentkontrollere**.

Forskjellen er dette:

- **Administrator**: slår på «fail-safe» hvis man går utenfor **signalområdet**.
- **Assistentkontroller**: slår **ikke** på «fail-safe» når signalområdet overskrides.

Hvor mange kontrollere du trenger, avhenger av behovet ditt. **Ledsagerkontroll** kan brukes i alle **SmartBrake-oppsett**, unntatt **SmartBrake SWITCH**.


Veiledninger

Vedlagt ordren ligger en instruksjonslapp på norsk og engelsk, ladekabel på 2m og ladeadapter

GRATULERER!



Gratulerer så mye med din nye SmartBrake.
Vi håper du får stor glede av den.

Skann QR-koden for å åpne den digitale bruksanvisningen med alt du trenger for å komme i gang:
<https://smartgroup.no/support/smartbrake>





Kontaktinfo:
post@smartgroup.no
64 95 94 44

Vi gleder oss til å høre hva du synes, og håper du vil dele dine opplevelser med SmartBrake her:


 
@SmartBrake_by_smartgroup

God tur!
Sporty hilsen fra Team SmartGroup

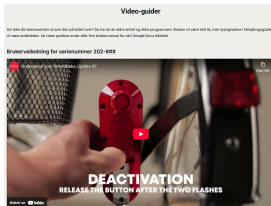

SmartBrake Support

Brukermanualer for SmartBrake S/N: A###



Sort bremsehett med serienummer markert i ladelokket. Utgivelsesår: 2025

SmartBrake TRÅDLØS BRUKERMANJAL	SmartBrake HYBRID BRUKERMANJAL
SmartBrake SWITCH BRUKERMANJAL	SmartBrake SPIKE BRUKERMANJAL
SmartBrake MONTERING BRUKERMANJAL	GripAdapt Magura HS11 BRUKERMANJAL
Veiledning for utskifting av hendel BRUKERMANJAL	Oppdatere programvare BRUKERMANJAL

Bruk AI Chatten vår!

SmartGroup Assistant

SmartBrake

SmartGroup Assistant
Skal du søke SmartBrake, eller har du SmartBrake allerede?

Chatten er for brukere, terapeuter, og teknikkere.
Svarer øyeblikkelig på det meste!

Write your message here...

Responses are AI-generated for informational purposes and are not guaranteed or binding.



Vet du allerede hva du skal bestille?

Følg riktig tabell på de neste sidene

Tabellforklaring, side 15 - 18.

SmartBrake **HYBRID 1X1**

- 1 bremseenhet og 1 trådløs kontroll + 1 standard Magura bremsehendel

SmartBrake **WIRELESS 1X1**

- 1 bremseenhet og 1 trådløs kontroll

SmartBrake **WIRELESS 1X2**

- 1 bremseenhet og 2 trådløse kontrollere

SmartBrake **SWITCH 1X1**

- 1 bremseenhet og 1 trådløs kontroll

SmartBrake HYBRID 1x1

Artikkelnummer	Navn	
SBH 1x1	SmartBrake Hybrid - 1x1**	HMS-nr
SB101-DB-HC-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems - Ledsagerkontroll	328498
SB101-DB-BLS-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems - Brake Lever Slim	328499
SB101-DB-TB-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems - Tommelbrems	328500
SB101-DBT-HC-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems Tvilling - Ledsagerkontroll	328501
SB101-DBT-BLS-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim	328502
SB101-DBT-TB-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Skivebrems Tvilling - tommelbrems	328503
SB101-RB-HC-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Felgbrems - Ledsagerkontroll	328298
SB101-RB-BLS-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Felgbrems- Brake Lever Slim	328496
SB101-RB-TB-H	SmartBrake Hybrid 1x1 Felgbrems - Tommelbrems	328497

**) SmartBrake leveres luftet og klar til montering.



Montering

Montering utført av SmartGroup Art.nr. SB-MF01

Vennligst oppgi HMSnr på sykkelen ved bestilling av SmartBrake.

SmartBrake WIRELESS 1x1

Artikkelnummer	Navn	
SBW 1x1	SmartBrake Wireless - 1x1**	HMS-nr
SB101-DB-TB-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems - Tommelbrems	297651
SB101-DB-HC-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems - Ledsagerkontroll	297652
SB101-DB-BLS-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems - Brake Lever Slim	309240
SB101-DBT-TB-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems Tvilling - Tommelbrems	297656
SB101-DBT-HC-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems Tvilling - Ledsagerkontroll	297657
SB101-DBT-BLS-W	SmartBrake 1x1 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim	309242
SB101-RB-TB-W	SmartBrake 1x1 Felgbrems - Tommelbrems	297661
SB101-RB-HC-W	SmartBrake 1x1 Felgbrems - Ledsagerkontroll	297662
SB101-RB-BLS-W	SmartBrake 1x1 Felgbrems- Brake Lever Slim	309244

**) SmartBrake leveres luftet og klar til montering.



Montering

Montering utført av SmartGroup Art.nr. SB-MF01

Vennligst oppgi HMSnr på sykkelen ved bestilling av SmartBrake.

SmartBrake WIRELESS 1x2

Artikkelnummer	Navn	
SBW 1x2	SmartBrake Wireless - 1x2**	HMS-nr
SB102-DB-TB-TB-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems - Tommelbrems - Tommelbrems	297673
SB102-DB-TB-HC-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems - Tommelbrems - Ledsagerkontroll	297674
SB102-DB-BLS-BLS-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems - Brake Lever Slim - Brake Lever Slim	309249
SB102-DB-BLS-TB-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems - Brake Lever Slim - Tommelbrems	309250
SB102-DB-BLS-HC-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems - Brake Lever Slim - Ledsagerkontroll	309251
SB102-DBT-TB-TB-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems Tvilling - Tommelbrems - Tommelbrems	297678
SB102-DBT-TB-HC-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems Tvilling - Tommelbrems - Ledsagerkontroll	297679
SB102-DBT-BLS-BLS-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim - Brake Lever Slim	309252
SB102-DBT-BLS-TB-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim - Tommelbrems	309253
SB102-DBT-BLS-HC-W	SmartBrake 1x2 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim - Ledsagerkontroll	309254
SB102-RB-TB-TB-W	SmartBrake 1x2 Felgbrems - Tommelbrems - Tommelbrems	297683
SB102-RB-TB-HC-W	SmartBrake 1x2 Felgbrems - Tommelbrems - Ledsagerkontroll	297684
SB102-RB-BLS-BLS-W	SmartBrake 1x2 Felgbrems - Brake Lever Slim - Brake Lever Slim	309255
SB102-RB-BLS-TB-W	SmartBrake 1x2 Felgbrems - Brake Lever Slim - Tommelbrems	309256
SB102-RB-BLS-HC-W	SmartBrake 1x2 Felgbrems - Brake Lever Slim - Ledsagerkontroll	309257

**) SmartBrake leveres luftet og klar til montering.

Vennligst oppgi HMSnr på sykkelen ved bestilling av SmartBrake.



Montering

Montering utført av SmartGroup Art.nr. SB-MF01

SmartBrake SWITCH 1x1

Artikkelnummer	Navn	
SBS 1x1	SmartBrake Switch - 1x1**	HMS-nr
SB101-DB-TB-S	SmartBrake 1x1 Skivebrems - Tommelbrems (SWITCH)	297653
SB101-DB-BLS-S	SmartBrake 1x1 Skivebrems - Brake Lever Slim (SWITCH)	309241
SB101-DBT-TB-S	SmartBrake 1x1 Skivebrems Tvilling - Tommelbrems (SWITCH)	297658
SB101-DBT-BLS-S	SmartBrake 1x1 Skivebrems Tvilling - Brake Lever Slim (SWITCH)	309243
SB101-RB-TB-S	SmartBrake 1x1 Felgbrems - Tommelbrems (SWITCH)	297663
SB101-RB-BLS-S	SmartBrake 1x1 Felgbrems - Brake Lever Slim (SWITCH)	309245

**) SmartBrake leveres luftet og klar til montering.



Montering

Montering utført av SmartGroup

Art.nr. SB-MF01

Vennligst oppgi HMSnr på sykkelen ved bestilling av SmartBrake.

Tilleggsprodukter / Tjenester

Oppgradering av SmartBrake ved gjenbruk

Eldre SmartBrake-modeller som skal gjenbrukes **kan og bør sendes til SmartGroup for oppgradering.**

SmartBrake er et produkt i rask teknologisk utvikling, og vi mener at **siste versjon alltid gir best ytelse, driftssikkerhet og brukeropplevelse.** Ved gjenbruk vil bremsen ofte også monteres på en **annen sykkel**, noe som kan kreve endringer i **kabellengder, kalipere og oppsett.**

Vi tilbyr derfor **en svært rabattert oppgraderingspris**, da mye av komponentene fra innlevert SmartBrake kan gjenbrukes. Målet er å sikre at **den beste og mest oppdaterte SmartBrake-versjonen er i bruk i markedet.**

Siste versjon har sort bremseenhet.

Bremseenheter med **rødt lokk** bør vurderes sendt inn til SmartGroup for oppgradering.

Viktig:

Ved oppgradering må **alle kontrollere leveres sammen med bremseenheten**, slik at de oppdateres med **samme programvare.**

Om det er behov for nye kontrollere kjøpes disse separat.

Artikkelnummer	Navn	
SB Gjenbruk	SmartBrake Gjenbruk	HMS-nr
SB-Gjenbruk	SmartBrake Gjenbruk	Kommer



Gammel versjon (rød). **Anbefales teknisk oppgradering**



Ny versjon (Sort). **Trenger ikke teknisk oppgradering**

Nyhet! Tilpass din bremsehendel - SmartBrake GripAdapt

GripAdapt er vår nyeste oppfinnelse for å muliggjøre enkel bremsing for alle. Ved hjelp av enkle kiler kan bremsehendel din tiltes slik at hendelen kommer nærmere styret. Dette er perfekt for barn og voksne som synes det er vanskelig å betjene en vanlig bremsehendel.

SmartBrake GripAdapt er nå et alternativ til våre bremsehendler som Brake Lever Slim og Magura HS11. Målet er å lage versjoner for flere typer bremsehendler fremover. Med SmartBrake GripAdapt kan du redusere avstanden fra bremsehendelen til styret med **10-30 mm**, avhengig av type bremsehendel og styrets geometri.

Vil du vite mer om dette? Send en epost til post@smartgroup.no

Artikkelnummer	Navn	
SB GA	SmartBrake GripAdapt	HMS-nr
SB-GA-HS11	SmartBrake GripAdapt	328504



Magura HS11 uten SmartBrake GripAdapt

Magura HS11 **MED** SmartBrake GripAdapt
*Kan kreve lengre skruer enn originalt



SmartBrake brystmontert bremsehendel

Uten behov for håndgrep eller armstyrke – og åpner for aktiv bruk også for personer med begrenset hånd- eller armfunksjon.

SmartBrake brystmontert bremsehendel er en ergonomisk løsning som lar deg plassere SmartBrake-kontrolleren på brystet og betjene bremsen med hode eller overarm.

Festet bygger på en standard **GoPro®-brystsele**, som gir høy komfort, enkel justering og stabil plassering – slik at du får enkel og trygg tilgang til bremsen uten å bruke hender eller armstyrke.

Fordeler

- Bruker standard GoPro®-brystsele med universelt festesystem
- Trygg, håndfri betjening av SmartBrake
- Enkel montering med justerbare stropper
- Stabil og forutsigbar plassering av kontrolleren – uavhengig av arm- og håndstilling

Artikkelnummer	Navn	
SB CBL	SmartBrake GripAdapt	HMS-nr
SB-CBL	SmartBrake Chestmount Brake Lever	Kommer



SmartBrake på barnevogn

For personer som kan oppleve anfall eller plutselig miste muskelkontroll (f.eks. ved epilepsi), gir SmartBrake SWITCH et ekstra sikkert alternativ: Vognen ruller når hendelen holdes inne – og **stanser umiddelbart** når grepet slippes.

Bruksområde

SmartBrake kan ettermonteres på barnevogner som leveres med **skivebrems**, og gir ledsager/forelder bedre kontroll i bakker og ved plutselige situasjoner. Løsningen kan bidra til økt trygghet og selvstendighet i hverdagsaktiviteter.

Fordeler i klinisk sammenheng

- **Trådløs bremsing** – enkel montering uten kabelstrek
- **Fleksibel styring** – kompatibel med Brake Lever Slim, Thumb Brake og ledsagerkontroll
- **Økt sikkerhet** i krevende situasjoner og uforutsigbare hendelser
- **Fail-safe**: bremsen aktiveres hvis signalet brytes eller grepet slippes

Forutsetninger og anbefalinger


- Barnevogn med skivebrems
- Tilpasning og kort opplæring anbefales før ordinær bruk



	Denne listen viser til noen modeller som kan bruke SmartBrake, utover listen kan SmartBrake tilpasses hvis vognen har skivebrems fra før	Kan søkes på via HMS?
Leverandør	Navn på vogn	Ja/Nei, HMS-nr
Medema Norge AS	KUKINI	Ja, 324879 og 324880
Bano Life	ST Jogger	Ja, 146011
UPPAbaby	Ridge	Nei
tfk - Trend for kids	Joggster Adventure, duo2 etc (NB! Kun modellene satt opp med skivebrems)	Nei
Thule	Chariot sykkelvogn (NB! Kun modellene satt opp med skivebrems)	Nei

RESERVEDELER til SmartBrake


BRACKETTER

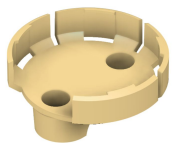

Hand control to handlebar:
Art: SB-BCH-002. HMS:
297703



Brake Unit: Art:
SM1-0006. HMS:
297708

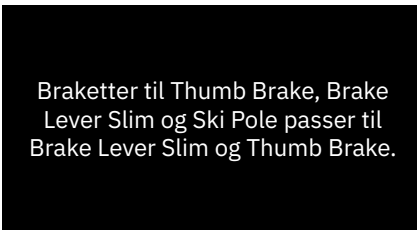

Thumb Brake: Art:
SM2-0030. HMS:
297706



Brake Lever Slim:
Art: SM2-0030-02. HMS:
309264



Ski Pole: Art:
SM2-0031. HMS:
297707

BREMSEKONTROLLER UTEN BRACKETTER



Hand Control: Art:
SB-BCH-001. HMS:
297698




Brake Lever Slim: Art:
SB-BCLS-001. HMS:
309263



Thumb Brake: Art:
SB-BCT-002. HMS:
297697




BREMSEENHET

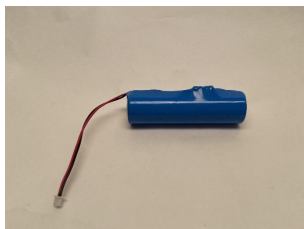

Battery – Brake Unit:
Art: SM1-0012. HMS:
297711



Screw Cap – Brake Unit:
Art: SM1-0003. HMS:
297710

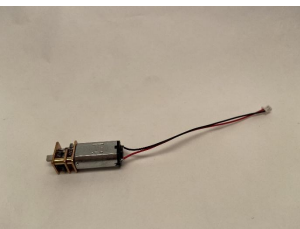

Gear Motor – Brake Unit:
Art: SM1-0011. HMS:
297712



USB Charger Double:
Art: SM3-0003. HMS:
297709

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Dere kjenner brukeren, vi kjenner produktet – sammen finner vi løsningen.

Bestillinger og andre henvendelser sendes til post@smartgroup.no



BENDIK FON
Daglig leder



ANDERS SKAARUD
Teknisk ansvarlig



CLÉMENT BASSO-BERT
Produktutvikler

Fornebuveien 46, 3 etg.
1366 LYSAKER
VELKOMMEN INNOM!
+47 64 95 94 44